

Ersatzteile / Spare parts.
KaVo 1058 S/TM/O/P/C/G + COMPACTchair.



Immer auf der sicheren Seite.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen

Tel.: 0 73 51 / 56-2500 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14







Hersteller/manufacturer:

Kaltenbach & Voigt GmbH

Bismarckring 39



D-88400 Biberach

KaVo 1058

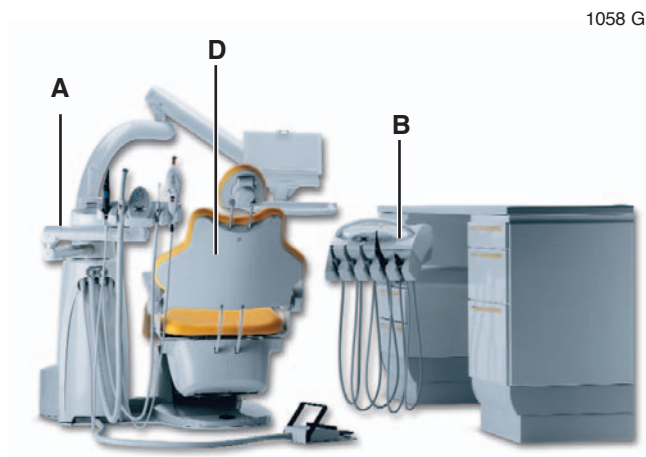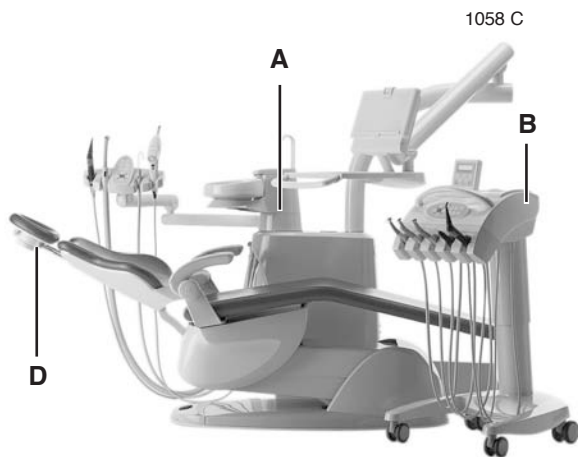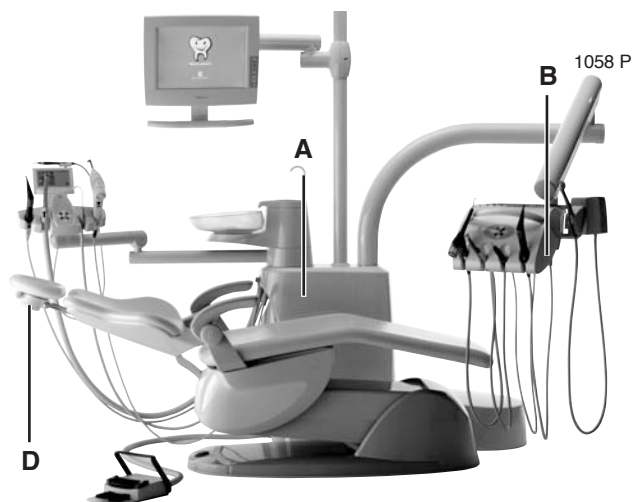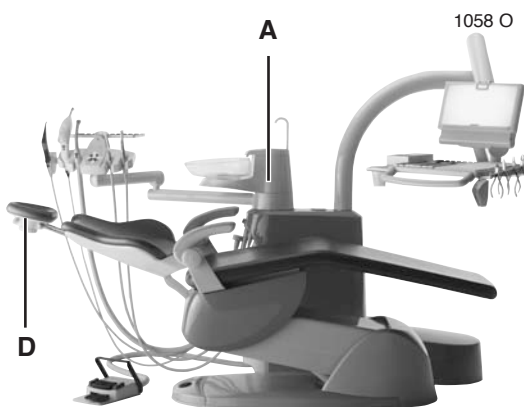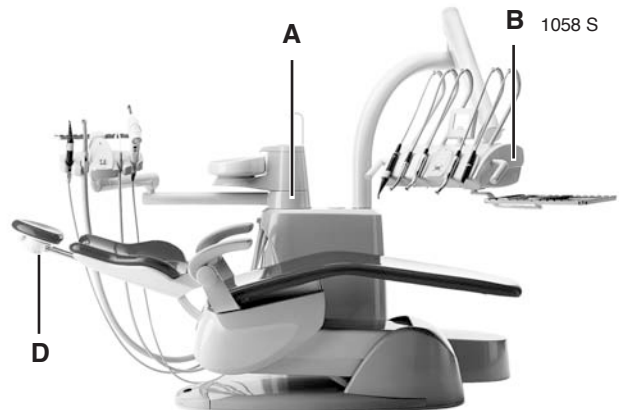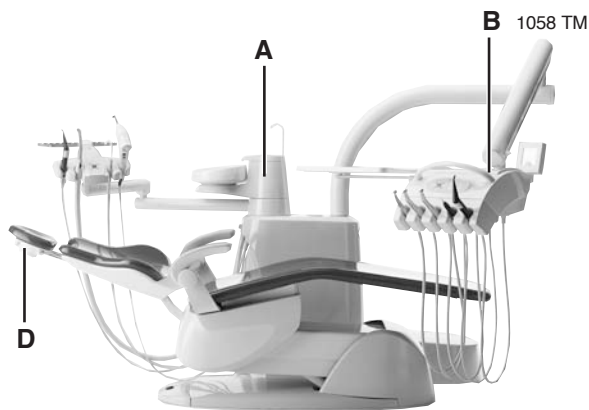

A	=	Versorgungselement und Helferinelement Supply unit and assistant's unit	2-39
B	=	Arztelement 1058 1058 dentist's unit	40-63
C	=	Optionale Bausätze Optional kits	64-105
D	=	Stuhl 1058 / COMPACTchair Chair 1058 / COMPACTchair.....	106-129


KaVo 1058

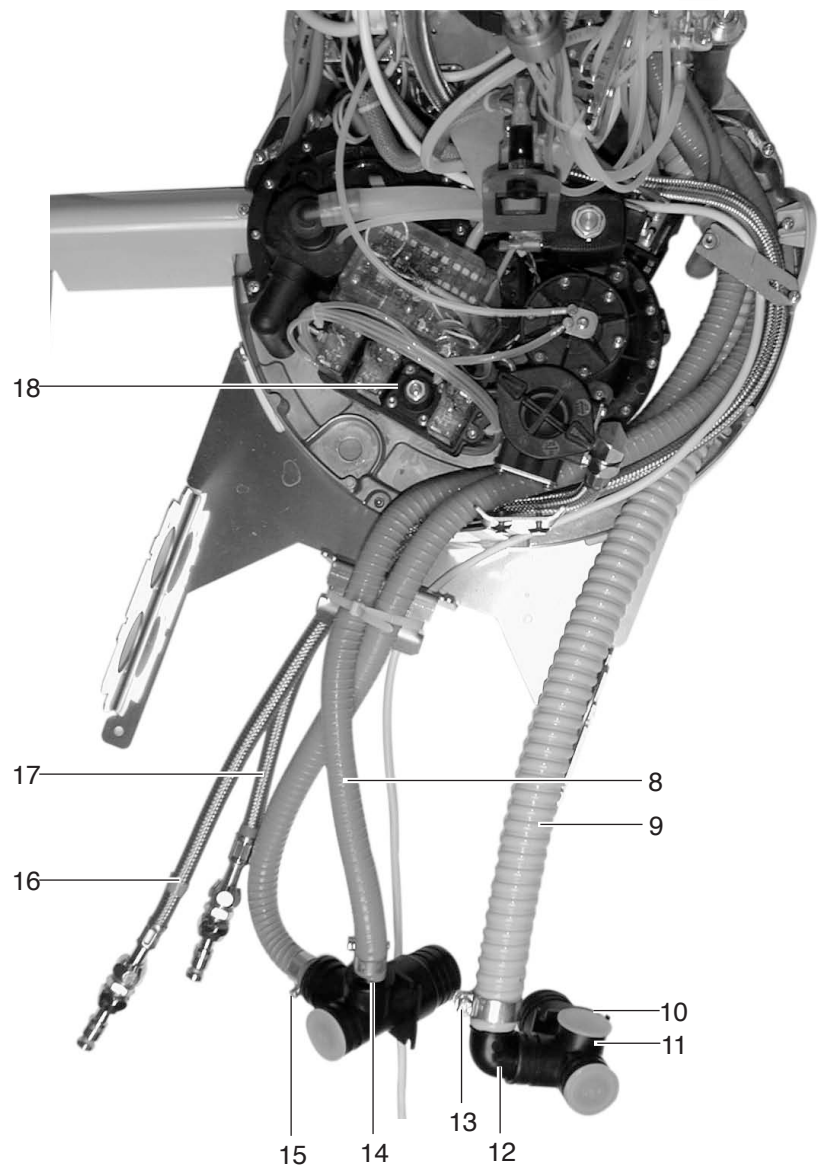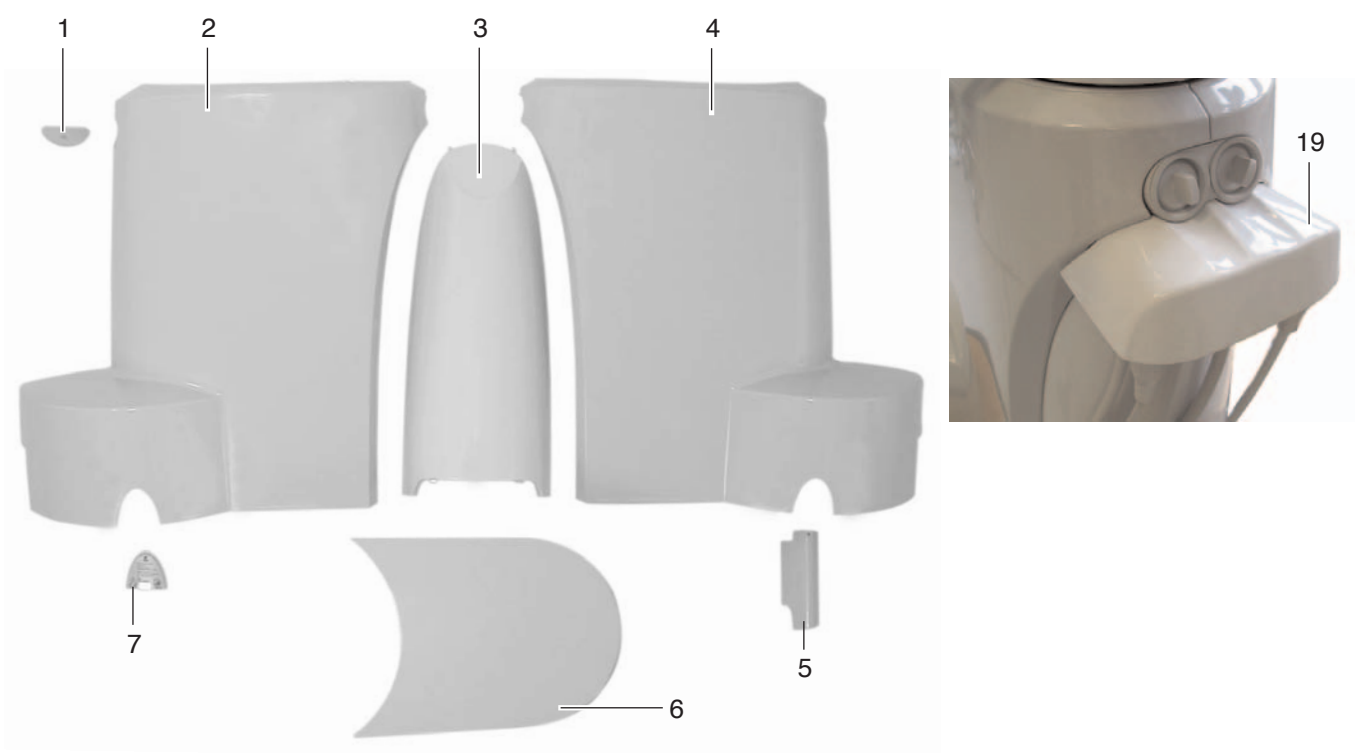



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Abdeckung	1.001.5031	Cover	links/left-hand
	Linsenschraube (zu Pos. 1)	0.261.5102	Oval head screw (for item 1)	M 4 x 20
2	Abdeckung	1.001.4978	Cover	
3	Klappe	1.001.4980	Fuse holder	
4	Abdeckung	1.001.4979	Cover	rechts/right-hand
5	Kanal	1.001.0946	Duct	rechtshänder/right-hander
	Kanal	1.001.2842	Duct	linkshänder/left-hander
6	Abdeckung	1.001.4977	Cover	
7	Kanalabdeckung	1.001.2909	Duct cover	
8	Schlauch	1.000.0890	Hose	1) Meterware / Lw 15
				by the meter / ins. width 15
9	Schlauch	0.065.7379	Hose	1) Meterware / Lw 25
				by the meter / ins. width 25
10	Stopfen	0.224.0800	Plug	
11	Anschlußstück	0.211.7272	Connector	
12	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
	O-Ring (zu Pos. 12)	0.200.6414	O-ring (for item 12)	21 x 1,5
13	Schlauchschelle	0.222.6033	Hose clamp	Ø 29 mm
14	Anschlußstück	0.211.7052	Connector	
	O-Ring (zu Pos. 14)	0.200.6414	O-ring (for item 14)	21 x 1,5
15	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	Ø 18 mm
16	Schlauch	0.226.9151	Hose	Schellfix; 0,5 m Wasser/water
17	Schlauch	0.226.9169	Hose	Schellfix; 1 m Luft/air
18	Wassereingangsblock I2C	0.226.6004	Water block I2C	DVGW s. Seite/page 12-15
19	Selektivabdeckung 1058O	1.001.4978	Cover selective 1058O	lackiert ab/from 07/2008


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

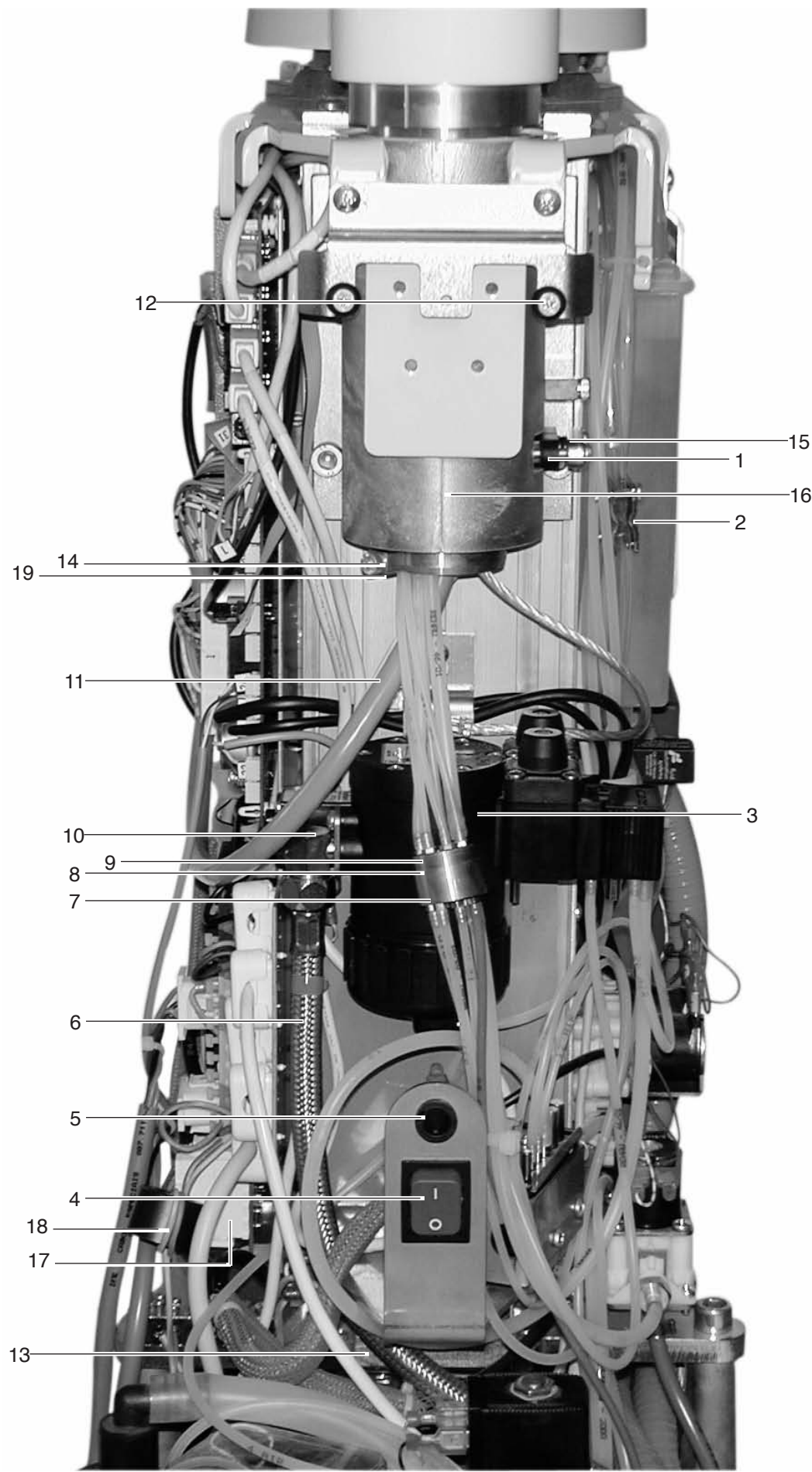



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Bremssegment	0.214.0332	Brake segment	
	Druckfeder (zu Pos. 1)	0.201.8173	Pressure spring (for item 1)	
2	Bügel	0.715.9022	Bracket	Schlauchdrossel/restrictor
	Schraube (zu Pos. 2)	0.261.5100	Screw (for item 2)	
3	Luftblock	0.226.6002	Air block	s. Seite/page 10
4	Ausschalter	0.223.2309	On-off switch	
5	Sicherungshalter	0.223.1090	Fuse holder	
	Renkverschluß (zu Pos. 5)	0.223.1091	Bayonet lock (for item 5)	
	Sicherung (zu Pos. 5)	0.223.2783	Fuse (for item 5)	T6,3 H
6	Schlauch	0.226.9151	Hose	Schellfix; 0,5 m Luft/air
7	Kupplungsstecker	0.210.2101	Coupler plug	
8	Dichtungsscheibe	0.224.2499	Sealing washer	
9	Kupplungsplatte	0.210.2091	Junction board	
10	Schlauchanschluß	0.211.1701	Tube connection	
	O-Ring (zu Pos. 10)	0.200.6133	O-ring (for item 10)	9 x 1,5
	Sicherungsblech (zu Pos. 10)	0.210.3872	Lock washer	
11	Lastleitung Tisch 3000L	0.710.3581	Cable table	
	Leitung USB (zu Pos. 11)	0.223.4218	Cable USB (for item 11)	
12	Senkschraube	0.251.4547	Screw	
	Scheibe 4,6 (zu Pos. 12)	0.200.0462	Washer (for item 12)	
13	Entstörfilter	0.221.3447	Interference filter	10 A
14	Anschlag	0.724.8772	Stopper	
	Zylinderschraube M5x20		Screw	
15	Platte	0.724.7602	Base	
	Schraube	0.261.5088	Screw	
16	Aufnahme montiert	0.710.3311	Receptacle	
17	Klappferrit	0.221.4836	Ferrit	
18	Ferritring	0.221.4840	Ring ferrit	
19	Schraube	0.249.4184	Screw	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

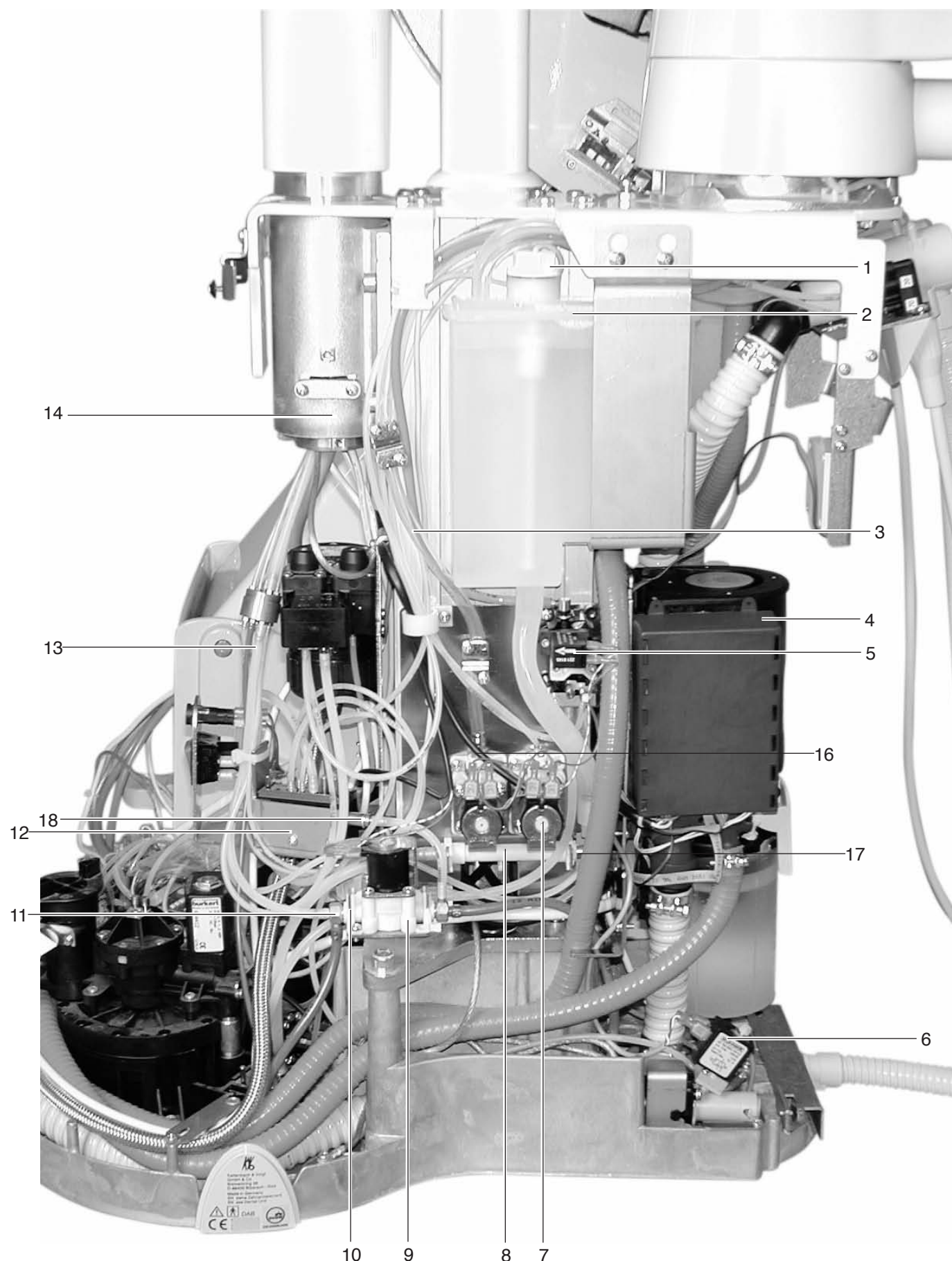



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Niveauschalter	1.001.3916	Level switch	
	O-Ring (zu Pos. 1)	0.200.6519	O-ring (for item 1)	26 x 2
2	H2O2 Behälter	0.719.2332	H2O2 tank	
3	Schlauch	0.065.5992	Hose	PVC 5 x 1,5 Meterware/ by the meter
4	BS Amalgamabscheider	1.001.5143	Amalgam separator kit	Metasys s. Seite/page 72-75
	Stecknippel Spritze	0.211.1201	Nipple	
	O-Ring	0.200.6016	O-Ring	
5	Magnetventil	0.221.6145	Solenoid valve	s. Seite/page 22
6	BS Saugstromventil	1.001.4879	Aspirator valve kit	s. Seite/page 74
7	Magnetventil ,montiert	0.210.2211	Solenoid valve assembly	s. Seite/page 10
8	Steckverbinder	0.203.4800	Connector	
	O-Ring (zu Pos. 8)	0.200.6124	O-ring (for item 8)	6,5 x 1,6
9	Magnetventil ,montiert	0.210.2211	Solenoid valve assembly	s. Seite/page 10
10	Feder	0.201.8908	Spring	
11	Stecknippel montiert	0.211.1651	Plug-in fitting assembled	
12	Verteilerventil montiert		Pressurizing valve assembled	
	Magnetventil (zu Pos. 12)	1.001.3352	Solenoid valve (for item 12)	für Spray / inkl. Leitung for spray / incl. line
13	Schlauchstrang		Umbilical cord	
	Kupplungsplatte	0.210.2091	Junction board	
	Schlauch PE	0.065.5370	Hose PE	(Air 26/12) 2 x 0,63 Meterware/by the meter
	Schlauch PE	0.065.5371	Hose PE	(Water 44/Air 20) 2,5 x 0,73 Meterware/by the meter
	Schlauch PE	0.065.5372	Hose PE	(Air 36) 4 x 1 Meterware/by the meter
14	Aufnahme montiert	0.710.3311	Receptacle	
15	Anschlusswinkel	0.764.4333	Connecting angle	
	O-Ring (zu Pos. 15)	0.200.6414	O-ring (for item 15)	
16	Nippel	0.203.4208	Fitting	
	O-Ring (zu Pos. 16)	0.200.6124	O-ring (for item 16)	
	Feder (zu Pos. 16)	0.201.8908	Clip (for item 16)	
17	Blind Nippel	0.203.4208	Fitting	
	O-Ring (zu Pos. 17)	0.200.6124	O-ring (for item 17)	
	Feder (zu Pos. 17)	0.201.8908	Clip (for item 17)	
18	Nippel	0.203.4002	Fitting	
	O-ring (zu Pos. 18)	0.200.6074	O-ring (for item 18)	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

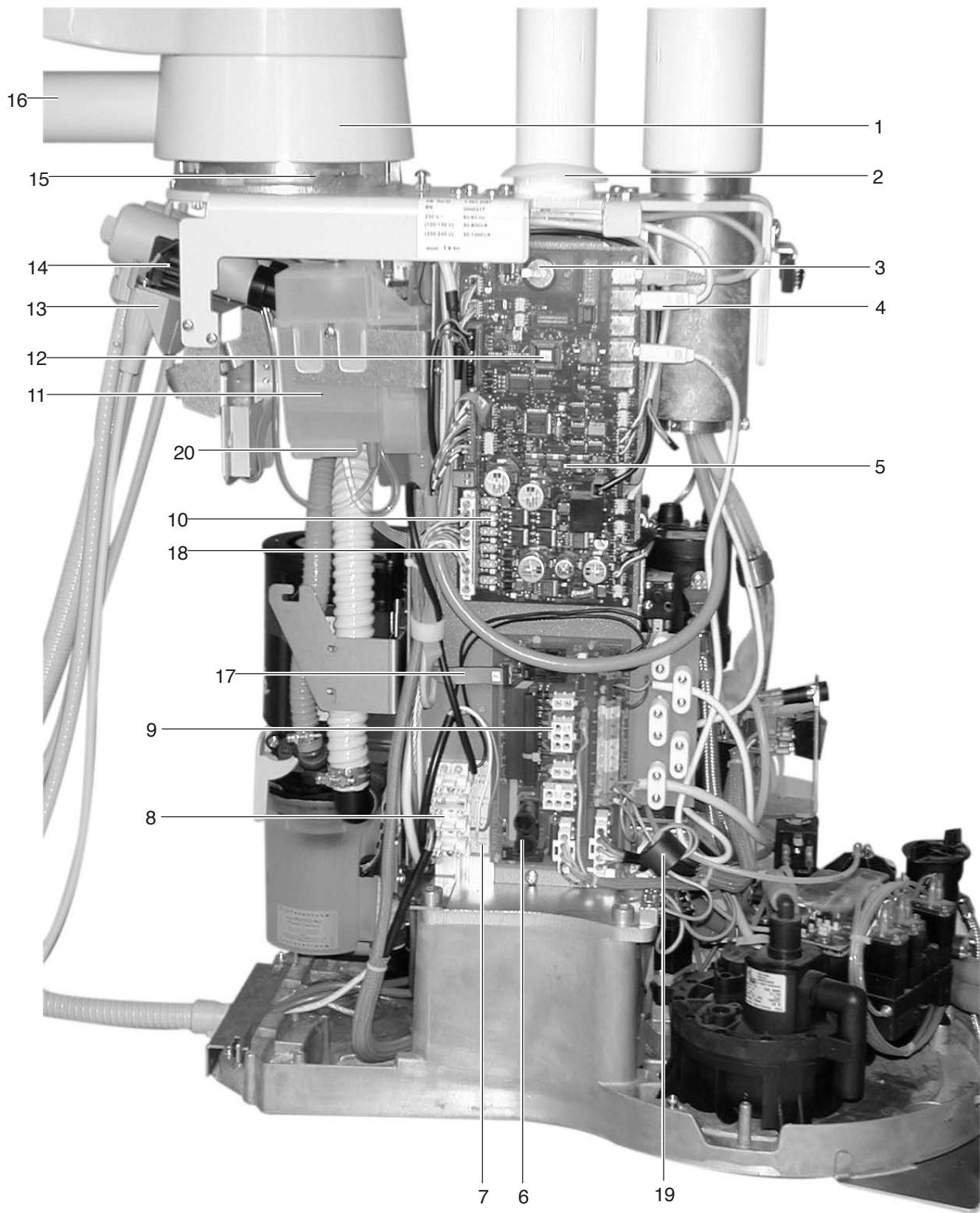



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Schwenkarmaufnahme	1.001.1972	Receptacle	
2	Abdeckung	1.005.3788	Cover	
	Deckel	1.001.2241	Cover	Silikon/silicone anstelle Lampenstange instead of lamp rod
3	RTC-Modul	1.003.4866	RTC module	ab/from 02/2006
	RTC-Modul	0.226.7047	RTC module	bis/until 02/2006
4	Leitung USB	0.223.4217	Cable USB	X30 Fußanlasser/Foot control 2500 GE/GE
	Leitung USB	0.223.4216	Cable USB	X19 Steuerung HE Abl 2500 GE/WI
	Leitung USB	0.223.4218	Cable USB	X18 Steuerung Arzt/ Dentist control 3500 GE/GE
	Leitung USB	0.223.4210	Cable USB	X17 Wegaufnehmer Stuhl/ Position pick up chair 600 WI/WI
5	Zentrale Steuerung	1.003.3100	Control PCB	ab/from 02/2006
	Zentrale Steuerung	1.000.8890	Control PCB	bis/until 02/2006
	Spritzschutz (zu Pos. 5)	1.001.4545	Splash protection (for item 5)	
6	Sicherung	0.223.2784	Fuse	1) T2,5 H
7	Klemmleiste	1.001.2148	Terminal strip	2 polig/ 2 pin
8	Klemmleiste	1.001.2147	Terminal strip	1 polig/ 1 pin
	Sicherung	0.223.2733	Fuse	1) T5,0 A
	Sicherung	0.223.2759	Fuse	1) T8,0 A
9	Netzplatine	1.001.0215	Mains-PCB	
10	SMD Sicherung	1.001.9421	Fuse SMD	1) T4,0 A
	SMD Sicherung	1.001.9422	Fuse SMD	1) T5,0 A
11	Spüleinheit kpl.		Rinsing unit assembly	s. Seite/page 22
12	Programmspeicher	1.003.3101	Program memory	ab/from 02/2006
	Programmspeicher	1.002.5005	Program memory	bis/until 02/2006
13	Blende	1.001.2310	Cover	
14	Kupplung	0.764.6613	Coupling	
15	Leitung Sicherheitsabschaltung	1.001.3786	Cable safety switch	Schale/bowl
16	Schwenkarm	1.001.1861	Swivel arm	
17	Bandleitung	1.001.3081	Cable line	Netzpl.-Zentr. Pl.
18	Leitung Trafo sek.	1.001.0524	Cable Transformer sek.	
19	Ferritring	0.221.4840	Ring Ferrit	ø 28x20 für PA-Leitung/ for PA-Line
	Klappferrit	0.221.4836	Ferrit	ø 10,5x12,5 für Netzzuleitung/ for mains
20	Blindstopfen	0.224.2467	Blind cover	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

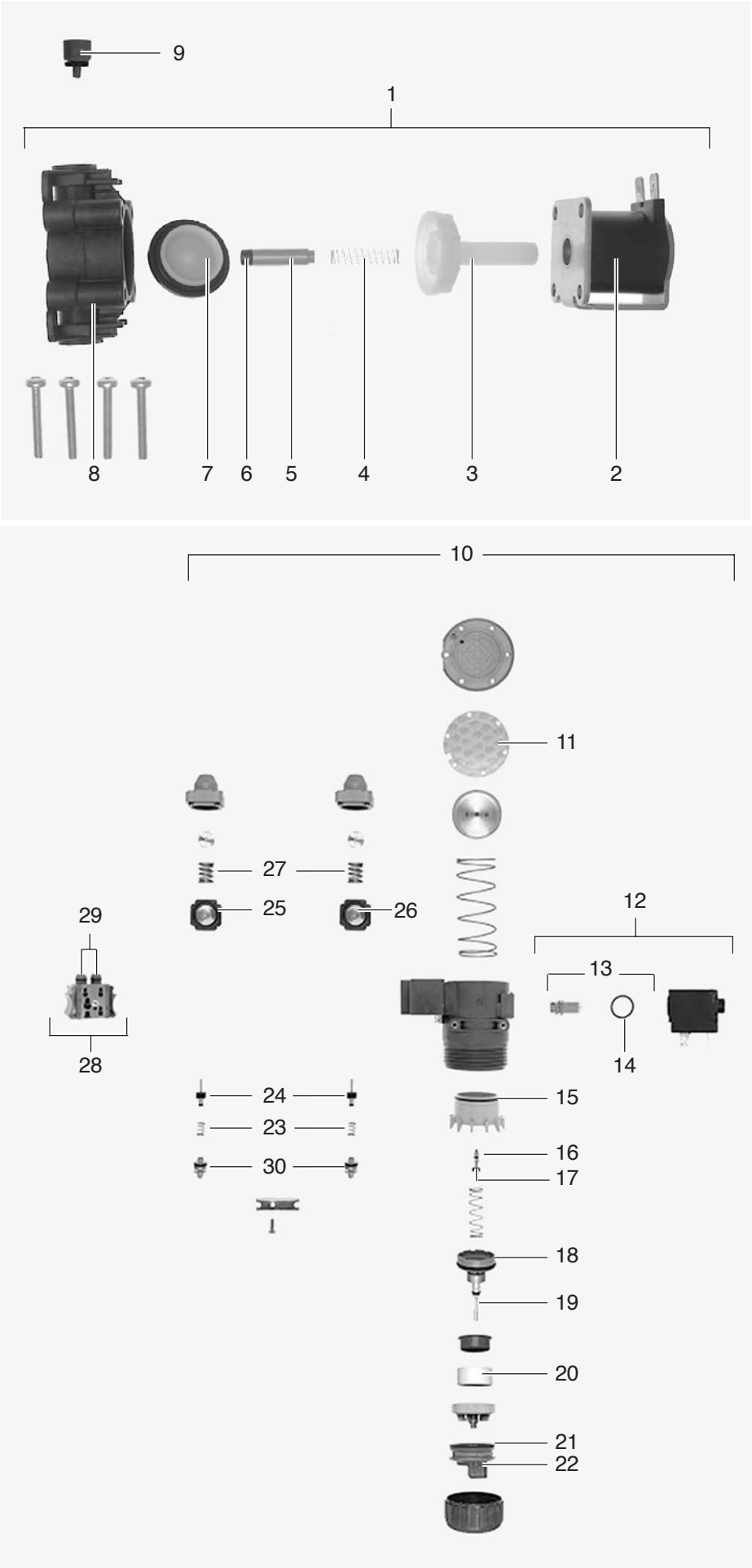



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Magnetventil ,montiert	0.210.2211	Solenoid valve assembly	
2	Ventiloberteil, komplett	0.231.1415	Upper valve part assembly	
3	Plungerführung	0.210.2352	Plunger guide	1)
4	Druckfeder	0.201.8059	Pressure spring	1)
5	Magnetkern, komplett	0.210.1271	Magnet core assembly	1)
6	Kappe	0.210.2372	Cap (for item 5)	1)
7	Membrane, komplett	0.210.1261	Diaphragm assembly	1)
8	Ventilkörper	0.210.5532	Valve body	
9	Regulator	0.220.7455	Regulator	nur Magnetventil Mundspülbecken only solenoid valve spittoon bowl
10	Luftblock	0.226.6002	Air block	Rep.AT.Nr/exch.no.0.999.0514
11	Membran	0.236.0109	Diaphragm	
12	Magnetsystem	0.236.0139	Solenoid system	
13	Rep. Set Kern kompl.	1.000.0891	Repair set assembly	1)mit Feder,Plunger und O-Ring with spring, plunger and O-ring
14	O-Ring	0.236.0138	O-ring	1) 12,5 x 1,1
15	O-Ring	0.236.0131	O-ring	39 x 1,5
16	O-Ring	0.236.0106	O-ring	3 x 1
17	O-Ring	0.236.0105	O-ring	5 x 1,5
18	Kolben mit Dichtung	0.236.0130	Piston with seal	
19	Stößel mit Nutring	0.236.0116	Plunger with lip seal	
20	Filter	0.236.0129	Filter	1)
21	O-Ring	0.236.0134	O-ring	43 x 4
22	Filtertopf, montiert	0.236.0133	Filter bowl, assembled	mit Nutring /with lip seal
23	Druckfeder	0.236.0114	Pressure spring	
24	Stößel, komplett	0.210.2301	Plunger assembled	
25	Membrane	0.210.1961	Diaphragm	für Red. von Ls1 o. Bohrung for red. of Ls1 w/o hole
26	Stößel, komplett	0.236.0117	Plunger assembled	für Red. von Ls3 m. Bohrung for red. of Ls3 w hole
27	Druckfeder	0.236.0121	Pressure spring	
28	Kupplungsstecker, montiert	0.226.6003	Coupler plug assembly	
29	O-Ring	0.200.6125	O-ring	7 x 2
30	O-Ring	0.238.1309	O-ring	6 x 1,5


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

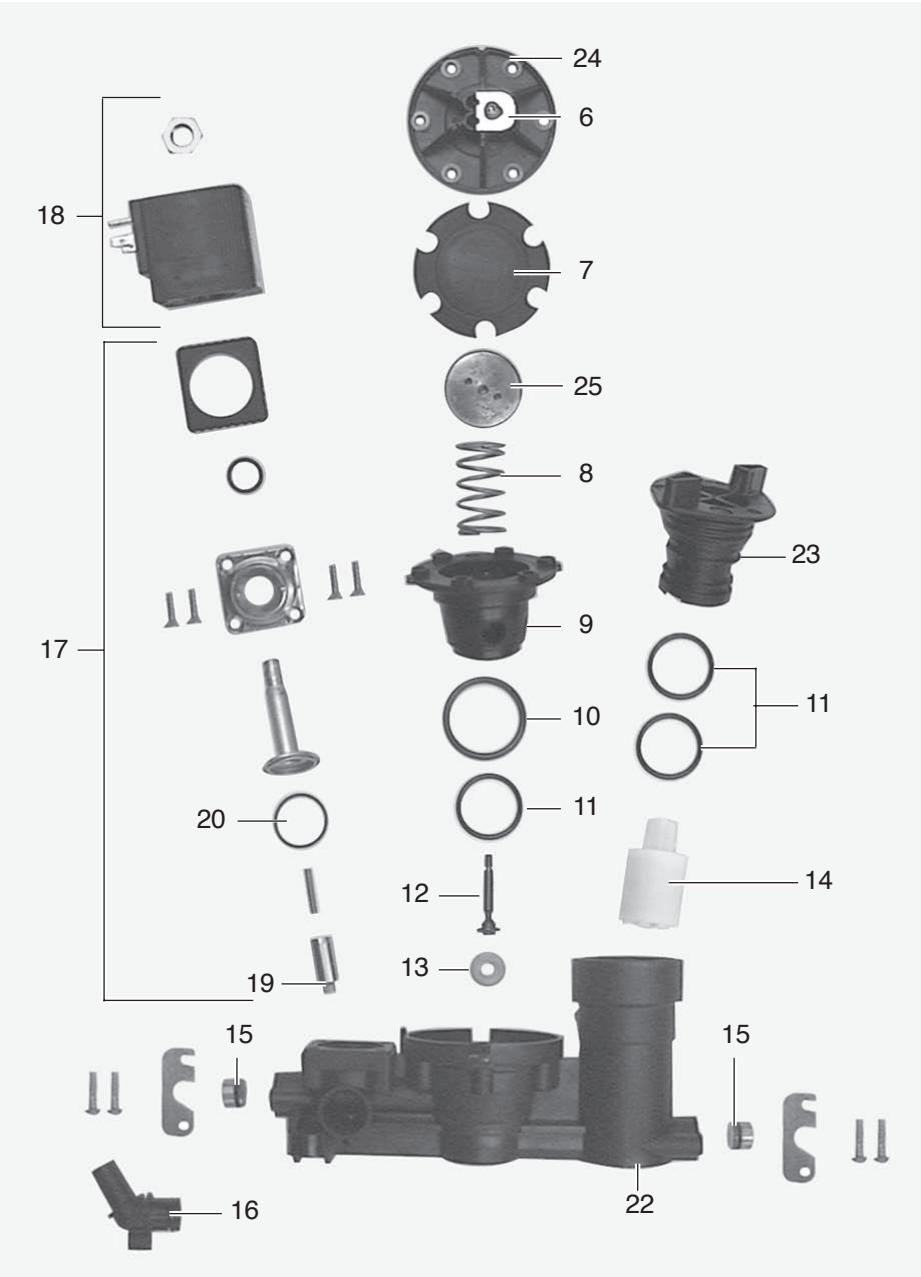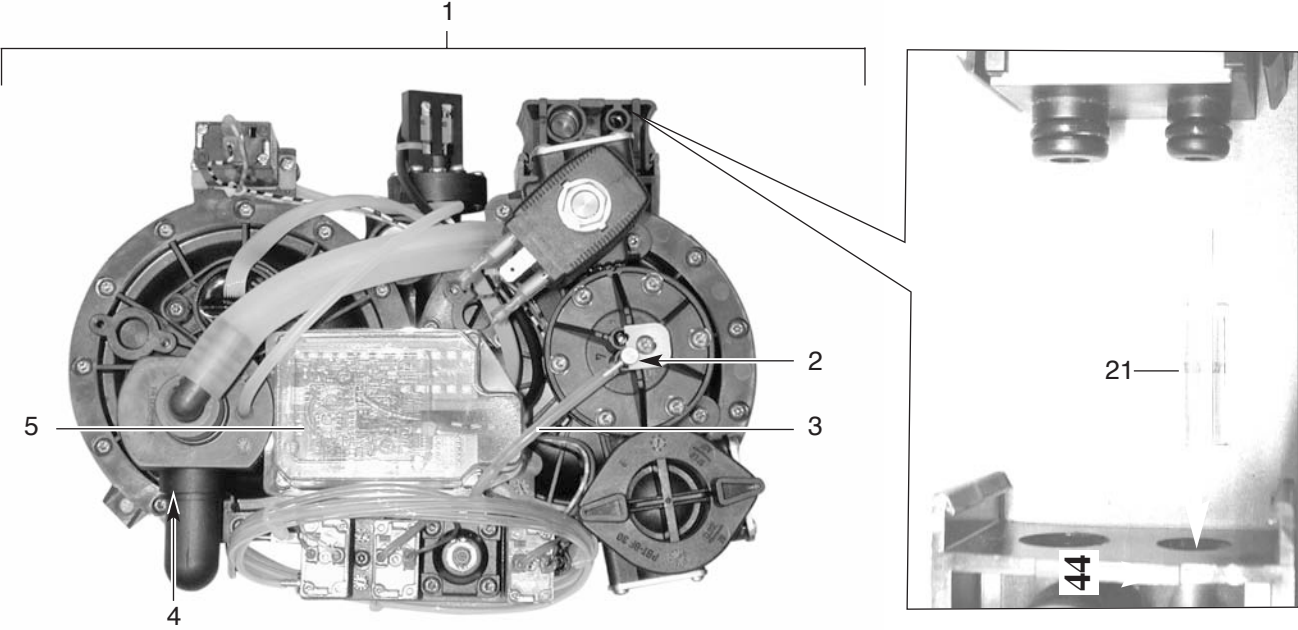



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
	BS Wasserblock DVGW	1.001.2401	Water block kit DVGW	
1	Wasserblock, komplett I2C	0.226.6004	Water block assembly I2C	
2	O-Ring	0.200.6016	O-ring	2,2 x 1
3	Schlauch	0.065.5785	Hose	4 x 2,5 Tecal
4	O-Ring	0.238.1095	O-ring	16 x 1,5
5	Klarsichthaube	0.238.1098	Plastic cover	
6	Stecksicherung	0.203.4466	Plug-in protection	
7	Membrane	0.238.1061	Diaphragm	1)
8	Druckfeder	0.238.1059	Pressure spring	
9	Reglereinsatz	0.238.1055	Regulating insert	
10	O-Ring	0.238.1067	O-ring	31,34 x 3,53
11	O-Ring	0.238.1068	O-ring	1) 25,07 x 2,62
12	Ventilstößel	0.238.1056	Valve plunger	
13	Stößeldichtung	0.238.1057	Plunger seal	
14	Filterelement	0.238.1051	Filter element	1) Wasser/water
15	O-Ring	0.200.6133	O-ring	9 x 1,5
16	O-Ring	0.238.1081	O-ring	9 x 2,5
17	Magnetventil WEE	0.238.1070	Solenoid valve WEE	Armatur/Usu
18	Magnetventil WEE	0.238.1072	Solenoid valve WEE	Spulensatz/Flush set
19	Dichtkappe	0.238.1066	Cap	1)
20	Dichtung	0.238.1065	Seal	1)
21	Einsteck-Filter	1.001.0636	Filter	1)
22	Gehäuse WEE	0.238.1050	Housing	
23	Verschraubung für Wasserfilter	1.005.3390	Screw connection for water filter	
24	Deckel	0.238.1064	Cover	
25	Teller	1.006.6498	Plate	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

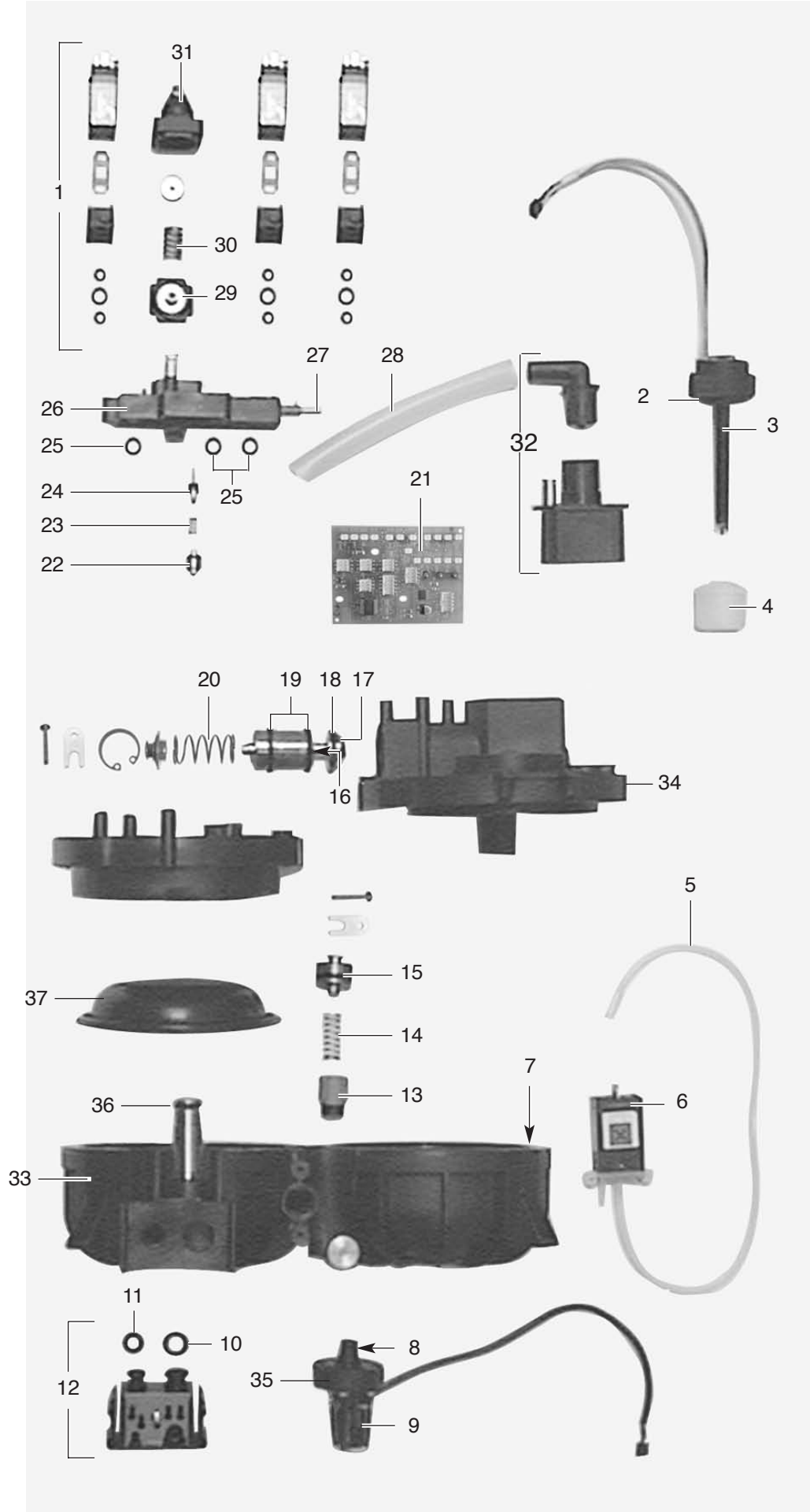



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Magnetventil	0.238.1043	Solenoid valve	1) Ventilplatte/valve board
2	O-Ring	0.238.1073	O-ring	30 x 2,5
3	Füllstandssensor komplett	0.238.1107	Filling level sensor assembly	
4	Schwimmer	0.238.1074	Float	
5	Schlauch	0.065.5393	Hose	2 x 1 Silicon Meterware/by the meter
6	Magnetventil	0.238.1099	Solenoid valve	H2O2
7	O-Ring	0.238.1005	O-ring	105 x 4
8	O-Ring	0.238.1069	O-ring	11 x 2
9	Mikroschalter	0.223.2405	Microswitch	
10	O-Ring	0.238.1081	O-ring	9 x 2,5
11	O-Ring	0.238.1046	O-ring	6,02 x 2,62
12	Kupplungsplatte, komplett	0.226.6006	Junction board assembly	
13	Führung komplett	0.238.1038	Guide assembly	
14	Druckfeder	0.238.1037	Pressure spring	
15	O-Ring	0.238.1047	O-ring	15,54 x 2,62
16	Stangendichtung	0.220.0447	Lip seal	
17	Selektivkolben komplett	0.238.1106	Selective piston assembly	
18	O-Ring	0.238.1012	O-ring	15,47 x 3,53
19	O-Ring	0.238.1019	O-ring	19,18 x 2,46
20	Druckfeder	0.238.1018	Pressure spring	
21	Leiterplatte	0.238.1201	PCB	Mit/with I2C-Bus
22	O-Ring	0.236.0105	O-ring	5 x 1,5
23	Druckfeder	0.236.0114	Pressure spring	
24	Stößel	0.210.2301	Plunger	
25	O-Ring	0.238.1044	O-ring	4 x 3
26	Ventilplatte komplett	0.238.1104	Valve board assembly	
27	Stecknippel	0.203.4003	Plug-in fitting	
	O-Ring (zu Pos. 27)	0.200.6016	O-ring (for item 27)	2,2 x 1
28	Schlauch	0.065.6978	Hose	Meterware/by the meter
29	Stößel komplett	0.236.0117	Plunger assembly	mit Bohrung/with drilling
30	Druckfeder	0.201.8279	Pressure spring	
31	Ventildeckel montiert	1.001.8255	Valve cover	
32	Einlaufabdeckung kpl.	0.238.1109	Inlet cover	
33	Behälter	1.004.3158	Container	
34	Deckel	1.005.3391	Cover	
35	Druckschalter	0.226.6009	Pressure switch	
36	O-Ring	0.238.1081	O-ring	
37	Speichermembrane	0.238.1006	Diaphragm	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

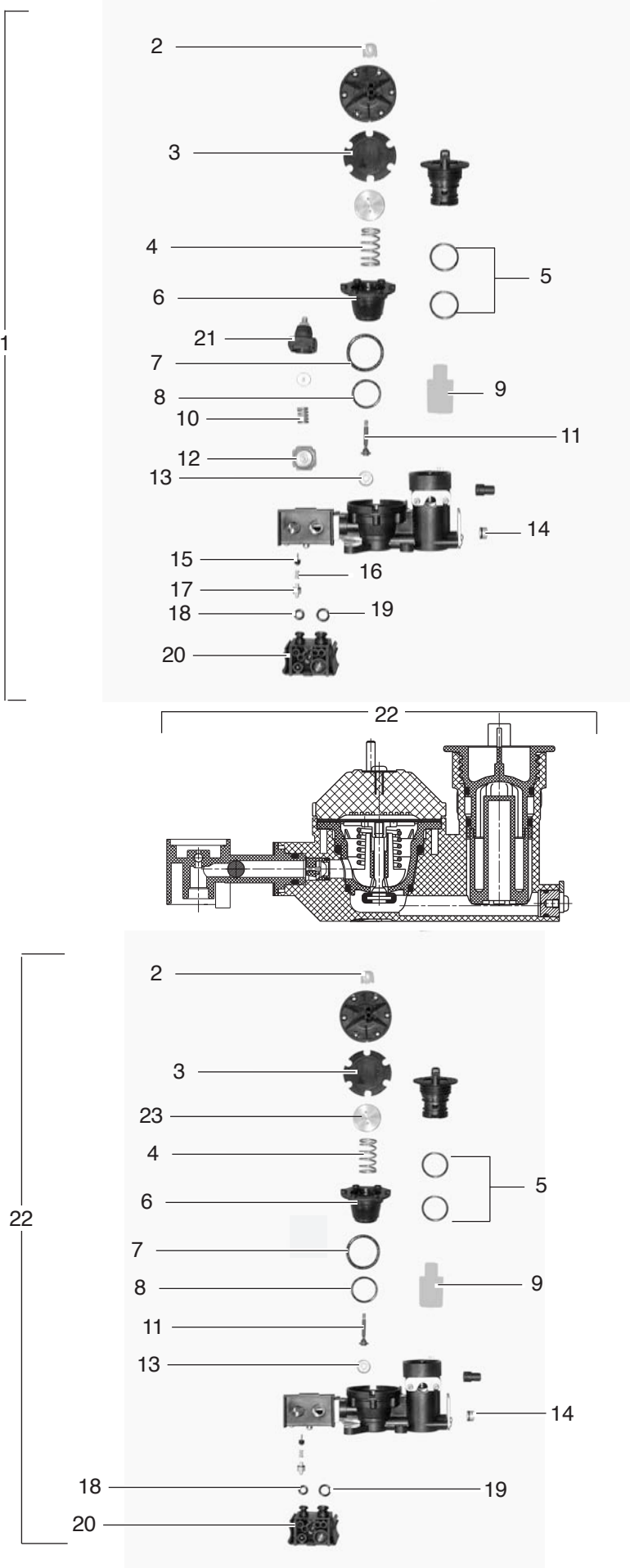



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
	BS Wasserblock ohne DVGW	0.710.3271	Kit waterblock without DVGW	
1	Wasserblock kompakt	0.226.6010	Waterblock complete	mit Red. Ventil/with Pressure reducing valve Ventilplatte/valve board ohne/without DVGW
2	Stecksicherung	0.203.4466	Safety plug	
3	Membrane	0.238.1061	Diaphragm	
4	Druckfeder	0.238.1059	Pressure spring	
5	O-Ring	0.238.1068	O-ring	25,07 x 2,62
6	Reglereinsatz	0.238.1055	Regulating insert	
7	O-Ring	0.238.1067	O-ring	34,34 x 3,53
8	O-Ring	0.238.1068	O-ring	25,07 x 2,62
9	Filterelement	0.238.1051	Filter element	1) Wasser/water
10	Druckfeder	0.201.8265	Pressure spring	
11	Ventilstößel	0.238.1056	Valve plunger	
12	Membrane	0.210.1961	Diaphragm	1)
13	Stößeldichtung	0.238.1057	Plunger seal	
14	O-Ring	0.200.6133	O-ring	9 x 1,5
15	Stößel	0.210.2311	Plunger	1)
16	Druckfeder	0.201.8264	Pressure spring	
17	O-Ring	0.238.1309	O-ring	6 x 1,5
18	O-Ring	0.238.1081	O-ring	9 x 2,5
19	O-Ring	0.238.1046	O-ring	6,02 x 2,62
20	Kupplung	0.226.6006	Coupling	
21	Ventildeckel mont.	1.001.8255	Valve cover	
22	Wasserblock	1.000.0494	Waterblock	für BS Wasserflasche ohne Red. Ventil/for kit waterbottle without Pressure reducing valve
23	Teller	1.006.6498	Plate	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

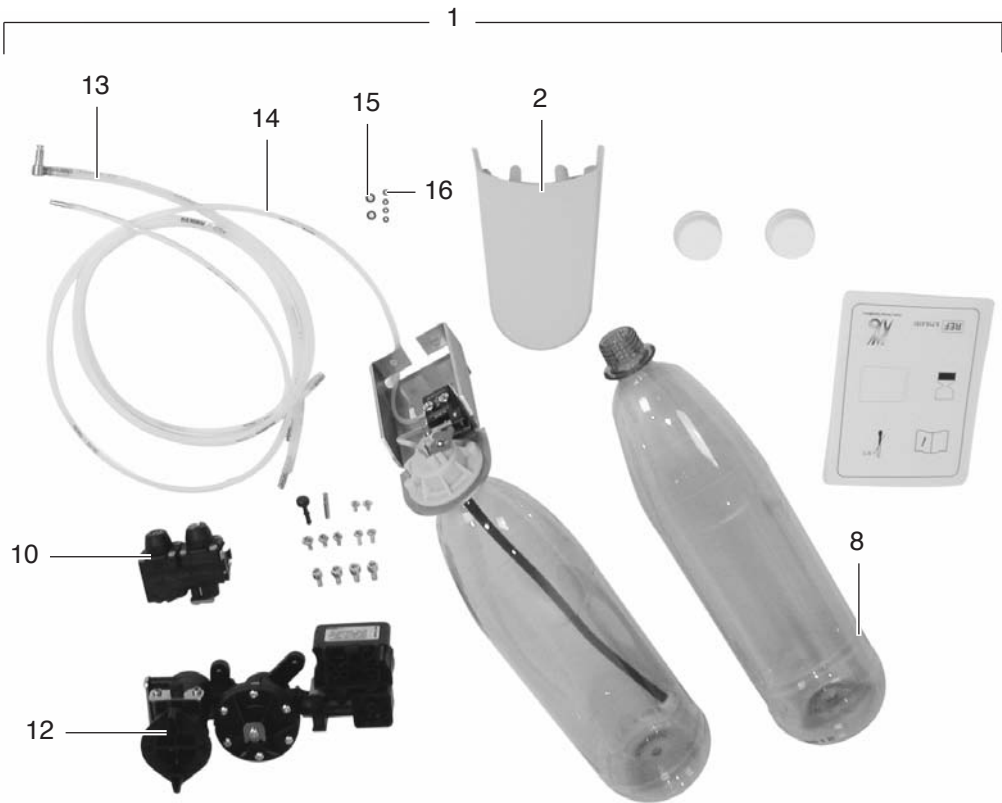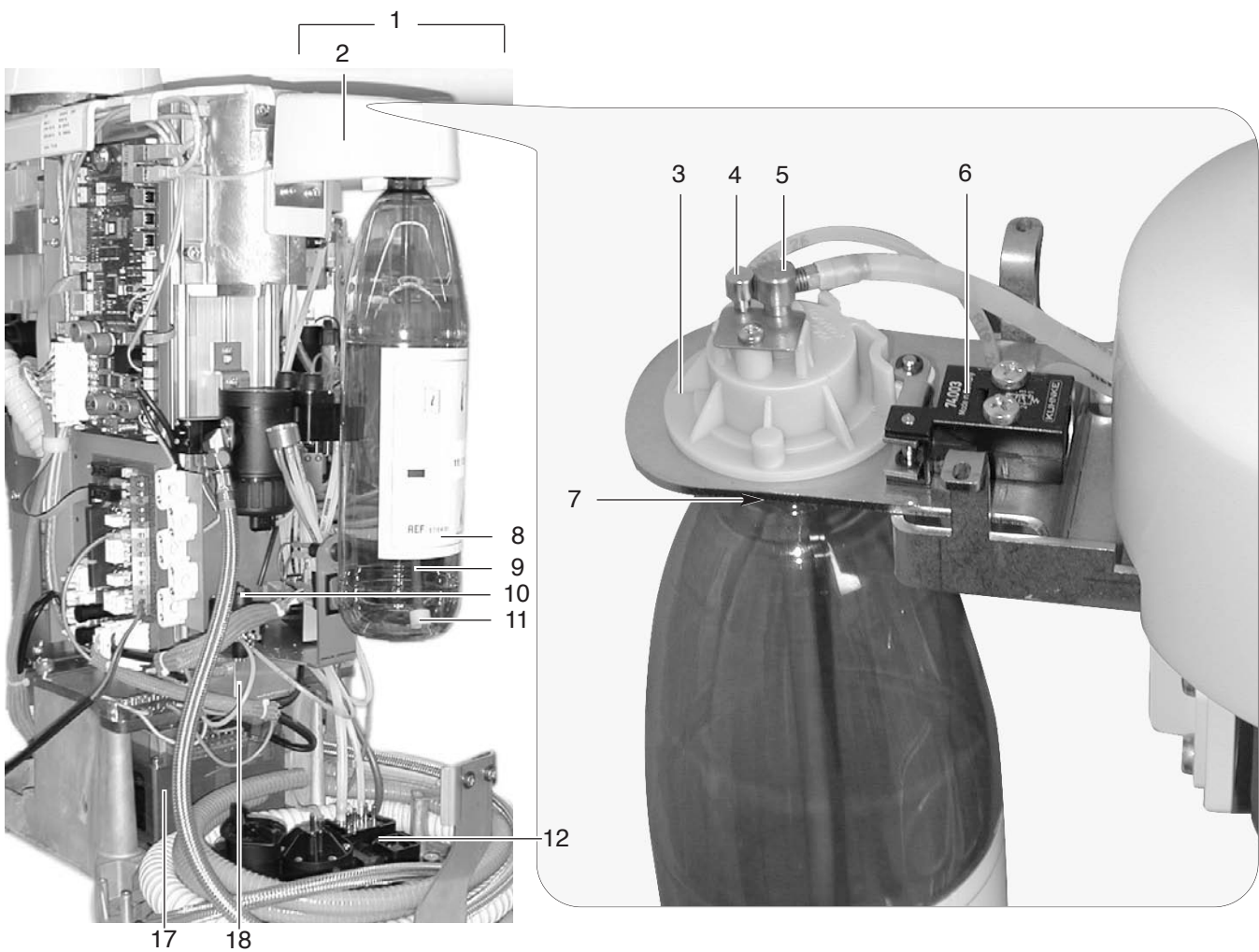



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Wasserflasche	1.001.2402	Water bottle kit	
2	Abdeckung	1.001.1338	Cover	
3	Gewindeanschluß	0.764.7403	Threaded connector	
	O-Ring (zu Pos. 3)	0.200.6622	O-ring (for item 3)	30 x 1,5
4	Stecknippel, montiert	0.211.1081	Plug-in fitting assembly	abgewinkelt
	O-Ring (zu Pos. 4)	0.200.6016	O-ring (for item 4)	2,2 x 1
5	Stecknippel, montiert	0.211.1691	Plug-in fitting assembly	abgewinkelt
	O-Ring (zu Pos. 5)	0.200.6074	O-ring (for item 5)	3,5 x 1,5
6	3/2 Wegeventil	0.220.0878	3/2 way valve	
7	Membrane	0.210.4732	Diaphragm	1)
8	Wasserflasche komplett	0.710.4151	Water bottle assembly	
9	Schlauch	0.065.5794	Hose	4 x 1,5
				Meterware/by the meter
10	Regelventil komplett	0.210.0021	Regulating valve assembly	s. Seite/page 22
11	Schlauchnippel	0.203.4801	Nipple	
	O-Ring (zu Pos. 10)	0.200.6163	O-ring (for item 10)	7 x 2
	Sieb (zu Pos. 10)	0.210.4682	Strainer (for item 10)	
12	Wasserblock	1.000.0494	Water block	f. Wasserflasche/Water bottle
				s. Seite/page 16
				Ohne Red. Ventil/
				without Red.valve
				Mit Red. Ventil/with Red.valve
				s. Seite/page 16
	Wasserblock, kompakt		Water block, compact	
	ohne DVGW	0.226.6010	without DVGW	
13	Schlauch PE	0.065.5372	Hose PE	4 x 1
				Meterware/by the meter
14	Schlauch PE	0.065.5370	Hose PE	2 x 0,63
				Meterware/by the meter
15	O-Ring	0.200.6074	O-ring	3,5 x 1,5
16	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
17	Trafo	0.744.1531	Transformer	
18	Entstörfilter	0.221.3447	Interference filter	10A
19	Dosieraufsatz	1.002.0287	Cover	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



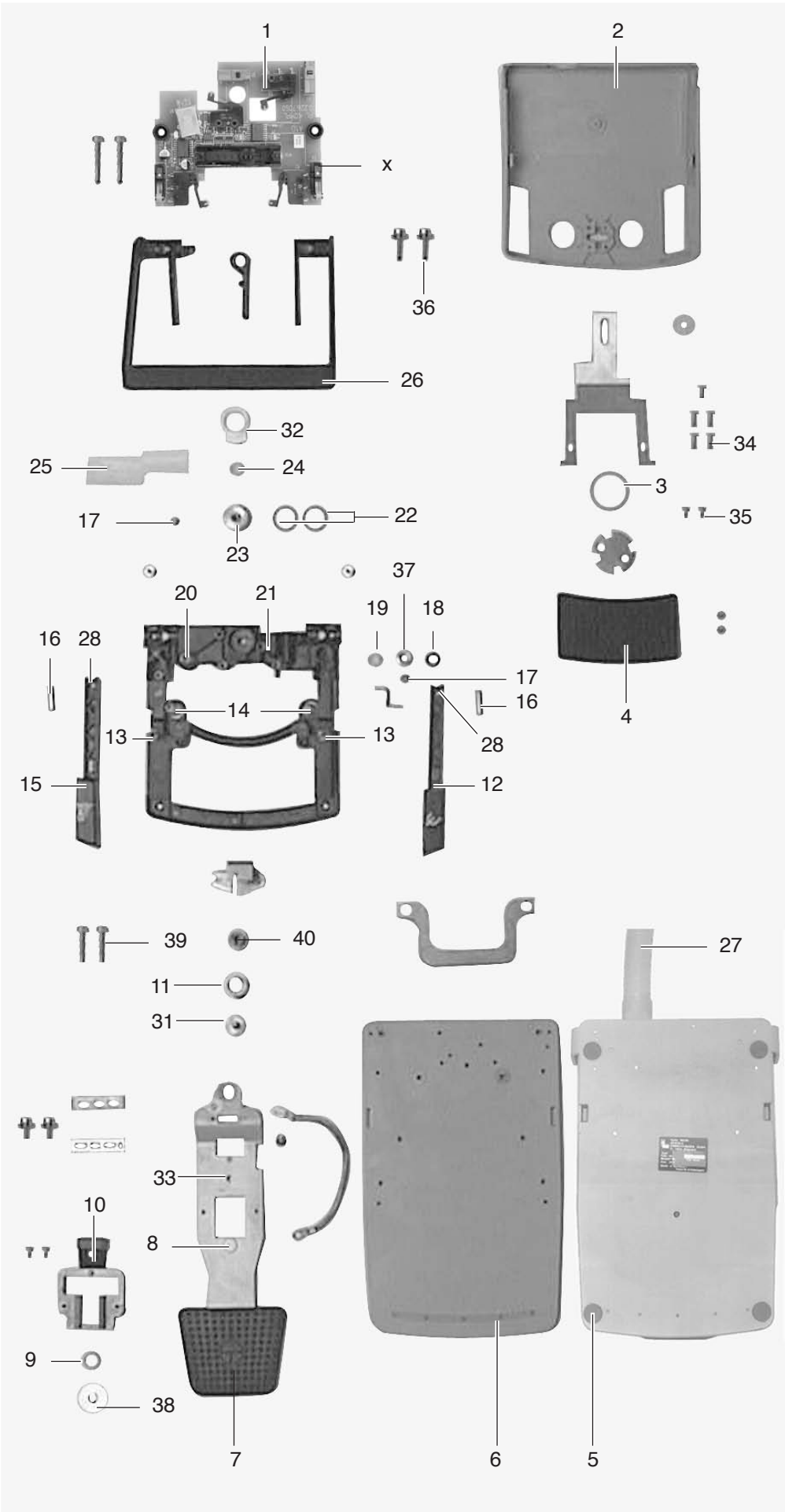
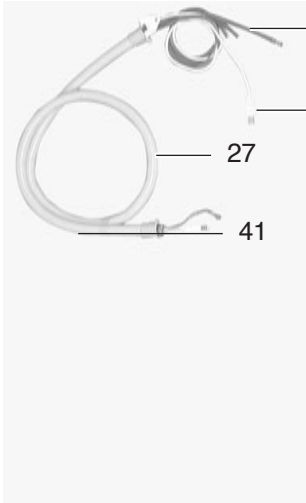




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Steuerung Anlasser	0.226.7050	Foot control PCB	
2	Haube	0.734.2212	Cover	
3	O-Ring	0.200.6416	O-ring	
4	Schubpedalgummi	0.734.3612	Pedal rubber	
	Schubpedal, komplett	0.734.1391	Push pedal assembly	
	Zwischenstück zu Pos. 4	0.734.2282	Intermediate piece for item 4	
5	Elastikpuffer	0.220.0440	Elastic buffer	1)
6	Pedalanschlag	0.734.3562	Pedal stop	
7	Pedalgummi	0.734.3552	Rubber pedal cover	
8	Abdeckkappe	0.202.6052	Cap	
9	O-Ring	0.200.6141	O-ring	7 x 3,5
10	Schwenkführung	0.734.3522	Swivel guide	
11	Druckfeder	0.201.8117	Pressure spring	
12	Taster, rechts	0.734.3542	Pushbutton, right-hand	
13	Druckfeder	0.201.8287	Spring	
14	Kegelfeder	0.201.8269	Conical wire spring	
15	Taster, links	0.734.2132	Pushbutton, left-hand	
16	Bolzen	0.734.3772	Bolt	
17	Dämpfer	0.734.0792	Damper	
18	O-Ring	0.200.6125	O-ring	7 x 2
19	Ventildichtkörper	0.734.2082	Gasket sheet	1)
20	Kegelfeder	0.201.8054	Conical wire spring	
21	Ventilblock montiert	0.734.1401	Valve block assembly	mit Kugel/with ball
22	O-Ring	0.200.6315	O-ring	16 x 1,25
23	Ventil	0.734.3632	Valve	
24	Ventildichtkörper	0.734.0682	Gasket sheet	1)
25	Dichtungsscheibe	0.734.2122	Sealing washer	
26	Bügel	0.734.2172	Bracket	
27	Anlasserkabel, komplett	1.001.3412	Foot control cord assembly	
	O-Ring 2x (zu Pos. 27)	0.200.6074	O-ring 2x (for item 27)	3,5 x 1,5
	O-Ring 1x(zu Pos. 27)	0.200.6184	O-ring 1x (for item 27)	2,1 x 1,1
28	Einstellschraube	0.201.1463	Adjustment screw	
29	Leitung USB	0.223.4217	Cable USB	Fußanlasser/Foot control
30	Schlauch (12/36)	0.065.5794	Hose (12/36)	4 x 1,5 blau/blue
	Schlauch (35)	0.065.5310	Hose (35)	Meterware/by the meter
				1,7 x 0,9 blau/blue
				Meterware/by the meter
31	Führung	0.734.3782	Guide piece	
32	Schaltblech	0.734.3702	Shift plate	
33	Gewindestift M 4	0.201.1453	Threaded pin	
34	Stößel	0.734.2292	Tappet	
35	Linsenschraube 3x 6 EJOT	0.260.9642	Screw	
36	Linsenschraube M 4x22	0.261.5088	Screw	
	Scheibe B 4,3 (zu Pos. 36)	0.261.4006	Washer (for item 36)	
37	Führung	0.734.3672	Guide piece	
38	Mitnehmer	0.734.2602	Driving slot	
39	Linsenschraube M3x25	0.261.5042	Counter screw	
40	Achse	0.734.3762	Axis	
41	Hüllschlauch 1450 mm	0.734.2221	Hose	
	Anlasser komplett	0.734.1490	Foot control	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



KaVo 1058

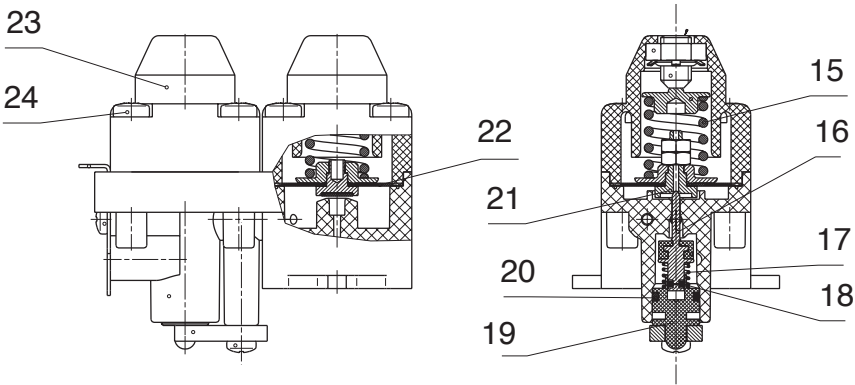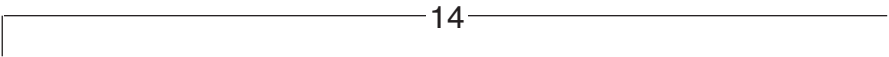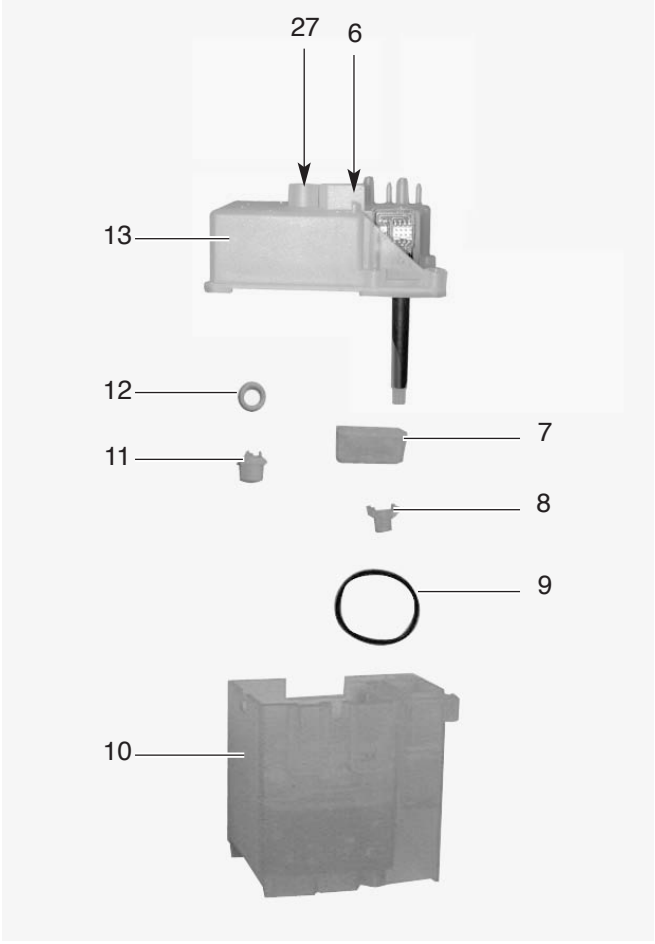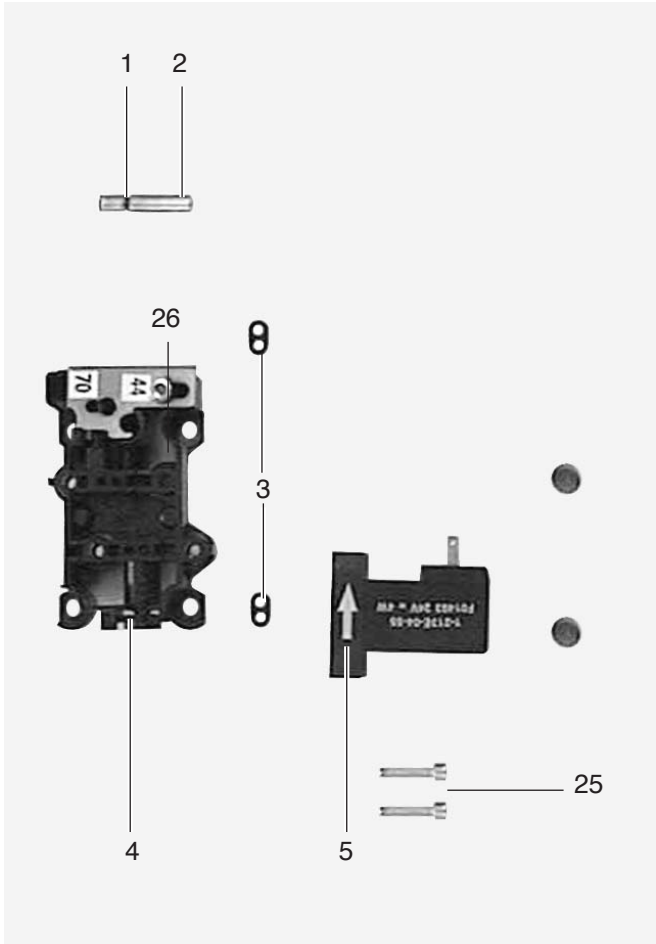



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	O-Ring	0.200.6074	O-ring	3,5 x 1,5
2	Stecknippel	0.203.4004	Plug-in fitting	
3	Dichtung	0.224.2511	Seal	
4	Ventilsockel	0.210.5642	Valve holder	
5	Magnetventil	0.221.6145	Solenoid valve	
	Magnetventil	0.221.6144	Solenoid valve	1) NC (Mundglas-Wasser / Mouthglass-Water) 1) NO (3F/MF Wasser nur bei BS. Intensiventkeimung) / (3F/MF water only for kit disinfection)
6	Schlauchanschluß	0.211.5082	Hose connector	12 x 1
	O-Ring (zu Pos. 6)	0.200.6209	O-ring (for item 6)	
7	Schwimmer	0.765.2162	Float	36 x 2,5
8	Schwimmeranschlag	0.765.2172	Float stop	
9	O-Ring	0.200.6618	O-ring	
10	Behälter	0.765.2182	Reservoir	7 x 3,5 mit eingegoss. Pos. Erfasser with incorporated level sensor incl. Platine/PCB
11	Strahlregler	0.765.2252	Jet regulator	
12	O-Ring	0.200.6141	O-ring	
13	Deckel	0.765.1181	Cover	
14	Regelventil, kpl.	0.210.0021	Regulating valve assembly	
15	Druckfeder	0.210.0021	Pressure spring	
16	Stößel, kpl.	0.210.2301	Plunger assembly	
17	Druckfeder	0.201.8264	Pressure spring	
18	O-Ring (zu Pos. 16)	0.200.6026	O-ring (for item 16)	ø 1,5 x 1
19	Verschlussstopfen	0.238.0008	Cover	
20	O-Ring (zu Pos. 19)	0.238.1309	O-ring (for item 19)	ø 6 x 1,5
21	Stößel mit Bohrung	0.236.0117	Plunger	
22	Überdruckmembrane	0.210.1891	Diaphragma	
23	Ventildeckel, mont.	1.001.8255	Valve cover	
24	KT-Schraube	1.000.2311	Screw	3,5 x 20
25	Schraube M3 x 14	0.249.4140	Screw	
26	Blindabdeckung		Cover:	
	1x Brücke (zu Pos. 26)	0.210.5802	Bridge (for item 26)	
	1x Dichtung (zu Pos. 26)	0.224.2511	Washer (for item 26)	
	2x Schraube (zu Pos. 26)	0.249.4140	Screw 2x (for item 26)	
27	Wasseranschluss:		Water connection:	
	Nippel (zu Pos. 27)	0.211.1731	Nipple (for item 27)	
	O-Ring (zu Pos. 27)	0.200.6124	O-ring (for item 27)	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

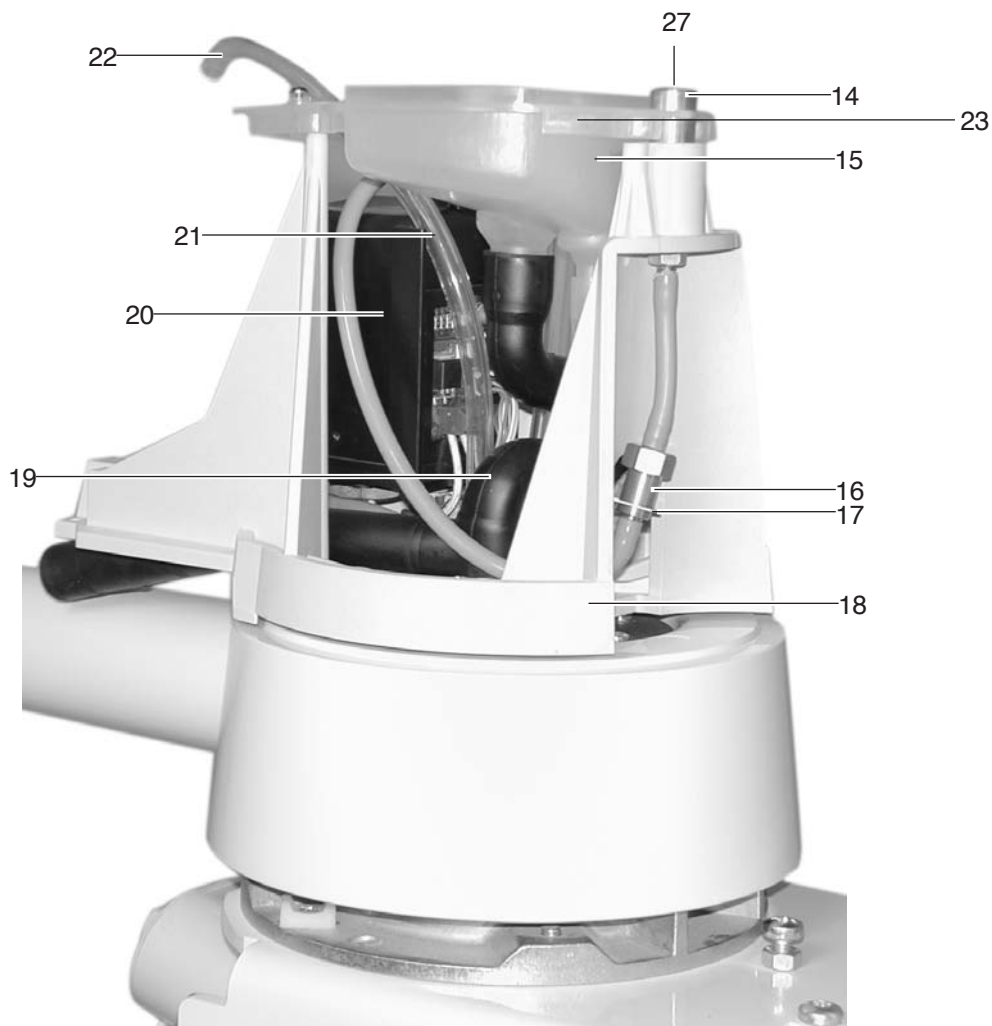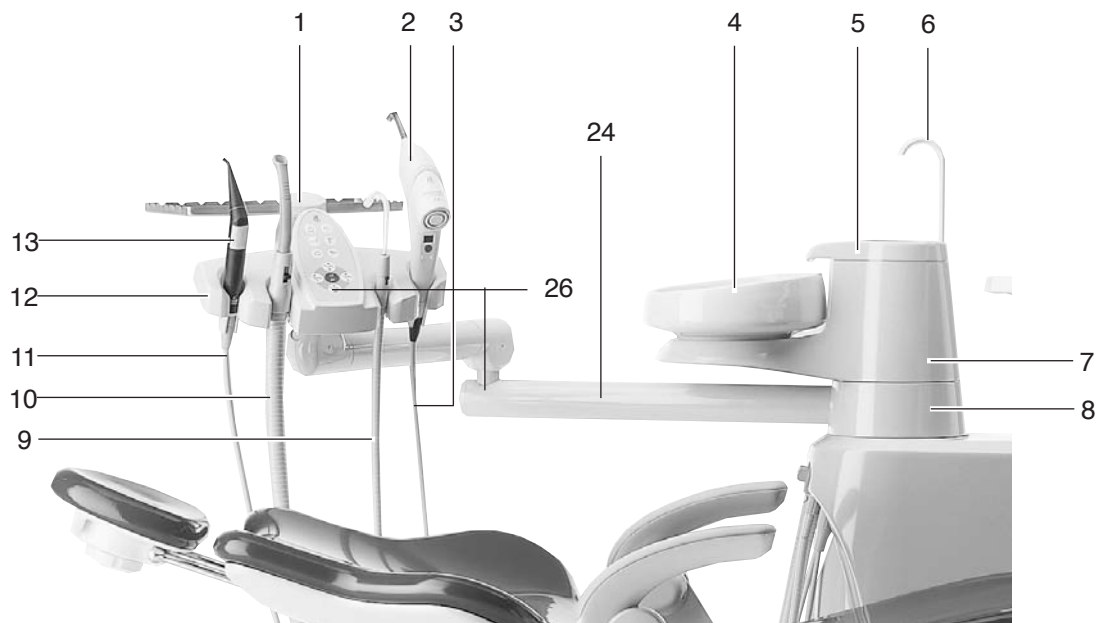




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Trayablage HE	1.000.0894	Tray support HE kit	s. Seite/page 30
2	BS Polymerisationslicht	1.003.8114	Kit polymerization	mit Satelec Handstück/ with Satelec handpiece
	BS POLYlux 2	1.002.5375	Kit POLYlux 2	s. Seite/page 86
	POLYlux 2 zu BS POLYlux 2	0.773.8000	POLYlux 2 or Kit Polylux 2	ab/from 06/2003
	bei O-Gerät 1.002.3758		only Type O 1.002.3758	s. ET-Blatt 0.789.5118
	BS POLYlux 2	0.742.1501	Kit POLYlux 2	s. spare part sheet 0.789.5118
	POLYlux 2 zu BS POLYlux 2	0.773.8000	POLYlux 2 or Kit Polylux 2	bis/until 05/2003
				s. ET-Blatt 0.789.5118
3	POLYlux 2 Schlauch	0.516.1090	POLYlux 2 hose	
4	Mundspülbecken	0.764.3503	Spittoon bowl	
5	Abdeckung	1.001.1425	Cover	
	Teller	0.764.6153	Plate	
6	Mundglaseinlauf, montiert	0.764.8541	Tumbler filling pipe assembly	mit O-Ring und Strahlregler with O-ring and Jet regulator
	O-Ring (zu Pos. 6)	0.200.6128	O-ring (for item 6)	1) 6 x 1
	Strahlregler	0.764.6093	Jet regulator	
7	Schalenträger	1.001.1424	Bowl support cover	Außenteil/
8	Schwenkarmaufnahme	1.001.1972	Receptacle	
9	Speichelzieherschlauch	0.211.1571	Saliva ejector hose	1) s. Seite/page 34
10	Sekretschlauch	0.211.1561	Secretion hose	1) s. Seite/page 34
11	4 F Handstückschlauch	0.516.8190	4 F handpiece hose	
12	BS HE Element einfach	1.001.2399	HE kit	s. Seite/page 26
13	3-F Handstück	0.773.0500	3-F handpiece	s. Seite/page 94
14	Aufnahme	0.764.6103	Holder	
15	Ablauf H2O2	1.001.1423	Drain H2O2	
16	Steckbuchse, montiert	0.211.1681	Connection bush assembly	T-Stück / Tee
17	Feder	0.201.8903	Clip	groß/big
18	Patiententeilträger	1.001.1422	Support	Innenteil/
19	Ablauf	0.764.6083	Drain	
20	Boiler	0.765.0210	Boiler	Kit s. Seite/page 34
21	Schlauch	0.065.5992	Hose	PVC 5 x 1,5 Meterware/ by the meter
22	Schlauchhalter	1.001.1426	Tube holder	
23	Sieb Oxygenal	0.210.4682	Sieve	
24	Schwenkarm	1.001.1861	Swivelling arm	
26	Scheibe	0200.2038	Disk	
	Lagerschraube (zu Pos. 26)	0.764.6293	Screw (for item 26)	
27	Sieb Oxyg.	0.210.4682	Sieve	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 S/TM/C/G/O



HE comfort / 1058O ab 8/2005

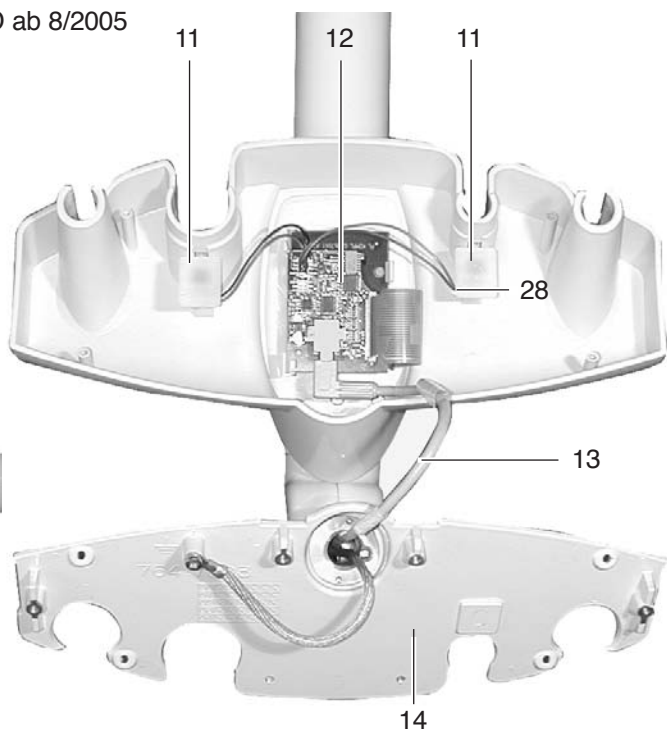

HE standard

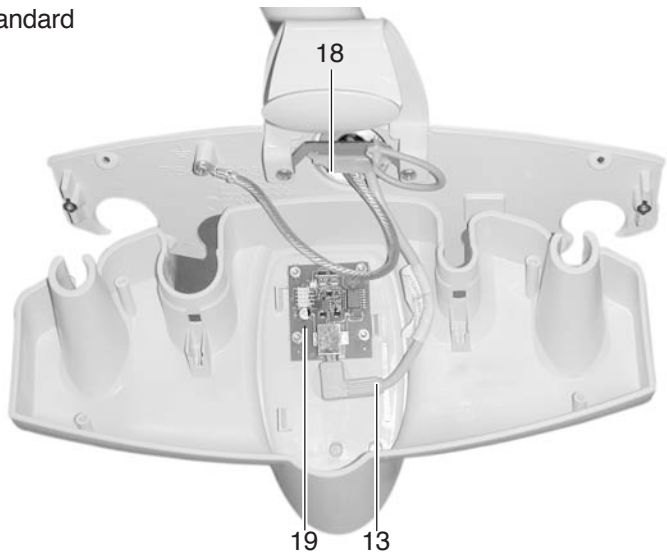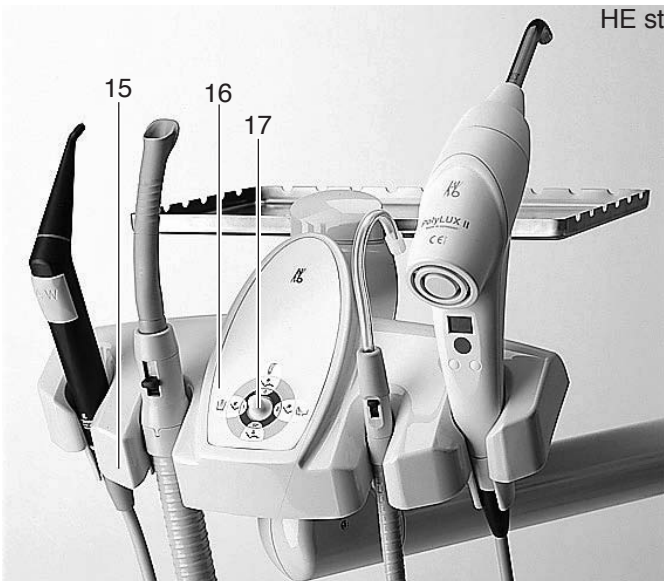



HE comfort / 1058O E-Motor ab 7/2008

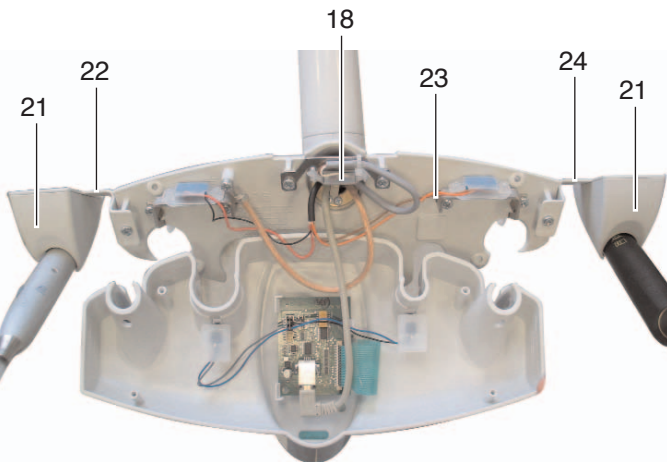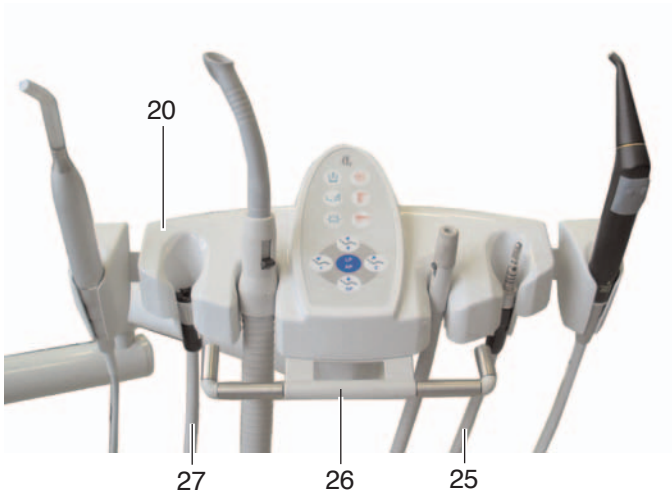



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
	BS Helferinelement comfort	1.001.2398	Assistant's unit comfort kit	
1	3-F Handstück	0.773.0500	3-F handpiece	s. Seite/page 94
2	Saugkanüle	0.236.2127	Aspirator cannula	
3	Helferin-Ablage	0.764.7023	Assistant's support	
	Helferin-Ablage (zu Pos. 3)	1.003.6263	Assistant's support (for item 3)	1058O ab/from 8/2005 (SN 1000250)
4	Bedienteil Helferin	0.710.7512	Assistant's Control element	
5	Speichelzieherkanüle	0.236.2128	Saliva ejector cannula	
6	BS Polymerisationslicht	1.003.8114	Kit polymerization	mit Satelec Handstück/ with Satelec handpiece s. Seite/page 88 ab/from 06/2003 s. ET-Blatt 0.789.5118 s. spare part sheet 0.789.5118
	BS POLYlux 2	1.002.5375	Kit POLYlux 2	
	POLYlux 2 zu BS POLYlux 2	0.773.8000	POLYlux 2 or Kit Polyflux 2	s. ET-Blatt 0.789.5118 s. spare part sheet 0.789.5118
	Stromversorgungsplatine	1.002.3782	Supply system POLYlux 1058	
	BS POLYlux 2	0.742.1501	Kit POLYlux 2	bis/until 05/2003
	POLYlux 2 zu BS POLYlux 2	0.773.8000	POLYlux 2 or Kit Polyflux 2	s. ET-Blatt 0.789.5118 s. spare part sheet 0.789.5118
7	POLYlux 2 Schlauch	0.516.1090	POLYlux 2 hose	
8	Speichelzieherschlauch	0.211.1571	Saliva ejector hose	
9	Sekretschlauch	0.211.1561	Secretion hose	
10	4 F Handstückschlauch	0.516.8190	4 F handpiece hose	
11	Schalteraufnahme	0.764.7033	Switch holder	
	Mikroschalter (zu Pos. 11)	0.223.2406	Microswitch (for item 11)	1)
12	Steuerung Tastatur	0.226.7041	Key pad control PCB	
13	USB-Leitung	0.223.4216	USB line	
14	Helferin Träger	0.764.7013	Assistant's support	
	BS Helferinelement standard	1.001.2399	Assistant's unit standard kit	
15	Helferin-Ablage	1.001.2179	Assistant's support	
16	Dekorfolie	1.001.2175	Decorative shield	
17	Kappe	1.001.2174	Cap	1)
18	Mikroschalter	0.223.2405	Microswitch	1)zum Anlöten / to solder on
	Schaltergehäuse (zu Pos. 18)	0.764.4633	Switch housing (for item 18)	
19	Steuerung Joystick	1.001.2676	Joystick control PCB	
20	Helferin-Ablage	1.003.6263	Assistant's support	1058O ab/from 8/2005
21	Kameraablage 3A	1.001.1937	Support for camera 3A	
	Halbrundschraube 4x10 EJOT	0.260.9574	Screw	zu Pos./for item 21
22	Halter Spritze links lackiert	1.002.3326	Assistant's support	1058O ab/from 7/2008
23	Leitung Ablageschalter HE	1.006.3419	Cable assistant's support	1058O ab/from 7/2008
24	Halter Spritze rechts lackiert	1.006.5378	Holder	1058O ab/from 7/2008
25	Luftinstrumentenschlauch 1550	1.003.2894	Air instrument hose	1) 1550 mm nur/only 1058O
26	BS Saugschlauchführung	1.002.3617	Install. guide piece	s. Seite/page 30
27	KL Motorschlauch	0.516.5900	KL motorhose	1) 1400 mm nur/only 1058O ab/from 07/2008
28	Leitung Ablagebord	0.764.8591	Line	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



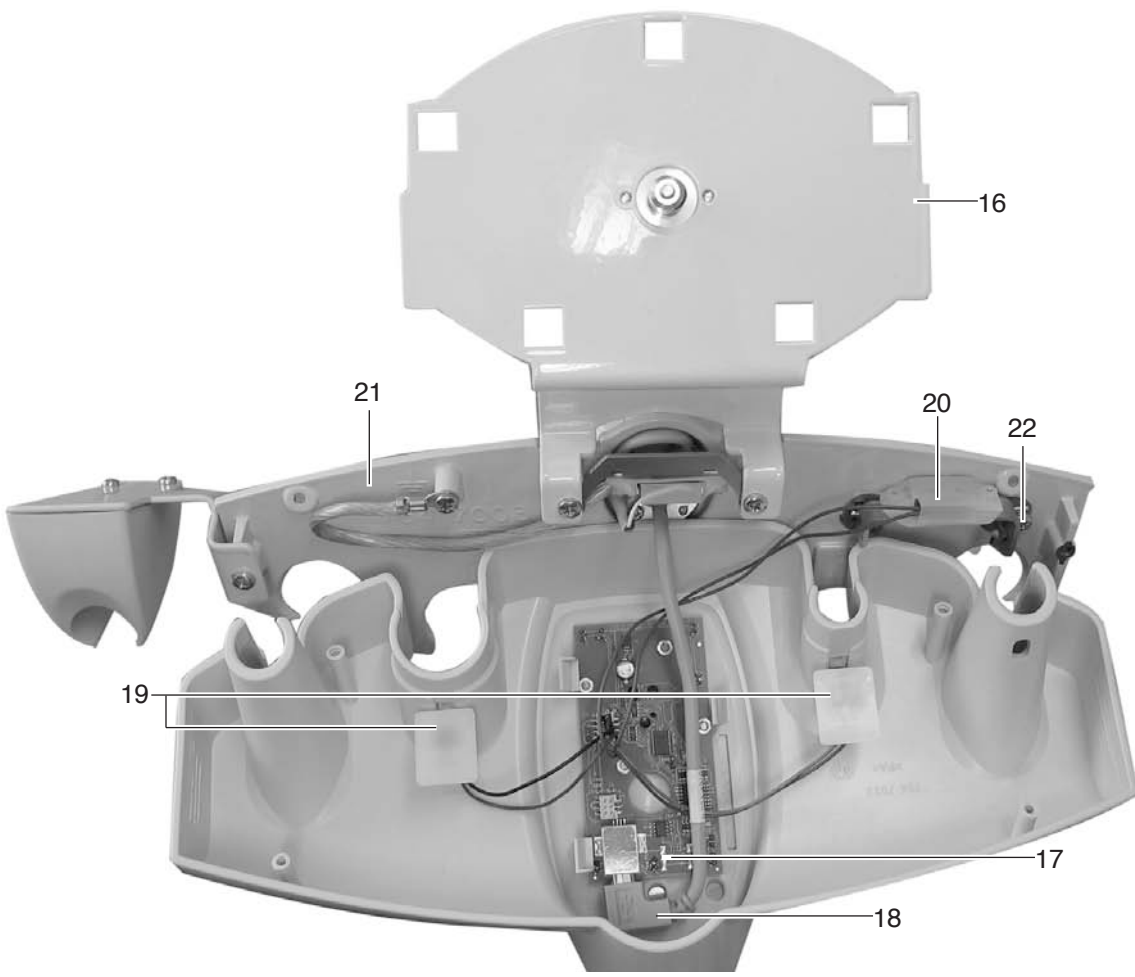
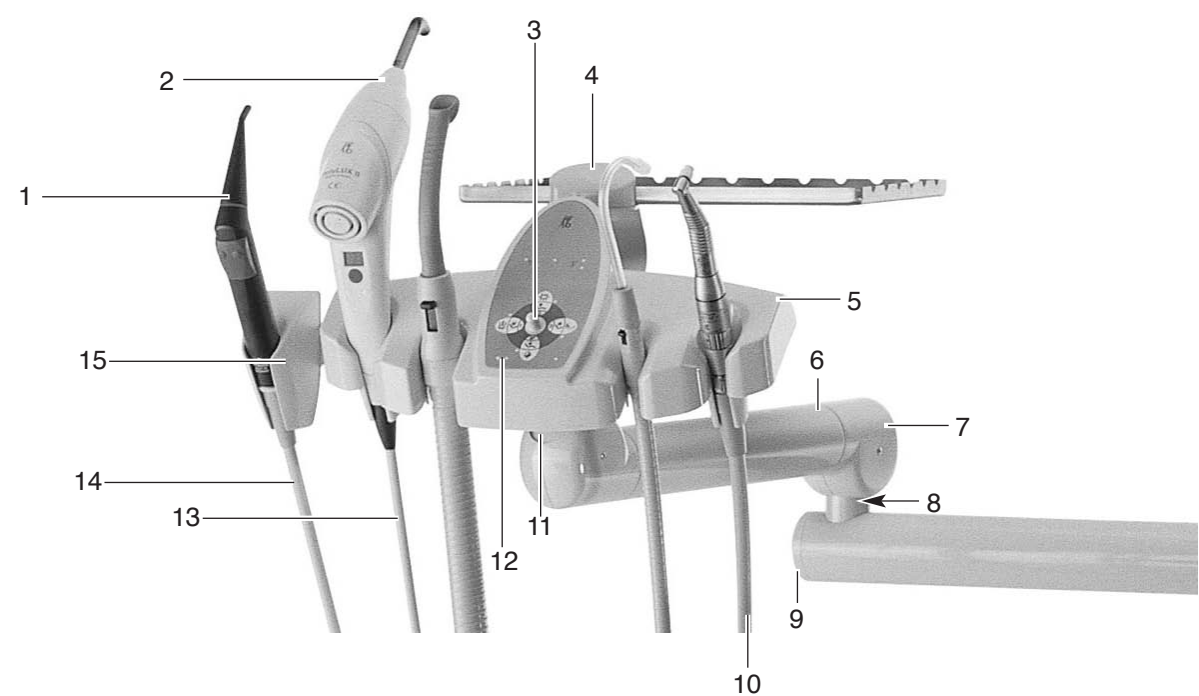




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Einbausatz M-F-Spritze HE M-F Handstück	1.002.1366 0.773.0000	M-F syringe kit assistant M-F handpiece	s. Seite/page 36 s. Seite/page 96-98
2	Einbausatz Polymerisations- licht mit Satelec-Handstück Einbausatz POLYlux2 1058 O	1.004.0809 1.002.3759	Kit Polymerization with Satelec-handpiece 1058 O POLYlux2 kit	s. Seite/page 92
3	Kappe	1.001.2174	Cap	1)
4	Trayhalter BS Trayablage HE	1.000.0896 1.000.0894	Tray support Tray support HE kit	Pos.4 + Befestigungsteile/ Fixing parts
5	HE-Ablage HE-Ablage	1.002.2036 1.003.6263	Assistant support Assistant support	für/to 1058 O/P für/to 1058 O ab/from 07/05
6	Arm für HE-Element	0.764.7173	Arm for assistant-element	
7	Abdeckung Abdeckung	0.764.7233 0.764.7243	Cover Cover	
8	Lagerzapfen	0.764.7193	Bearing pin	
9	Deckel	0.764.7083	Cover	
10	Luftinstrumentenschlauch 1550	1.003.2894	Air instrument hose	1) 1550 mm nur/only 1058O
11	Lagerzapfen	1.001.4576	Bearing pin	
12	Bedienfolie Bedienfolie	1.002.1716 0.710.7512	Sensor foil Sensor foil	für/to 1058 O/P für/to 1058 O ab/from 07/05
13	POLYlux 2 Schlauch	0.516.1090	POLYlux 2 hose	für/to POLYlux 2
14	4 F Handstückschlauch	0.516.8190	4 F handpiece hose	
15	Kameraablage 3A Halbrundschraube 4x10 EJOT	1.001.1937 0.260.9574	Support for camera 3A Screw	zu Pos./for item 15
16	BS Aufnahme Diagnodent	1.002.1699	Install receptacle Diagnodent	
17	Steuerung Tastatur Steuerung Tastatur	1.002.2307 0.226.7041	Keyboard control Keyboard control	für/to 1058 O/P für/to 1058 O ab/from 07/05
18	USB Leitung	0.223.4216	Cable USB	
19	Schalteraufnahme Mikroschalter (zu Pos. 19)	0.764.7033 0.223.2406	Switch holder Microswitch (for item 19)	1)
20	Mikroschalter Mikroschalter Linsenschraube 3x 8 EJOT Schaltergehäuse Druckfeder	0.223.2405 0.223.2406 0.260.9635 0.764.4633 0.201.8275	Microswitch Microswitch Screw Switch housing Spring	zu Pos./for item 20 zu Pos./for item 20 zu Pos./for item 20 zu Pos./for item 20
21	He-Träger	1.002.2035	Support	1058 O
22	Linsenschraube M 4x 6	0.261.5095	Counter screw	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058

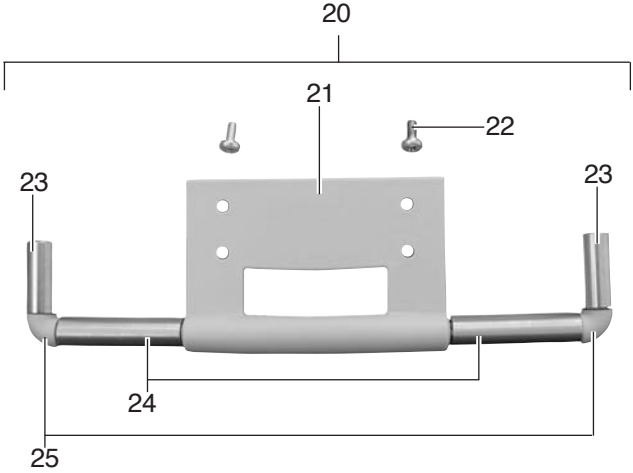
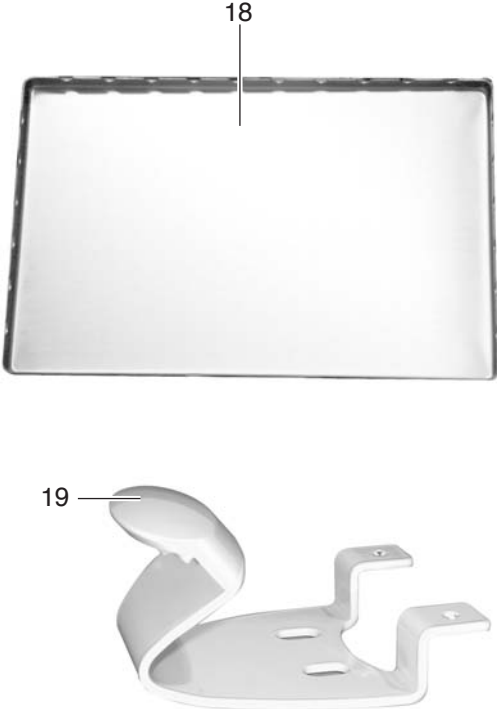
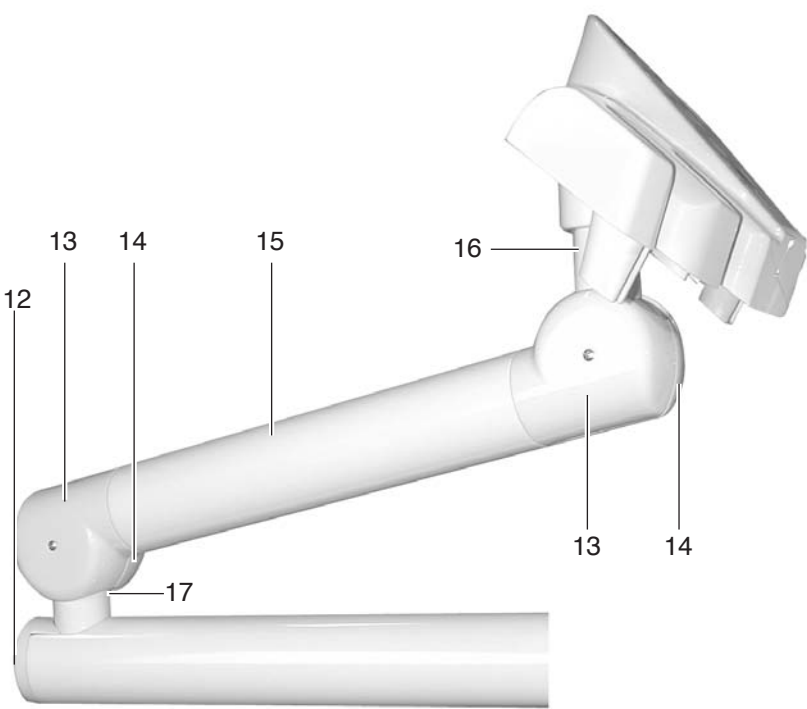
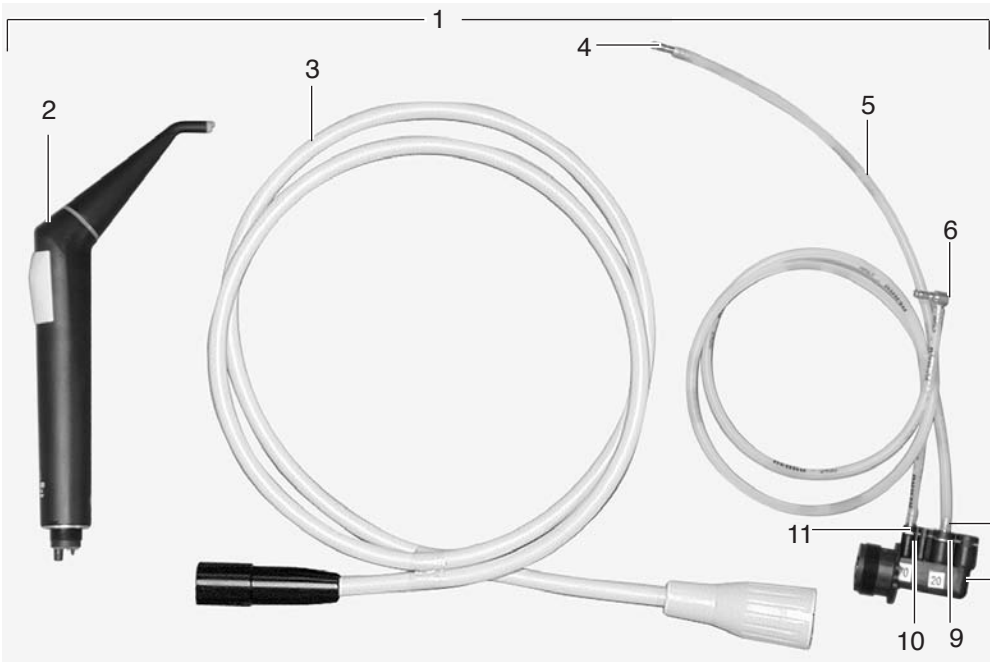




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS 3-F Handstück HE	1.001.3091	Assistant's 3-F handpiece kit	Pos. 2-11
2	3-F Handstück	0.773.0500	3-F handpiece	s. Seite/page 94
3	4 F Handstückschlauch	0.516.8190	4 F handpiece hose	1550 mm
4	Stecknippel	0.203.4015	Plug-in fitting	
5	Schlauch	0.065.5371	Hose	PE 2,5 x 0,73 Meterware/ by the meter
6	Steckanschluß	0.211.1201	Plug-in connection	
7	Stecknippel	0.203.4014	Plug-in fitting	
	O-Ring (zu Pos. 7)	0.200.6074	O-ring (for item 7)	3,5 x 1,5
8	Kupplung	0.764.6613	Coupling	
9	Feder	0.201.8903	Clip	groß/big
10	Feder	0.201.8904	Clip	klein/small
11	Stecknippel	0.203.4015	Plug-in fitting	
	O-Ring (zu Pos. 11)	0.200.6184	O-ring (for item 11)	2,1 x 1,1
12	Deckel	0.764.7083	Cover	
13	Abdeckung	0.764.7233	Cover	
14	Abdeckung	0.764.7243	Cover	
15	Arm für HE-Element	0.764.7173	Arm for assistant-element	
16	Lagerzapfen	1.001.4576	Bearing pin	
17	Lagerzapfen	0.764.7193	Bearing pin	
18	Tablett	0.228.3016	Tray	
19	Trayhalter	1.000.0896	Tray support	
	BS Trayablage HE	1.000.0894	Tray support HE kit	Pos.19 + Befestigungsteile ohne Pos. 18/Fixing parts without pos. 18
20	BS Saugschlauchführung	1.002.3617	Install. guide piece	
21	Griff	1.002.3618	Handle	
22	Linsenschraube M 4x 8	0.261.5096	Screw	
23	Rolle	1.002.3621	Pulley	
24	Rolle	1.002.3620	Pulley	
25	Rollenträger	1.002.3619	Support	
	O-Ring 5 X1,5 (zu Pos. 25)	0.200.6138	O-ring (for item 25)	5 X1,5

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.




KaVo 1058

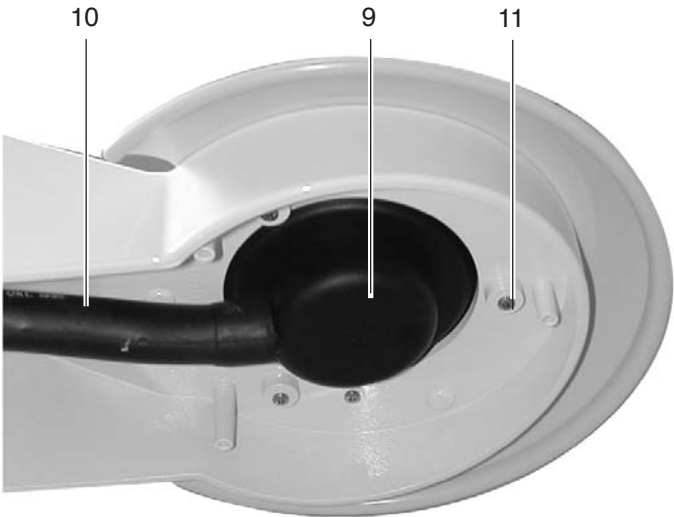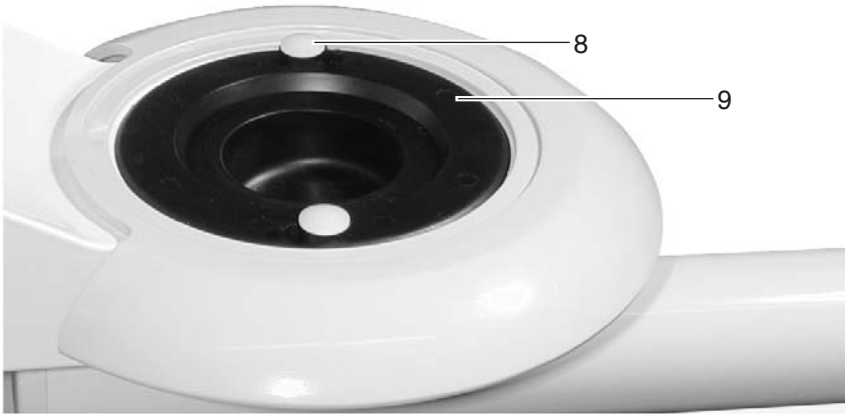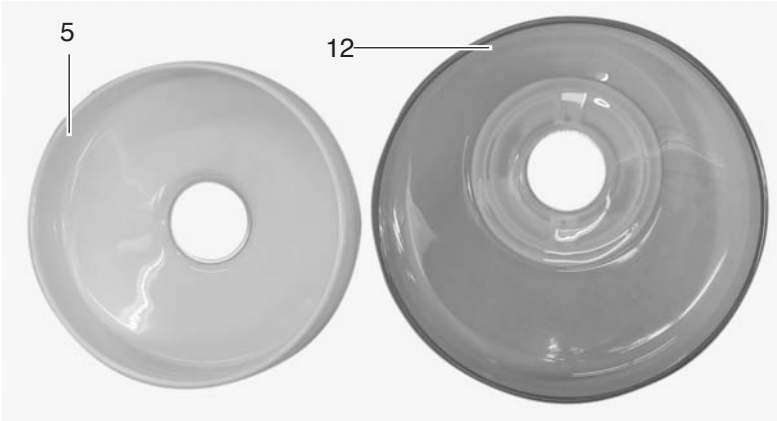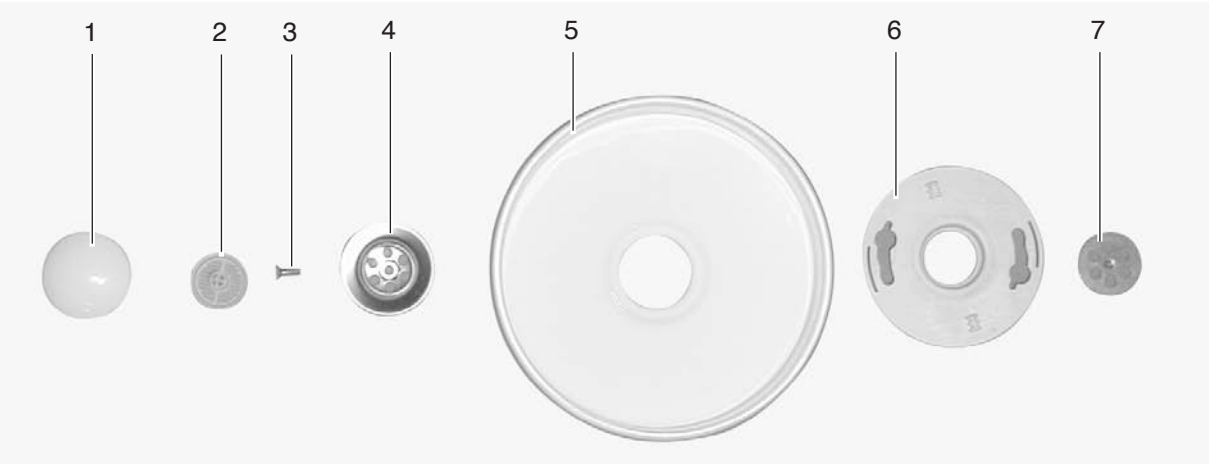



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Verschlußkappe	0.202.6062	Screw cap	1)
2	Sieb	0.210.5152	Strainer	1)
3	Senkschraube	0.251.4204	Screw	1) M5 x 14
4	Abflußstück	0.764.3513	Drain piece	
5	Speischale	0.764.3503	Spittoon bowl	
6	Bajonettring	0.764.4863	Slide ring	
7	Abflußstück	0.764.4853	Drain piece	
8	Verschlußkappe	0.764.6053	Screw cap	
	Schraube	0.260.9637	Screw	
9	Ablauf Schale	0.764.6043	Drainage	
10	Ablauf	0.764.6083	Drain	
11	HR-Schraube	0.260.9637	Screw HR	3 x 10
12	Mundspülbecken Glas	1.002.1064	Spittoon bowl	"Ice"-Design



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

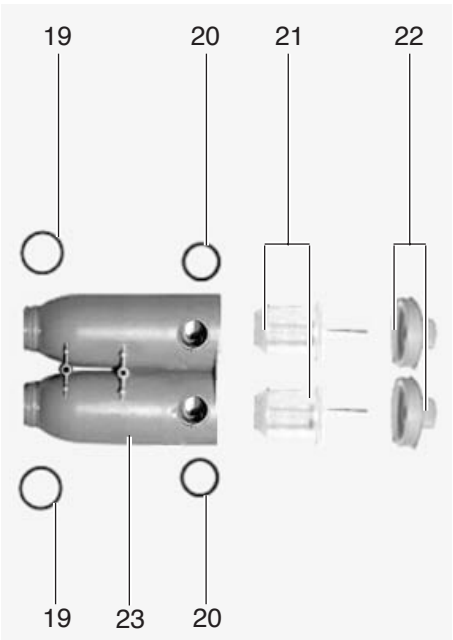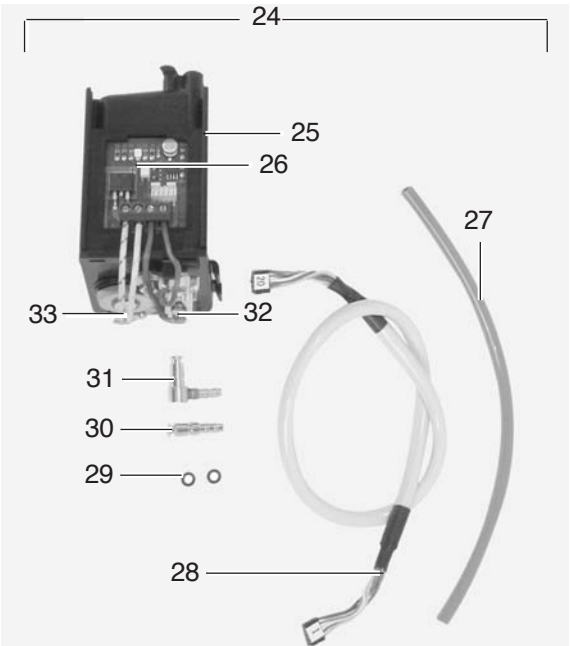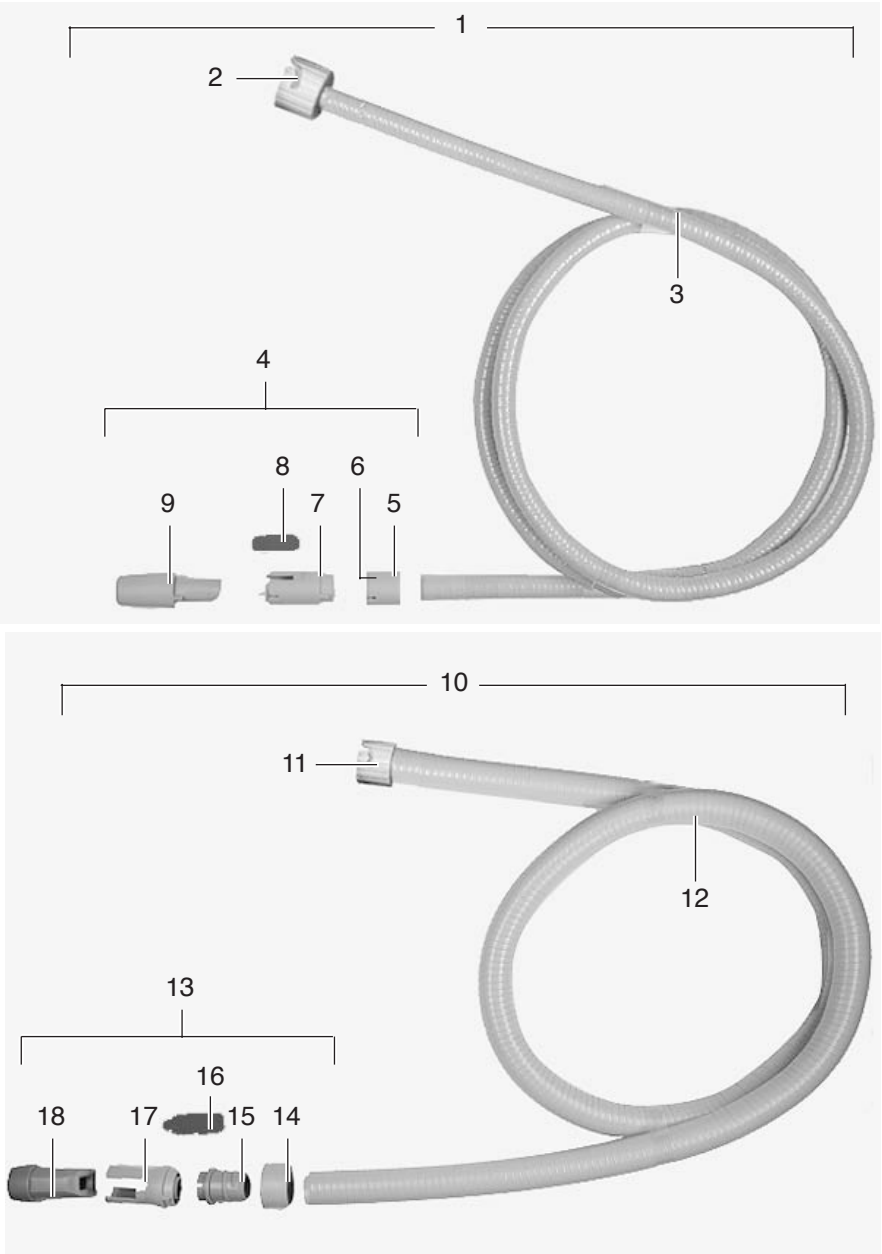



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Speichelzieherschlauch	0.211.1571	Saliva ejector hose	1)
2	Schlauchanschluß, klein	0.211.7212	Hose connector, small	
3	Schlauch	0.226.9164	Hose	1) 1600 mm, Lw 8
	Schlauch	0.065.6589	Hose	Meterware /by the meter
4	Absauganschluß klein	0.211.1751	Small suction connection	1)
5	Hülse	0.764.5663	Sleeve	
6	Schlauchanschluß	0.764.5673	Hose connector	
7	Gehäuse	0.764.5643	Housing	
8	Schieber	0.764.5653	Slide	1)
9	Mundstück	0.764.5633	Mouth piece	
10	Sekretschlauch	0.211.1561	Secretion hose	1)
11	Schlauchanschluß, groß	0.211.7122	Hose connector, large	
12	Schlauch	0.226.9162	Hose	1) 1600 mm, Lw 20
	Schlauch	0.065.7163	Hose	Meterware /by the meter
13	Absauganschluß groß	0.211.1761	Large suction connection	1)
	Hülse (zu Pos. 13)	1.000.9912	Sleeve (for item 13)	
14	Hülse	0.764.5613	Sleeve	
15	Schlauchanschluß	0.764.5623	Hose connector	
16	Schieber	0.764.5603	Slide	1)
17	Gehäuse	0.764.5593	Housing	
18	Mundstück	0.764.5583	Mouth piece	1)
19	O-Ring	0.200.6414	O-ring	1) 21 x 1,5
20	O-Ring	0.200.6316	O-ring	1) 18 x 2
21	Sieb	0.763.3423	Strainer	1)
22	Kappe	0.763.3203	Cap	1)
23	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	
24	BS Boiler	1.001.2407	Kit Boiler	
25	Boiler	0.765.0210	Boiler	
26	Boilersteuerung	0.226.7045	Boiler PCB	
27	Schlauch	0.065.5593	Hose	3 x 1,5 (Mundglas / tumbler) Meterware /by the meter
28	Leitung	1.001.3917	Line	Boiler
29	O-Ring	0.200.6074	O-ring	3,5 x 1,5
30	Stecknippel	0.203.4002	Plug-in fitting	
31	Stecknippel, montiert	0.211.1691	Plug-in fitting assembly	
32	Temperaturregler	0.765.1121	Thermostat	55 °C
	O-Ring (zu Pos. 32)	0.200.6125	O-ring (for item 32)	7 x 2
33	Heizpatrone	0.221.2215	Heating cartridge	
	O-Ring (zu Pos. 33)	0.200.6301	O-ring (for item 33)	15 x 2




1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

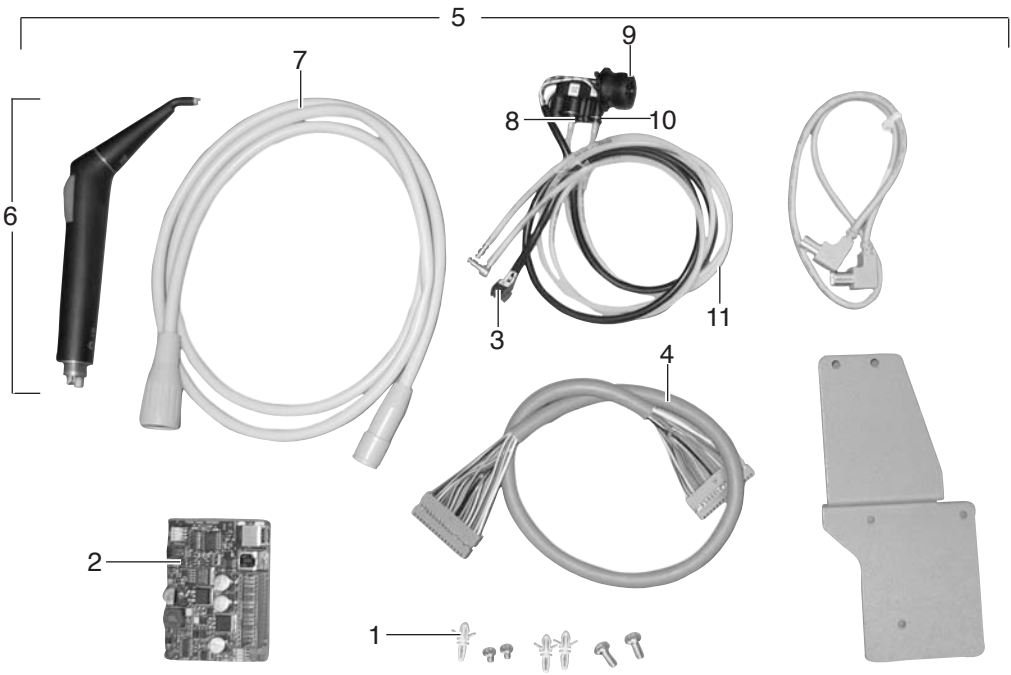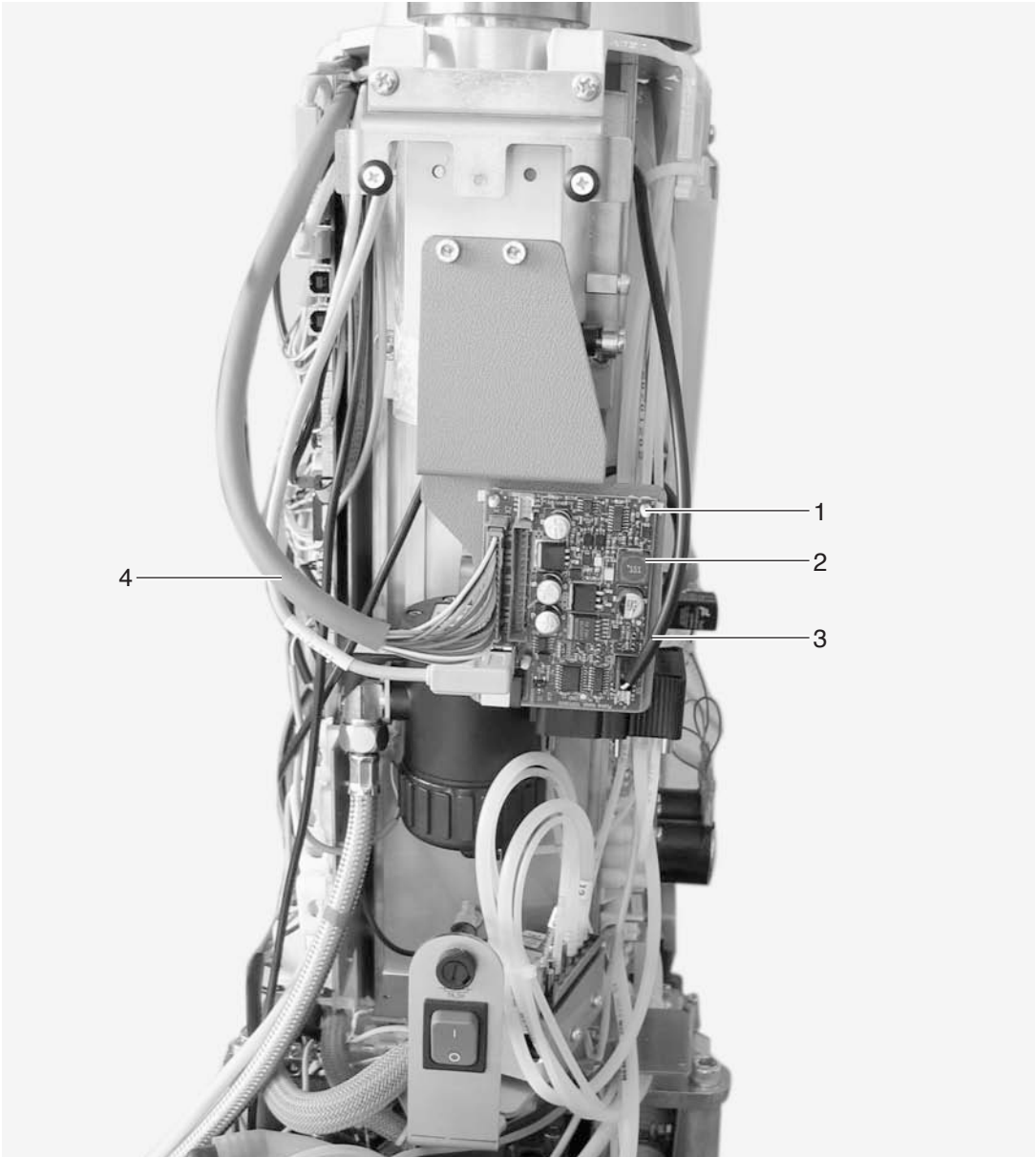



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Abstandshalter	0.224.6435	Spacer	
2	Steuerung MF warm	1.001.5600	Control plate MF syringe	
3	Leitung MF	1.001.9214	Line MF	
4	Leitung Versorgung MF warm	1.001.9181	Supply cable MF warm	
5	BS MF Handstück HE	1.002.1366	BS MF-HANDPIECE HE	Helferin / Assistant s. Seite/page 96-98
6	M-F Handstück	0.773.0000	M-F handpiece	
7	4 F Handstückschlauch	0.516.8190	4 F handpiece hose	
8	Stecknippel	0.203.4014	Plug-in fitting	Luft/air
	O-Ring (zu Pos. 8)	0.200.6074	O-ring (for item 8)	3,5 x 1,5
	Feder (zu Pos. 8)	0.201.8903	Spring (for item 8)	groß/big
9	Kupplung	0.764.6613	Coupling	
10	Stecknippel	0.203.4015	Nipple	Wasser/water
	O-Ring (zu Pos. 10)	0.200.6184	O-ring (for item 10)	2,1 x 1,1
	Feder (zu Pos. 10)	0.201.8904	Clip (for item 10)	klein/small
11	Schlauch PE	0.065.5371	Hose PE	2,5 x 0,73 Leitung 70/20 Meterware/by the meter

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

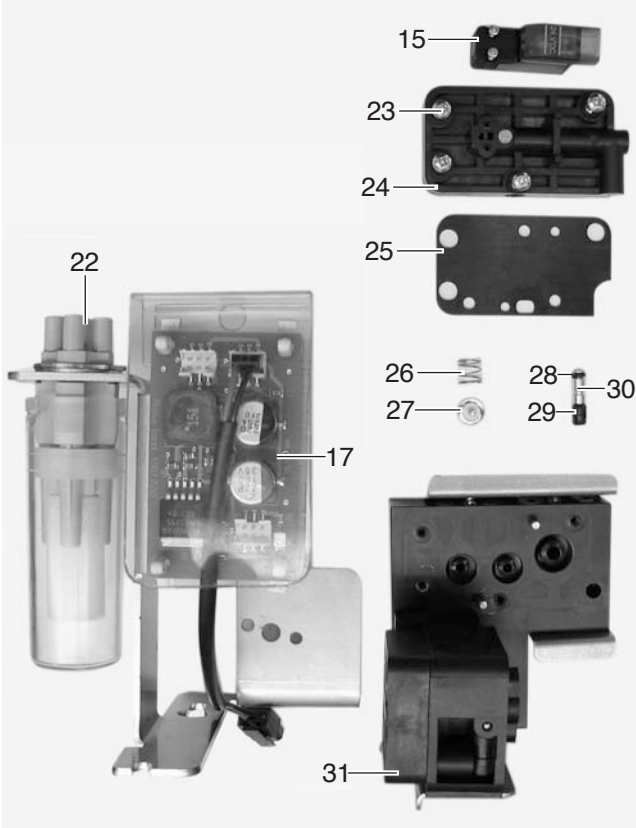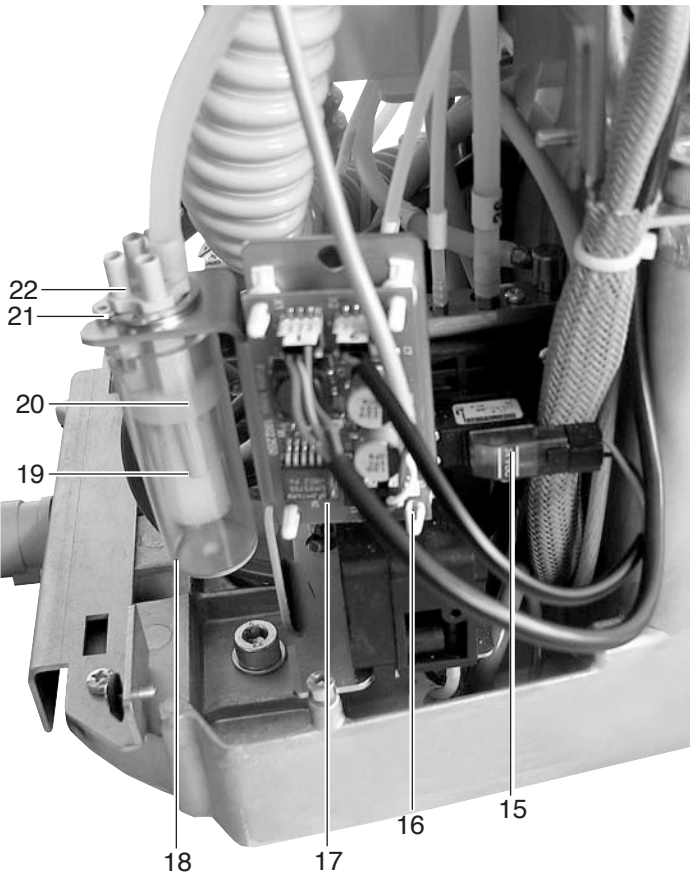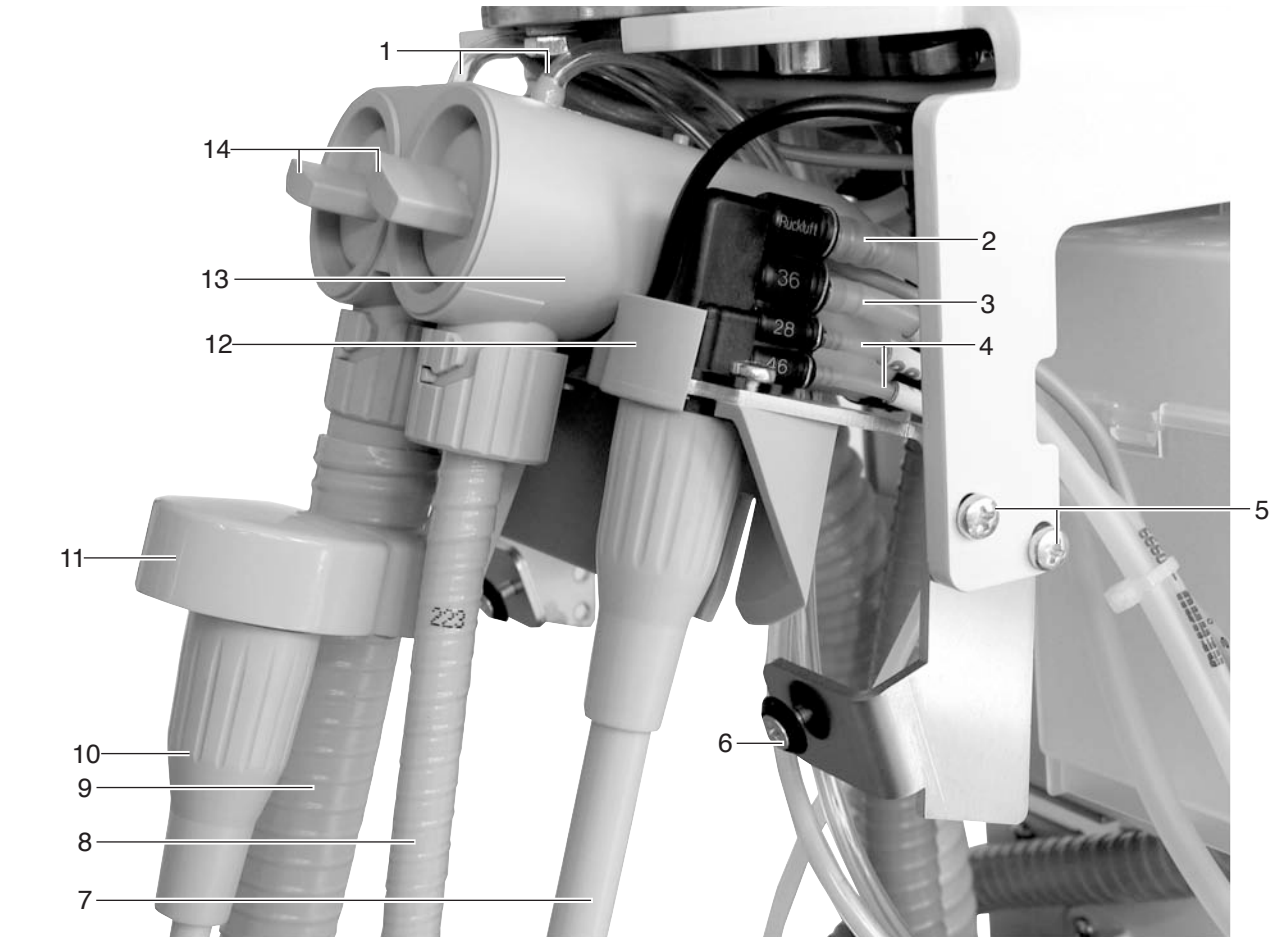




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Schlauch	0.065.5599	Hose	3 x 1 Meterware/ by the meter
2	Schlauch	0.065.5789	Hose	Meterware/by the meter 4 x 1,5
	Stecknippel (zu Pos. 2)	0.203.4259	Nipple (for item 2)	
	O-Ring (zu Pos. 2)	0.200.6074	O-ring (for item 2)	3,5 x 1,5
	Feder (zu Pos. 2)	0.201.8903	Clip (for item 2)	groß/big
3	Schlauch (zu Pos. 2)	0.065.5372	Hose (for item 2)	4 x 1,0 Meterware/ by the meter
	Stecknippel	0.203.4002	Plug-in fitting	
	O-Ring (zu Pos. 3)	0.200.6074	O-ring (for item 3)	3,5 x 1,5
	Feder (zu Pos. 3)	0.201.8903	Spring (for item 3)	groß/big
4	Schlauch PE	0.065.5370	Hose PE	(Air 28/46) 2 x 0,63 Meterware/by the meter
	Stecknippel (zu Pos. 4)	0.203.4001	Nipple (for item 4)	
	O-Ring (zu Pos. 4)	0.200.6184	O-ring (for item 4)	2,1 x 1,1
	Feder (zu Pos. 4)	0.201.8904	Clip (for item 4)	klein/small
5	Linsenschraube M 4X10	0.261.5097	Screw	
6	Senkschraube M 4x12	0.251.4547	Screw	
	Scheibe 4,6	0.200.0462	Washer	
7	Luftinstrumentenschlauch 1550	1.003.2894	Air instrument hose	1) 1550 mm nur/only 1058O
8	Speichelziehschlauch	0.211.1571	Saliva ejector hose	1) s. Seite/page 34
9	Sekretschlauch	0.211.1561	Secretion hose	1) s. Seite/page 34
10	POLYlux 2 Schlauch	0.516.1080	POLYlux 2 hose	
11	Abdeckung	1.002.3327	Cover	1058 O
	Linsenschraube 3x 8 EJOT	0.260.9635	Screw (for item 11)	1058 O
12	Blende	1.001.2310	Cover	
13	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	18 x 2 s. Seite/page 34
14	Kappe	0.763.3203	Cap	1)
	Sieb (zu Pos. 14)	0.763.3423	Strainer (for item 14)	1)
15	Magnetventil	1.001.5862	Solenoid valve	
16	Abstandshalter	0.224.6435	Spacer	
17	Lichtversorgung-Instrument	1.002.2550	Light supply instrument PCB	
18	Ölbehälter	0.210.5132	Oil reservoir	
19	Filter	0.220.7926	Filter	1)
20	Dichtung	0.210.5392	Seal	
21	Sicherungsring 18x1,2	0.245.5025	Safety ring	
22	Halter	0.210.5142	Holder	
23	Halbrundschrabe 3x16 EJOT	0.260.9558	Screw	
24	Anschlussplatte III	1.001.5863	Connecting plate III	
25	Dichtung	0.710.1572	Washer	
26	Druckfeder	0.201.8051	Pressure spring	1)
27	Ventilteller	0.715.4382	Valve disk	1)
	Scheibe (zu Pos. 27)	0.200.3114	Disk (zu Pos. 27)	1)
28	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
29	Dichtung klein	0.728.4142	Seal	
30	Stecknippel	0.203.4001	Nipple	
31	Steuerventil montiert	1.001.5868	Control valve ass.	1) s. Seite/page 62
	O-Ring (zu Pos. 31)	0.200.6036	O-ring (for item 31)	1) 3,1 x 1,6

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 O incl. E-Motor




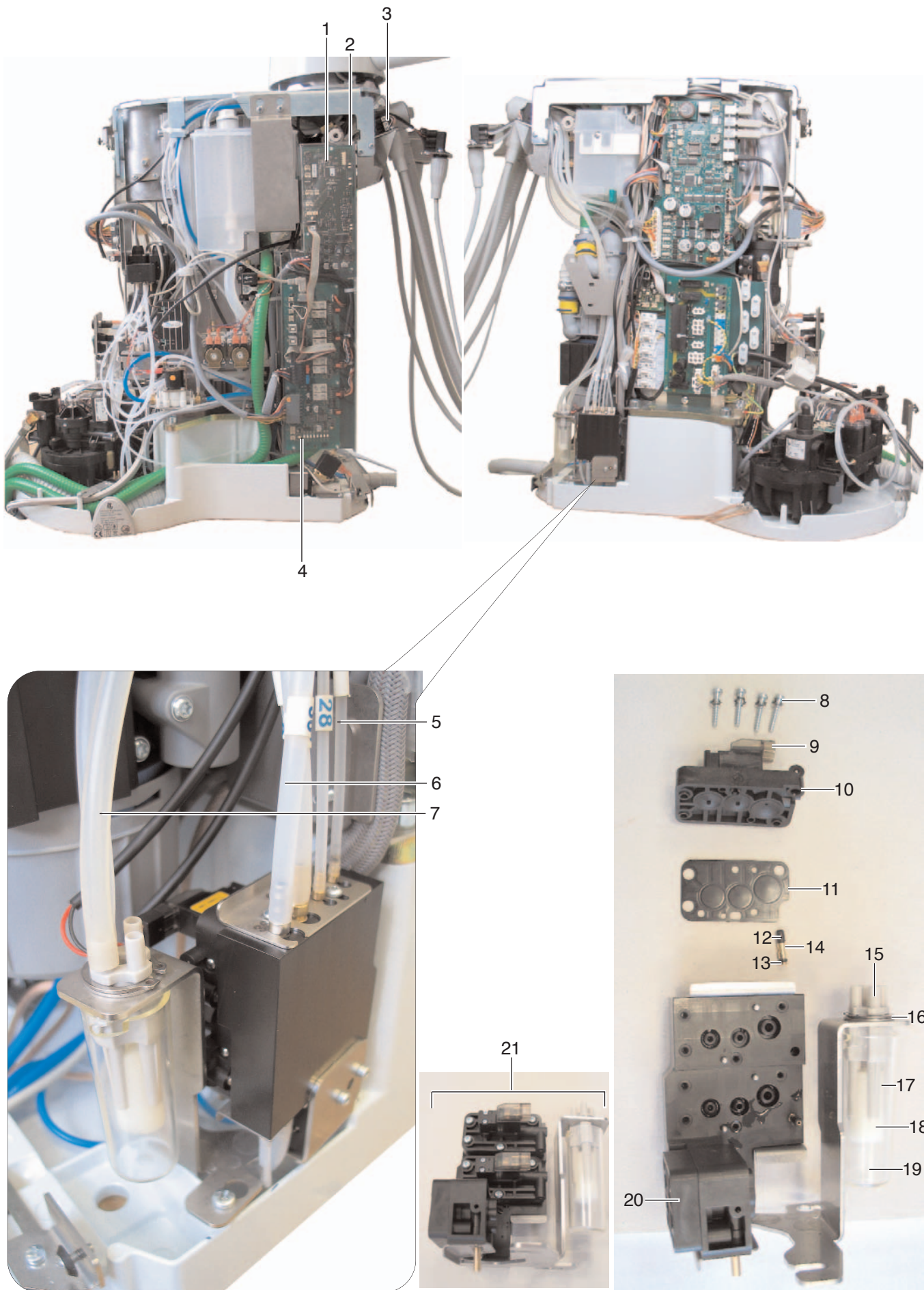




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Motorelektronik KL4	1.006.1037	Motorelectronic KL4	
2	Spritzschutz	1.006.3272	Splash protection	
3	Leitung Turb/Mot	1.006.3326	Cable turb/mot	
4	Steuerung Arzt	0.226.7040	Dentist's PCB	
5	Schlauch PE	0.065.5370	Hose PE	(Air 28/46) 2 x 0,63 Meterware/by the meter
6	Schlauch PE	0.065.5372	Hose PE	(Air 36) 4 x 1
7	Schlauch	0.065.5789	Hose	Meterware/by the meter 4 x 1,5
8	Halbrundschraube 3x16 EJOT	0.260.9558	Screw	
	Zahnscheibe (zu Pos. 8)	0.258.4005	Washer (for item 8)	A 3,2
9	Magnetventil	1.001.5862	Solenoid valve	
10	Anschlussplatte III	1.001.5863	Connecting plate III	
11	Dichtung	0.710.1572	Washer	
12	Dichtung klein	0.728.4142	Seal	
13	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
14	Stecknippel	0.203.4001	Nipple	
15	Halter	0.210.5142	Holder	
16	Sicherungsring 18x1,2	0.245.5025	Safety ring	
17	Dichtung	0.210.5392	Seal	
18	Filter	0.220.7926	Filter	1)
19	Ölbehälter	0.210.5132	Oil reservoir	
20	Steuerventil montiert	1.001.5868	Control valve ass.	1) s. Seite/page 62
	O-Ring (zu Pos. 19)	0.200.6036	O-ring (for item 19)	1) 3,1 x 1,6
21	Ventilplatte montiert	1.006.1407	Valve plate installs	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



KaVo 1058 TM

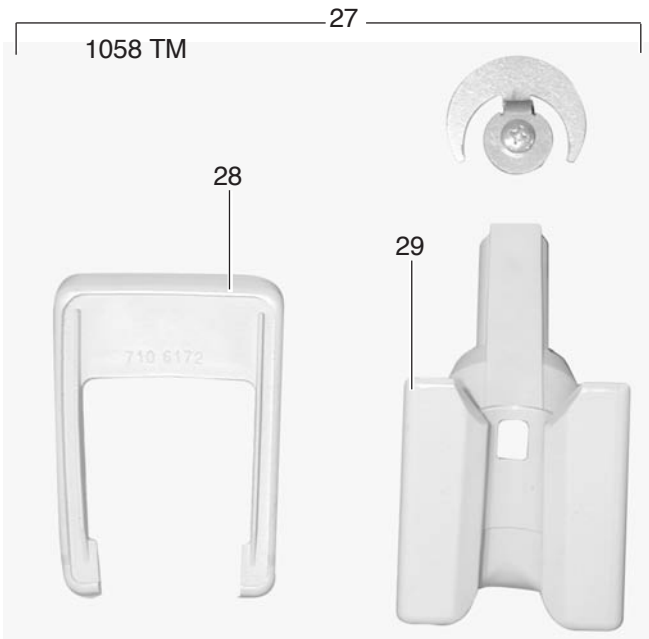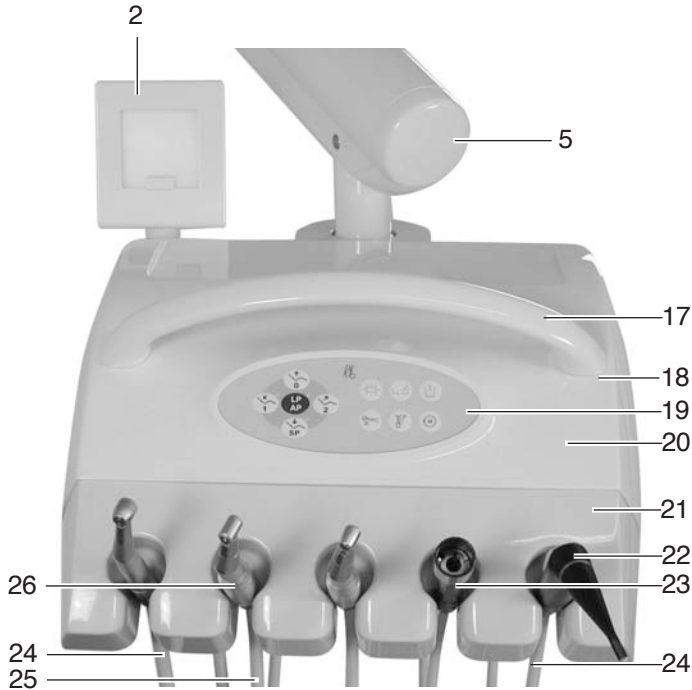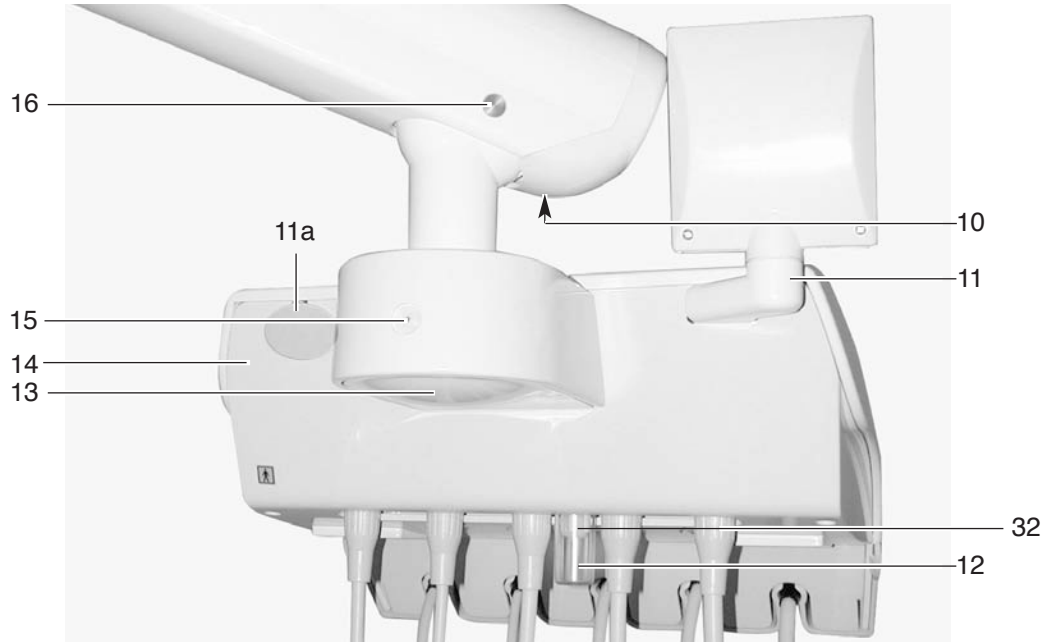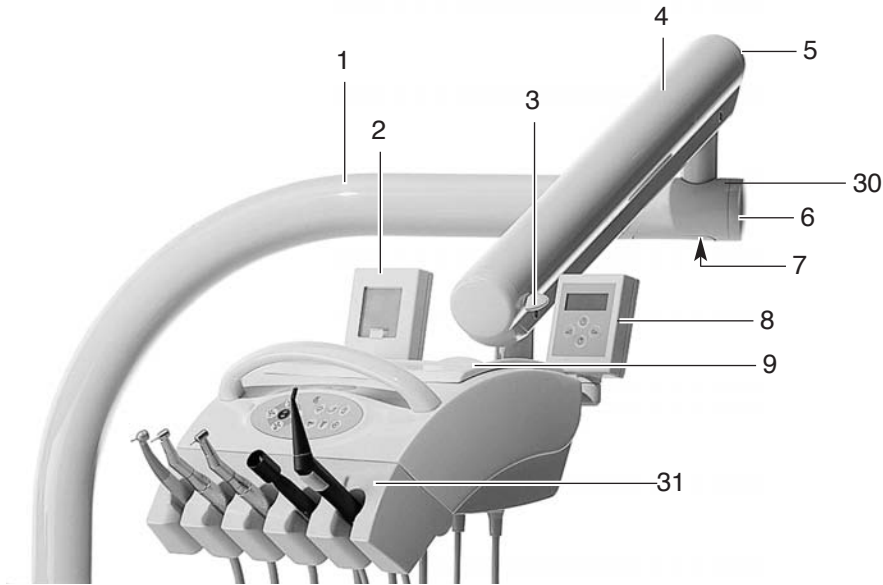



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Schwenkarm (lang), mont.	0.724.2961	Swivel arm (long) assembly	bis/until 7/2004 incl. Lager/bearing
	Schwenkarm (D80) lang, kpl.	1.002.6938	Swivel arm (D80) long assembly	ab/from 7/2004 incl. Lager/bearing
2	Röntgenbildbetrachter	0.740.4861	X-ray viewer	5 x 5 s. Seite/page 100
3	Klemmschraube	0.724.8922	Fixing screw	
4	Federarm komplett	0.724.2851	Spring arm assembly	bis/until 7/2004 mit Leitungen+Schläuchen/ incl. cables+hoses
	Federarm 1058/80 Ersatz	1.003.4405	Spring arm	ab/from 7/2004 mit Leitungen+Schläuchen/ incl. cables+hoses
	Gasdruckfeder (zu Pos. 4)	0.220.1520	Pneumatic spring (for item 4)	1000 N (kein/no tray)
	Gasdruckfeder (zu Pos. 4)	0.220.1522	Pneumatic spring (for item 4)	1500 N
	Gasdruckfeder (zu Pos. 4)	0.220.1517	Pneumatic spring (for item 4)	1900 N
	Gasdruckfeder (zu Pos. 4)	0.220.1519	Pneumatic spring (for item 4)	2500 N
5	Abdeckung	0.213.4752	Cover	
	Schnäpper (zu Pos. 5)	0.764.3933	Catch (for item 5)	
6	Abdeckung	0.213.4712	Cover	
	Schnäpper (zu Pos. 6)	0.764.3933	Catch (for item 6)	
7	Abdeckung	0.724.8752	Cover	
8	BS Drehzahl/Timer/Memospeed	1.000.9105	Kit Speed/Timer/Memospeed	s. Seite/page 100
9	Antirutschmatte	0.710.8162	Non-slip mat	
10	Einstellschraube	0.724.7272	Adjustment screw	für Gewichtsausgleich/ for weight compensation
11	BS Adapter Kleinbildbetr.	0.740.4981	Viewer kit	links / left side s. Seite/page 100
11a	Abdeckung	0.725.4481	Cover	anstelle von/instead of Pos.11
12	Ölbehälter	0.210.5132	Oil reservoir	
	Filter (zu Pos. 12)	0.220.7926	Filter (for item 12)	1)
13	Abdeckung	0.710.8012	Cover	
14	Gehäuseunterteil	0.710.7812	Bottom part of housing	
15	Abdeckung	0.710.6952	Cover	
16	Kerbstift	0.252.6031	Slotted Pin	3x32 Achssicherung/ axle-fixation
17	Griff	0.710.7922	Handle	
18	Unterlage	0.710.7932	Support	
19	Bedienteil	0.710.7502	Control element	
20	Gehäuseoberteil	0.710.7892	Top part of housing	
21	Instrumententräger	0.710.7942	Instrument carrier	
22	3-F Handstück	0.773.0500	3-F handpiece	s. Seite/page 94
23	BS PIEZOlux	1.000.2107	Kit PIEZOlux	s. Seite/page 92
24	Luftinstrumentenschlauch	0.516.5310	Air instrument hose	1) 1250 mm
25	KL-Motorschlauch	0.516.5810	KL motorhose	s. Seite/page 102
	INTRA K Motorschlauch	1.000.5652	K-LUX motorhose	s. Seite/page 102
	COMFORTbase 405 L Schlauch	1.006.1211	COMFORTbase 405 L hose	s. Seite/page 104
26	INTRA LUX Motor KL 701	1.001.8776	INTRA LUX motor KL 701	s. ETB/spare part sheet 1.002.2168
	COMFORTdrive 200 XD	1.000.5500	COMFORTdrive 200 XD	s. Seite/page 104
27	BS 3-F Handstück	1.000.1142	3-F handpiece kit	stehend/standing
28	Distanzstück	0.710.6172	Spacer	
29	Tülleneinsatz	0.710.6162	Insert	
	Blindabdeckung	0.710.1882	Blank cover	für freibleibende Ablage/ for support without engagement
30	Anschlagring	1.002.6818	Ring	
	2x Schraube	0.249.4154	Screw 2x (for item 30)	
31	Blindabdeckung	0.710.1882	Blind cover	
32	Halter	0.210.5142	Holder	
	Klammer (zu Pos. 32)	0.245.5025	Clamp (for item 30)	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

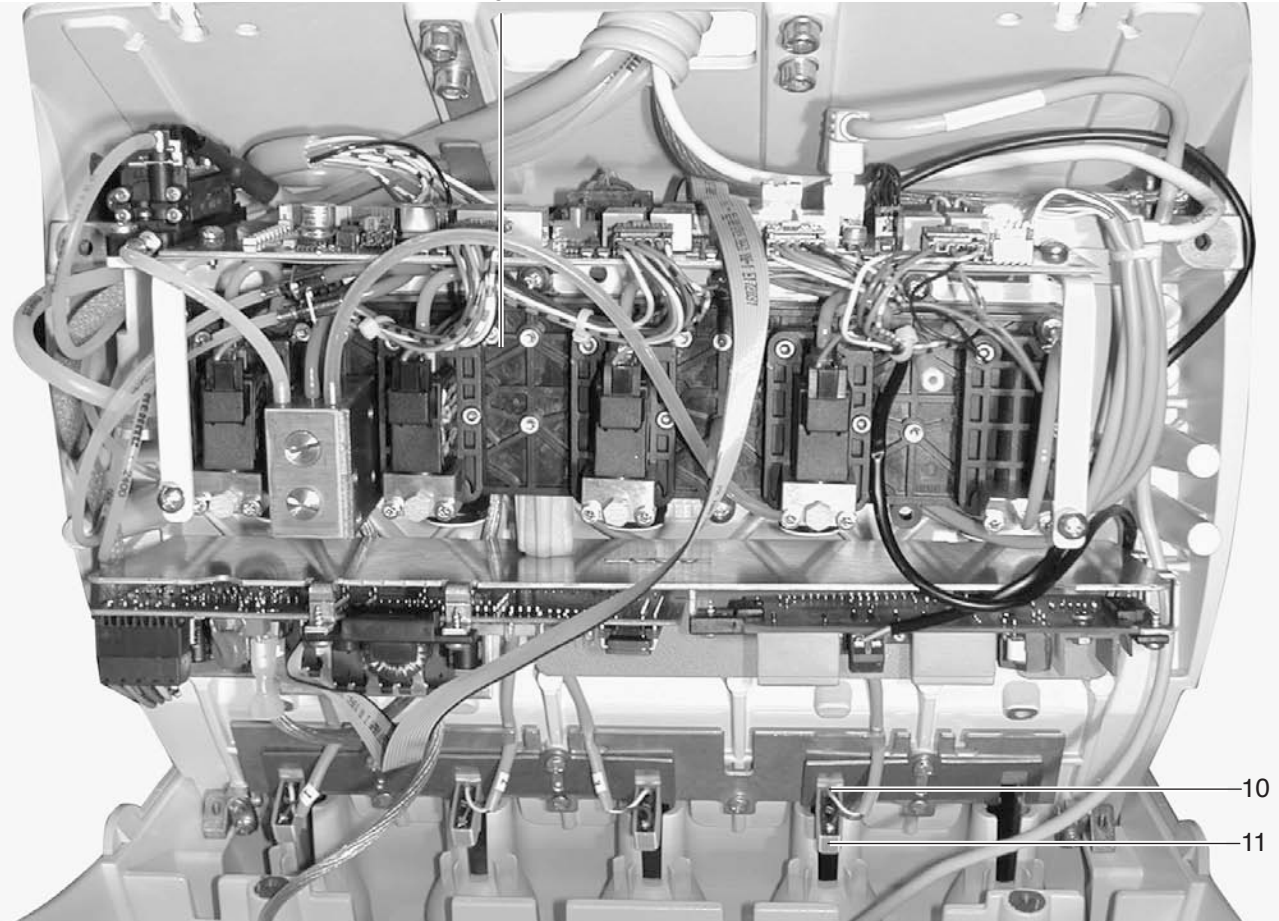
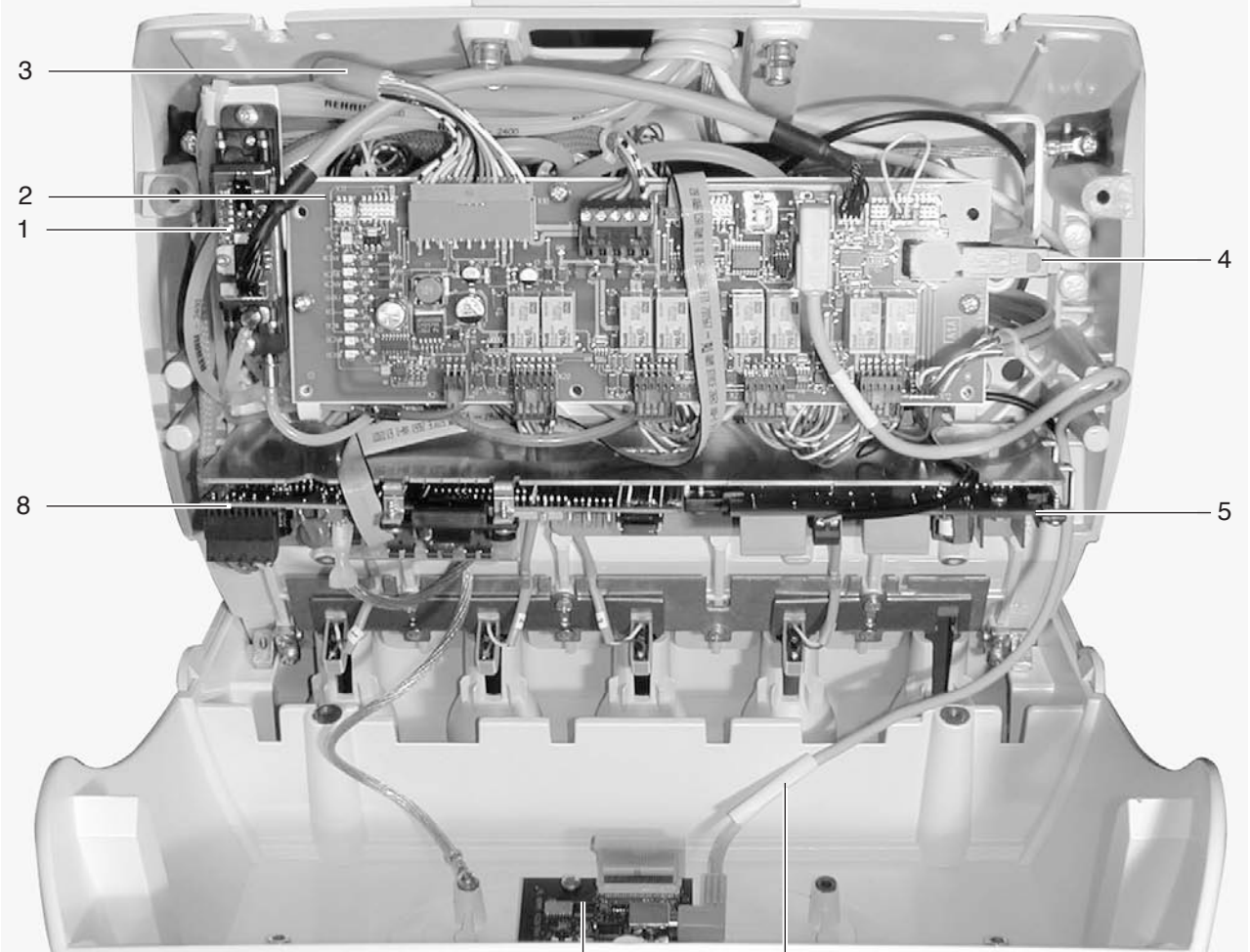




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Sprayerwärmung Instr.	0.728.3131	Heating for instr. kit	s. Seite/page 92
2	Steuerung Arzt	0.226.7040	Dentist's PCB	
3	Lastleitung Tisch	0.710.3581	Load cable table	
4	USB Leitung	0.223.4218	Cable USB	
5	PIEZO-ZEG Elektronik	0.710.4241	Scaler electronic plate	s. Seite/page 92
6	USB Leitung	0.223.4210	Cable USB	
7	Steuerung Tastatur	0.226.7041	Keyboard PCB	
8	Motorelektronik KL	0.696.0161	Motorelectronic KL	s. Seite/page 102
	Motorelektronik KL	1.003.8985	Motorelectronic KL	ab/from 12/05
	PCBA KL-4 Steuerung	1.006.1037	PCBA KL-4	ab/from 03/09
9	Ventilplatte	0.710.0621	Valve board	s. Seite/page 60
	Ventilplatte	1.001.5869	Valve board	ab/from 7/2004
				s. Seite/page 62
10	Mikroschalter	0.223.2406	Microswitch	1)
11	Schalteraufnahme	0.764.6403	Switch holder	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 S

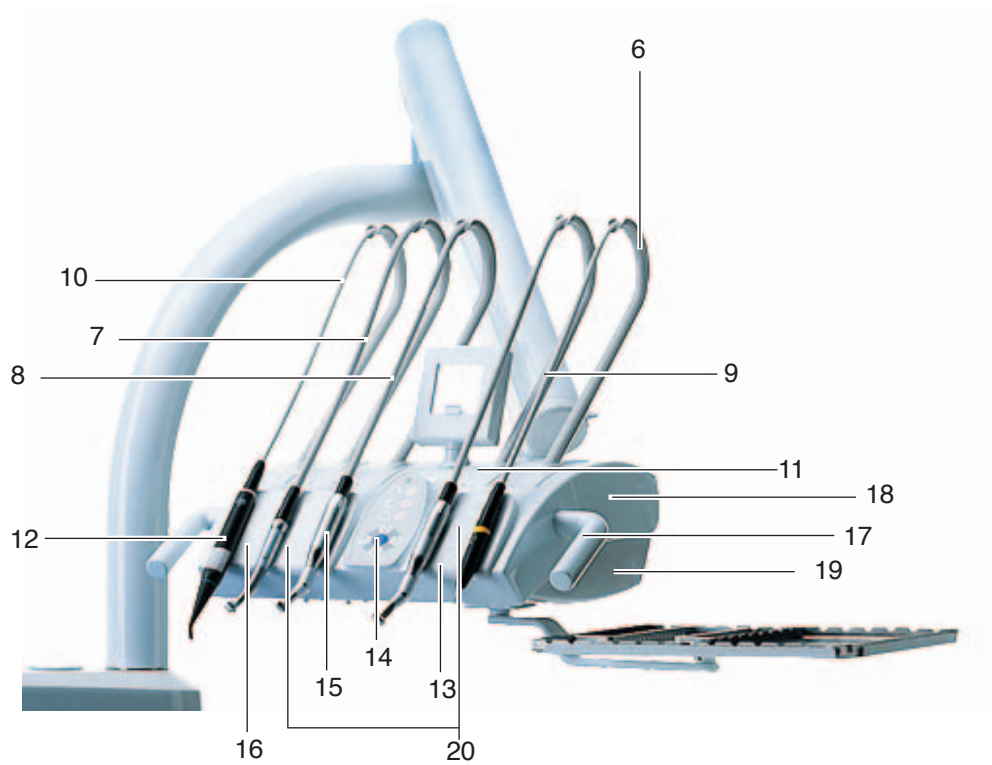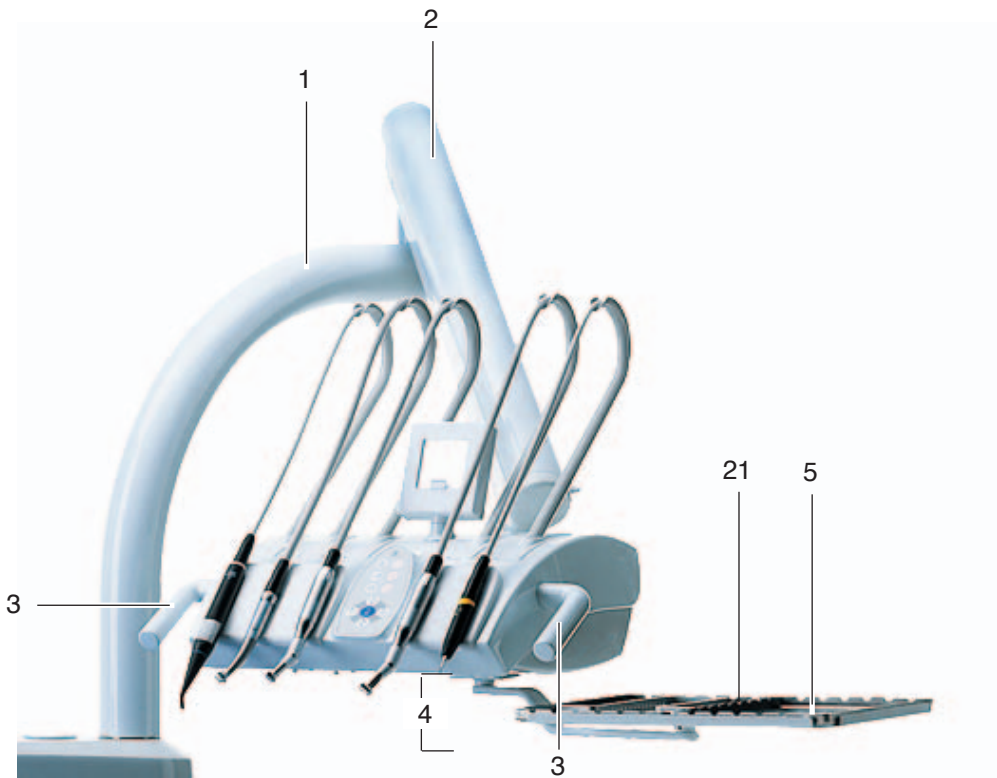




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Schwenkarm (kurz), mont. Schwenkarm (D80) kurz, kpl.	0.724.2951 1.002.6936	Swivel arm (short) assembly Swivel arm (D80) short assembly	incl. Lager/bearing ab/from 7/2004 incl. Lager/bearing mit Leitungen+Schläuchen/ incl. cables+hoses ab/from 7/2004 mit Leitungen+Schläuchen/ incl. cables+hoses
2	Federarm komplett Federarm 1058/80 Ersatz	0.724.2851 1.003.4405	Spring arm assembly Spring arm	fest montiert/fixed f.USA-Tray s.Seite/page102 f.Norm-Tray s.Seite/page104
3	Griff	0.710.7712	Handle	
4	BS Tray-Aufnahme BS Tray-Aufnahme	1.000.3698 1.000.3697	Kit Tray holder Kit Tray holder	
5	Amerikanisches Tablett Normtablett	0.725.8152 0.719.1070	American tray Norm-tray	s. Seite/page 104 s. Seite/page 64
6	Schwinge	0.710.6502	Swing arm	s. Seite/page 48
7	Luftinstrumentenschlauch	0.516.5310	Air instrument hose	1) 1250 mm
8	K-Motorschlauch K 200 KL-Motorschlauch COMFORTbase 405 L	1.000.5652 0.516.5810 1.006.1211	K-motor-tubing K 200 KL motorhose COMFORTbase 405 L	1) 1250 mm 1) 1250 mm
9	BS PIEZOlux	1.000.2107	Kit PIEZOlux	s. Seite/page 92
10	4 F Handstückschlauch	0.516.8140	4 F handpiece hose	1) 1250 mm
11	Abdeckung	1.000.2245	Cover	
12	3-F Handstück	0.773.0510	3-F handpiece	s. Seite/page 94
13	Ablagekissen	0.710.7742	Hygienic repository	2er
14	Bedienteil	0.710.7512	Control element	S/HE
15	INTRA LUX Motor K 200 INTRA LUX Motor KL 701	1.000.6717 1.001.8776	INTRA LUX Motor K 200 INTRA LUX motor KL 701	s. Seite/page 102 s. ETB/spare part sheet 1.002.2168 s. Seite/page 104
	COMFORTdrive 200 XD	1.000.5500	COMFORTdrive 200 XD	
16	Ablagekissen	0.710.7732	Hygienic repository	3er
17	BS Griffe S abnehmbar Griffaufnahme, montiert Griff, montiert	0.710.4101 0.710.3481 0.740.4571	Kit handles S detachable Holder assembly Gripping sleeve assembly	
18	Gehäuseoberteil	0.710.7622	Top part of housing	
19	Gehäuseunterteil	0.710.7532	Bottom part of housing	
20	Ablagekissen kompl. 1058 S Einschlagniet (zu Pos. 20)	1.003.2961 0.710.7632	Hygienic repository Rivet	komplett/complete
21	Anti-Rutschplatte	0.710.7072	Anti gliss mat	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 S

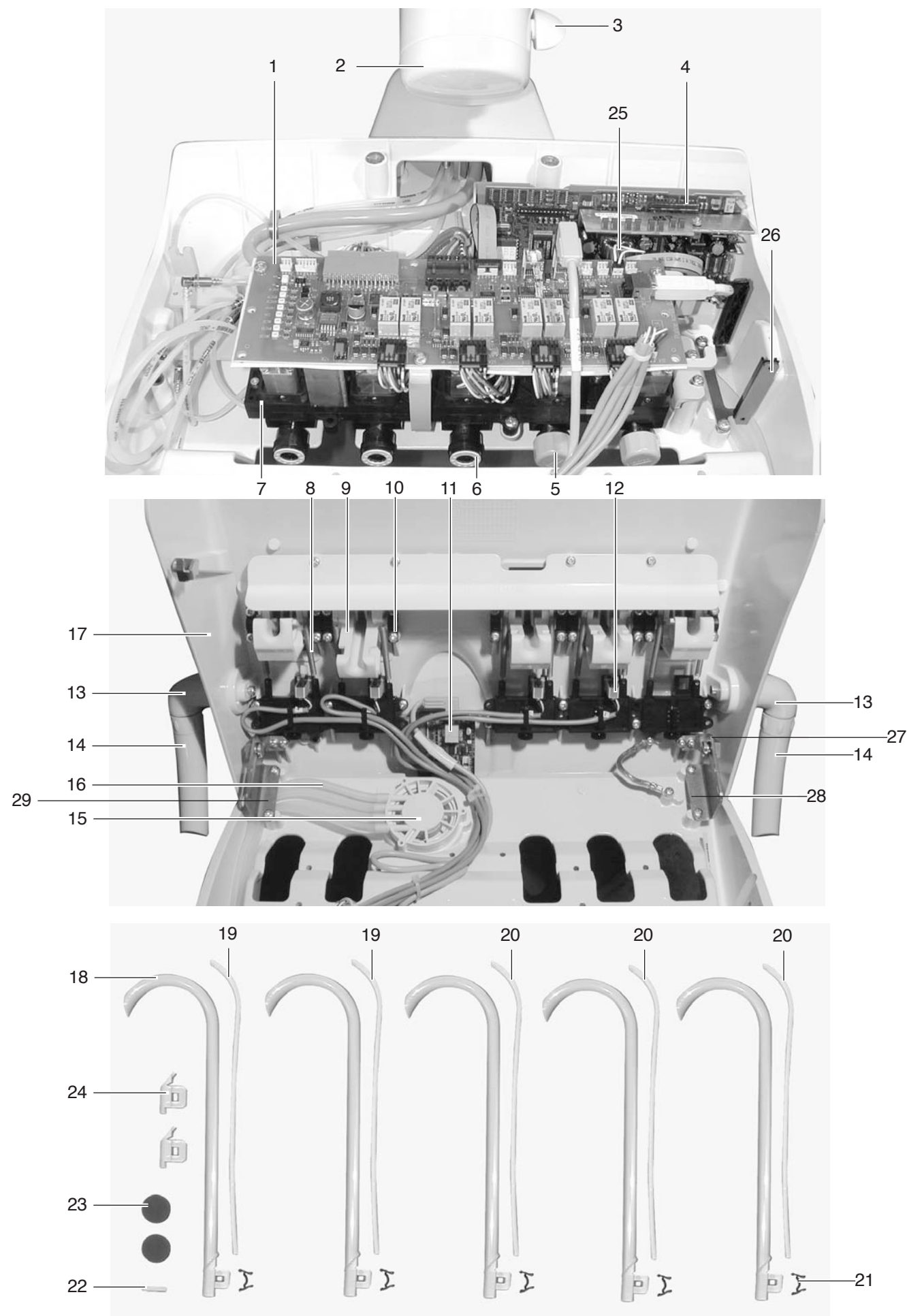




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Steuerung Arzt	0.226.7040	Dentist's PCB	
2	Abdeckung	0.213.4752	Cover	
	Schnäpper (zu Pos. 2)	0.764.3933	Catch (for item 2)	
3	Klemmschraube	0.724.8922	Fixing screw	
4	Motorelektronik KL	0.696.0161	Motorelectronic KL	s. Seite/page 102 ab/from 12/05 ab/from 03/09
	Motorelektronik KL	1.003.8985	Motorelectronic KL	
	PCBA KL-4 Steuerung	1.006.1037	PCBA KL-4	
5	Abdeckkappe	0.213.4372	Cap	
	Dichtung (zu Pos. 5)	0.710.1932	Seal (for item 5)	
6	Steckerkranz	0.710.1922	Connector rim	1)
7	Ventilplatte S	0.710.0601	Valve board S	s. Seite/page 60
	Ventilplatte S	1.001.5870	Valve board S	ab/from 7/2004
				s. Seite/page 62
8	Zugfeder	0.201.7166	Tension spring	
9	Schwenkkörper	0.710.7652	Swivel housing	
10	Lager für Schwenkkörper	0.710.7662	Bearing for swivel part	
11	Steuerung Tastatur	0.226.7041	Key pad control PCB	
12	Mikroschalter	0.223.2406	Microswitch	1)
	Schalteraufnahme (zu Pos. 12)	0.764.6403	Switch holder (for item 12)	
13	Griffaufnahme, montiert	0.710.3481	Holder assembly	
14	Griff, montiert	0.740.4571	Gripping sleeve assembly	
15	Filtergehäuse	0.710.2252	Filter housing	
	Ronde 33	0.200.3098	Disk 33	1)
	Ölbehälter	0.710.2262	Oil reservoir	
16	Schlauch	0.065.5789	Hose	Meterware/by the meter 4 x 1,5
17	Gehäuseoberteil	0.710.7622	Top part of housing	
18	Schwinge	0.710.6502	Swing arm	
19	Schlauchabdeckung	0.710.6512	Cover	f. MF/3F/PIEZOlux
20	Schlauchabdeckung	0.710.6552	Cover	zu KL Motorschlauch for KL motorhose
21	Klammer	0.710.7682	Clamp	
22	Einleger ZEG	0.710.6522	Insert scaler	zusätzlich zu/add. to Pos. 19
23	Ronde 33	0.200.3098	Disk 33	
24	Blindabdeckung	0.710.2302	Blank cover	statt/instead of Pos. 18
25	Brücke X 25	0.710.5651	Bridge	
26	Halter ZEG Elektronik	0.710.7602	Support	
27	Flachkopfschraube M6x3	0.250.2090	Screw	
	Gleitlager	1.002.2171	(for item 27)	
28	Achsführung links	0.710.7592	Axis guide left	
29	Achsführung rechts	0.710.7582	Axis guide right	
	Spritzschutz	0.710.7792	Splash protection	
	Schwenkkörper	0.710.7652	Swivel housing	
	Rastblech	1.003.4508	Clip	
	Senkschraube M3x8	0.260.9643	Screw	
	Stifthalter montiert	1.003.4509	Screw	
	Scheibe	0.242.4010	Disk	
	Schraube M3x4	0.261.5031	Screw	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 P

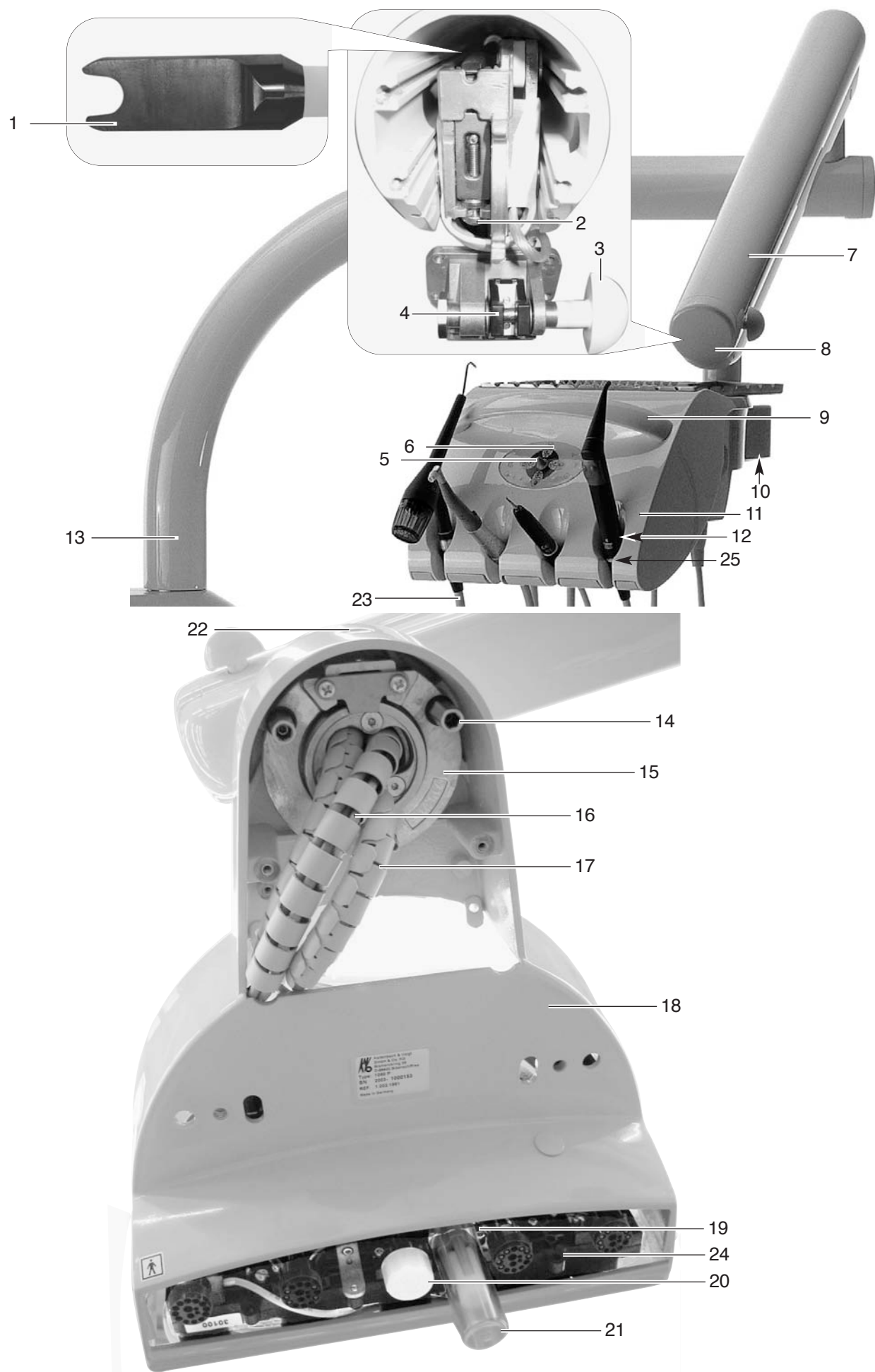




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Gelenkauge	0.724.8502	Joint	
2	Einstellschraube	0.724.7272	Screw	
3	Klemmschraube	0.724.8922	Fixing screw	
4	Bremssegment	0.724.7412	Segment	
5	Kappe	1.001.2174	Cap	1)
6	Bedienfolie P	1.002.1717	Sensor foil P	
7	Federarm komplett	0.724.2851	Spring arm assembly	mit Leitungen+Schläuchen/ incl. cables+hoses
	Federarm 1058/80 Ersatz	1.003.4405	Spring arm	ab/from 7/2004 mit Leitungen+Schläuchen/ incl. cables+hoses
	Gasdruckfeder (zu Pos. 7)	0.220.1520	Pneumatic spring (for item 7)	1000 N (kein/no tray)
	Gasdruckfeder (zu Pos. 7)	0.220.1522	Pneumatic spring (for item 7)	1500 N
	Gasdruckfeder (zu Pos. 7)	0.220.1517	Pneumatic spring (for item 7)	1900 N (mit/with tray)
	Gasdruckfeder (zu Pos. 7)	0.220.1519	Pneumatic spring (for item 7)	2500 N (über/over 20kg)
8	Abdeckung	0.213.4752	Cover	
	Schnäpper (zu Pos. 8)	0.764.3933	Catch (for item 8)	
	Linsenschraube 3x 8 EJOT	0.260.9635	Screw (for item 8)	
	Schlauch (zu Pos. 8)	0.065.6194	Hose (for item 8)	6x2 Meterware/by the meter
9	Griff P	1.002.1511	Handle PA	
10	Abdeckung	0.710.7542	Cover	
	Linsenschraube M 4x 8	0.261.5096	Screw (for item 6)	
11	Gehäuseoberteil PA	1.002.1154	Housing upper part PA	
12	Mikroschalter	0.223.2406	Microswitch	1)
13	Schwenkarm (lang), mont.	0.724.2961	Swivel arm (long) assembly	incl. Lager/bearing
	Schwenkarm (D80) lang, kpl.	1.002.6938	Swivel arm (D80) long assembly	ab/from 7/2004 incl. Lager/bearing
14	Mutter	0.201.5021	Nut	
	Gewindestift M 6x40 (zu Pos. 14)		0.249.5293	Threaded pin (for item 14)
	Kugelscheibe 6,4-C (zu Pos. 14)		0.258.1240	Ball disk (for item 14)
15	Einstellring, montiert	0.710.4131	Ring	
16	Lastleitung Tisch	0.710.3581	Load cable table	
	Leitung USB 3500 GE/WI	1.002.1909	Line USB 3500 GE/WI	
17	Schlauch PE	0.065.5370	Hose PE	(Air 12/35/70) 2 x 0,63 Meterware/by the meter
	Schlauch PE	0.065.5371	Hose PE	(Water 44/Air 20) 2,5 x 0,73 Meterware/by the meter
	Schlauch	0.065.5372	Hose	(36) 4 x 1,0 Meterware/ by the meter
18	Gehäuseunterteil	1.002.1132	Housing lower part	
19	Schlauch	0.065.5789	Hose	Meterware/by the meter 4 x 1,5
20	Abdeckkappe	0.213.4372	Cap	
	Dichtung (zu Pos. 20)	0.710.1932	Seal (for item 20)	
21	Ölbehälter	0.210.5132	Oil reservoir	
	Filter	0.220.7926	Filter	1)
	Halter	0.210.5142	Holder	
22	Abdeckung	0.710.6952	Cover	
	Gewindestift M 4x12 (zu Pos. 22)		0.249.5216	Pin (for item 22)
	Bremssegment (zu Pos. 22)	0.214.0338	Segment (for item 22)	
23	Luftinstrumentenschlauch	1.002.7075	Tubing for air driv. instr.	1250 mm
24	Ventilplatte, komplett	1.001.5869	Valve board assembly	ab/from 7/2004 s.Seite/page 62
25	Blindabdeckung	1.002.8111	Bind Cover	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 P



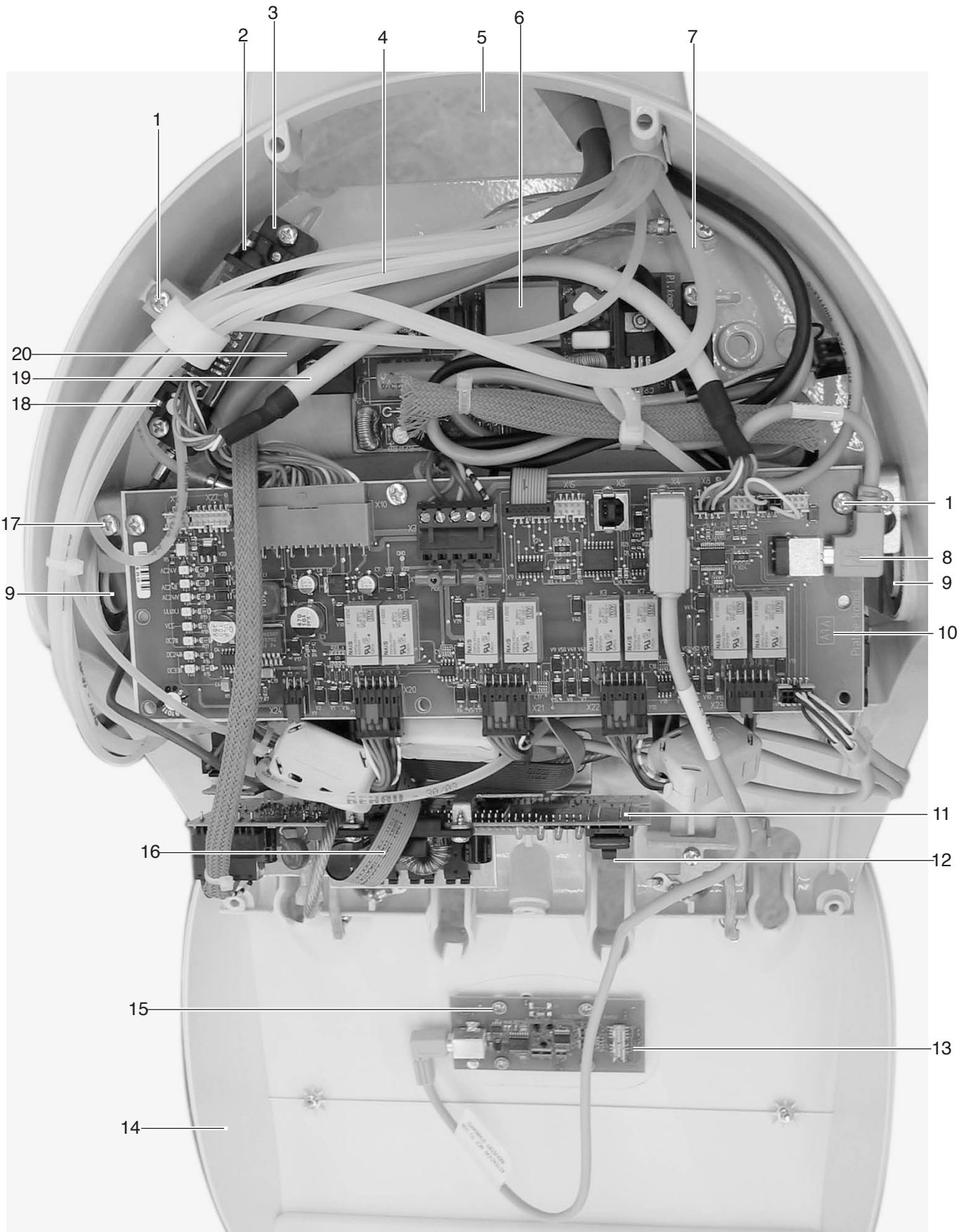




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Linsenschraube M 4x 8	0.261.5096	Screw	
2	Erhitzer, komplett	0.728.3691	Heater assembly	s. Seite/page 92
	Strg. Erhitzer 1080 (zu Pos. 2)	0.226.7044	Control plate (for item 2)	
3	Verschlußplatte	0.728.4022	Cover plate	
4	Schlauch PE	0.065.5370	Hose PE	(Air 12/26/35/70) 2 x 0,63 Meterware/by the meter
	Schlauch PE	0.065.5371	Hose PE	(Water 44/Air 20) 2,5 x 0,73 Meterware/by the meter
5	Gehäuseunterteil	1.002.1132	Housing lower part	
6	PIEZO-ZEG Elektronik	0.710.4241	Scaler electronic plate	Rep.AT.Nr/exch.no0.999.0338
7	Schlauch	0.065.5372	Hose	4 x 1,0 Meterware/ by the meter
8	Leitung USB 3500 GE/WI	1.002.1909	Line USB 3500 GE/WI	
9	Blindabdeckung	0.710.6422	Cover	
10	Steuerung Arzt	0.226.7040	Dentist's PCB	
11	Motorelektronik KL	0.696.0161	Motorelectronic KL	s. Seite/page 102
	Motorelektronik KL	1.003.8985	Motorelectronic KL	ab/from 12/05
	PCBA KL-4 Steuerung	1.006.1037	PCBA KL-4	ab/from 03/09
12	Schalteraufnahme	0.764.7033	Switch holder	
	Mikroschalter (zu Pos. 12)	0.223.2406	Microswitch (for item 12)	1)
13	Steuerung Tastatur 1058 P	1.002.1373	Keyboard control 1058 P	
14	Gehäuseoberteil PA	1.002.1154	Housing upper part PA	
15	Halbrundschrabe 4x 8 EJOT	0.260.9652	Screw	
16	Bandleitung	0.223.4178	Cable line	
17	Linsenschraube M 4X10	0.261.5097	Screw	
18	Eingangsplatte	0.728.4012	Plate	
	Dichtung (zu Pos. 15)	0.728.4002	Seal (for item 15)	
19	Leitung Erhitzer	0.728.4361	Line heater	
20	Lastleitung Tisch	0.710.3581	Load cable table	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 G

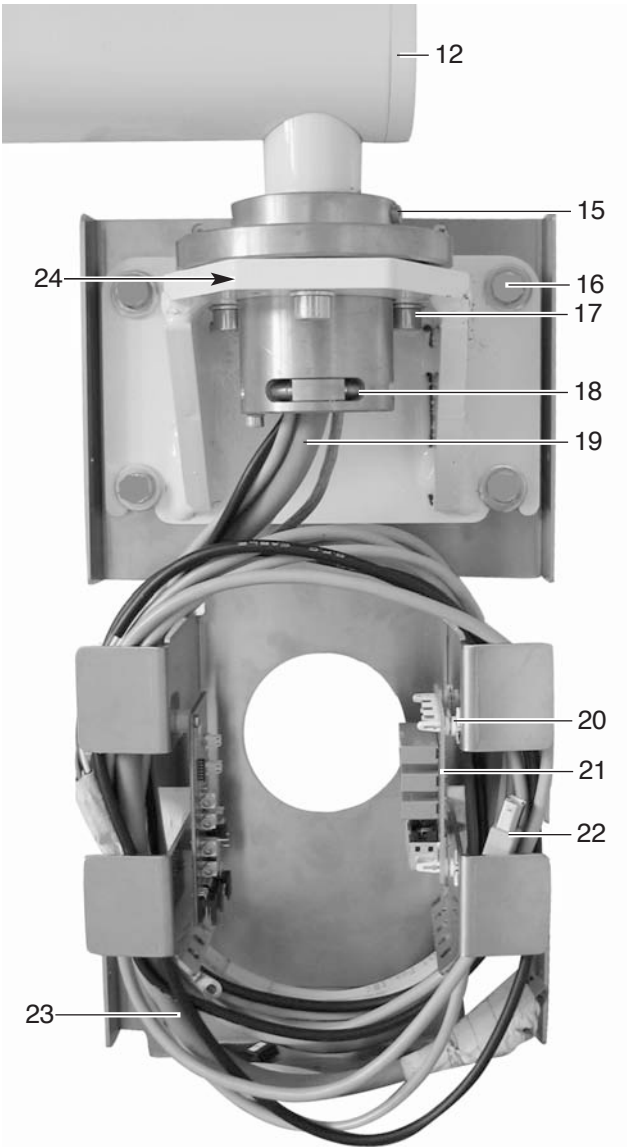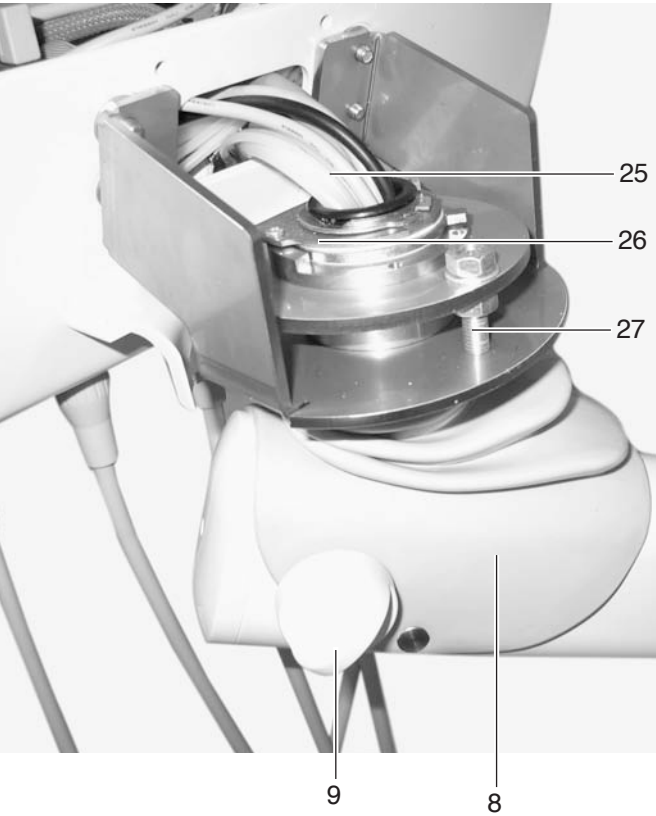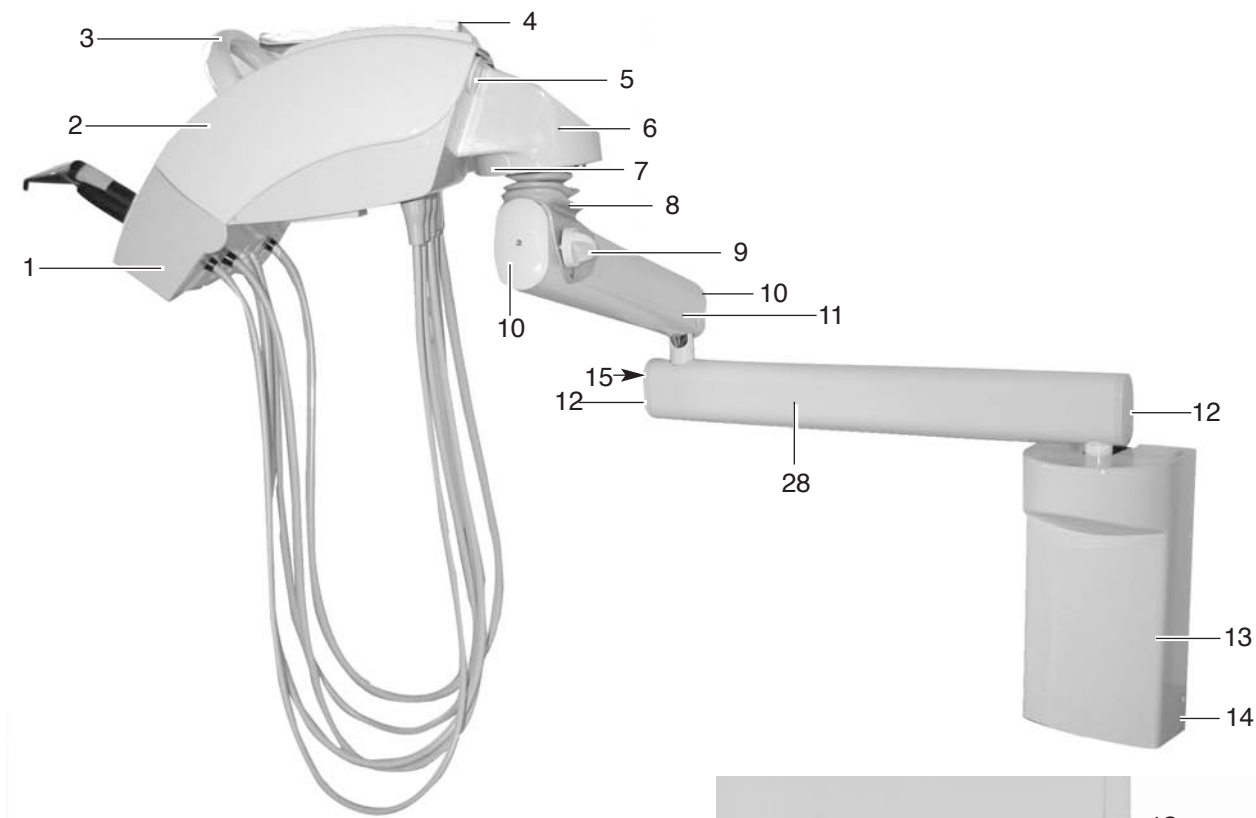




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Instrumententräger	0.710.7942	Instrument carrier	
2	Gehäuseoberteil	0.710.7892	Top part of housing	
3	Griff	0.710.7922	Handle	
4	Ablagekissen	0.710.8162	Hygienic repository	
5	Abdeckung	0.725.4481	Cover	
6	Abdeckung groß	1.000.1105	Cover big	
7	Abdeckung klein	1.000.1104	Cover small	
8	Faltenbalg	0.724.7062	Bellows	zwischen Federarm u. Tisch between spring arm and table
	Scheibe 35,5	0.200.2244	Washer	
	Sicherungsring 35x1,5	0.245.5038	Safety ring	
9	Klemmschraube, montiert	0.724.3381	Clamping screw assembly	
10	Abdeckung	0.213.4612	Cover	
11	Federarm 1060/62 G	0.724.3421	Spring arm 60/62 G	
12	Abdeckung	0.213.4622	Cover	
	Zylinderschraube M3x6	0.249.4157	Round screw	zu Pos./for item 12
13	Abdeckhaube 58 G	1.002.6419	Cover 58 G	
14	Senkschraube M 4x 8	0.251.4545	Counter sink screw	
15	Bremse M	0.214.0080	Brake	
16	Sechskantholzschraube 10X80	0.247.2163	Screw	
	Scheibe 10,5	0.242.4022	Washer	
	Dübel 12	0.220.7012	Sleeve	
17	Zylinderschraube M 8x20	0.249.4212	Screw	
18	Gewindestift AM 6x20	0.249.6244	Threaded pin	
19	Lastleitung Tisch 3000L	0.710.3581	Cable table	
20	Abstandshalter	0.224.6435	Spacer	
21	Verteilerplatine Versorgung/Can/I2C	1.001.8896	Electronical panel	
22	Leitung USB	0.223.4218	Cable USB	
23	Versorgungsleitung			
	Unterputz 1058 G	1.002.5835	Feed line	
	Kupplungsstecker, montiert	0.210.2101	Coupling plug, assembled	
	Kupplungsplatte, montiert	0.210.2091	Coupling plate, assembled	
	Dichtungsscheibe	0.224.2499	Sealing washer	
24	Gewindestift M 6x 6	0.249.5019	Threaded pin	
25	Schlauch	0.065.5370	Hose	(12/26/35) 2 x 0,63 Meterware/by the meter
	Schlauch	0.065.5372	Hose	(36) 4 x 1 Meterware/by the meter
	Schlauch	0.065.5371	Hose	(20/44) 2,5 x 0,73 Meterware/by the meter
26	Bremsplatte	0.710.2242	Brake plate	
	Linsenschraube M 3x 8	0.261.5034	Oval head screw	
	Sicherungsring 35x1,5	0.245.5038	Safety ring	
27	Zylinderschraube M 8X40	0.249.4217	Cheese head screw	
	Druckfeder	0.201.8289	Pressure spring	
	Tellerfeder A16	0.253.6009	Spring A16	
	Sechskantmutter M 8	0.251.1018	Hexagonal nut	
28	Armsystem SY 1060/62G	0.724.3351	Swivel arm 60/62 G	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



KaVo 1058 C

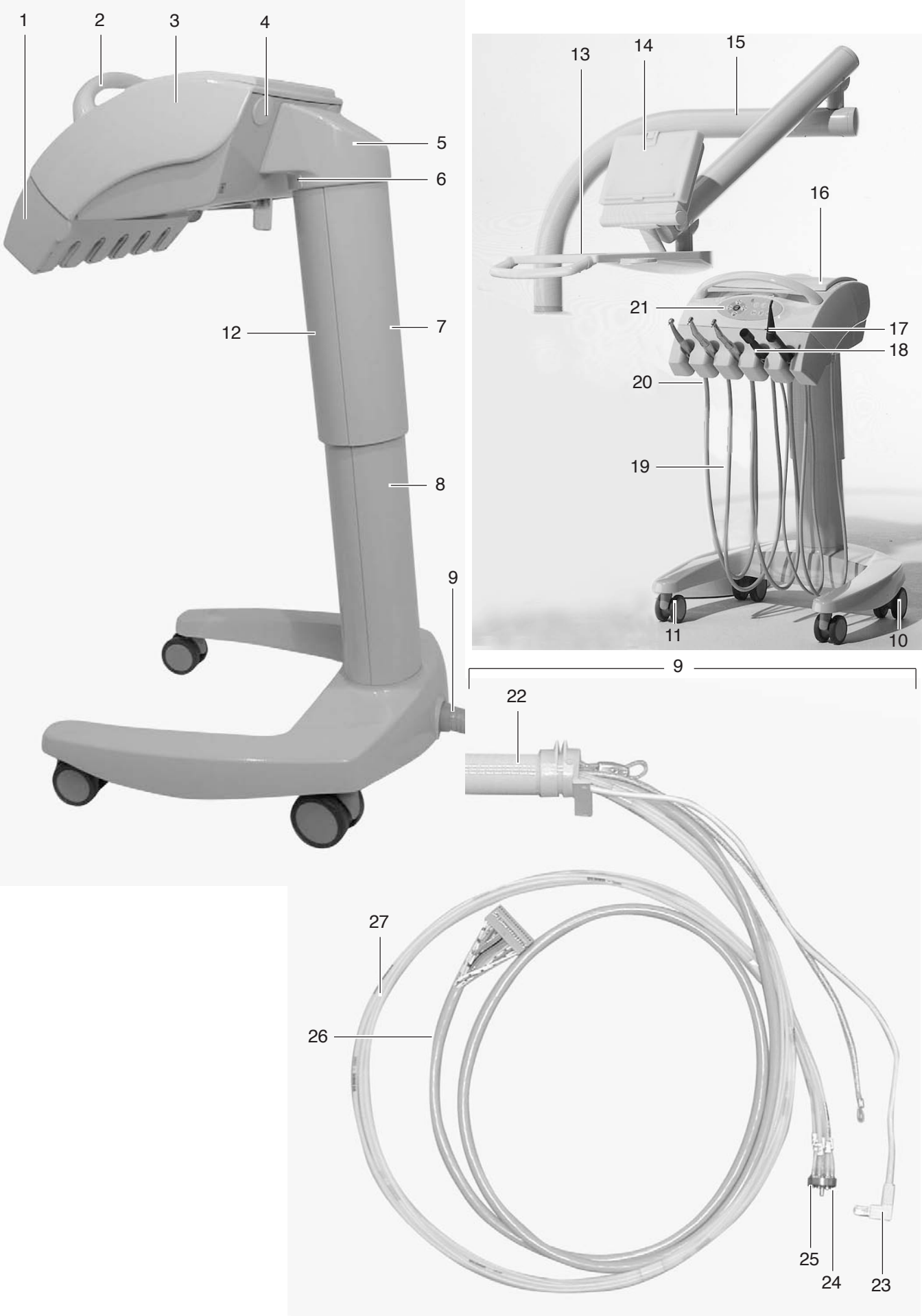



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Instrumententräger	0.710.7942	Instrument carrier	
2	Griff	0.710.7922	Handle	
3	Gehäuseoberteil	0.710.7892	Top part of housing	
4	Abdeckung	0.725.4481	Cover	
5	Abdeckung groß	1.000.1105	Cover big	
6	Abdeckung klein	1.000.1104	Cover small	
7	Abdeckung oben	1.000.1103	Cover top	
8	Abdeckung lang	1.000.1100	Cover long	
9	Schlauchstrang, montiert	1.000.3171	Umbilical cable assembly	s. Pos. 22-27
10	Rolle groß	1.000.1057	Coaster, big	
11	Rolle klein	1.000.1056	Coaster, small	
12	Abdeckung unten	1.000.1101	Cover below	
13	BS Servicetisch 1568	1.000.2156	Servicetable 1568 kit	s. Seite/page 108
14	Röntgenbildbetrachter 1440	0.740.1450	X-ray viewer 1440 kit	s. ETB/spare part sheet 0.789.5089
15	Schwenkarm 1568	1.000.3432	Swivel arm 1568	
16	Ablagekissen	0.710.8162	Hygienic repository	
17	3-F Handstück	0.773.0500	3-F handpiece	
	4 F Handstückschlauch	0.516.8140	4 F handpiece hose	1250 mm
	4 F Handstückschlauch	0.516.8090	4 F handpiece hose	1400 mm
18	BS PIEZOlux	1.000.2107	Kit PIEZOlux	s. Seite/page 92
19	KL-Motorschlauch	0.516.5810	KL motorhose	1250 mm (KL 701)
	KL-Motorschlauch	0.516.5900	KL motorhose	1400 mm (KL 701)
	INTRA K Motorschlauch	1.000.5652	K-LUX motorhose	1250 mm
	COMFORTbase 405 L	1.006.1211	COMFORTbase 405 L	1250 mm
20	Luftinstrumentenschlauch	0.516.5310	Air instrument hose	1250 mm
	Luftinstrumentenschlauch	0.516.5350	Air instrument hose	1400 mm
21	Bedienteil	0.710.7502	Control element	
22	Schlauch	0.211.6332	Hose	2,3 m
23	USB Leitung	1.000.2282	Cable USB	
24	Dichtungsscheibe	0.224.2499	Sealing washer	
25	Kupplungsstecker	0.210.2101	Coupler plug	
26	Lastleitung	1.000.2283	Load cable	
27	Schlauch	0.065.5370	Hose	(12/26/35/70) 2 x 0,63 Meterware/by the meter
	Schlauch (zu Pos. 27)	0.065.5372	Hose (for item 27)	(36) 4 x 1 Meterware/by the meter
	Schlauch (zu Pos. 27)	0.065.5371	Hose (for item 27)	(20/44) 2,5 x 0,73 Meterware/by the meter




1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

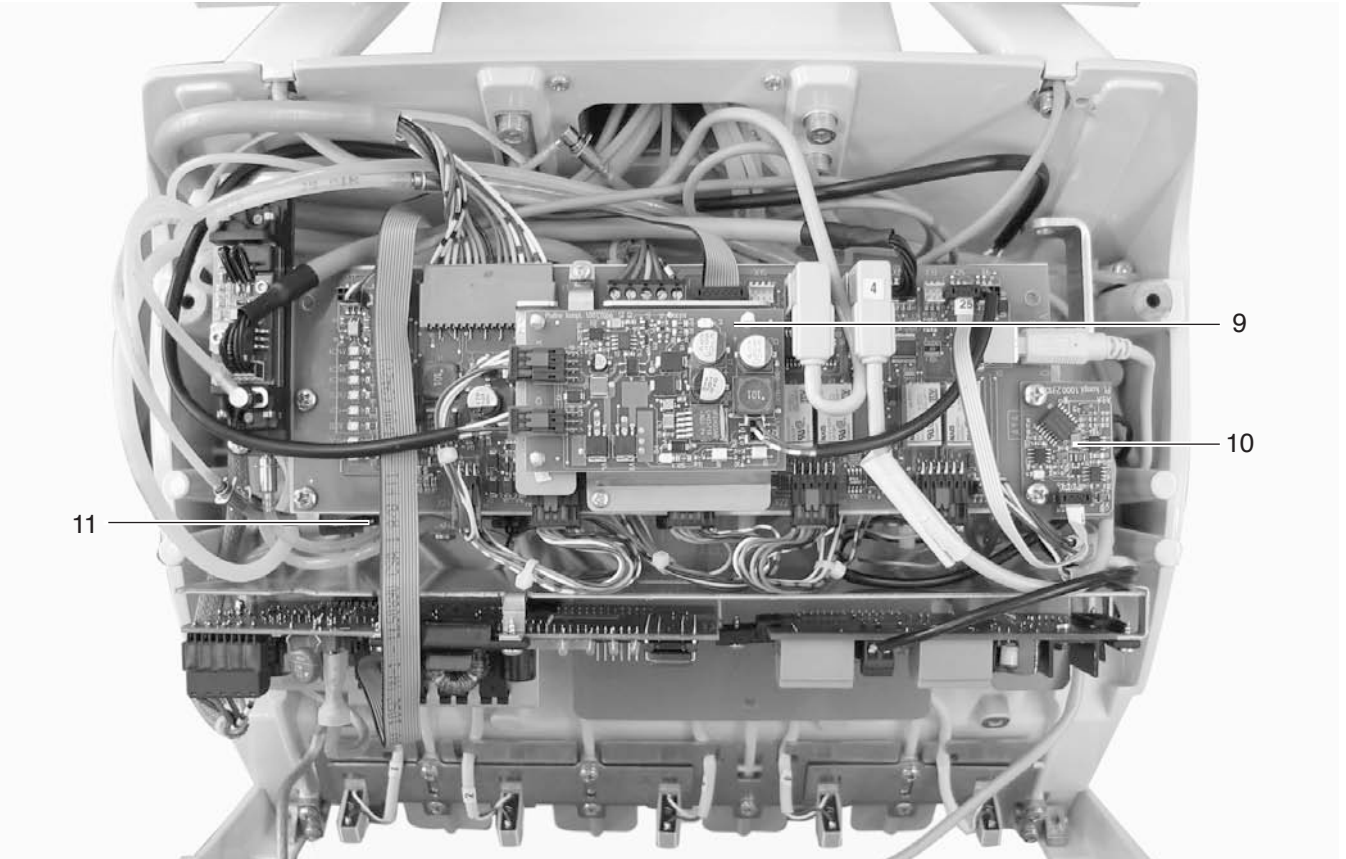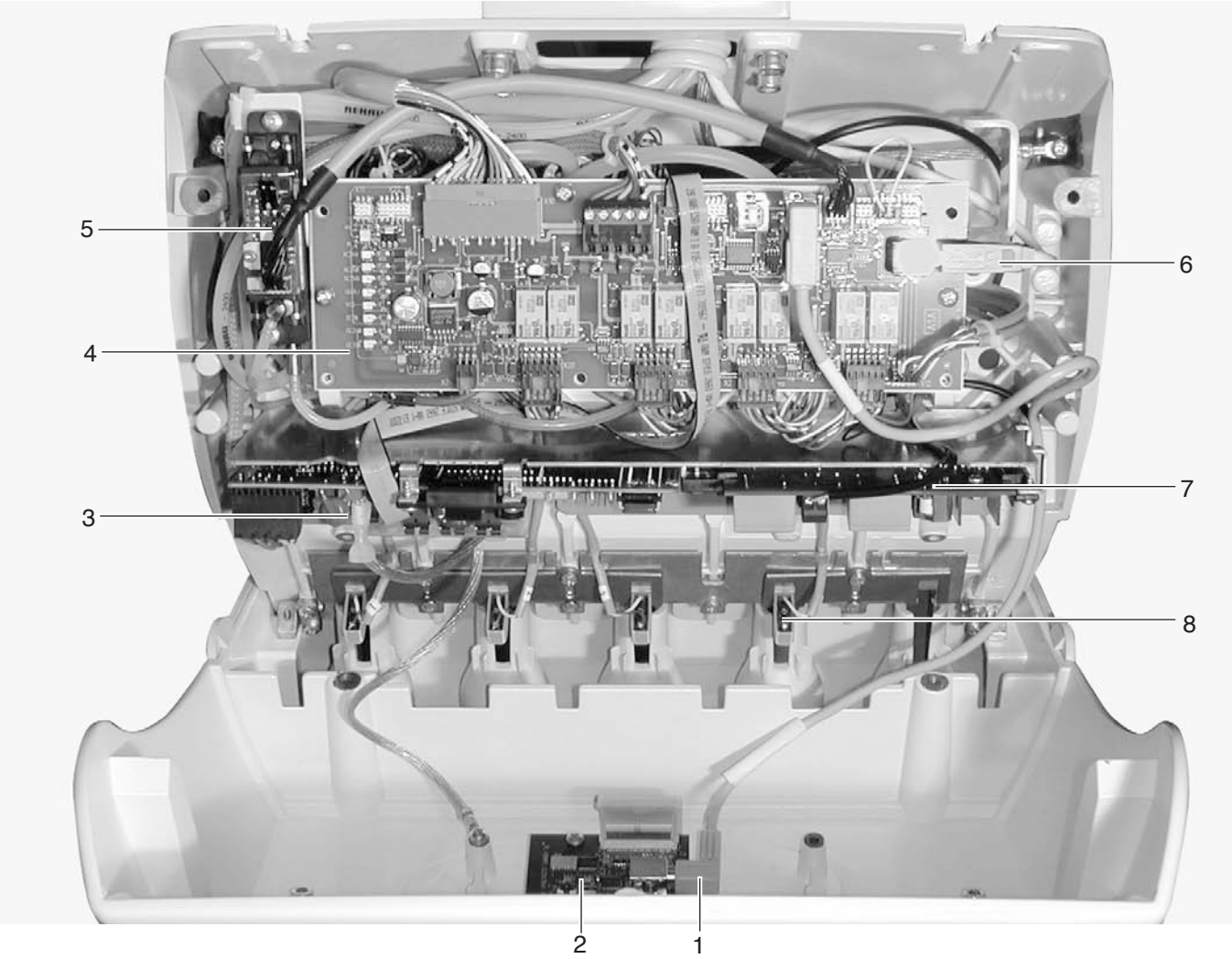



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	USB Leitung	0.223.4210	Cable USB	
2	Steuerung Tastatur	0.226.7041	Keyboard PCB	
3	Motorelektronik KL	0.696.0161	Motorelectronic KL	s. Seite/page 102
	Motorelektronik KL	1.003.8985	Motorelectronic KL	ab/from 12/05
	PCBA KL-4 Steuerung	1.006.1037	PCBA KL-4	ab/from 03/09
4	Steuerung Arzt	0.226.7040	Dentist's PCB	
5	BS Sprayerwärmung Instr.	0.728.3131	Heating for instr. kit	s. Seite/page 92
6	USB Leitung	1.000.2282	Cable USB	
7	PIEZO-ZEG Elektronik	0.710.4241	Scaler electronic plate	s. Seite/page 92
8	Mikroschalter	0.223.2406	Microswitch	1)
	Schalteraufnahme (zu Pos. 8)	0.764.6403	Switch holder (for item 8)	
9	MFH-Steuermodul	1.001.7066	MFH-module	
10	Lagesensor Cart	1.000.2310	Sensor	
11	Ventilplatte, komplett	1.001.5869	Valve board assembly	ab/from 7/2004 s.Seite/page 62

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

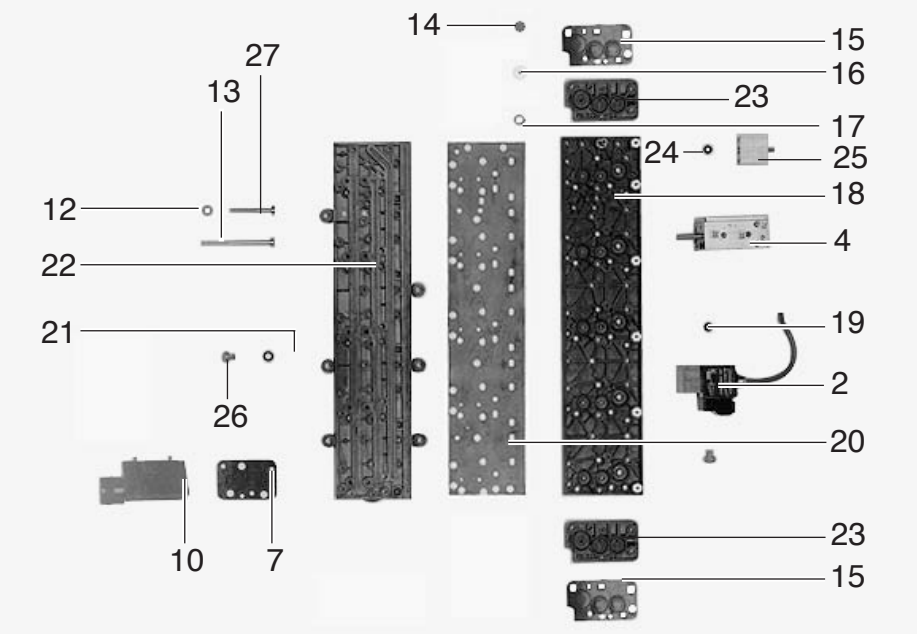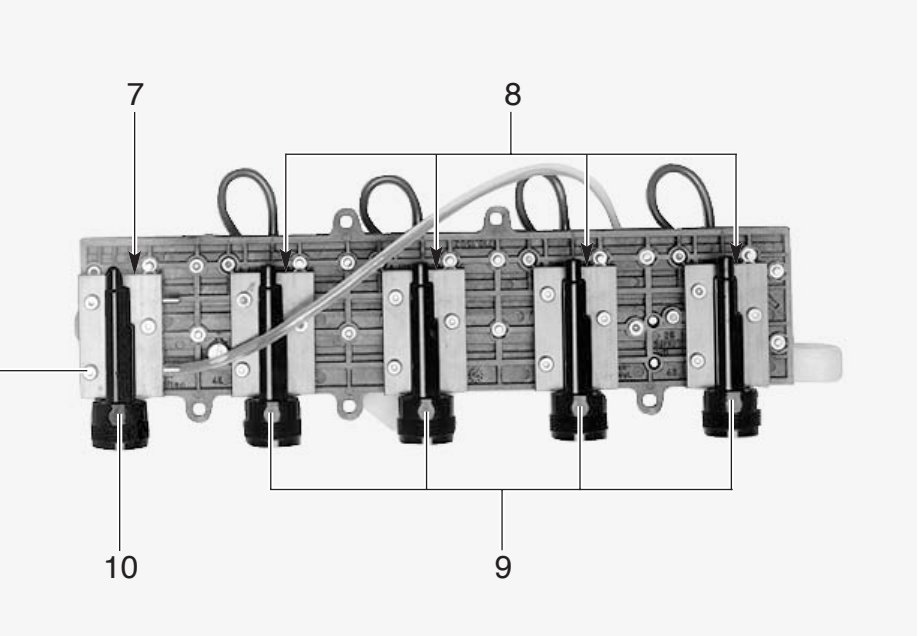
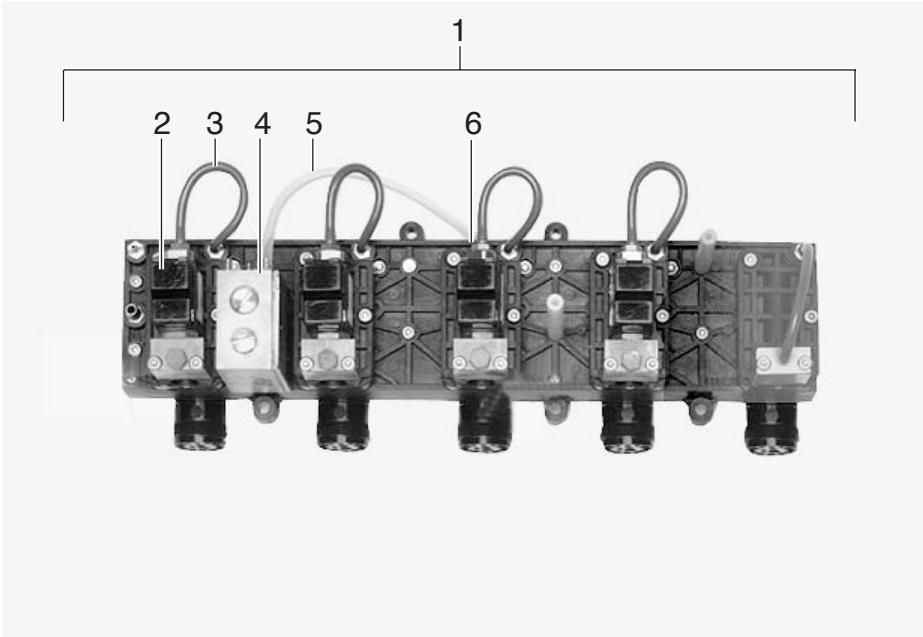




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Ventilplatte, komplett	0.710.0621	Valve board assembly	TM-/C-/G-/P-Version bis/until 7/2004 Rep.AT.Nr./exch.no.0.999.0428 TM-/C-/G-/P-Version ab/from 7/2004 s.Seite/page 62 S-Version bis/until 7/2004 Rep.AT.Nr./exch.no.0.999.0427 S-Version ab/from 7/2004 s.Seite/page 62
	Ventilplatte, komplett	1.001.5869	Valve board assembly	
	Ventilplatte, komplett	0.710.0601	Valve board assembly	
	Ventilplatte S	1.001.5870	Valve board S	
2	Mikro-Magnetventil	0.221.6128	Micro solenoid valve	4 Stück montiert/ 4 pieces assembled Meterware; 1,7 x 0,9 by the meter
3	Schlauch blau	0.065.5310	Hose blue	
4	Steuerventil	0.210.0670	Control valve	
	O-Ring zu Pos. 4	0.200.6036	O-ring (for item 4)	s. Seite/page 64 3,1 x 1,6
	Schrauben 2x	0.249.4159	Screws, 2 pieces	
5	Schlauch	0.065.5785	Hose	Meterware, 4 x 2,5 by the meter
6	Stecknippel	0.203.4037	Plug-in fitting	
	Dichtungsscheibe (zu Pos. 6)	0.222.5111	Sealing washer (for item 6)	1)
7	Dichtung (zu Pos. 10)	0.710.1582	Seal (for item 10)	
8	Dichtung (zu Pos. 9)	0.710.1562	Seal (for item 9)	
9	Verteilerblock	0.710.1542	Distributor block	
10	Verteilerblock für 3-Funktionshandstück	0.710.0611	Distributor block for 3-function handpiece	M3 x 30
11	Zylinderschraube	0.249.4162	Screw	
12	Sechskantmutter	0.251.1010	Hexagonal nut	
13	Zylinderschraube	0.249.4156	Screw	M3 x 50
14	Scheibe	0.200.3114	Disk	1)
15	Dichtung	0.710.1572	Gasket	1)
16	Ventilteller	0.715.4382	Valve disk	1)
17	Druckfeder	0.201.8051	Pressure spring	1)
18	Ventilplatte	0.710.0631	Valve board	1) 3,1 x 1,6
19	O-Ring	0.200.6036	O-ring	
20	Dichtung	0.710.1552	Seal	4 x 1,5
21	O-Ring	0.200.6034	O-ring	
22	Verteilerplatte	0.710.1502	Distributor board	
23	Anschlussplatte 2	1.003.2333	Connecting base 2	
24	O-Ring	0.200.6036	O-ring	
25	Blindanschluss	0.710.1532	Bind connector	
26	Entlüftungsschraube	0.210.5112	Screw	
27	Schraube M3x30	0.249.4162	Screw	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.


KaVo 1058

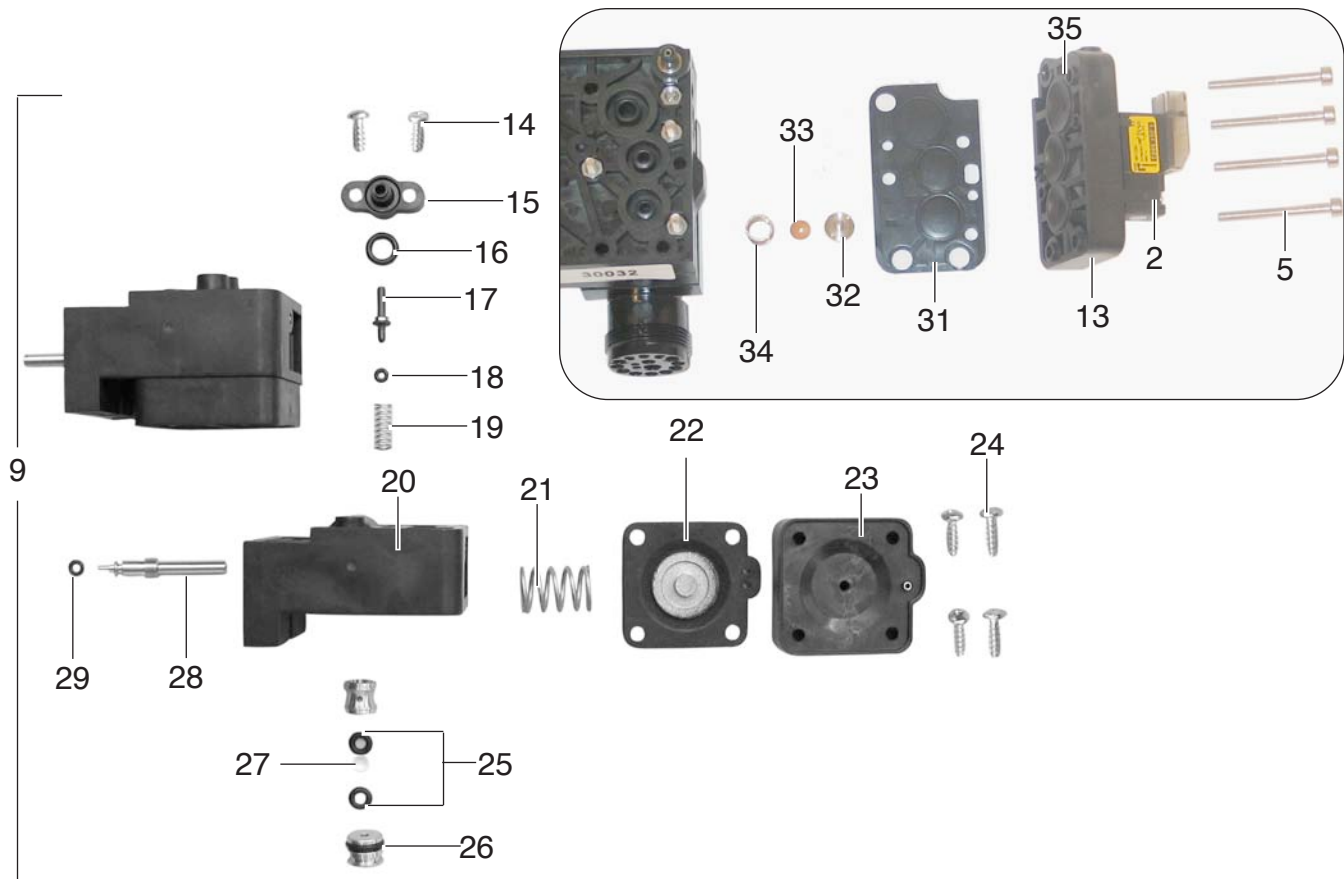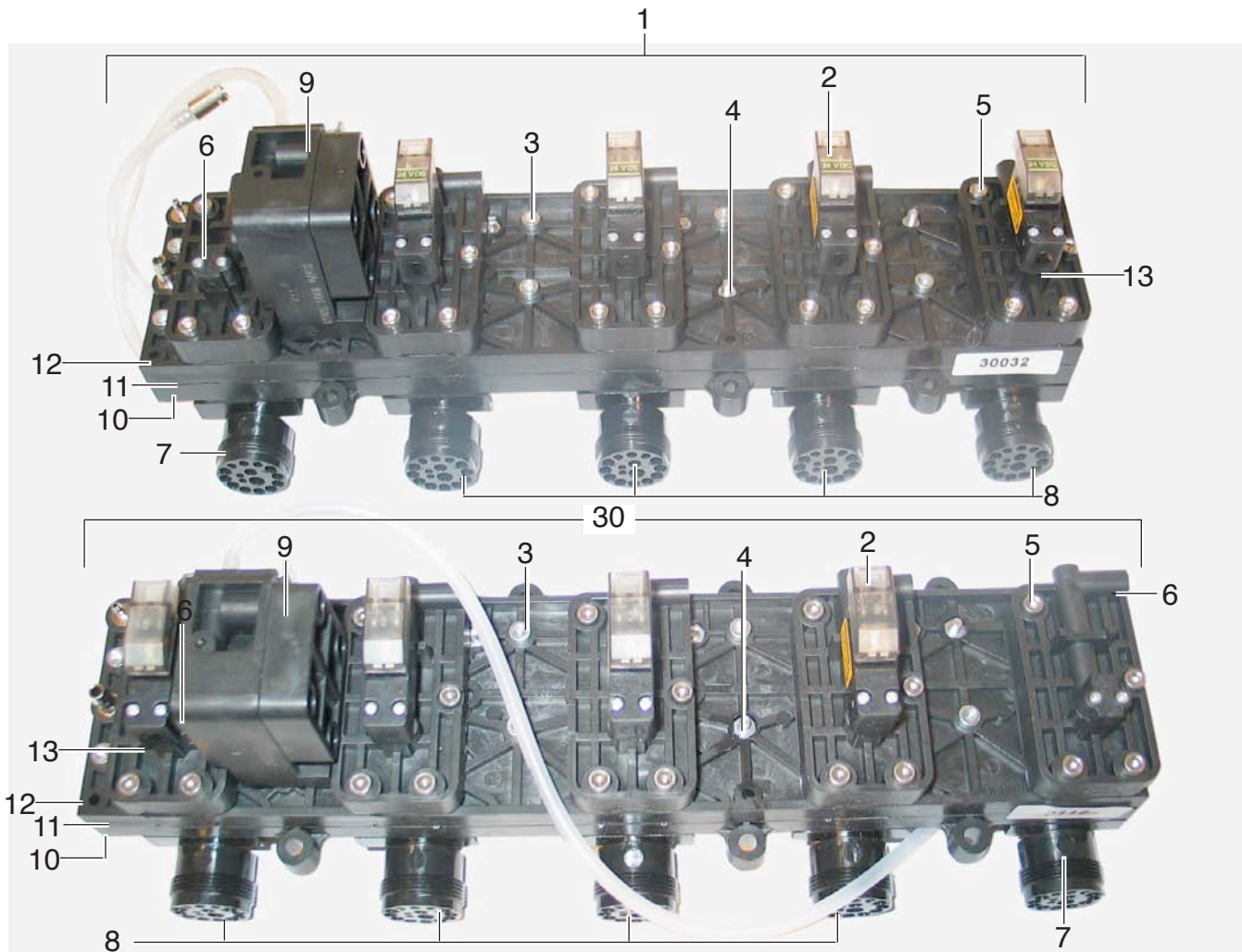



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Ventilplatte S	1.001.5870	Valve board S	S-Version ab/from 7/2004
2	Magnetventil	1.001.5862	Solenoid valve	
3	Zylinderschraube	0.249.4150	Screw	M3 x 18
4	Zylinderschraube	0.249.4159	Screw	M3
	Sechskantmutter	0.251.1010	Hexagonal nut	M3
5	Zylinderschraube	0.249.4162	Screw	M3 x 30
6	Luftbrücke	1.001.6623	Air duct	
7	Verteilerblock für 3-Funktionshandstück	0.710.0611	Distributor block for 3-function handpiece	
	Dichtung (zu Pos. 7)	0.710.1582	Seal (for item 7)	1)
8	Verteilerblock	0.710.1542	Distributor block	
	Dichtung (zu Pos. 8)	0.710.1562	Seal (for item 8)	
9	Steuerventil montiert	1.001.5868	Control valve ass.	
	O-Ring (zu Pos. 9)	0.200.6036	O-ring (for item 9)	1) 3,1 x 1,6
10	Verteilerplatte	0.710.1502	Distributor board	
11	Dichtung	0.710.1552	Seal	
12	Ventilplatte	0.710.0631	Valve board	
13	Anschlussplatte III	1.001.5863	Connecting plate III	
14	Linsenschraube 3x 8 EJOT	0.260.9635	Screw	
15	Ventildeckel	0.728.3952	Valve cover	
16	O-Ring 5 X1,5	0.200.6138	O-ring	5 X1,5
17	Stößel	0.210.2402	Plunger	1)
18	O-Ring	0.200.6071	O-ring	1) 1,5 x 1
19	Druckfeder	0.201.7035	Pressure spring	1)
20	Ventilgehäuse	1.001.5861	Valve housing	
21	Druckfeder	0.201.8261	Pressure spring	
22	Dichtplatte	0.728.3792	Plate	
23	Ventildeckel	1.001.5867	Valve cover	
24	Halbrundschrabe 3x10 EJOT	0.260.9637	Screw	
25	O-Ring	0.200.6008	O-ring	2,7 x 1,5
26	O-Ring 6 X1,5	0.200.6101	O-ring	6 X1,5
27	Kugel	0.210.2132	Ball	
28	Dosiernadel	0.210.5052	Dosing needle	
29	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
30	Ventilplatte, komplett	1.001.5869	Valve board assembly	TM-/C-/G-/P-Version ab/from 7/2004
31	Dichtung	0.710.1572	Seal	1)
32	Ventilteller	0.715.4382	Valve disk	1)
33	Scheibe	0.200.3114	Disk	1)
34	Druckfeder	0.201.8051	Pressure spring	1)
35	Dichtung klein	0.728.4142	Seal	1)

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.


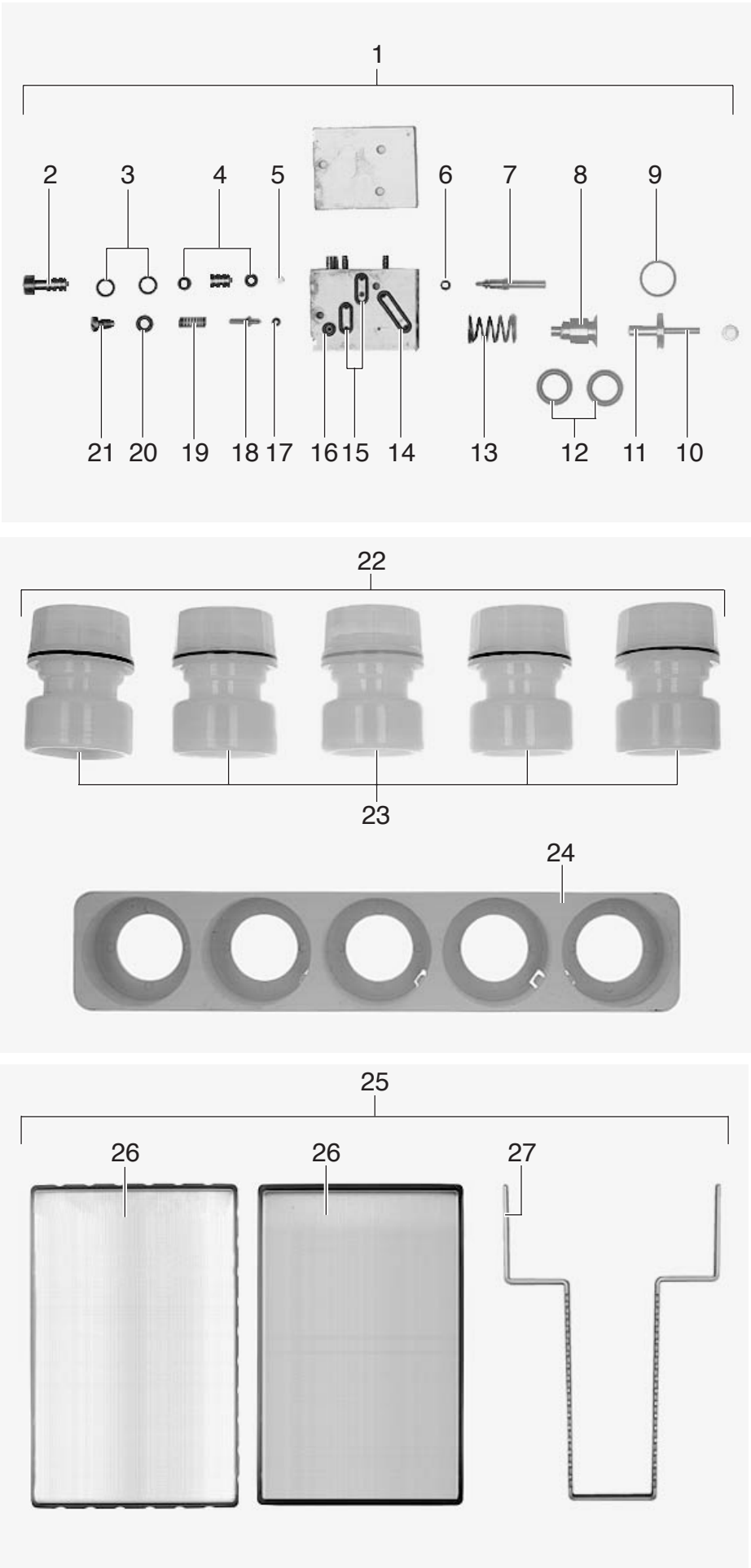




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Steuerventil	0.210.0670	Control valve	Rep.AT.Nr./exch.no.0.999.0423
2	Ventilschraube	0.210.5032	Valve screw	
3	O-Ring	0.200.6115	O-ring	6 x 1
4	O-Ring	0.200.6008	O-ring	2,7 x 1,5
5	Kugel	0.210.2132	Ball	
6	O-Ring	0.200.6016	O-ring	2,2 x 1
7	Dosiernadel	0.210.5052	Dosing needle	
8	Kolben	0.210.5042	Piston	
9	O-Ring	0.200.6224	O-ring	14 x 1
10	Stellschraube	0.210.5072	Setscrew	
	O-Ring (zu Pos. 10)	0.200.6027	O-ring (for item 10)	3 x 1
11	Kolben	0.210.5062	Piston	
12	O-Ring	0.200.6221	O-ring	1) 11 x 2,5
13	Druckfeder	0.201.8198	Pressure spring	
14	O-Ring	0.200.6240	O-ring	12,48 x 1,78
15	O-Ring	0.200.6111	O-ring	8 x 1,5
16	O-Ring	0.200.6072	O-ring	3,1 x 1,6
17	O-Ring	0.200.6071	O-ring	1) 1,5 x 1
18	Stößel	0.210.2402	Plunger	1)
19	Druckfeder	0.201.7035	Pressure spring	1)
20	O-Ring	0.200.6047	O-ring	1) 4 x 1,5
21	Ventilschraube	0.210.1262	Valve screw	
22	Kappengläser mit Halter	0.719.4270	Medicament bottles with holder	
23	1 Satz Kappengläser	0.228.3011	1 set of medicament bottles	
24	Kappengläserhalter	0.719.1332	Bottle holder	
	Haftgummi (zu Pos. 24)	0.220.0449	Adhesive gum (for item 24)	
25	Instrumententablett, standard	0.719.1070	Instrument tray standard	
26	Tablett	0.228.3016	Tray	
27	Instrumentenbank	1.002.7231	Instrument rest	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



KaVo 1058

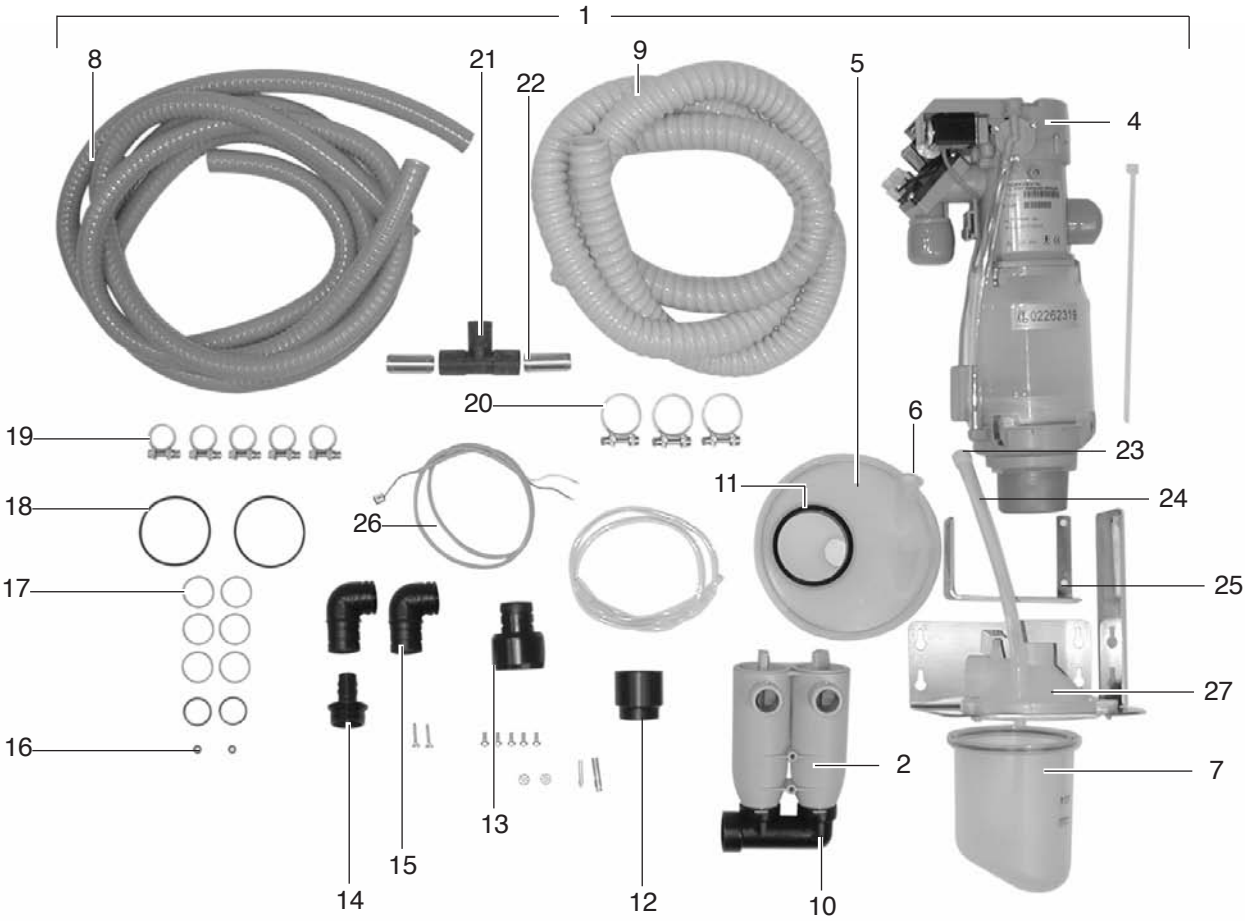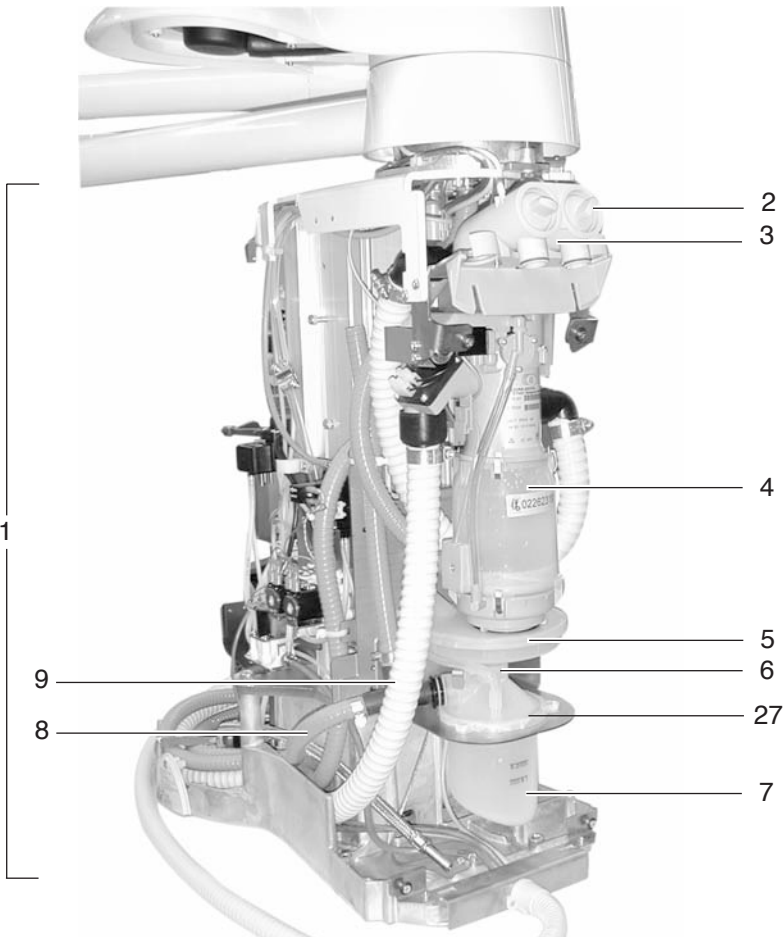



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Separierung Dürr	1.001.5223	Separating device kit Dürr	
2	Kappe	0.763.3203	Cap	1)
	Sieb (zu Pos. 2)	0.763.3423	Strainer (for item 2)	1)
3	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	18 x 2
4	Separierautomatik	0.226.2319	Separating device	
5	Trichterdeckel	0.764.6783	Funnel cover	
	O-Ring (zu Pos. 5)	0.200.6909	O-ring (for item 5)	122 x 2
6	Trichter	0.764.6773	Funnel	
	O-Ring (zu Pos. 6)	0.200.6414	O-ring (for item 6)	21 x 1,5
7	Behälter	0.763.3913	Reservoir	
	O-Ring (zu Pos. 7)	0.200.6811	O-ring (for item 7)	84 x 3
8	Schlauch	1.000.0890	Hose	Lw 14,5 Meterware/ by the meter
9	Schlauch	0.065.7379	Hose	Lw 25 Meterware/ by the meter
10	Siebverbinder	1.001.2277	Connector	
	O-Ring (zu Pos. 10)	0.200.6414	O-ring (for item 10)	21 x 1,5
11	Zwischenring	0.764.6793	Intermediate ring	
	O-Ring (zu Pos. 23)	0.200.6714	O-ring (for item 23)	50 x 2,5
12	Reduzierung	0.763.4013	Reduction	
13	Anschlußstück	0.763.3413	Connector	
14	Anschlußstück	0.211.7052	Connector	
15	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
16	O-Ring	0.200.6074	O-ring	3,5 x 1,5
17	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
18	O-Ring	0.200.6714	O-ring	50 x 2,5
19	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	17 mm
20	Schlauchschelle	0.222.6033	Hose clamp	
21	T-Stück	0.764.6633	Tee	
22	Buchse	0.203.3103	Bush	
23	Stopfen	0.220.7461	Plug	
24	Schlauch	0.065.6194	Tubing	
25	2x Schraube	0.261.5096	Screw	
26	Leitung Dürr Sepa	1.002.0301	Line Dürr Sepa	
27	Deckel	0.764.6463	Cover	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

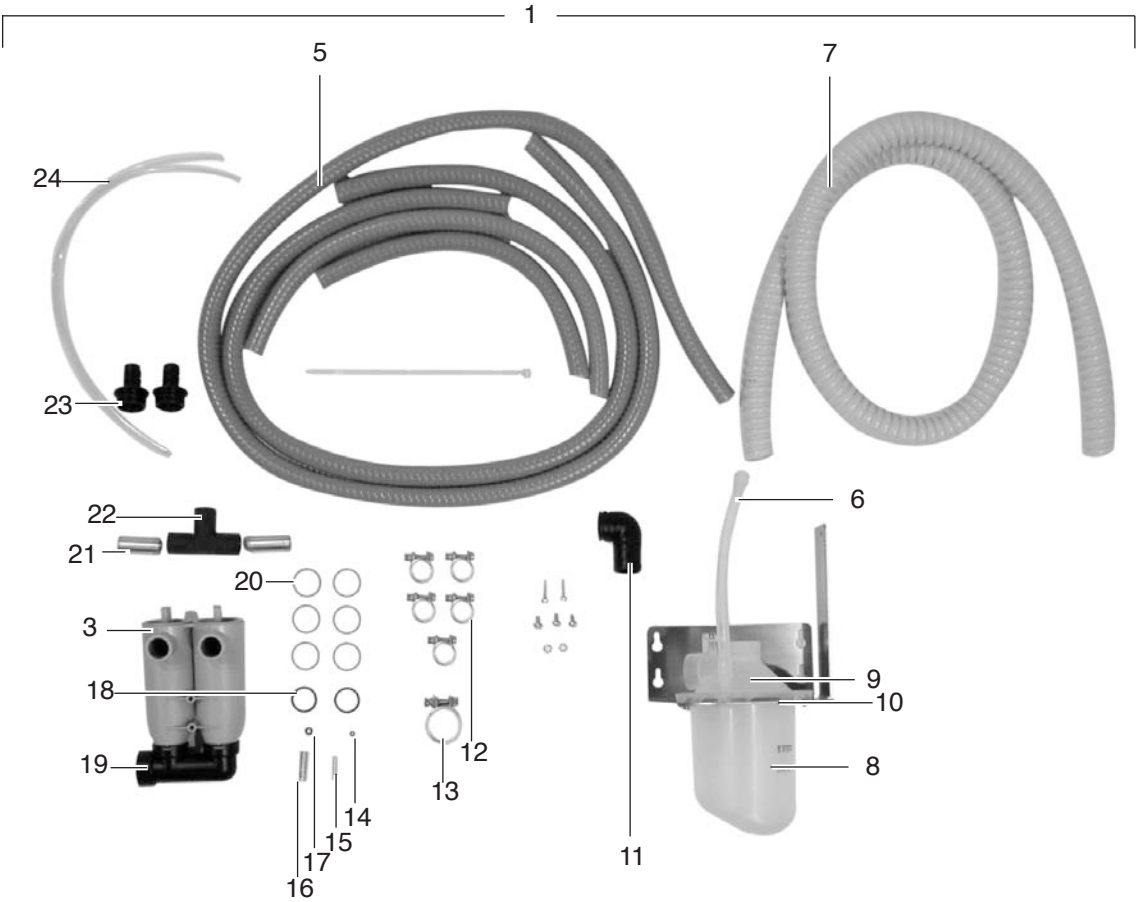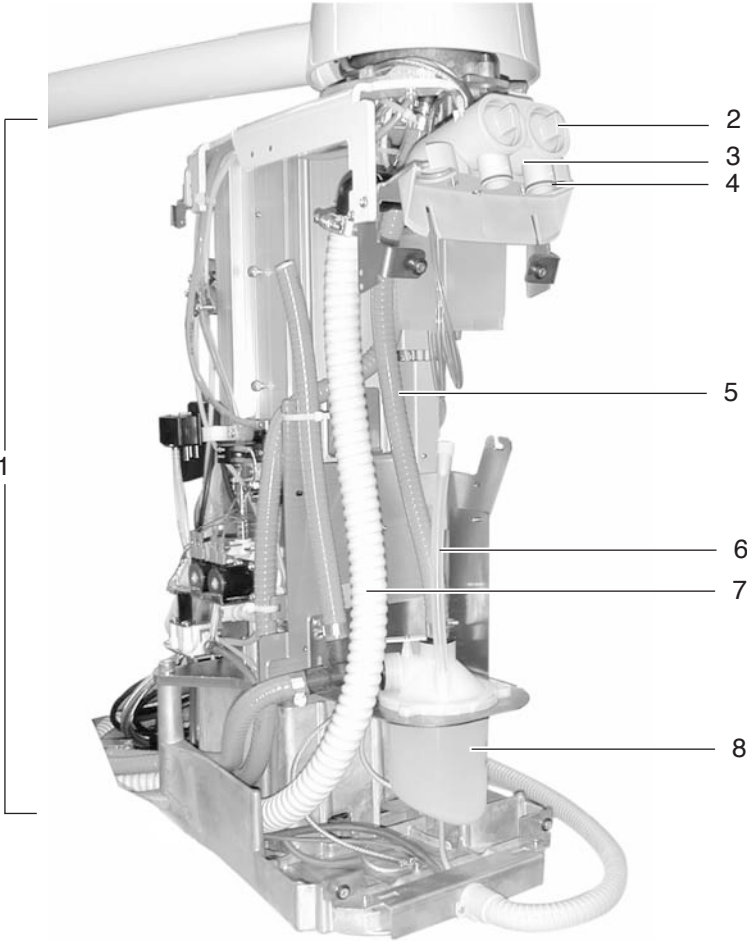



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Festteilesammler	1.001.2405	Solid part collector kit	
2	Kappe	0.763.3203	Cap	1)
	Sieb	0.763.3423	Strainer (for item 5)	1)
3	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	18 x 2
4	O-Ring	2.006.6316	O-ring	21 x 1,5
5	Schlauch	1.000.0890	Hose	Lw 14,5 Meterware/ by the meter
6	Schlauch	0.065.6194	Hose	6x2 Meterware/by the meter
7	Schlauch	0.065.7379	Hose	Lw 25 Meterware/ by the meter
8	Behälter	0.763.3913	Reservoir	
9	Deckel	0.764.6463	Cover	
10	O-Ring	0.200.6811	O-ring	84 x 3
11	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
12	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	17 mm
13	Schlauchschelle	0.222.6033	Hose clamp	
14	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
15	Stecknippel	0.203.4003	Plug-in fitting	
16	Stecknippel	0.203.4004	Plug-in fitting	
17	O-Ring	0.200.6074	O-ring	3,5 x 1,5
18	O-Ring	0.200.6316	O-ring	18 x 2
19	Siebverbinder	1.001.2277	Connector	
20	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
21	Buchse	0.203.3103	Bush	
22	T-Stück	0.764.6633	Tee	
23	Anschlußstück	0.211.7052	Connector	
24	Schlauch	0.065.5599	Hose	3 x 1 Meterware/ by the meter



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

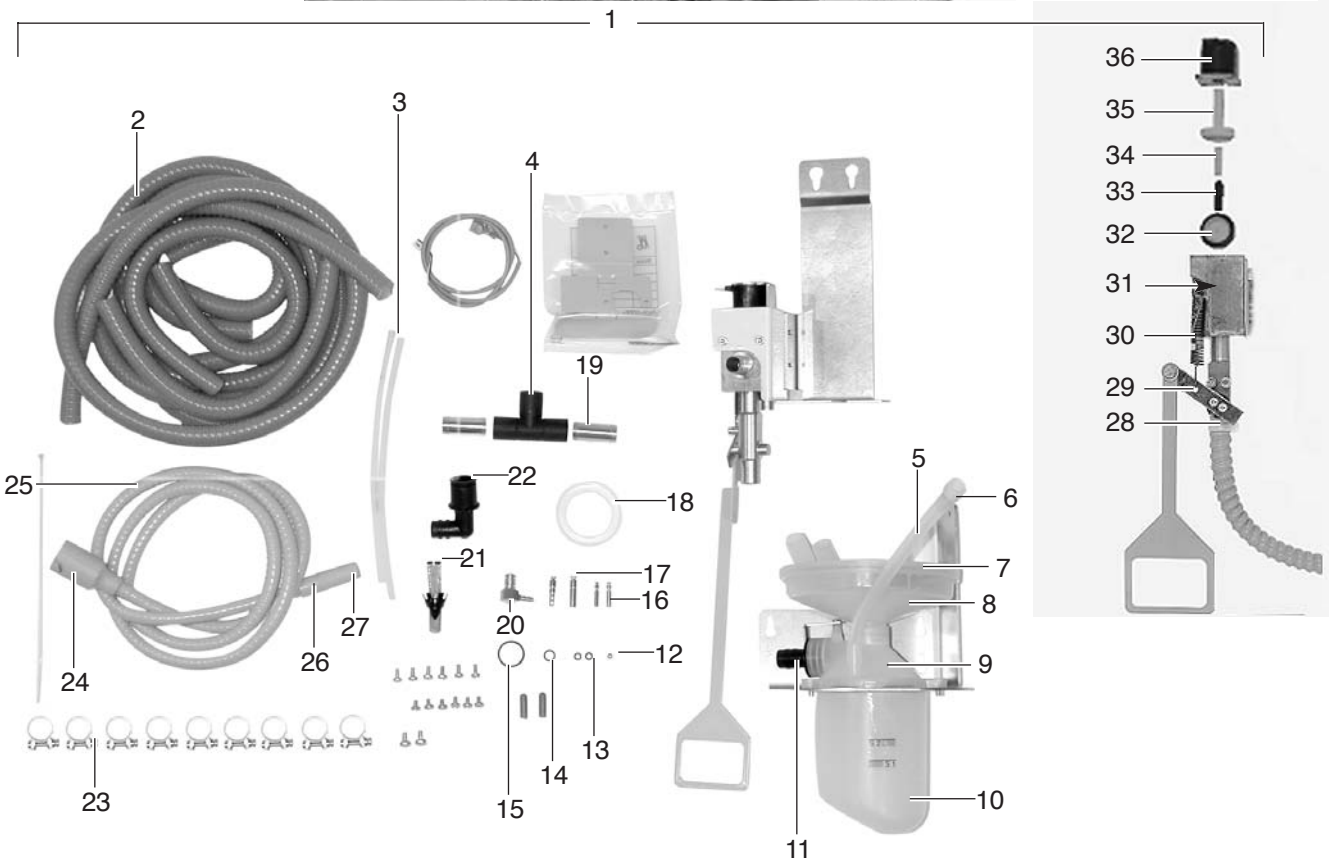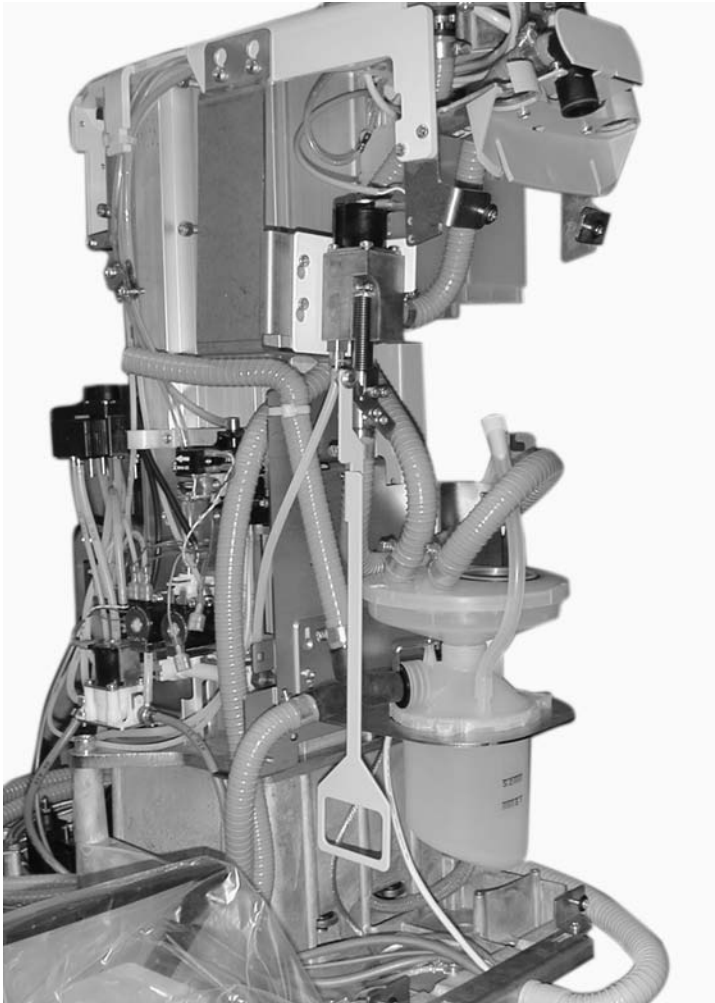



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Speichelzieher	1.001.5192	Saliva ejector kit	wasserbetrieben water-operated
2	Schlauch	1.000.0890	Hose	Meterware, Lw 14,5
3	Schlauch	0.065.5372	Hose	by the meter, ins. width 14,5 4 x 1,0 Meterware/ by the meter
4	T-Stück	0.764.6633	Tee	
5	Schlauch	0.065.6194	Hose	6x2 Meterware/by the meter
6	Stopfen	0.220.7461	Plug	
7	Trichterdeckel	0.764.6783	Funnel cover	
	O-Ring (zu Pos. 7)	0.200.6909	O-ring (for item 7)	122 x 2
8	Trichter	0.764.6773	Funnel	
9	Deckel	0.764.6463	Cover	
10	Behälter	0.763.3913	Reservoir	
	O-Ring (zu Pos. 10)	0.200.6811	O-ring (for item 10)	84 x 3
11	Anschlußstück	0.211.7052	Connector	
	O-Ring (zu Pos. 11)	0.200.6414	O-ring (for item 11)	21 x 1,5
12	O-Ring	0.200.6184	O-ring	1) 2,1 x 1,1
13	O-Ring	0.200.6074	O-ring	1) 3,5 x 1,5
14	O-Ring	0.200.6124	O-ring	6,5 x 1,6
15	O-Ring	0.200.6316	O-ring	18 x 2
16	Stecknippel	0.203.4003	Plug-in fitting	
17	Stecknippel	0.203.4004	Plug-in fitting	
18	Zwischenring	0.764.6793	Intermediate ring	
19	Buchse	0.203.3103	Bush	
20	Steckverbinder	0.211.1641	Connector	
21	Stecksieb	0.210.2922	In-line strainer	1)
22	Winkel	0.764.7383	Angle	
23	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	17 mm
24	Schlauchanschluß	0.764.7373	Tube connection	
25	Speichelzieherschlauch	0.211.1791	Saliva ejector hose	1)
	Schlauch (zu Pos. 25)	0.226.9164	Hose (for item 25)	1,6 m ohne Anschlußteile without connectors
26	Hülse	0.764.5663	Sleeve	
27	Kanülenaufnahme	0.764.5863	receptacle canula	klein / small
28	O-Ring	0.200.6133	O-ring	9 x 1,5
29	Hebel	0.210.5162	Lever	
30	Zugfeder	0.201.7126	Tension spring	
31	Treibdüse	0.210.1781	Nozzle	
32	Membrane, komplett	0.210.1261	Diaphragm assembly	1)
33	Magnetkern, komplett	0.210.1271	Solenoid core assembly	1)
34	Druckfeder	0.201.8059	Pressure spring	1)
35	Plungerführung	0.210.2352	Plunger guide	1)
36	Ventiloberteil, komplett	0.231.1415	Valve top assembly	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

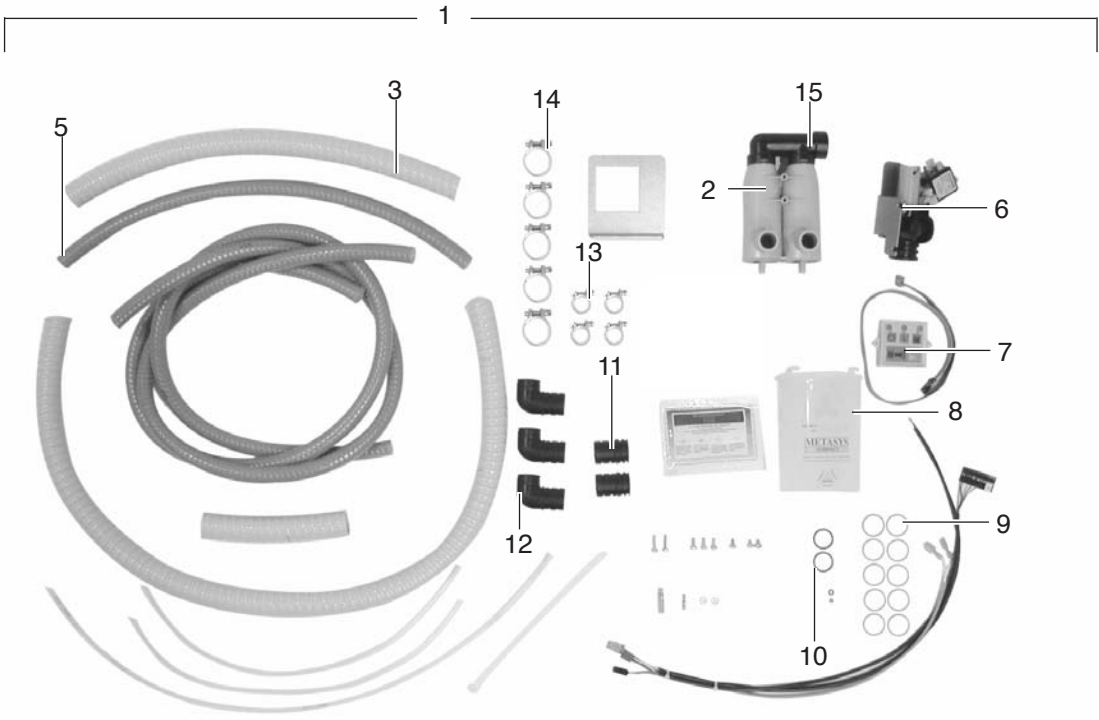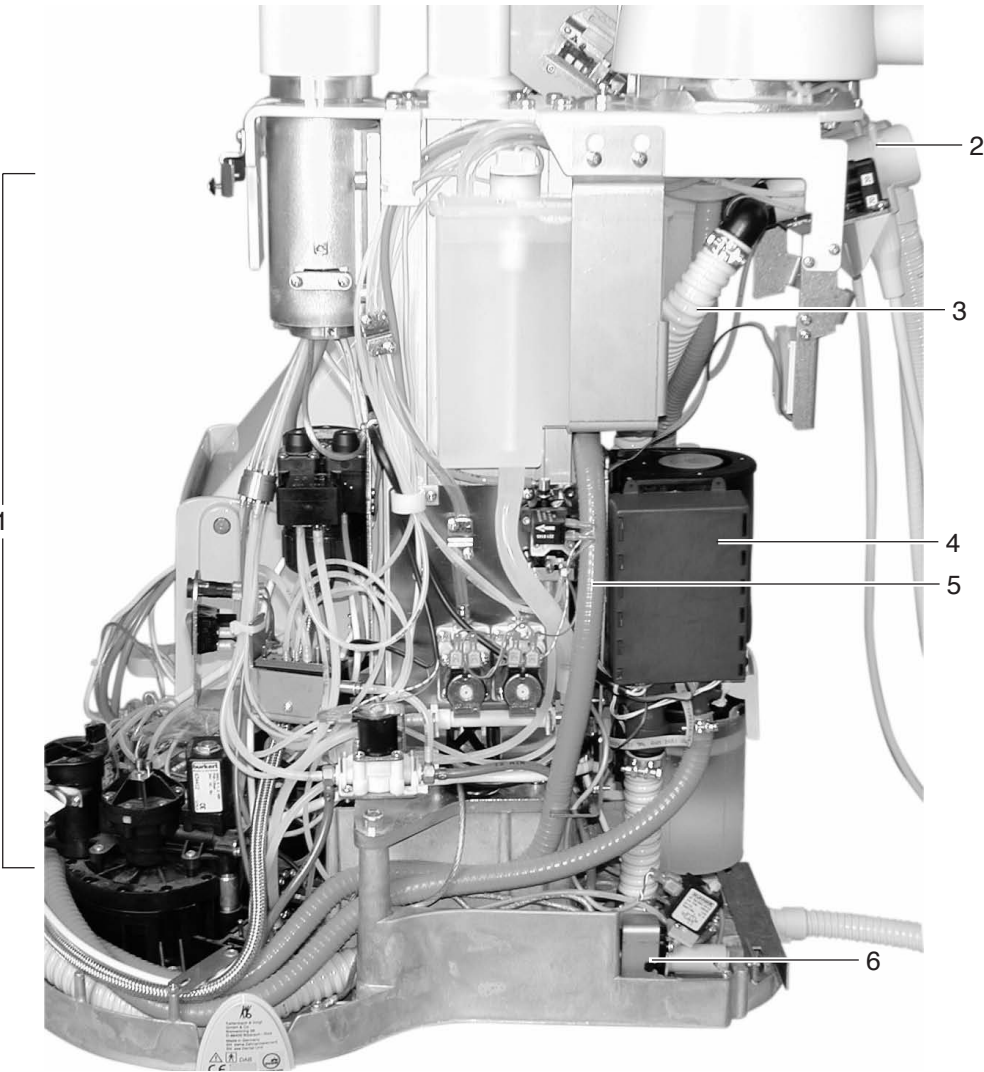



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Amalgamabscheider BS Separierung ECO	1.001.5143 1.001.5146	Amalgam separator kit Separating device ECO kit	Metasys Metasys
2	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	
3	Schlauch	0.065.7379	Hose	Meterware/Lw 25 by the meter/inside width 25
4	Abscheider Compact Dynamic Abscheider Compact Dyn.ECO	1.000.6830 1.000.6861	Separator Compact Dynamic Separator Compact Dyn.ECO	s. Seite/page 74 s. Seite/page 74
5	Schlauch	1.000.0890	Hose	Lw 14,5 Meterware/ by the meter s. Seite/page 74
6	Saugstromventil		Aspirator valve	
7	Anzeige, extern	0.764.4343	Indicator, external	
8	Sammelbehälter	0.226.2312	Collector	
9	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
10	O-Ring	0.200.6316	O-ring	18 x 2
11	Anschlußstück	0.764.4293	Connector	
12	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
13	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	17 mm
14	Schlauchschelle	0.222.6033	Hose clamp	
15	Siebverbinder	1.001.2277	Connector	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

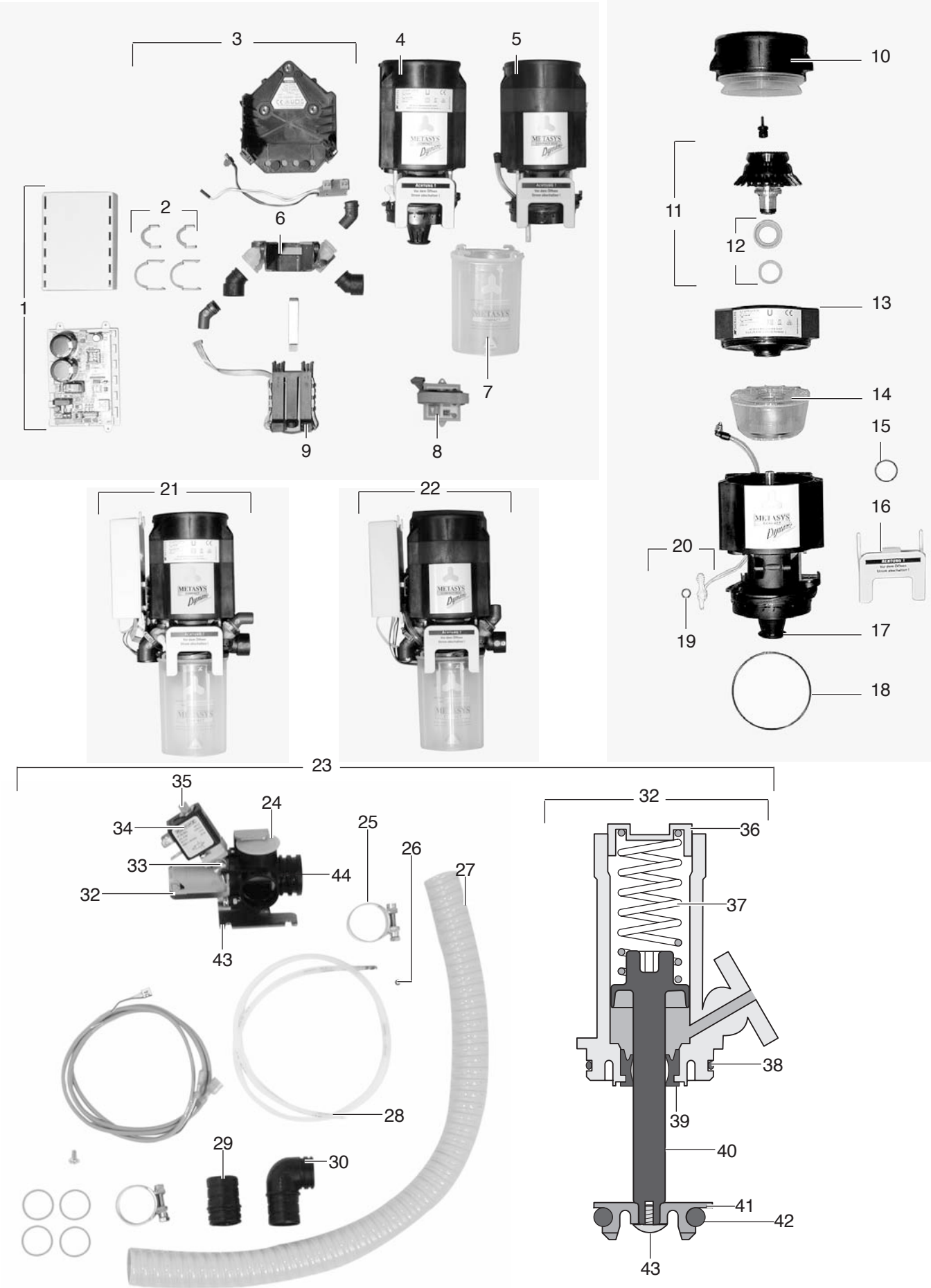



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Steuerplatine	1.000.6824	Control PCB	
	Sicherung 6,3A	1.000.6873	Fuse	zu Pos./for item 1
	Adapterkabel zu Metasys CD2	1.006.4540	Cable	
2	Schlauchklemmensatz	0.236.2499	Set of tube clamps	
3	Wandhalterung für CD	1.000.6821	Wall support	f. Compact Dynamic
4	Antrieb Compact	1.000.6762	Compact drive	
5	Antrieb Compact ECO	1.000.6763	Compact ECO drive	
6	Übergabe Wasser-Luft	1.000.6764	Transition water-air	
7	Sammelbehälter	0.226.2312	Collector	
8	Anzeige	0.764.4343	Indicator	
9	Lichtschanke	0.236.2496	Light barrier	
10	Sepa Oberteil	1.000.6765	Separation top	
11	Sepa Laufrad	1.000.6823	Separation wheel	
12	Gleitring und C-Ring	1.000.6768	Sliding ring with C-ring	
13	O-Ring	1.000.6828	O-ring	9 x 2 (10 Stück/pieces)
14	Zentrifugenkammern	1.000.6827	Centrifuge chambers	
15	O-Ring	1.000.6769	O-ring	22 x 2 (10 Stück/pieces)
16	Verriegelungsbügel	1.000.6766	Locking bracket	
17	Pumpeneinlauf	0.236.2488	Pump entry	
18	O-Ring	1.000.6770	O-ring	80 x 2 (10 Stück/pieces)
19	O-Ring	1.000.6829	O-ring	8 x 1,5 (10 Stück/pieces)
20	Tauchsonde	1.000.6767	Probe	
21	Abscheider Compact Dynamic	1.000.6830	Separator Compact Dynamic	
22	Abscheider Compact Dyn. ECO	1.000.6861	Separator Compact Dyn. ECO	
23	BS Saugstromventil	1.001.4879	Aspirator valve kit	
24	Stopfen	0.224.0800	Plug	
25	Schlauchschele	0.222.6033	Hose clamp	
26	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
27	Schlauch	0.065.7379	Hose	Meterware/Lw 25 by the meter/inside width 25
28	Schlauch	0.065.5371	Hose	PE 2,5 x 0,73 Meterware/ by the meter
29	Anschlußstück	0.764.4293	Connector	
	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
30	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
31	Ventilsockel	0.763.9571	Valve base	
32	Selektivkolben	0.763.9431	Selective piston	1)
33	Stecknippel	0.210.1811	Plug-in fitting	
	O-Ring (zu Pos. 33)	0.200.6036	O-ring (for item 33)	3,1 x 1,6
34	Micro-Magnetventil	0.221.6022	Micro solenoid valve	
35	Filter	0.210.3412	Filter	
36	Kappe	0.763.3223	Cap	1)
37	Druckfeder	0.201.8108	Pressure spring	
38	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
39	Kolbendichtung	0.220.0447	Plunger seal	
40	Kolbenstange	0.763.3173	Plunger pole	
41	Kolben	0.763.3243	Plunger	
42	O-Ring	0.200.6318	O-ring	15 x 3,5
43	HR-Schraube	0.260.9637	Screw HR	3 x 10
44	Ventilsockel	0.753.3853	Valve socle	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

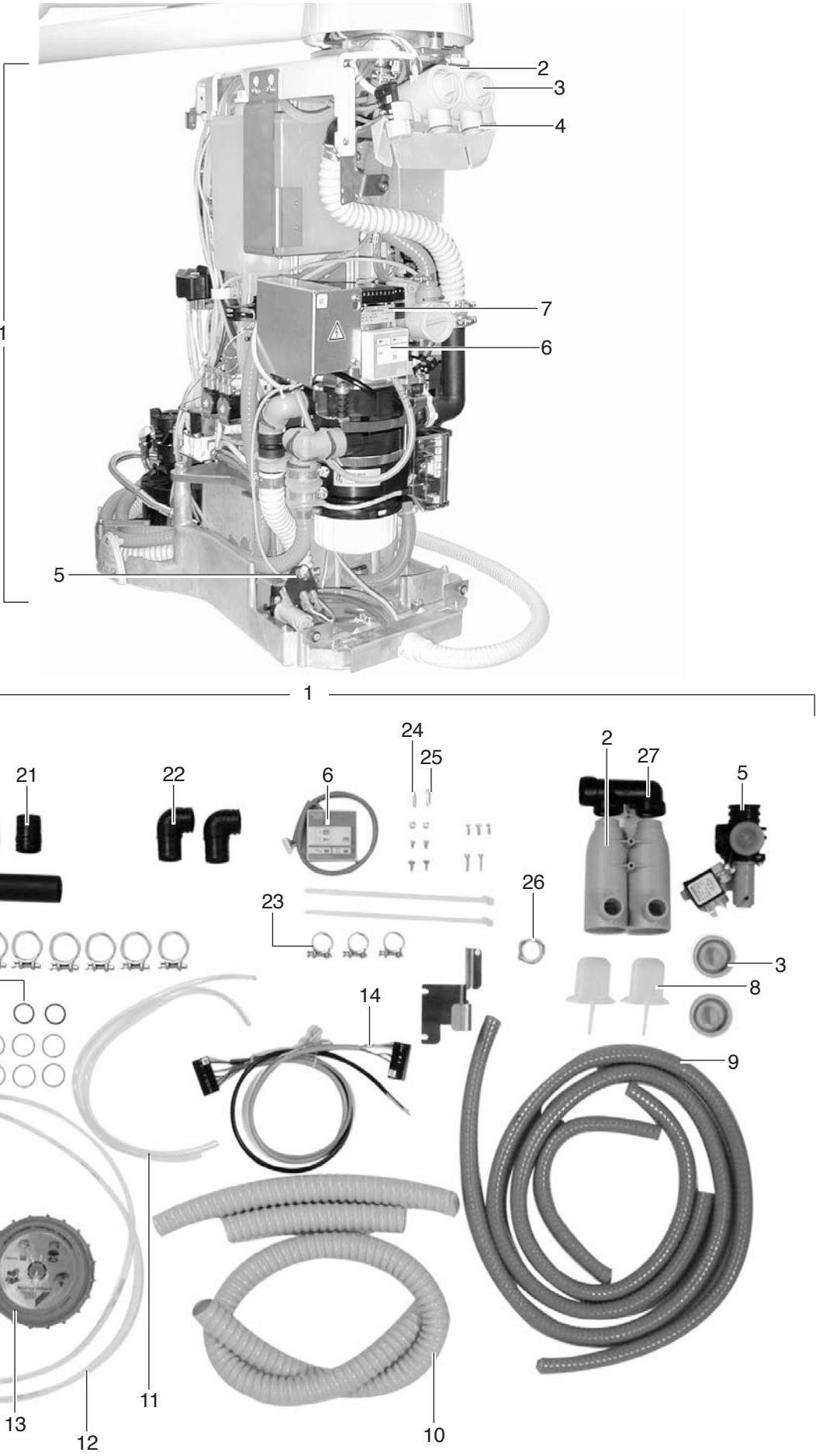




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Amalgamabscheider	1.001.2404	Amalgam separator kit	Dürr, ersetzt durch Amalgamabscheider DÜRR CAS / replaced by Amalgam separatorDÜRR CAS, s. Seite/page 84
2	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	
3	Kappe	0.763.3203	Cap	1)
4	O-Ring	0.200.6316	O-ring	1) 18 x 2
5	Saugstromventil		Aspirator valve	s. Seite/page 74
6	Anzeigemodul	0.226.2316	Indicator module	
7	Amalgamabscheider	0.226.2315	Amalgam separator	Rep.AT.Nr/exch.no.0.999.0244
8	Sieb	0.763.3423	Strainer	1)
9	Schlauch	1.000.0890	Hose	Lw 14,5 Meterware/ by the meter
10	Schlauch	0.065.7379	Hose	Meterware/Lw 25 by the meter/inside width 25
11	Schlauch	0.065.5599	Hose	PVC 3 x 1 Meterware/ by the meter
12	Schlauch	0.065.5371	Hose	PE 2,5 x 0,73 Meterware/ by the meter
13	Sammelbehälter	0.226.2317	Collector	Dürr
14	Leitung	1.001.3746	Cable	Amab+MV
15	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
16	O-Ring	0.200.6036	O-ring	3,1 x 1,6
17	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
18	O-Ring	0.200.6316	O-ring	18 x 2
19	Schlauchschelle	0.222.6033	Hose clamp	
20	Verbinder	0.764.7703	Connector	
21	Anschlußstück	0.764.4293	Connector	
22	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
23	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	17 mm
24	Stecknippel	0.203.4015	Plug-in fitting	
25	Stecknippel	0.203.4014	Plug-in fitting	
26	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	
27	Siebverbinder	1.001.2277	Connector	
	O-Ring (zu Pos. 27)	0.200.6414	O-ring (for item 27)	21 x 1,5

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058

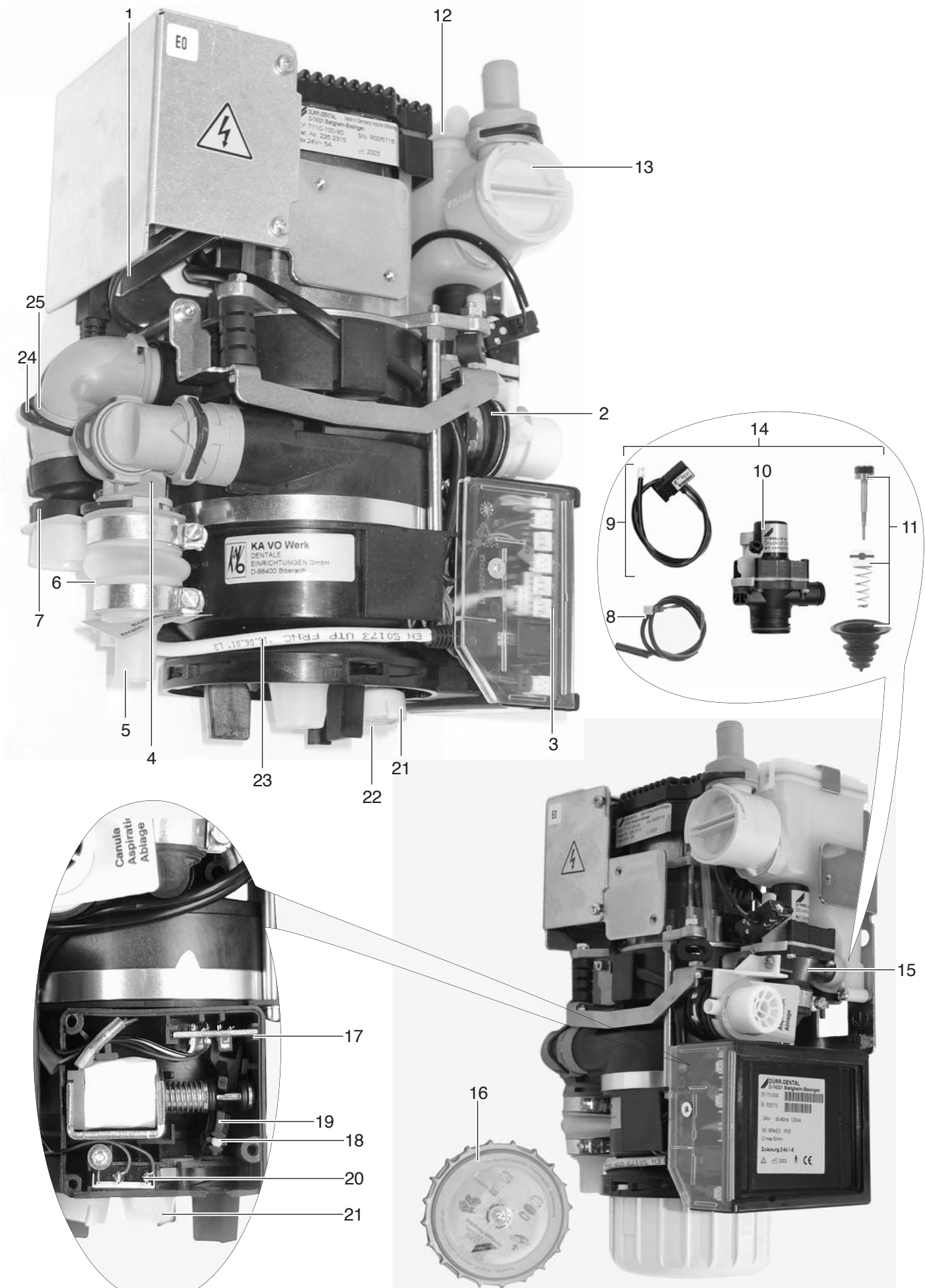




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Leiterplatte	0.236.2343	PCB guide	Rep.AT.Nr./exch.no. 0.999.0246
2	Gummitülle	0.236.2332	Rubber sleeve	Ablage/Support
3	Steuerung	0.236.2337	Control	EC-Motor Rep.AT.Nr./exch.no. 0.999.0245
4	Ventilbausatz Combi	1.000.9418	Valve set Combi assembly	
	Rückschlagventil	1.000.9419	Non return valve	zu Pos./for item 4
5	Halter	0.236.2333	Holder	Anschluß/connection
6	Gummitülle	0.236.2331	Rubber sleeve	Abwasser/Sewage
7	Gummitülle	1.000.9417	Rubber sleeve	Saugluft/Suction air
8	Reedschalter	0.236.2471	Reed switch	
9	Magnetventil	0.236.2467	Solenoid valve	alt/old
	Magnetventil	1.001.7473	Solenoid valve	neu/new
10	Hauptventil ohne Magnetventil	1.001.7472	Main valve without solenoid valve	
11	Kolben, komplett	0.236.2340	Piston assembly	mit O-Ring und Manschette with O-ring and sleeve für Schwimmer/for floater
12	Dichtung	0.236.2347	Seal	
13	Filtersieb	1.001.7476	Filter	
14	Hauptventil	1.001.7471	Main valve	
15	Gummitülle	1.001.7474	Rubber sleeve	
16	Sammelbehälter	0.226.2317	Collector	Dürr (incl. Pos.13)
17	SFÜ-Platine	0.236.2336	Level indication PCB	
18	Wellendichtring	0.236.2344	Shaft sealing ring	
19	Schalthebel	0.236.2341	Switching level	
20	Kabel mit Schalter	0.236.2339	Cable with switch	
21	Tastbolzen	0.236.2342	Sensor	
22	Gewicht	1.001.7459	Weight	
23	Kabel 8 adrig	1.001.7519	Cable	
24	Sicherungsring	1.000.9415	Safety ring	
25	O-Ring 20x2	1.000.9416	O-Ring 20x2	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058

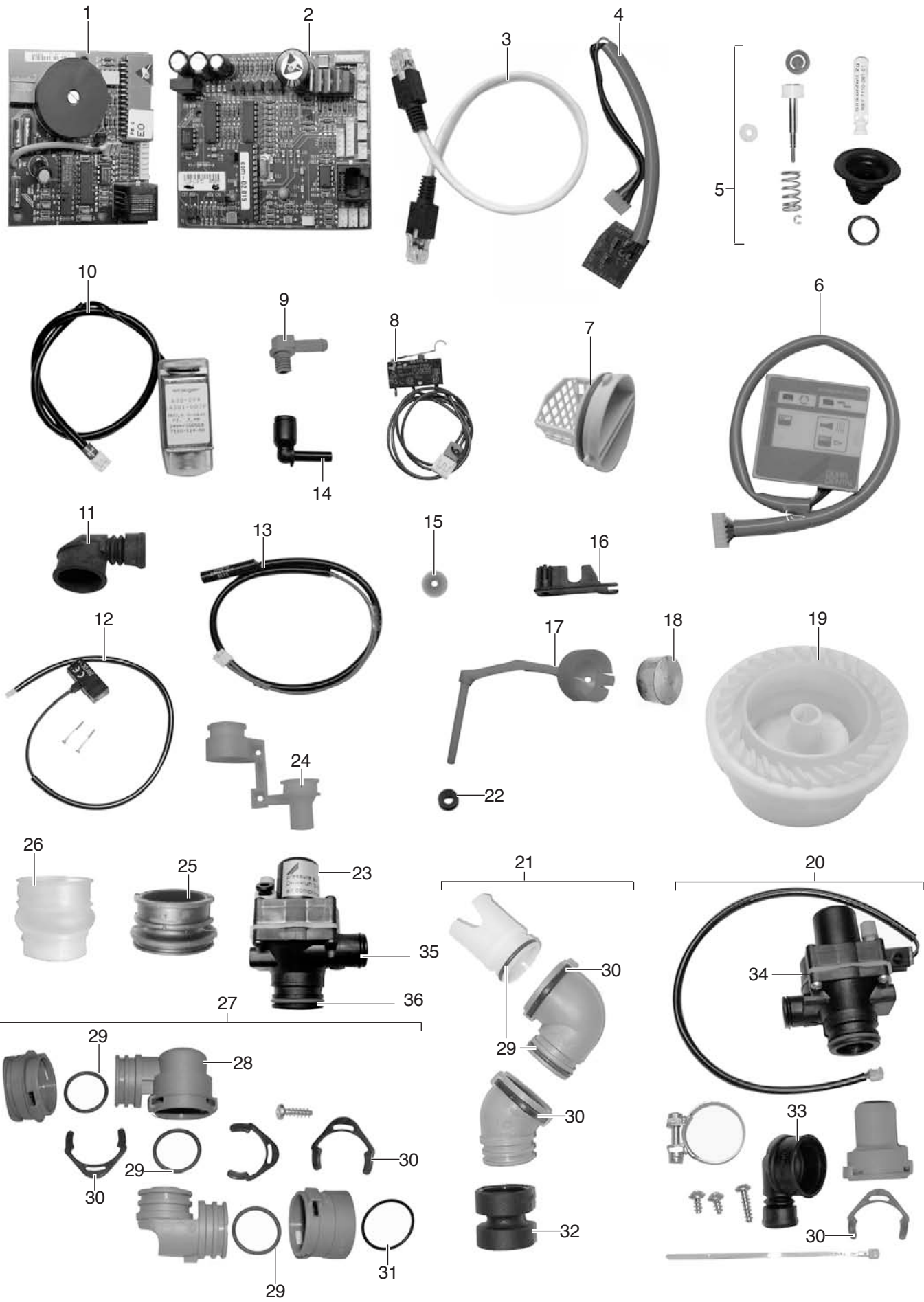



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Leiterplatte	0.236.2343	PCB guide	Rep.AT.Nr./exch.no. 0.999.0246
2	Steuerung	0.236.2337	Control	EC-Motor Rep.AT.Nr./exch.no. 0.999.0245
3	Kabel 8 adrig	1.001.7519	Cable	
4	SFÜ-Platine	0.236.2336	Level indication PCB	
5	Kolben, komplett	0.236.2340	Piston assembly	mit O-Ring und Manschette with O-ring and sleeve
6	Anzeigemodul	0.226.2316	Indicator module	
7	Filtersieb	1.001.7476	Filter	
8	Kabel mit Schalter	0.236.2339	Cable with switch	
9	Schlauchanschluss Winkel	1.001.7460	Tube connection	zu Pos./for item 10
10	Magnetventil	0.236.2467	Solenoid valve	alt/old
11	Gummitülle	0.236.2335	Rubber sleeve	Winkel/Angle
12	Magnetventil	1.001.7473	Solenoid valve	neu/new
13	Reedschalter	0.236.2471	Reed switch	
14	Schlauchtülle	0.236.2338	Hose connector	
15	Dichtung	0.236.2347	Seal	für Schwimmer/for floater
16	Schalthebel	0.236.2341	Switching level	
17	Tastbolzen	0.236.2342	Sensor	
18	Gewicht	1.001.7459	Weight	
19	Zentrifugentrommel	1.001.7475	Centrifugal basket	
20	Hauptventil	1.001.7471	Main valve	Umbausatz/Conversion kit
21	Umbausatz Dürr Am.abscheider	1.000.9414	Transformation kit Duerr	
22	Wellendichtring	0.236.2344	Shaft sealing ring	
23	Hauptventil ohne Magnetventil	1.001.7472	Main valve without solenoid valve	
24	Halter	0.236.2333	Holder	Anschluß/connection
25	Gummitülle	0.236.2332	Rubber sleeve	Ablage/Support
26	Gummitülle	0.236.2331	Rubber sleeve	Abwasser/Sewage
27	Ventilbausatz Combi	1.000.9418	Valve set Combi assembly	Umbausatz/Conversion kit
28	Rückschlagventil	1.000.9419	Non return valve	
29	O-Ring 20x2	1.000.9416	O-Ring 20x2	
30	Sicherungsring	1.000.9415	Safety ring	
31	O-Ring 24 X1,5	0.200.6420	O-Ring 24 X1,5	
32	Gummitülle	1.000.9417	Rubber sleeve	Saugluft/Suction air
33	Gummitülle	1.001.7474	Rubber sleeve	
34	Hauptventil	0.236.2468	Main valve	mit Magnetventil with solenoid valve
35	O-Ring 12 x 1,5	Dürr 9000-402-19	O-Ring	
36	O-Ring 17 x 2,5	Dürr 9000-402-28	O-Ring	

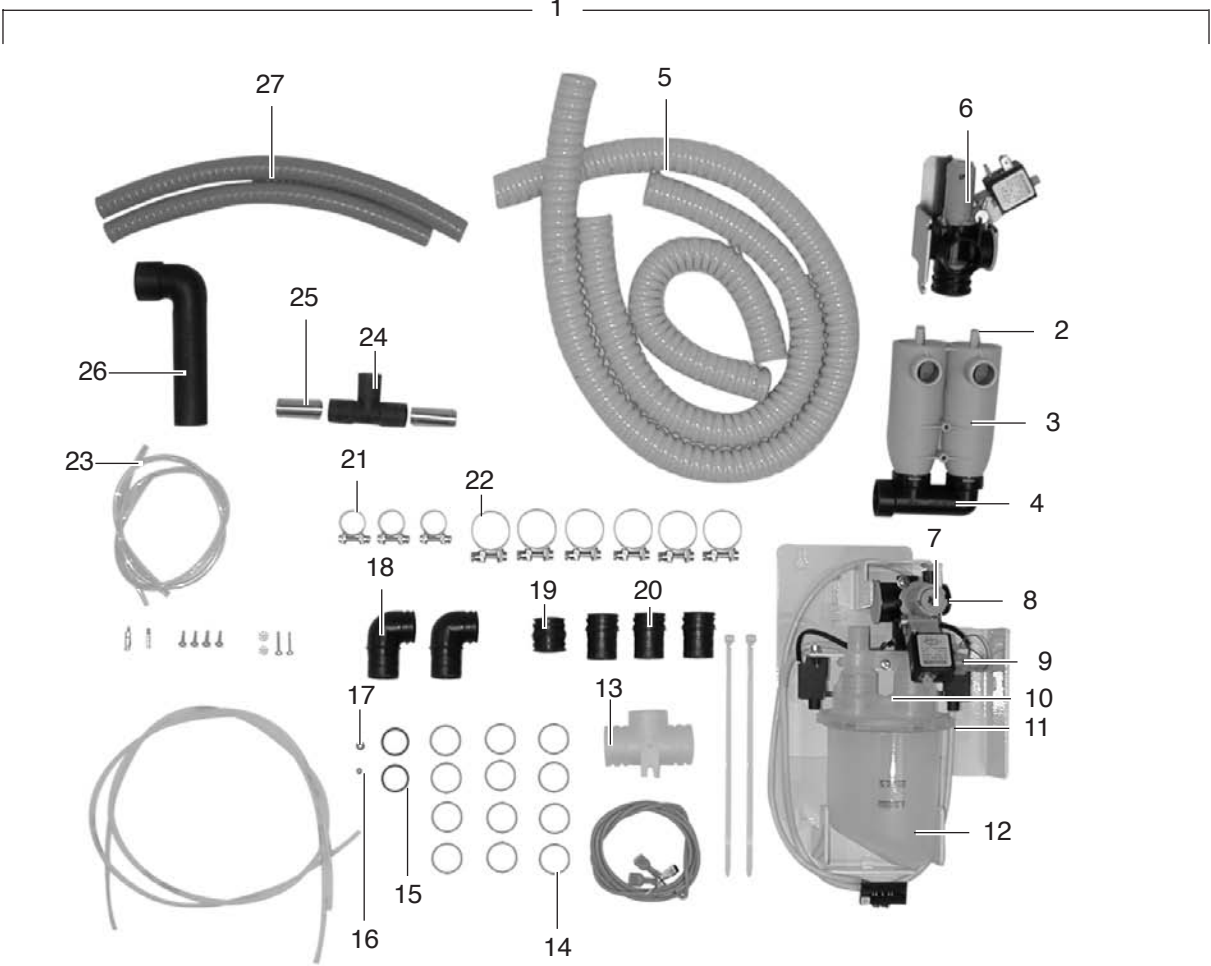
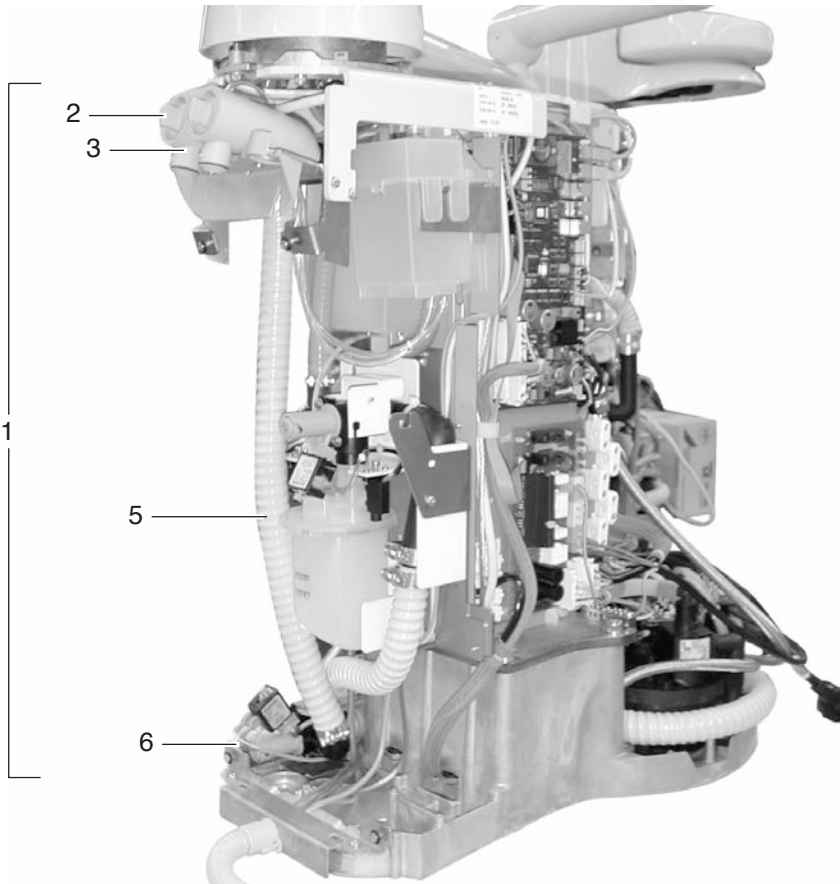




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS externe Absaugung	1.001.2403	External suction kit	Naßabsaugung
2	Kappe	0.763.3203	Cap	1)
	Sieb (zu Pos. 2)	0.763.3423	Strainer (for item 2)	1)
3	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	18 x 2
	O-Ring (zu Pos. 3)	0.200.6414	O-ring (for item 3)	21 x 1,5
4	Siebverbinder	1.001.2277	Connector	
5	Schlauch	0.065.7379	Hose	1) Meterware / Lw 25 by the meter / ins. width 25
6	BS Saugstromventil	1.001.4879	Aspirator valve kit	s. Seite/page 74
7	Selektivkolben	0.763.9431	Selective piston	1) s. Seite/page 74
8	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
9	Mikroschalter	1.002.3050	Microswitch	1)
	Schaltergehäuse (zu Pos. 9)	0.763.4023	Switch housing (for item 9)	
	Druckfeder (zu Pos. 9)	0.201.8015	Pressure spring (for item 9)	
10	Deckel	0.763.3923	Cover	
11	O-Ring	0.200.6811	O-ring	84 x 3
12	Behälter	0.763.3913	Reservoir	
13	T-Stück	0.764.6623	Tee	
14	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
15	O-Ring	0.200.6316	O-ring	18 x 2
16	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
17	O-Ring	0.200.6036	O-ring	3,1 x 1,6
18	Anschlußwinkel	0.764.4333	Connection angle	
19	Verbinder	0.764.4253	Connector	
20	Anschlußstück	0.764.4293	Connector	
21	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	17 mm
22	Schlauchschelle	0.222.6033	Hose clamp	
23	Schlauch	0.065.5599	Hose	3 x 1 Meterware/ by the meter
24	T-Stück	0.764.6633	Tee	Gummi / Rubber
25	Buchse	0.203.3103	Bush	
26	Verbinder	0.764.7703	Connector	
27	Schlauch	1.000.0890	Hose	Lw 14,5 Meterware/ by the meter

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058

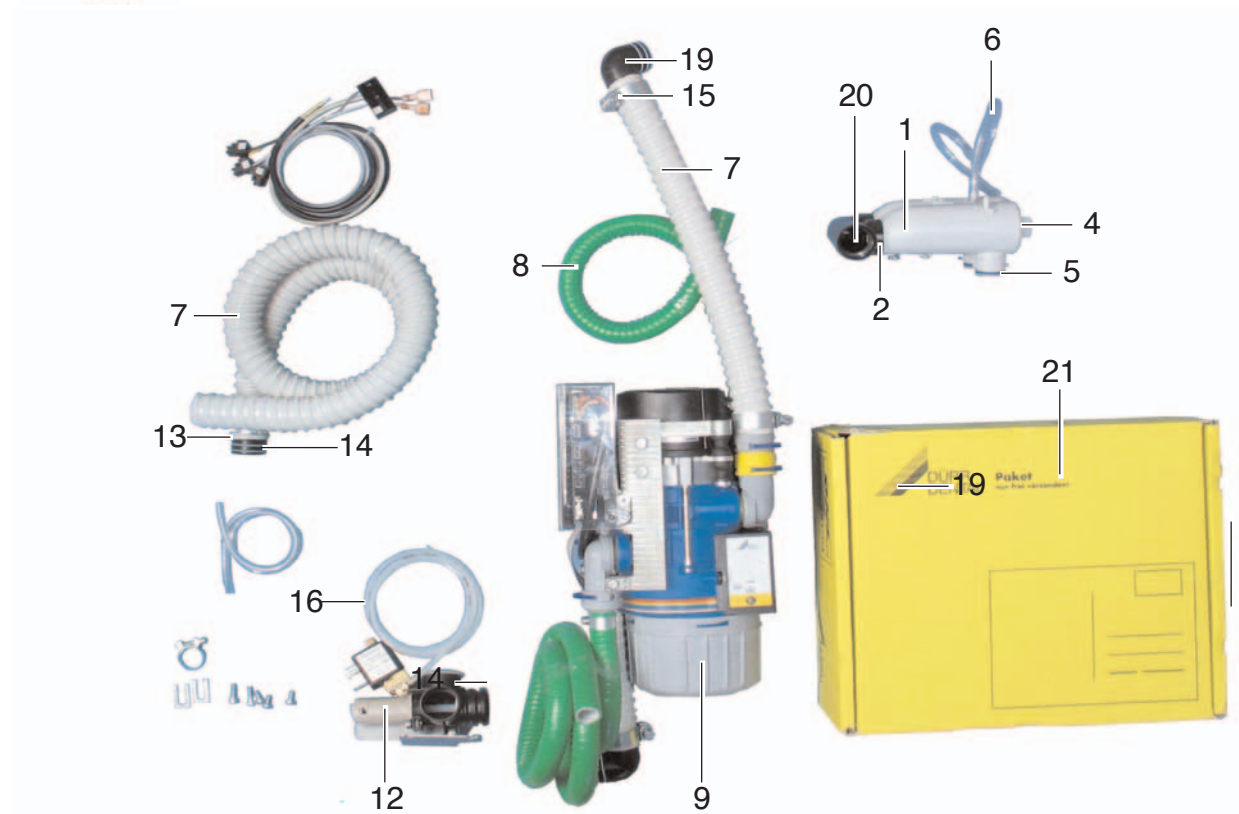
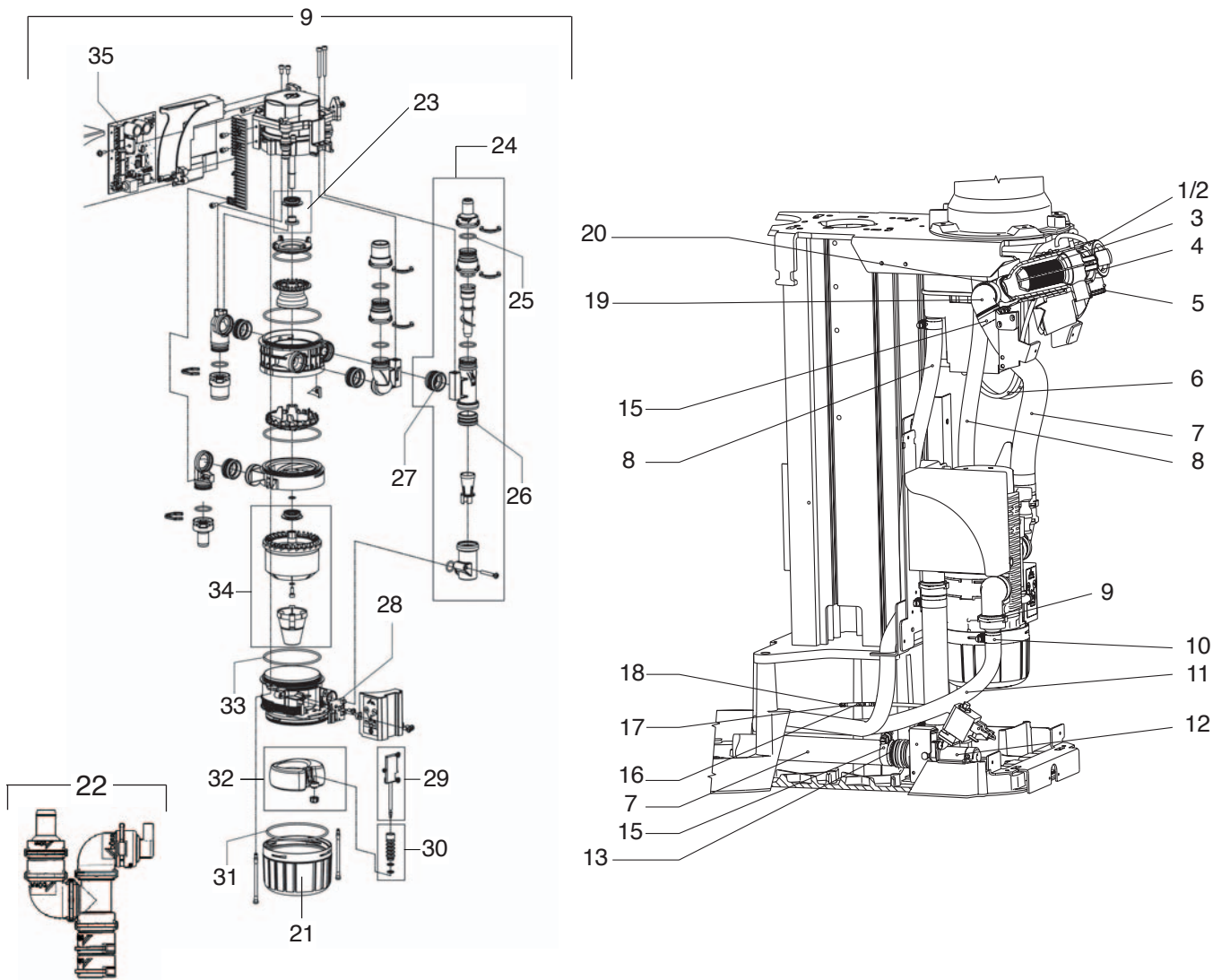




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
	BS Amalgamabscheider DÜRR CAS	1.003.2396	Kit Amab DÜRR CAS	
	BS Einbau Amalgamabscheider DÜRR CAS	1.003.2393	Kit Amab DÜRR CAS	nur Einbauteile, ohne Pos. 9 / only built-in pieces- without item 9
1	Siebgehäuse	0.763.3273	Sieve housing	
2	O-Ring	0.200.6414	O-ring	ø 21 x 1,5
3	Sieb	0.763.3423	Sieve	1)
4	Kappe	0.763.3203	Cap	1)
5	O-Ring	0.200.6316	O-ring	ø 18 x 2
6	Schlauch	0.065.5599	Hose	ø 3 x 1
7	Schlauch	0.065.7379	Hose	25 LW, Meterware/by the meter
8	Schlauch	1.000.0890	Hose	14,5 LW, Meterware/by the meter
9	Amalgamabscheider CAS	1.003.1686	Amalgam separator CAS	
10	Schlauchschelle	0.222.6028	Hose clamp	18 mm
11	Schlauch	1.000.0890	Hose	14,5LW, Meterware/by the meter
12	Saugstromventil		Valve	s. Seite/page 74
13	Anschlussstück	0.764.4293	Coupling	
14	O-Ring	0.200.6414	O-ring	ø 21 x 1,5
15	Schlauchschelle	0.222.6033	Hose clamp	
16	PE-Schlauch	0.065.5371	PE-Hose	ø 2,5 x 0,73
17	Stecknippel	0.203.4015	Nipple	
18	O-Ring	0.200.6184	O-ring	ø 2,1 x 1,1
19	Anschlusswinkel	0.764.4333	Connecting angle	
	O-Ring zu Pos. 19	0.200.6414	O-ring for item 19	ø 21 x 1,5
20	Siebverbinder	1.001.2277	Sieve connector	
21	Sammelbehälter CAS	1.003.9110	Collector CAS	incl. Versandverpackung incl. shipping container für Mundglasablauf
22	Syphon	1.004.4391	Trap	
23	Dichtungs-Set	1.004.3299	Gasket kit	
24	Stutzen kpl.	1.004.3295	Nozzle assembly	
25	O-Ring	1.004.3298	O-ring	ø 20 x 2
26	Gummitülle	1.004.3292	Sleeve	incl. Stützringe/support rings
27	Gummitülle	1.004.3293	Sleeve	incl. Stützringe/support rings
28	Leiterplatte	1.004.3290	Circuit board	SFÜ
29	Kulisse	1.004.3294	Baffle	
30	Faltenbalg	1.004.3286	Bellows	
31	O-Ring	1.004.3288	O-ring	ø 84 x 2,5
32	Klammer	1.004.3296	Clamp	
33	O-Ring	1.004.3289	O-ring	ø 78 x 2,5
34	Zentrifuge	1.004.3287	Centrifuge	
35	Leiterplatte	1.004.3291	Circuit board	CAS Steuerung/CAS control

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058

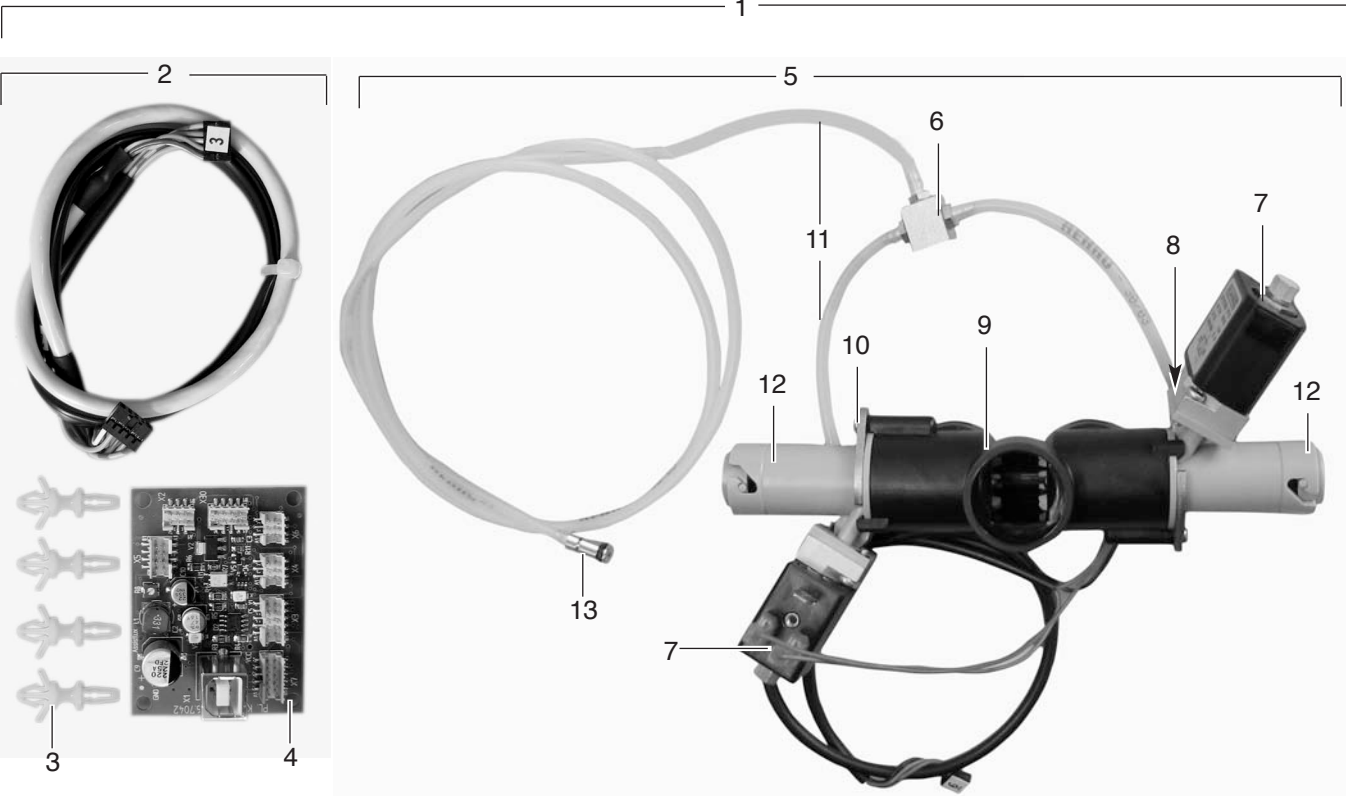
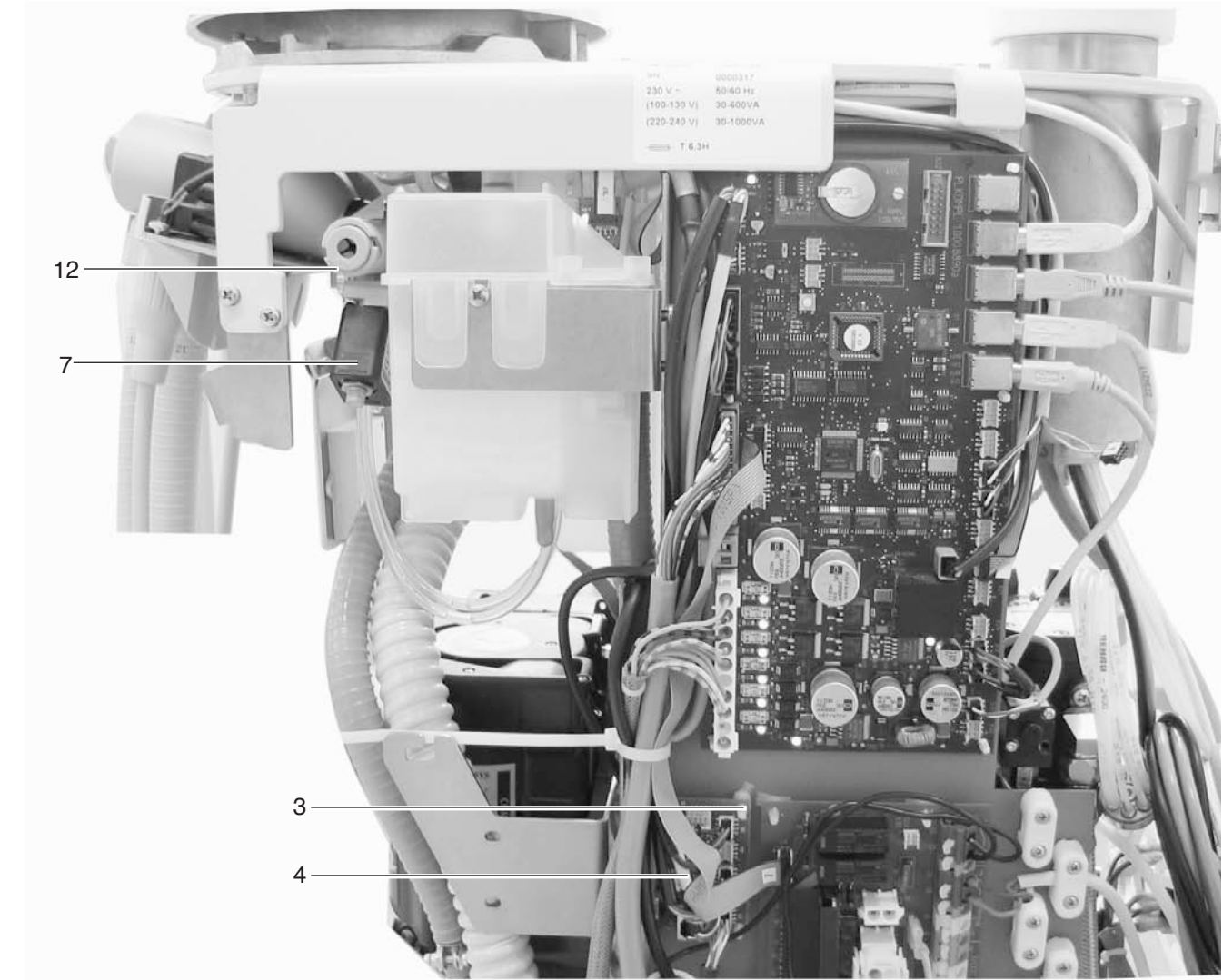




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Selektivventil 1058 TM/S/C/P	1.002.5713	Assembly kit selective valve 1058 TM	
2	Einbausatz Selektiv/ 1440 an 1058	1.002.5797	Assembly kit selective valve 1058	
3	Abstandshalter 9,5	1.002.3684	Spacer 9,5	
4	Steuerung Helferlin	0.226.7042	Control	
5	BS Selektivventil 1058	1.002.5714	Ass.kit selective valve 1058	
6	T-Stück	0.211.1491	T-junction	
	Stecknippel (zu Pos. 6)	0.203.4228	Plug-in fitting (for item 6)	
	Dichtungsscheibe (zu Pos. 6)	0.222.5111	Sealing washer (for item 6)	
7	Micro-Magnetventil	0.221.6022	Micro solenoid valve	
8	Stecknippel	0.210.1811	Nipple	
	O-Ring (zu Pos. 8)	0.200.6036	O-ring (for item 8)	3,1 x 1,6
9	Ventilgehäuse	1.002.5176	Valve housing	
10	Linsenschraube 3x20 EJOT	0.260.9636	Screw	
11	Schlauch PE	0.065.5371	Hose PE	2,5 x 0,73 Meterware/by the meter ohne/without Pos. 7 s. Seite/page 74
12	Selektivkolben	0.763.9431	Piston	
13	Stecknippel	0.203.4014	Plug-in fitting	
	O-Ring (zu Pos. 13)	0.200.6074	O-ring (for item 13)	3,5 x 1,5

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058

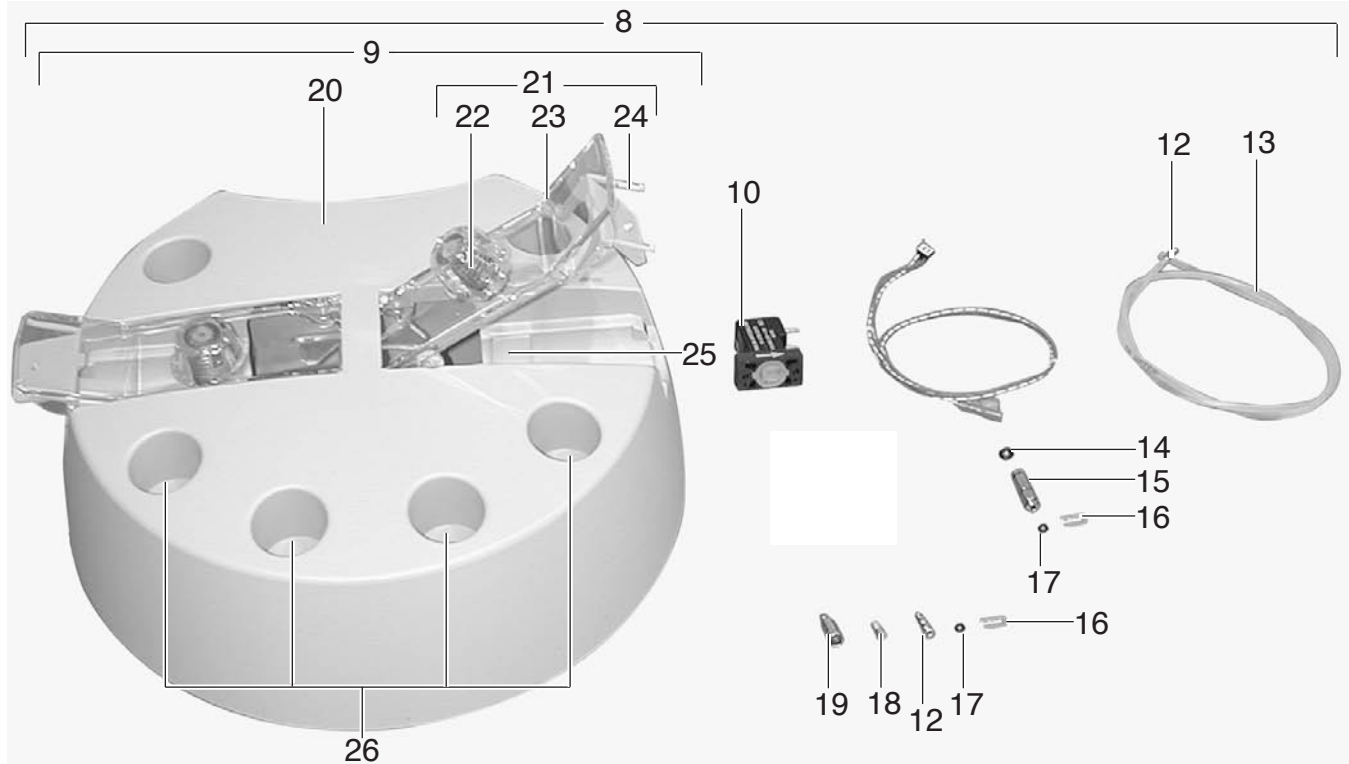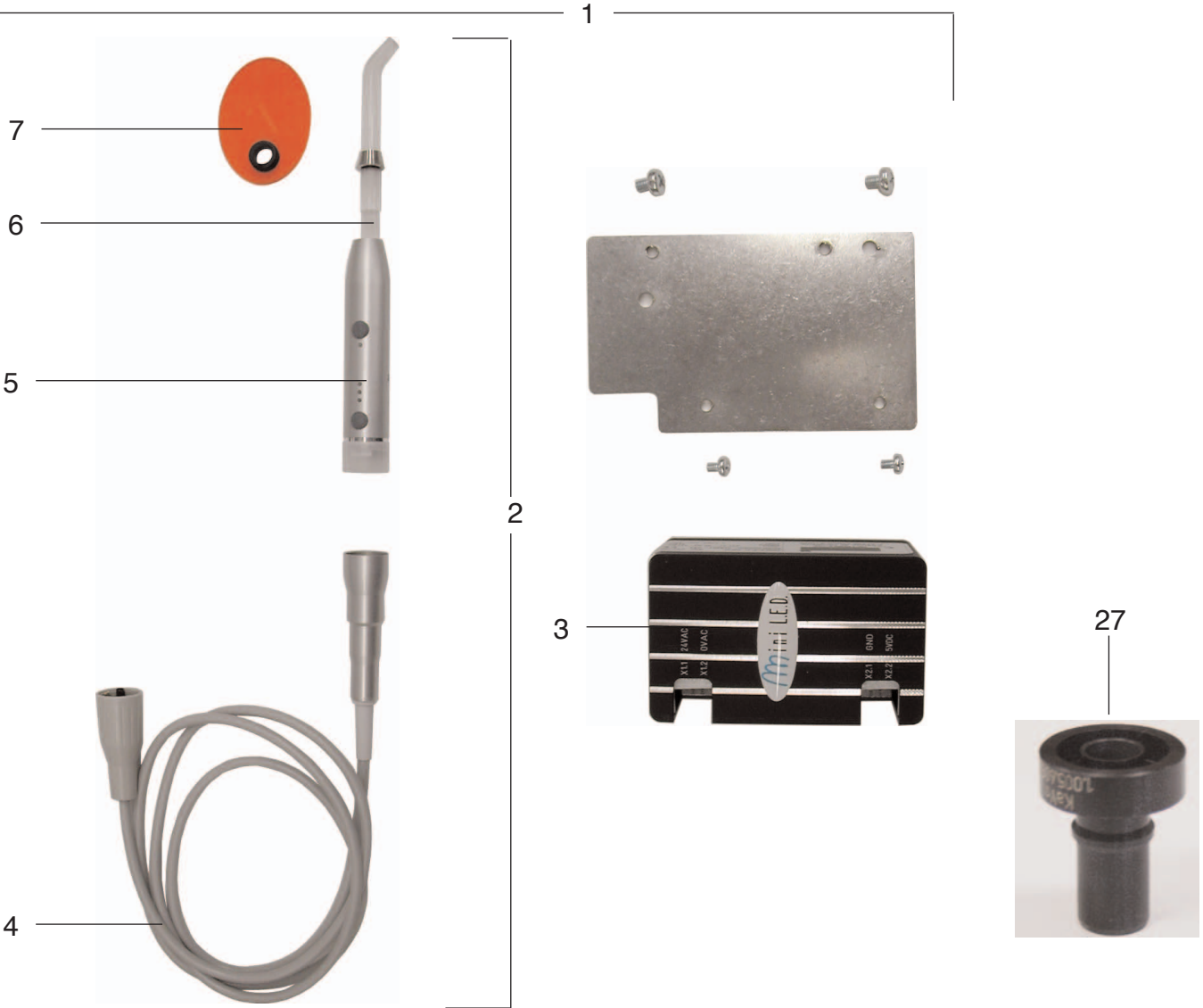




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS HE-Polylicht	1.003.8114	Assembly kit curing light	Satelec f. 1058 TM/C/G/P
2	Anbausatz - Satelec	1.003.8116	Handpiece LED Satelec	
3	Versorgungselektronik	1.003.8118	Supply system	
4	Instrumentenschlauch	1.003.8120	Instr. tubing	
5	Handstück Mini LED	1.003.8119	Handpiece	
6	Glasstab ø 7,5	1.003.8406	glass rod ø 7,5	
	Glasstab ø 5,5	1.003.8407	glass rod ø 5,5	
7	Blendschutz	1.003.8121	Light dimming device	
8	BS Intensiv-/Dauerentkeimung	1.000.1876	Kit	
9	Entkeimungsaufsatz, montiert	0.719.3421	Disinfection top assembled	
10	Magnetventil	0.221.6144	Solenoid valve	NO (MF-Wasser / MF-Water)
12	Stecknippel	0.203.4001	Plug-in fitting	
	O-Ring (zu Pos. 26)	0.200.6184	O-ring (for item 26)	2,1 x 1,1
13	Schlauch	0.065.5370	Hose	2 x 0,63 Meterware/by the meter
14	O-Ring	0.200.6074	O-ring	3,5 x 1,5
15	Stecknippel	0.203.4009	Plug-in fitting	
16	Feder	0.201.8904	Spring	
17	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
18	Stecknippel	0.203.4215	Plug-in fitting	
19	Steckbuchse	0.203.4145	Connection bush	
20	Entkeimungsaufsatz	0.719.2222	Disinfection top	
21	Bügel, komplett	0.719.2282	Bracket assembled	
22	Druckfeder	0.201.8119	Pressure spring	
	Stößel	0.719.2262	Plunger	
23	Bügel	0.719.2242	Bracket	
24	Rasthaken	0.719.2232	Locating hook	
25	Silikonclips	0.719.2272	Silicone clip	
26	Hülse	1.000.4292	Sleeve	
	Dichtung (zu Pos. 40)	1.000.4170	Seal (for item 40)	
27	Adapter	1.005.6892	Adapter	Adapter für COMFORTbase

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058


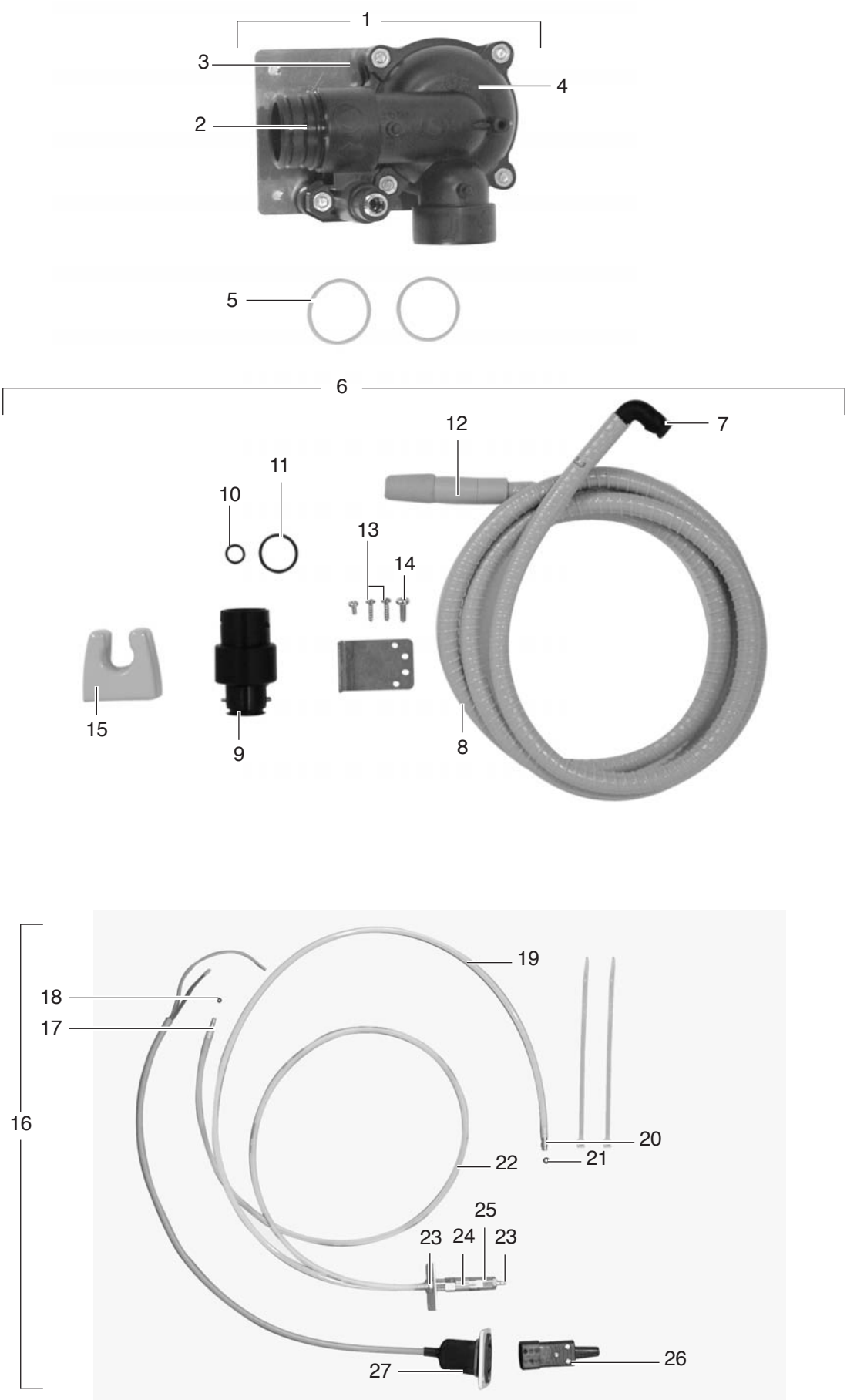




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Unterdruckregler	1.001.3094	Vacuum governor kit	
2	Verbinder	0.764.4253	Connector	
3	Reglerunterteil	0.210.5672	Regulator lower part	
	Membrane (zu Pos. 3)	0.210.2351	Diaphragm (for item 3)	
4	Regleroberteil	0.210.5662	Regulator upper part	
5	O-Ring	0.200.6414	O-ring	21 x 1,5
6	BS 2. Speichelzieher	1.001.4418	2. Saliva ejector kit	saugluftbetrieben air-operated
7	Kupplungswinkel	0.764.3982	Coupling angle	
8	Speichelzieherschlauch kompl.	0.211.1771	Saliva ejector hose ass.	1)
	Schlauch (zu Pos. 8)	0.226.9164	Hose (for item 8)	1) 1600 mm, Lw 8
	Schlauch (zu Pos. 8)	0.065.6589	Hose (for item 8)	Meterware /by the meter
9	Absaugadapter montiert	0.764.8551	Suction adaption assembly	
10	O-Ring	0.200.6108	O-ring	8 x 1,5
11	O-Ring	0.200.6316	O-ring	1) 18 x 2
12	Absauganschluß klein	0.211.1751	Small suction connection	
13	HR-Schraube	0.260.9637	Screw HR	3 x 10
14	Linsenschraube M 4X10	0.261.5097	Screw	
15	Aufnahme 2. Speichelzieher	1.001.4544	Holder 2. saliva ejector	
16	BS-Fremdgeräteanschluß	0.710.2581	Auxiliary equipm. conn. kit	
17	Stecknippel	0.203.4006	Plug-in fitting	
18	O-Ring	0.200.6184	O-ring	1) 2,1 x 1,1
19	Schlauch Luft	0.065.6181	Hose air	Meterware/by the meter 6x4
20	Stecknippel	0.203.4002	Plug-in fitting	
21	O-Ring	0.200.6074	O-ring	1)
22	Schlauch Wasser	0.065.5372	Hose water	
23	Stecknippel	0.203.4042	Plug-in fitting	
	O-Ring	0.200.6078	O-ring	4,5 x 2
24	Verschlußkupplung	0.220.0947	Screw coupling	1)
25	Verschlußnippel	0.220.0948	Screw nipple	1)
26	Kaltgerätestecker	0.223.0019	Plug	
27	Zusatzsteckdose	0.710.3191	Add. socket	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058



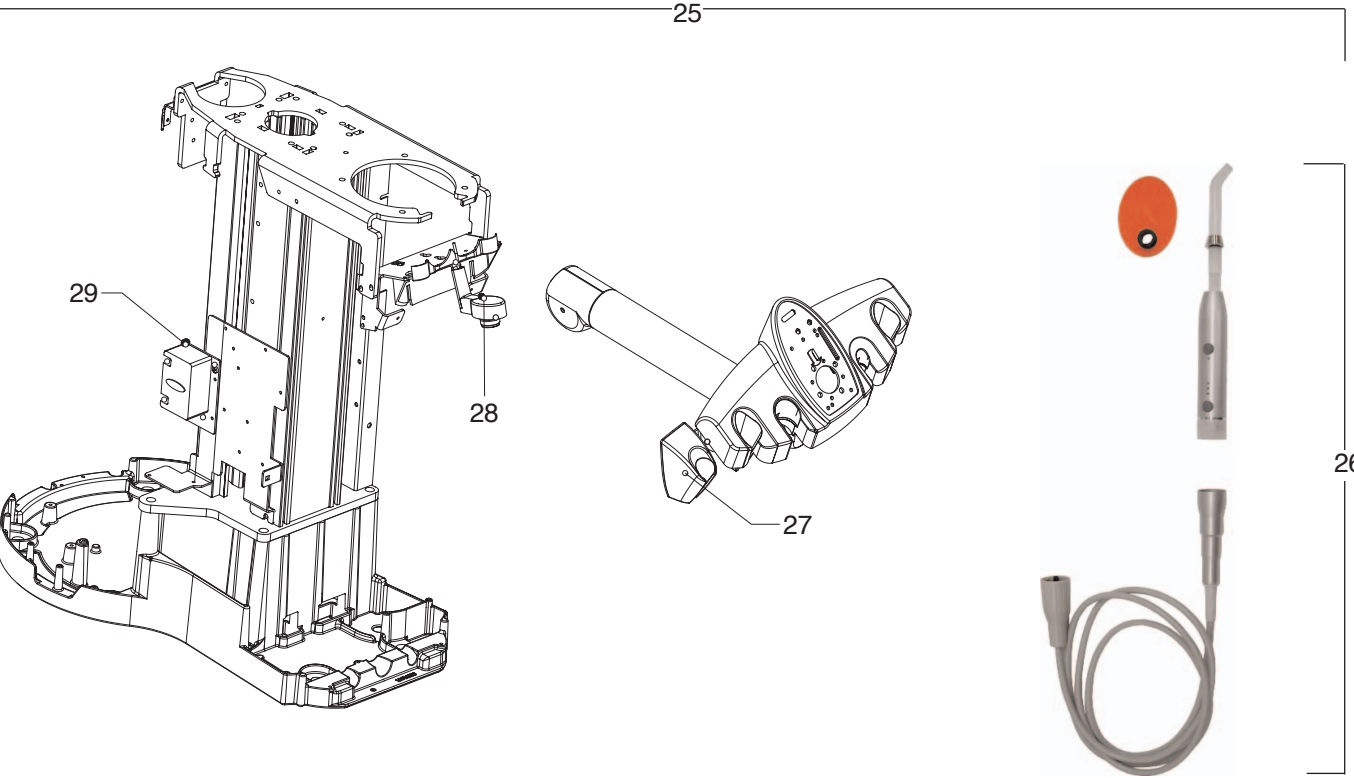
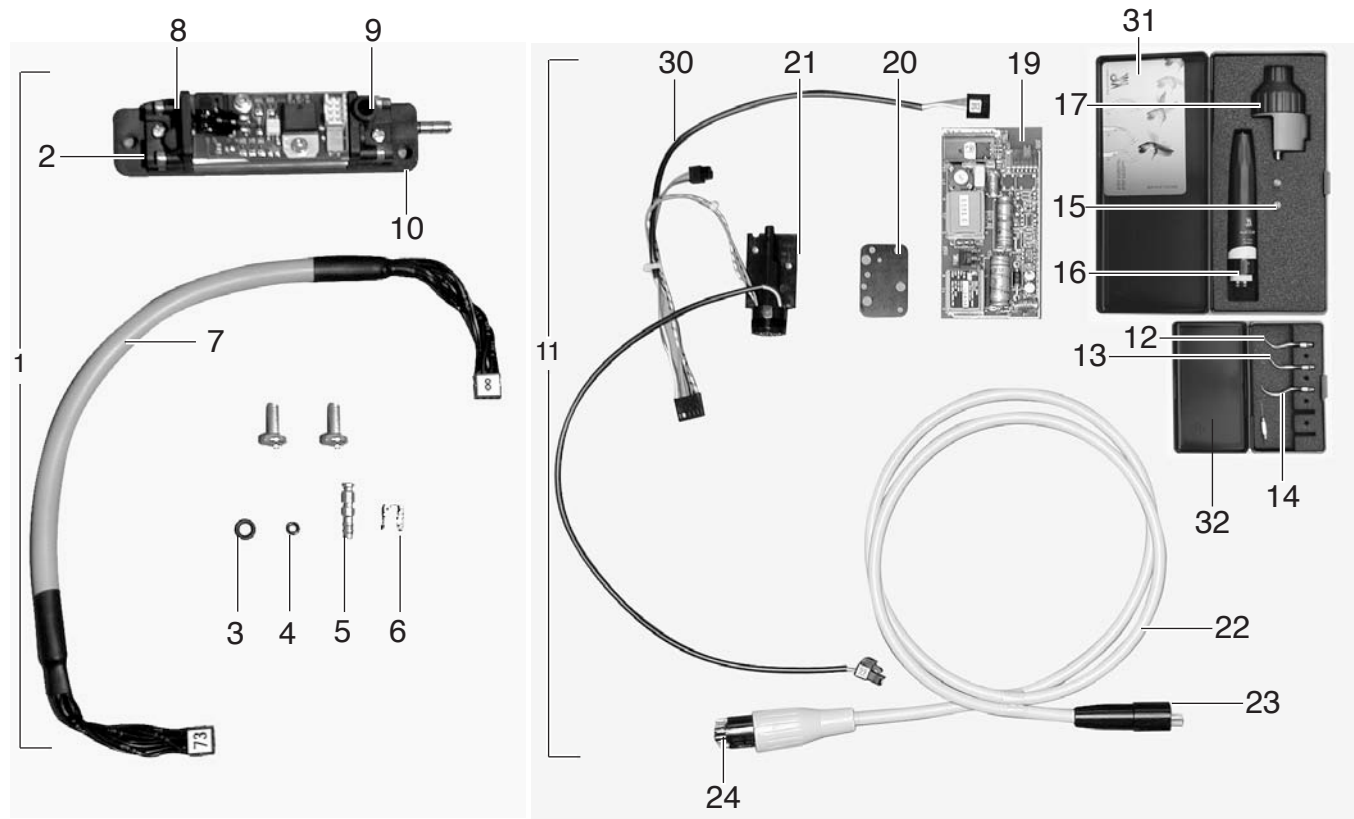




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Sprayerwärmung Instr.	0.728.3131	Heating for instr. kit	
2	Erhitzer, komplett	0.728.3691	Heater assembly	
3	O-Ring	0.200.6074	O-ring	3,5 x 1,5
4	O-Ring	0.200.6184	O-ring	2,1 x 1,1
5	Stecknippel	0.203.4015	Plug-in fitting	
6	Feder	0.201.8904	Clip	klein/small
7	Leitung	0.728.4361	Line	
8	Verschlussplatte	0.728.4022	Cover plate	
9	Eingangsplatte	0.728.4012	Plate	
	Dichtung zu Pos. 9	0.728.4002	Seal for item 9	
10	Montageplatte Erhitzer	0.728.3681	Mounting plate heater	
11	BS PIEZOlux	1.000.2107	Kit PIEZOlux	
12	Spitze 11	0.571.5852	Tip 11	1) 'Universal' shape
13	Spitze 10	0.571.5832	Tip 10	1) Form 'Perio'/'perio' shape
14	Spitze 9	0.571.5822	Tip 9	1) Form 'Sichel'/'sickle shape
15	Hochdrucklampe	1.002.2928	High pressure lamp	1)
16	PIEZOlux-Handstück	0.571.5211	PIEZOlux-handpiece	Rep.AT.Nr./exch.no1.000.4137
	PIEZO Wandler (zu Pos. 16)	0.571.5441	PIEZO Converter (for item 16)	Rep.AT.Nr./exch.no0.999.0560
	Außenhülse bedruckt (zu Pos. 16)	0.571.5622	Outer sheath (for item 16)	
17	Drehmomentschlüssel	1.000.4887	Changing tool	1)
18	Prüfschablone ZEG-Spitzen	1.001.6958	Test template scaler test	
19	PIEZO-ZEG Elektronik	0.710.4241	Scaler electronic plate	Rep.AT.Nr./exch.no0.999.0338
20	Dichtung	0.710.1592	Seal	
21	Verteilerblock	0.710.1542	Distributor block	ohne Leitung / without line
	Verteilerblock mit Leitung	0.728.4331	Distributor block with line	
22	SONOsoft-Schlauch	0.516.1060	SONOsoft Lux hose	1250 mm
23	Rückschlagventil	0.220.0450	Non return valve	
24	Dichtung	0.516.5762	Washer	
25	BS Polymerisationslicht	1.004.0809	Kit polymerization light	1058 O mit Satelec- Handstück/with Satelec handpiece s. Seite/page 88
26	Anbausatz Satelec	1.003.8116	Handpiece LED Satelec	
27	Ablage	1.001.1937	Support for Camera 3A	
28	Abdeckung	1.002.3327	Cover	
29	Versorgungselektronik	1.003.8118	Supply system	
30	Leitung Sonosoft	0.728.4331	Line	
31	Prüfschablone ZEG	1.001.6958	Test template ZEG	
32	Scaeler Spitzensatz	1.001.8522	Scaler	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.




KaVo 1058

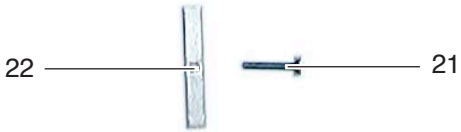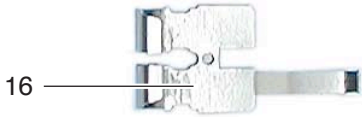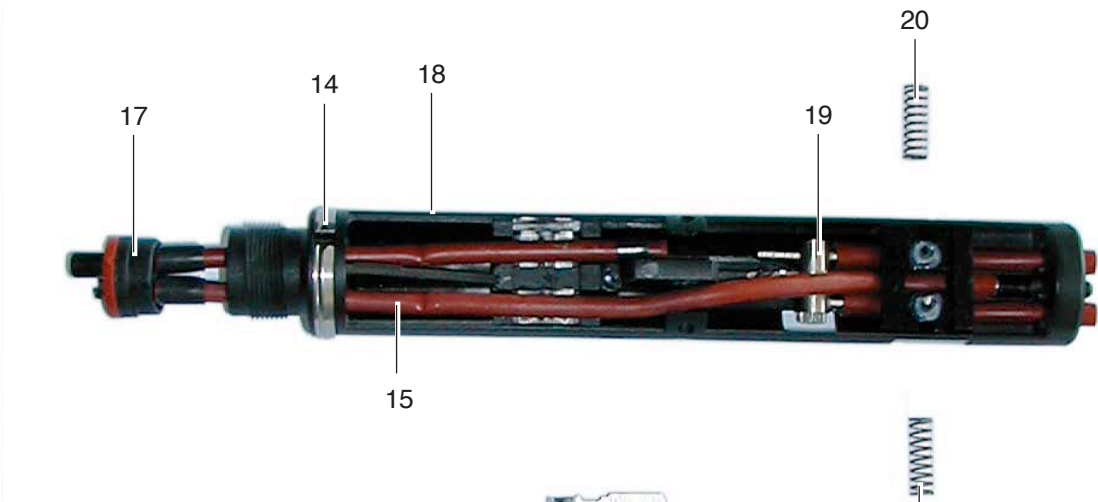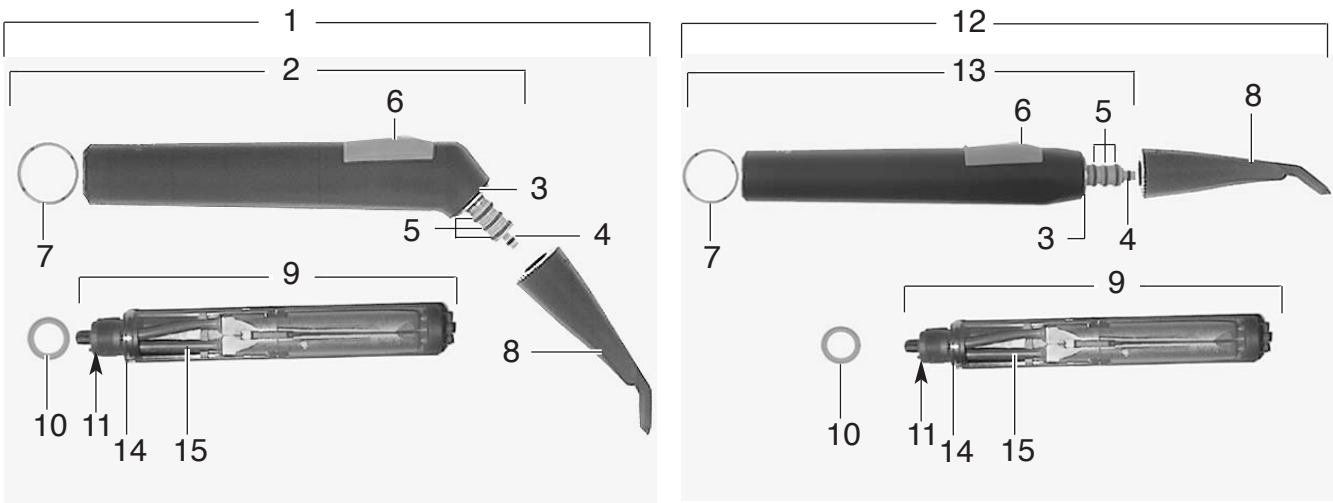



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	3-F Handstück	0.773.0500	3-F handpiece	abgewinkelt/
2	Griffhülse, montiert	0.773.0251	Gripping sleeve assembly	
3	Spannring	0.535.3732	Tension ring	1)
4	O-Ring	0.200.6046	O-ring	1) 2 x 1
5	O-Ring	0.200.6121	O-ring	1) 8 x 1
6	Taste, montiert	0.773.0051	Button assembly	1)
7	Gewinderastring	0.773.0012	Threaded stop ring	
8	Kanüle, montiert	0.773.0231	Nozzle assembly	1)
	Düsennadel (zu Pos. 8)	0.410.0921	Nozzle needle (for item 8)	
9	Ventilkörper, montiert	0.773.0261	Valve body assembly	1)
10	Gummipuffer	0.773.0002	Rubber pad	1)
11	Dichtung	0.553.1872	Seal	
12	3 F Handstück	0.773.0510	3 F handpiece	gerade (nur S-Geräte)
13	Griffhülse, montiert	0.773.0241	Gripping sleeve assembly	
14	Rastring	0.574.0412	Stop ring	
15	Schlauch	0.065.5379	Hose	Meterware/by the meter
16	Klemmblech	0.773.0872	Clip	
17	Medieneinsatz	0.773.0792	Insert	
18	Ventilkörper	0.773.0932	Valve body	
19	Luftumschalter	0.773.0271	Switch	
20	Druckfeder	0.201.7045	Pressure spring	
21	Zylinderschraube	0.240.9476	Screw	M 1,6
22	Klemmstück	0.773.0882	Clamp	
23	Lufthebel	0.773.0852	Air lever	
24	Wasserhebel	0.773.0842	Water lever	
25	Zylinderstift	0.202.0506	Pin	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

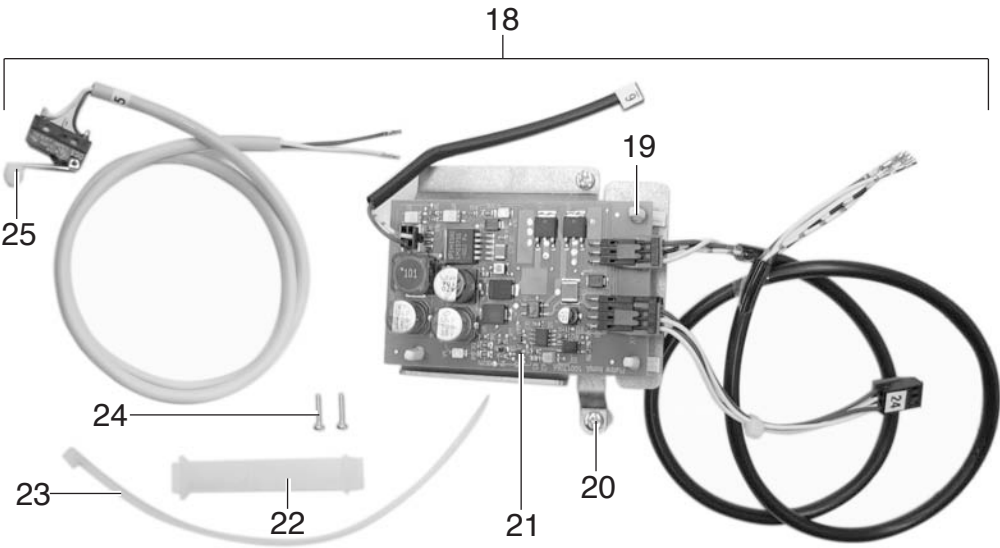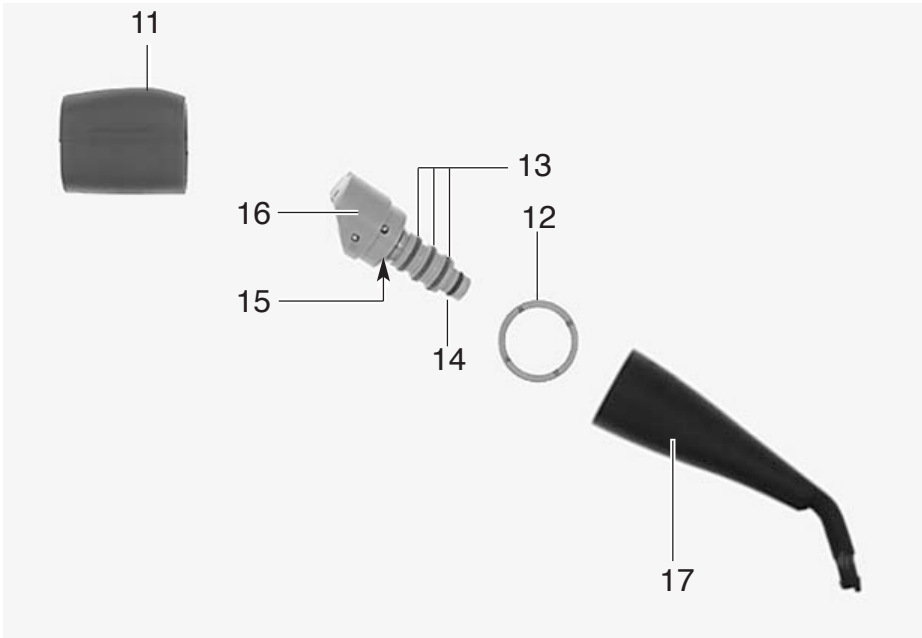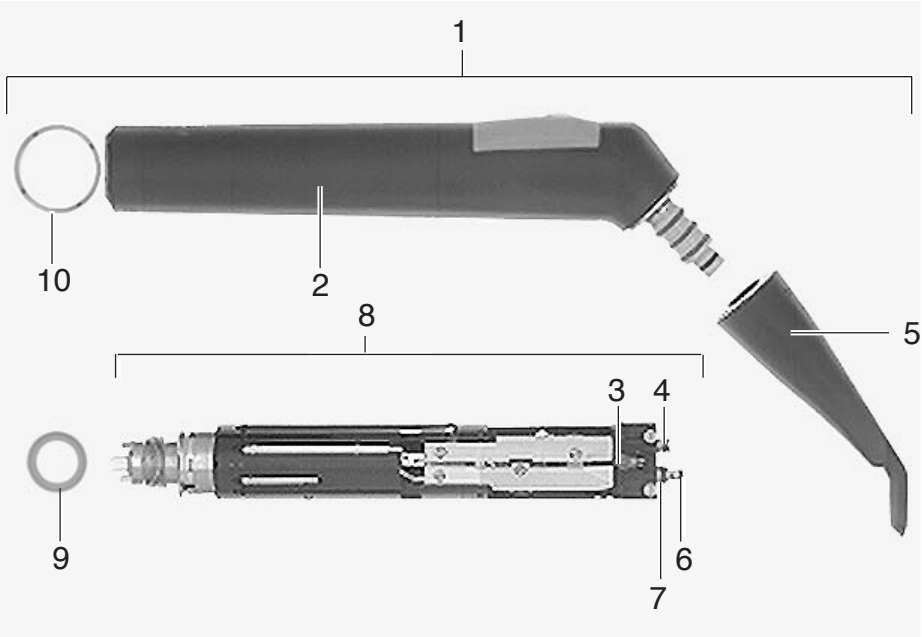



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	MF-Handstück	0.773.0000	MF handpiece	
2	Griffhülse, montiert	0.773.0001	Gripping sleeve assembled	
3	Hochdrucklampe	1.002.2928	High-pressure lamp	
4	O-Ring	0.200.6051	O-ring	1) 2 x 1
5	Kanüle, montiert	0.773.0011	Nozzle assembly	
6	O-Ring	0.200.6001	O-ring	1) 1,2 x 1
7	O-Ring	0.200.6030	O-ring	1) 3 x 1
8	Ventilkörper, montiert	0.773.0021	Valve body assembly	Rep.AT.Nr.: 0.999.0182
9	Gummipuffer	0.773.0002	Rubber buffer	1)
10	Gewinderastring	0.773.0012	Threaded locking ring	
11	Taste, montiert	0.773.0051	Button assembly	1)
12	Gewinding	0.773.0022	Threaded ring	
13	O-Ring	0.200.6121	O-ring	1) 8 x 1
14	O-Ring	0.200.6018	O-ring	1) 5 x 1
15	Spannring	0.535.3732	Clamping ring	
16	Aufnahme, montiert	0.773.0041	Connector assembly	
17	Kanülenhülse	0.773.0112	Nozzle sleeve	
18	Einbausatz für Mehrfunktionsspritze	1.002.0856	Inst.Kit MF-Syringe warm	Arzt/Dentist
19	Abstandshalter	0.224.6435	Spacer	
20	Linsenschraube M 3x 6	0.261.5033	Screw	
	Sechskantmutter M 4	0.251.1012	Hexagonal nut	zu Pos./for item 20
21	MFH-Steuermodul	1.001.7066	MFH-module	
22	Schalteraufnahme	0.764.6403	Switch holder	
23	Kabelband	0.222.6037	Cable tie	
24	Linsenschraube M 2x10	0.261.4976	Oval head screw	
25	Mikroschalter	0.223.2406	Microswitch	1)
26	Kombi-Schlüssel	0.411.0321	Key	zu Pos./for item 12 + Wasserventil/Water valve

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

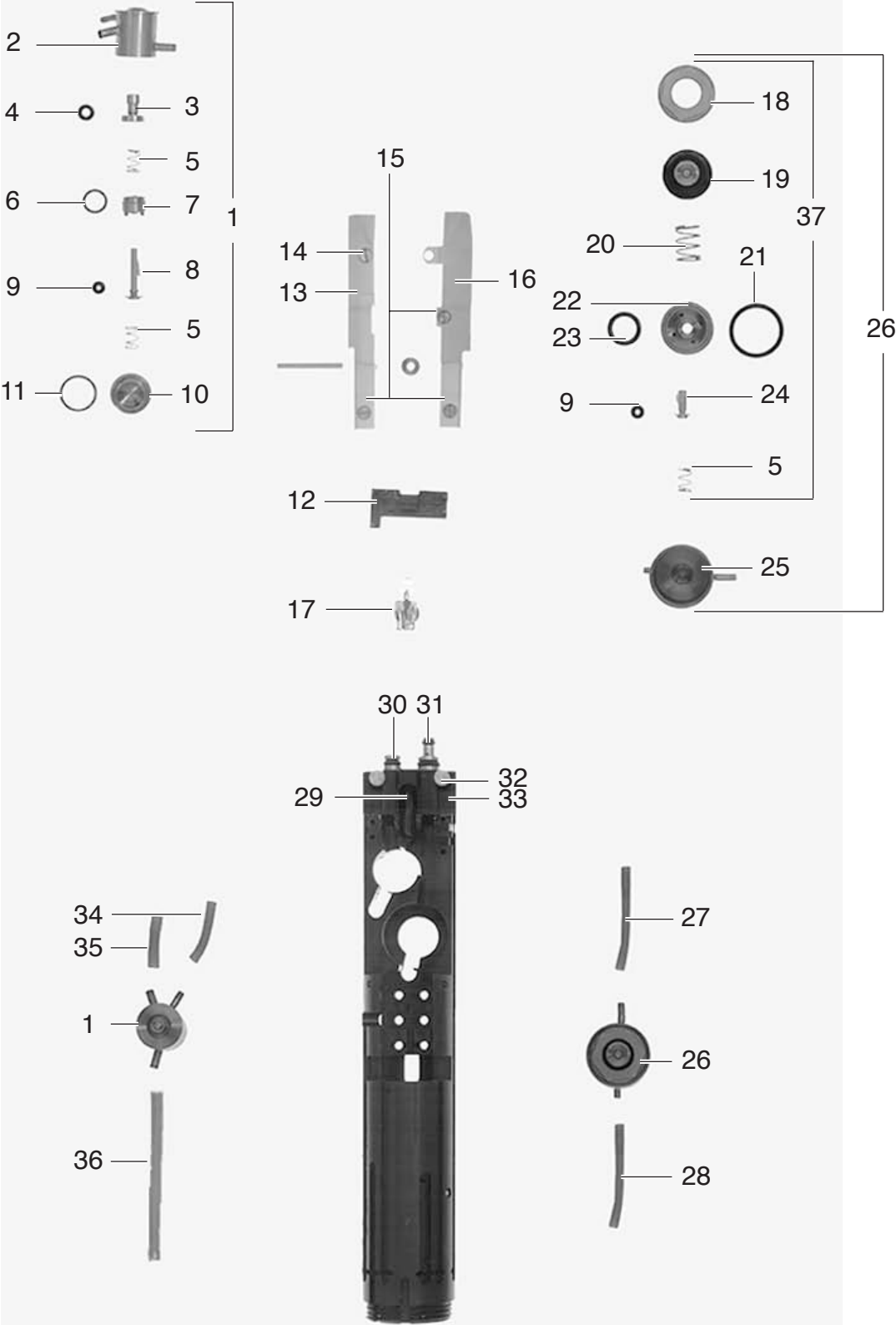




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Luftventil montiert	0.773.0161	Air valve assembly	
2	Luftventilblock vorm.	0.773.0171	Air valve block, preassembled	
3	Luft-Steuerstößel	0.773.0362	Air control plunger	
4	O-Ring	0.200.6061	O-ring	1,5 x 1
5	Druckfeder	0.201.8081	Pressure spring	
6	O-Ring	0.200.6060	O-ring	4 x 0,6
7	L.-Einlage	0.773.0372	Insert	
8	Luft-Ventilstößel	0.773.0352	Air valve plunger	
9	O-Ring	0.200.6035	O-ring	0,7 x 1
10	Luftdeckel	0.773.0382	Air cover	
11	O-Ring	0.200.6153	O-ring	6,5 x 0,6
12	Abdeckung	0.773.0632	Cover	
13	Lufthebel	0.773.0642	Air lever	
14	Gewindestift	0.773.0672	Grub screw	mit Zapfen/with journal
15	Gewindestift	0.773.0682	Grub screw	
16	Wasserhebel	0.773.0652	Water lever	
17	Hochdrucklampe	1.002.2928	High-pressure lamp	1)
18	Membranfassung	0.773.0282	Membrane holder	
19	Druckstück montiert	0.773.0151	Thrust pad, assembled	
20	Druckfeder	0.201.8067	Pressure spring	
21	O-Ring	0.200.6122	O-ring	9 x 1
22	Wasserventileinsatz	0.773.0302	Water valve insert	
23	O-Ring	0.200.6018	O-ring	5 x 1
24	Wasser-Ventilstößel	0.773.0292	Water valve plunger	
25	Wasserventilblock montiert	0.773.0141	Water valve block assembly	
26	Wasserventil montiert	0.773.0131	Water valve assembly	
27	Wasserschlauch	0.773.0592	Water hose	
28	Wasserschlauch	0.773.0602	Water hose	blau/blue
29	Kugel	0.257.4013	Ball	2 mm
	Druckfeder (zu Pos. 29)	0.201.8063	Pressure spring (for item 29)	
30	Luftnippel montiert	0.773.0121	Air nipple, assembled	
31	Spraynippel montiert	0.773.0111	Spray nipple, assembled	
32	Stift	0.773.0702	Pin	
33	Lampenhalter	0.773.0692	Lamp holder	
34	Luftschlauch	0.773.0582	Air hose	
35	Luftschlauch	0.773.0572	Air hose	
36	Luftschlauch	0.773.0612	Air hose	
37	Rep.-Satz Wasserventil	1.003.2358	Repair kit water valve	1)
	Schlüssel zu Wasserventil	0.411.0321	Key for water valve	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



KaVo 1058

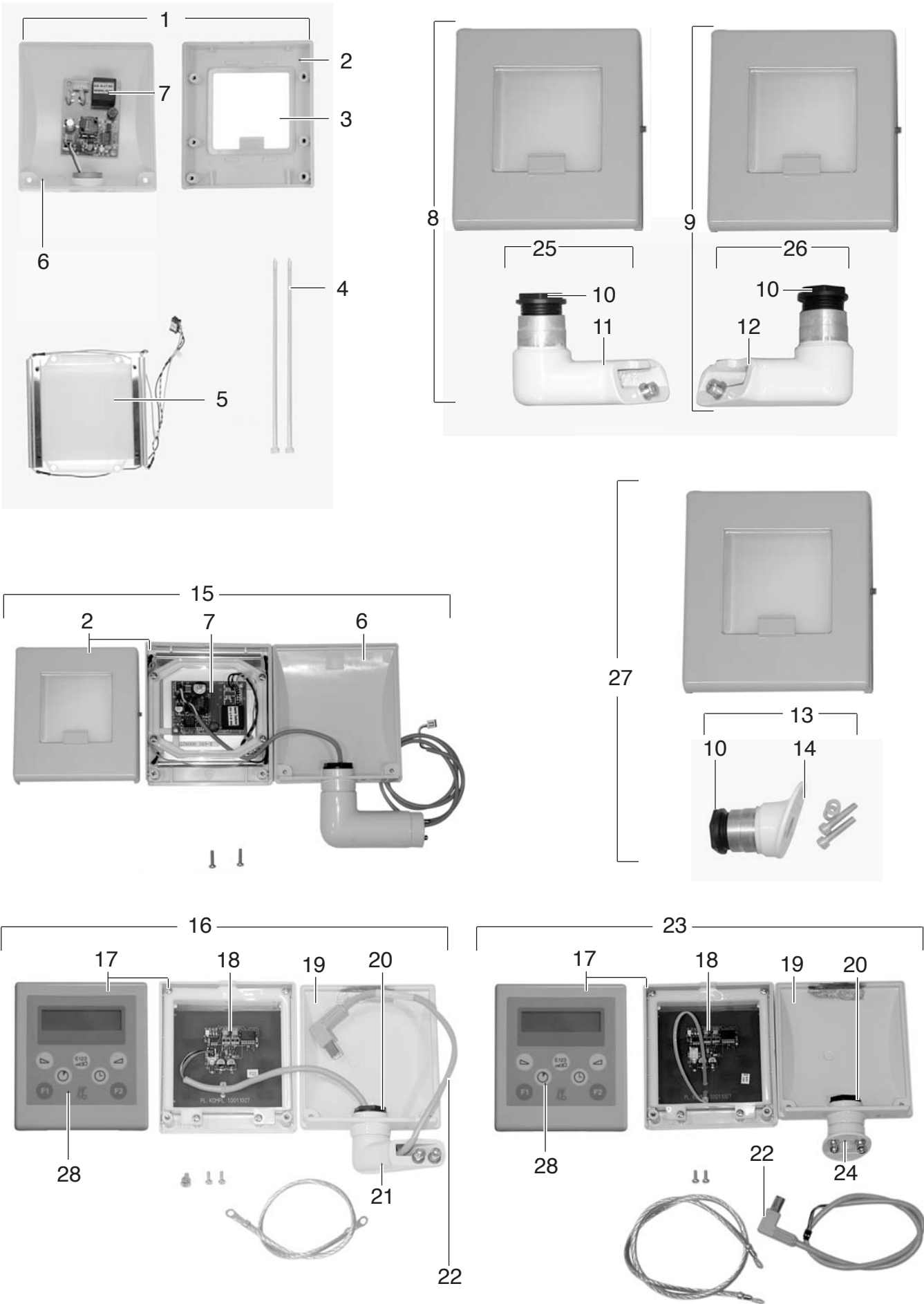




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Röntgenbildbetrachter 5x5	0.740.4861	Viewer	
2	Gehäuseoberteil	0.740.6352	Top part of housing	
3	Fenster	0.740.6372	Window	
4	Kabelband	0.222.6037	Cable tie	
5	Leuchtfeld	0.740.4871	Illuminated area	Röntgenbildbetrachter/ Viewer
6	Gehäuseunterteil	0.740.6342	Bottom part of housing	
7	Kleinbildbetrachter Steuerung	0.226.7017	Viewer control	
8	BS Adapter KBB	1.002.0335	Adapter Viewer kit	1058 TM links/left side incl. KBB/viewer
9	BS Adapter KBB	1.002.0336	Adapter Viewer kit	1058 TM rechts/right side incl. KBB/viewer
10	Mutter	0.201.5020	Nut	
11	Adapter links	0.740.6742	Adapter left side	
12	Adapter rechts	0.740.6762	Adapter right side	
13	BS Adapter KBB/Timer	0.740.4941	Adapter Viewer/Timer kit	1058 S mittig/middle
	BS Adapter KBB/Timer	1.002.0334	Adapter Viewer/Timer kit	1058 S mittig/middle incl. KBB/viewer
14	Adapter KBB/Timer	0.740.6782	Adapter right side Viewer/Timer	1058 S mittig/middle
15	Adapter & RBB 5x5	1.001.5608	Adapter & x-ray viewer 5x5	1058 S links/left side
16	BS Drehzahlanzeige/Timer	1.000.9105	Kit Speed/Timer	1058 TM links/left side mit/with Memospeed
17	Gehäuseoberteil, montiert	1.001.1021	Top part of housing ass.	incl. Bedienfolie
18	Steuerung Drehzahlanz./Timer	1.001.1007	Control Speed/Timer	mit/with Memospeed
19	Gehäuseunterteil	1.000.9108	Bottom part of housing	
20	Mutter	0.201.5020	Nut	
21	Adapter links	0.740.6742	Adapter left side	
22	Leitung USB	1.001.1208	Cable USB	
23	BS Drehzahlanzeige/Timer	1.001.2605	Kit Speed/Timer	1058 S mittig/middle mit/with Memospeed
24	Adapter KBB/Timer	0.740.6782	Adapter right side Viewer/Timer	1058 S mittig/middle
25	Adapter KBB/Timer.	0.740.4981	Adapter Viewer/Timer	links / left side
26	Adapter KBB/Timer	0.740.4991	Adapter Viewer/Timer	rechts / right side
27	Adapter & RBB	1.002.0334	Adapter & Viewer	1058 S mittig/middle incl. KBB/viewer
28	Bedienfolie	1.000.9109	Sensor foil	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

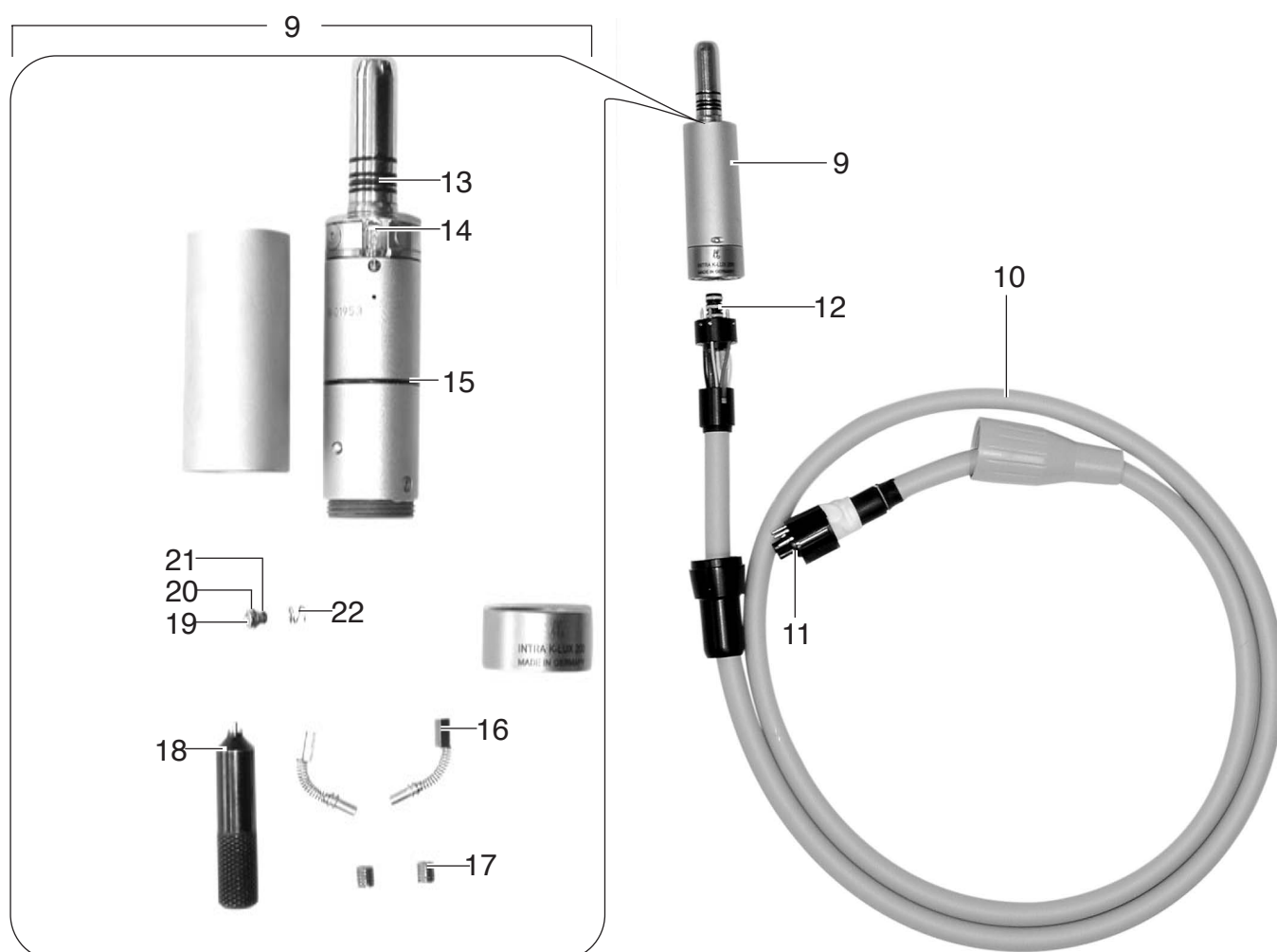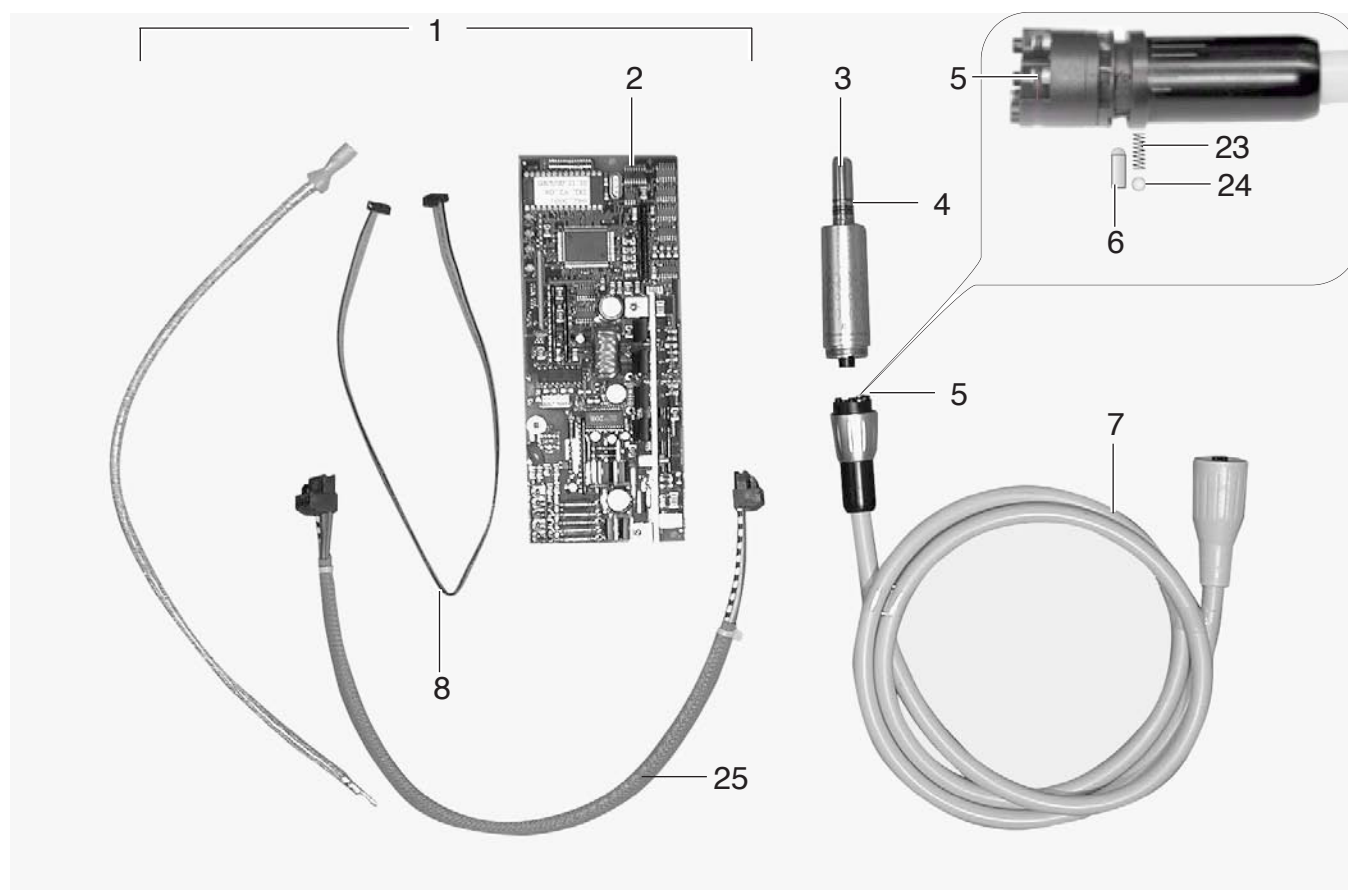

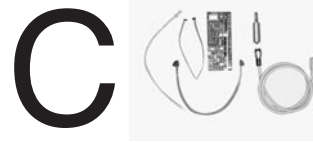

Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Anschluß Motor K/KL	0.728.4051	Kit Connection Motor K/KL	
2	Schaltplatte INTRA KL	0.696.0161	INTRA KL Electronic panel	Rep.AT.Nr./exch.no.0.999.0242 neu ab/new from 12-05
	Schaltplatte KL	1.003.8985	INTRA KL Electronic panel	
3	INTRA LUX Motor KL 701	1.001.8776	INTRA LUX motor KL 701	s. ETB/spare part sheet 1.002.2168
	INTRA LUX Motor KL 700	0.676.1000	INTRA LUX Motor KL 700	Rep.AT.Nr./exch.no.0.999.0550 s. ETB/spare part sheet 0.789.5119
4	O-Ring	0.200.6120	O-ring	1) 4 pro Motor/per motor 8,3 x 0,68
5	O-Ring	0.200.6061	O-ring	1,5 x 1
6	Stößel	0.516.2302	Plunger	Wasserregulierung/ water regulation 1250 mm
7	KL-Motorschlauch	0.516.5810	KL motorhose	
8	Bandleitung	0.223.4178	Cable line	
9	INTRA LUX Motor K 200	1.000.6717	INTRA LUX Motor K 200	s. ETB/spare part sheet 1.002.2169
	Rep. AT Intra Lux K200	1.005.4943		
10	INTRA K Motorschlauch	1.000.5652	K-LUX motorhose	1250 mm
	KL Motorschlauch	0.516.5900	KL motorhose	1058 O HE ab/from 07/2008 1400 mm
11	Dichtung	0.516.5762	Seal	1)
12	O-Ring	0.200.6037	O-ring	1) 3,8 x 1,1
13	O-Ring	0.200.6120	O-ring	1) 4 pro Motor/per motor 8,3 x 0,68
14	Hochdrucklampe	1.002.2928	High pressure lamp	1)
15	O-Ring	0.200.6308	O-ring	1) 17 x 0,8
16	Kohlebürste	0.676.0881	Carbon brush	1) 2Stück pro Motor/2 per motor
17	Gewindebuchse	0.676.1082	Bush	
18	Schlüssel	0.411.0041	Changing tool	
19	Ventilstößel, komplett	0.676.0901	Valve plunger assembly	
20	O-Ring	0.200.6038	O-ring	2,5 x 0,5
21	O-Ring	0.200.6042	O-ring	0,74 x 1,02
22	Druckfeder	0.201.8135	Pressure spring	
23	Druckfeder	0.201.8063	Pressure spring	
24	Kugel 2,0mm	0.257.4013	Ball	
25	Leitung Last	0.728.4341	Line	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.





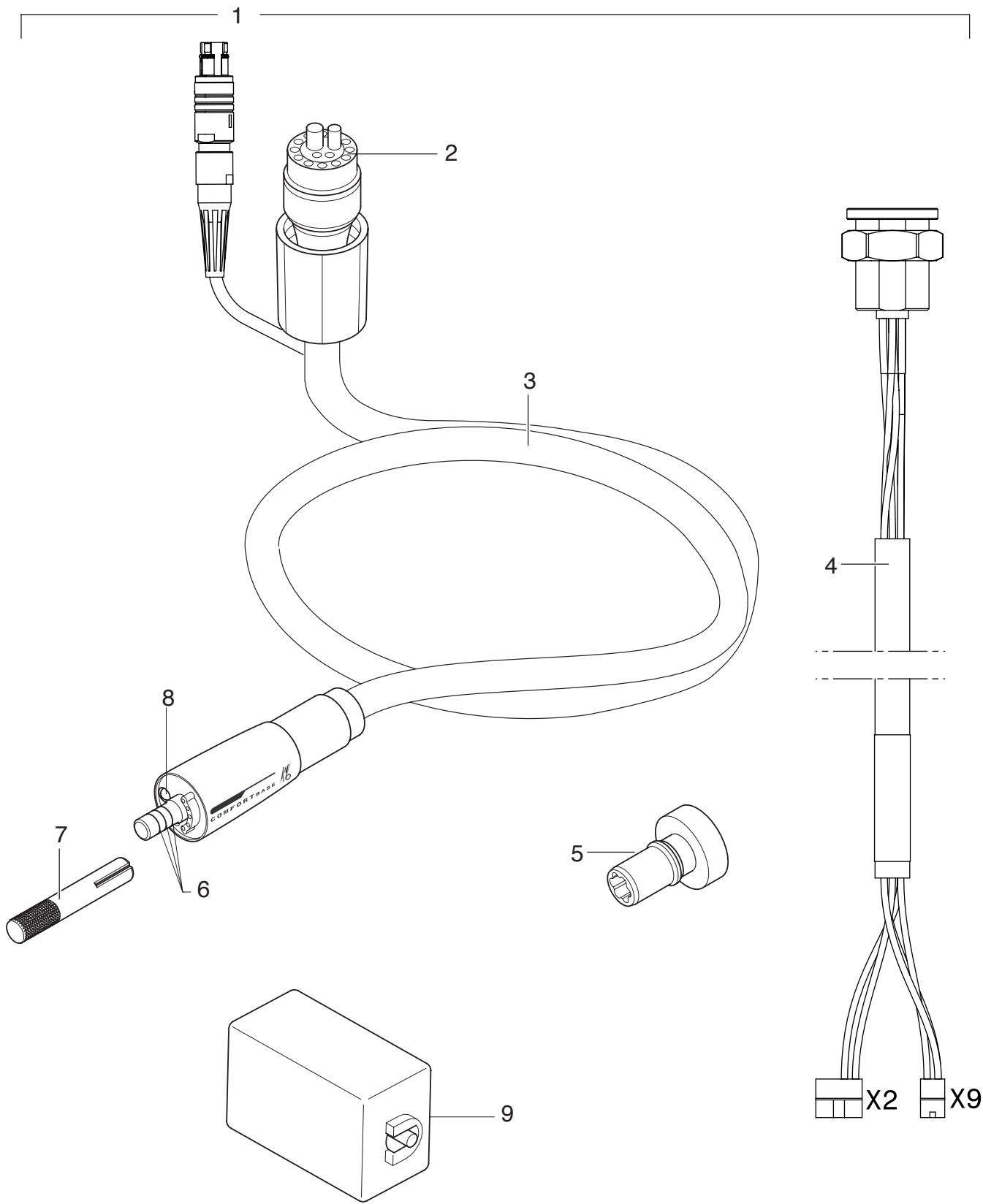




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	NRS COMFORTdrive 1058	1.007.1286	Kit RFK COMFORTdrive 1058	
2	Dichtung	0.516.5762	Washer	
3	COMFORTbase 405 L Schlauch	1.006.1211	COMFORTbase 405 L hose	
4	Leitung COMFORTdrive 1058	1.006.3269	Line COMFORTdrive 1058	
5	Adapter	1.005.6892	Adapter	
6	O-Ring 4,7 x 0,7	1.005.0327	O-ring 4,7 x 0,7	1) 3 pro Motor/per motor
7	Lampenwechsler	1.005.1773	Lamp change over switch	
8	Hochdrucklampe	1.002.2928	High pressure lamp	1)
9	Klappferrit	0.221.4837	Ferrit	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058

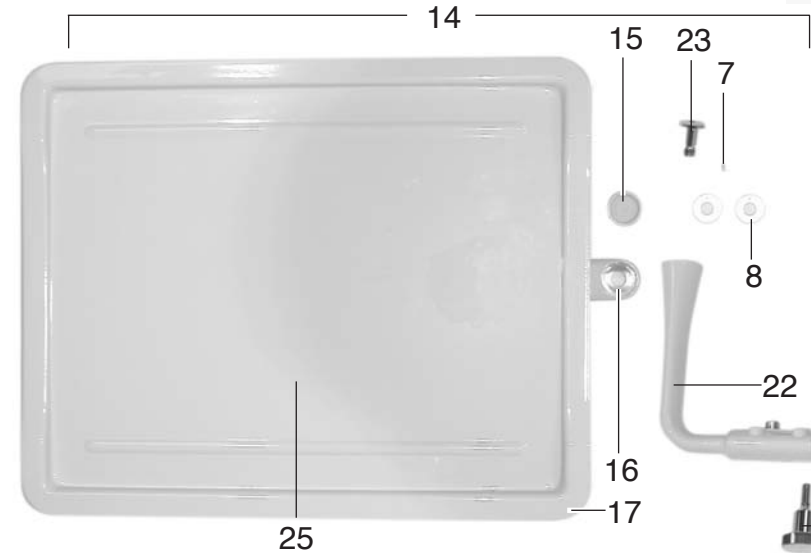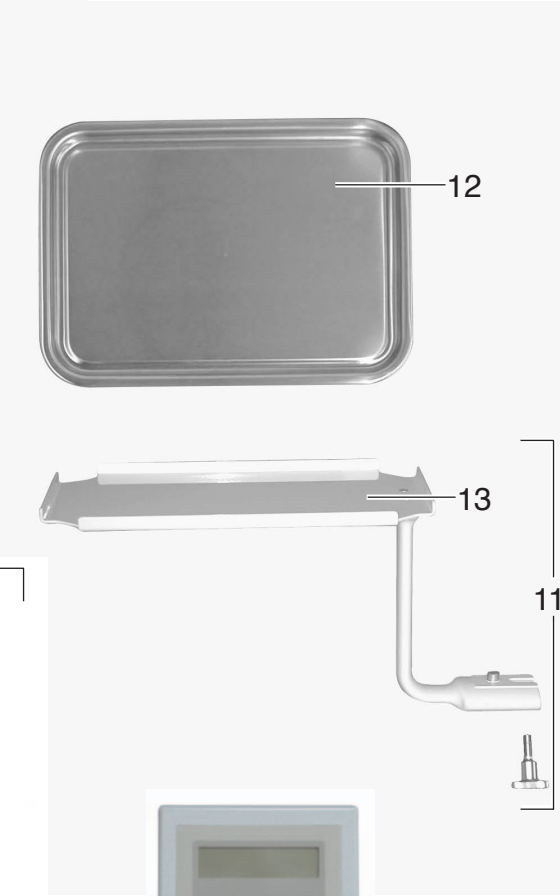
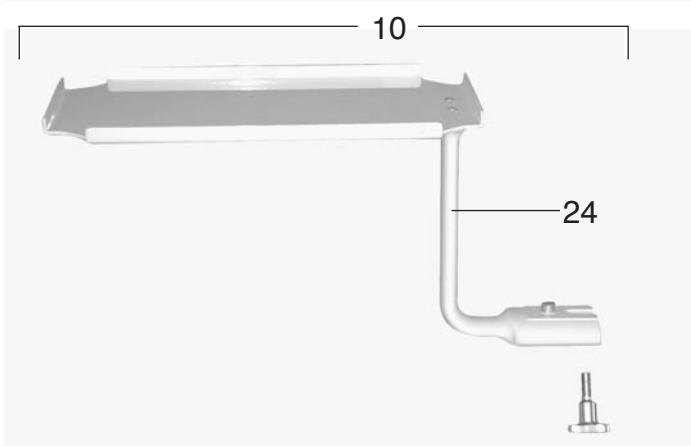
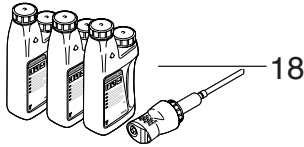
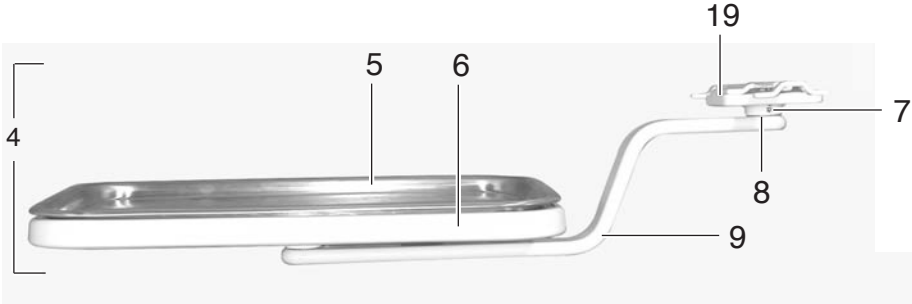




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Becherständer	0.719.4280	Cup stand	
2	O-Ring	0.200.6717	O-ring	57 x 3,5
4	BS Tray-Ablage	1.000.3698	Kit Tray support	f. ameri. tray 1058 S ohne/without Tray
	BS Tray-Ablage	1.000.3697	Kit Tray support	f. 2 Normtrays 1058 S ohne/without Tray
5	amerikanisches Tray	0.725.8152	American tray	
6	Tablett	0.725.6071	Tray	f. ameri. tray
	Tablett	0.725.0343	Tray	f. 2 Normtrays
7	Gewindestift	0.249.6583	Grub screw	M3 x 6
	Sechskantmutter	0.251.1010	Hexagonal nut	M3
8	Anlaufscheibe	0.220.0763	Thrust ring	
9	Tablettarm	1.000.3729	Tray arm	50mm
	Tablettarm 145 mm hoch	0.725.0333	Tray arm	145 mm
	Tablettarm 92 mm hoch	0.725.0193	Tray arm	92 mm
10	BS Trayhalter	1.000.2034	Tray holder kit	f. norm trays
	Instrumententablett, standard	0.719.1070	Instrument tray standard	
	2x Tablett + 1x Instrumentenbank			
11	BS Trayhalter	1.000.2033	Tray holder kit	f. ameri. tray
12	Amerikanisches Tablett	0.725.8152	American tray	
13	Tablettaufnahme f. US-Tray	1.000.2085	Holder for american tray	
14	BS Trayhalter	1.000.9976	Tray holder kit	2 Normtray schwenkbar/ swivel-mounted
15	Blindabdeckung	1.002.4684	Blank cover	
	O-Ring (zu Pos. 15)	0.200.6401	O-ring (for item 15)	20 x 2
16	Tablettarm	1.000.9975	Tray arm	
	Tablettaufnahme (zu Pos. 16)	0.725.0323	Holder (for item 16)	
17	Tablett	0.725.6051	Tray	
18	Beginner Set Dekaseptol	1.000.7204	Beginner Set Dekaseptol	3 x 1 l
	Nachfüllkanister Dekaseptol	1.000.7205	Refill can Dekaseptol	6 l
	Dosier Dispenser Dekaseptol	1.000.7206	Dosing dispenser Dekaseptol	
19	Aufnahme	0.725.0323	Receptacle	
	Teststreifen Wasser	0.229.5004	Test strip water	
	Tube Silikonfett	1.000.6403	Silicone grease tube	
	Tube Lagerfett	1.001.8521	Bearing grease tube	
20	Service-Tester I ² C	1.003.2212	Service-Tester I ² C	ab/from 10-05, Prog. 3.4
21	Stellschraube	1.000.1524	Ajusting screw	
22	Adapter	1.000.9973	Adapter	
23	Stellschraube	0.725.0033	Ajsuting screw	
24	Adapter	1.000.1522	Adapter	
25	Antirutschmatte	0.710.7072	Anti gliss mat	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

KaVo 1058 C/G

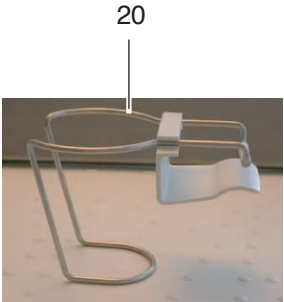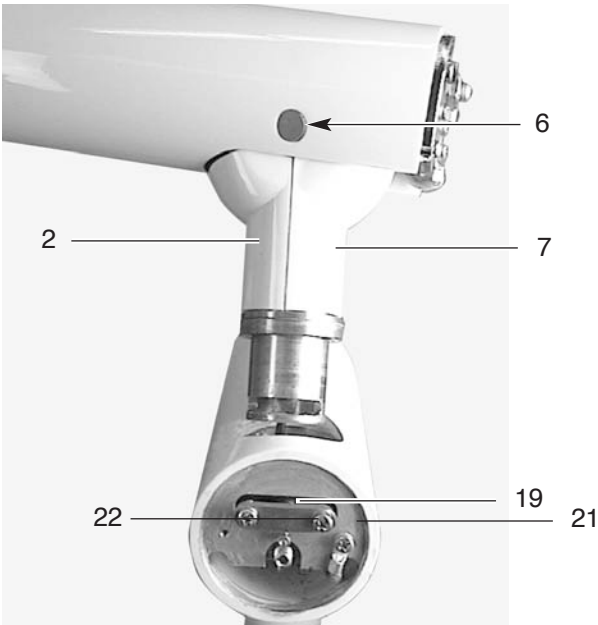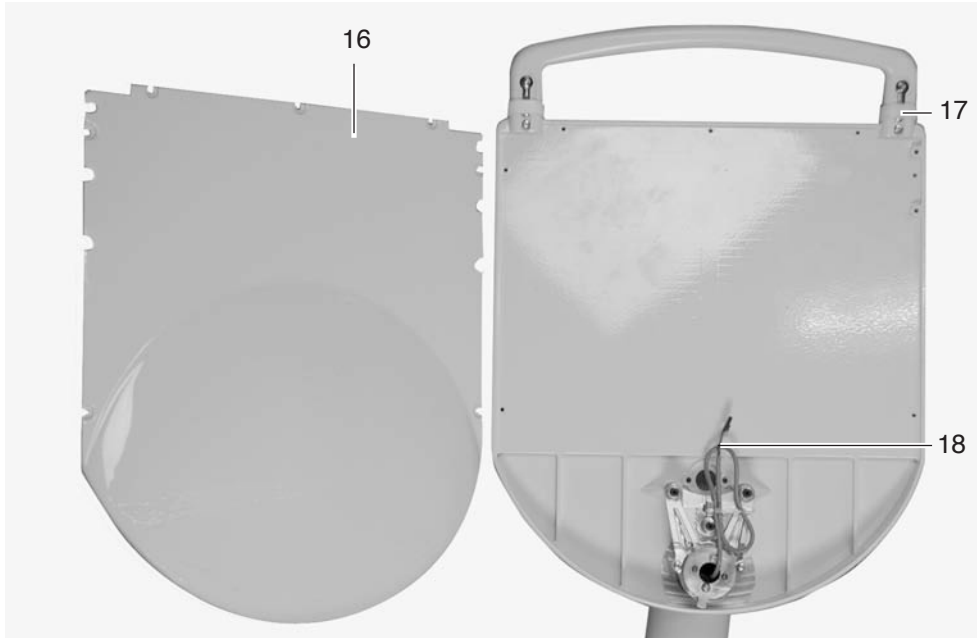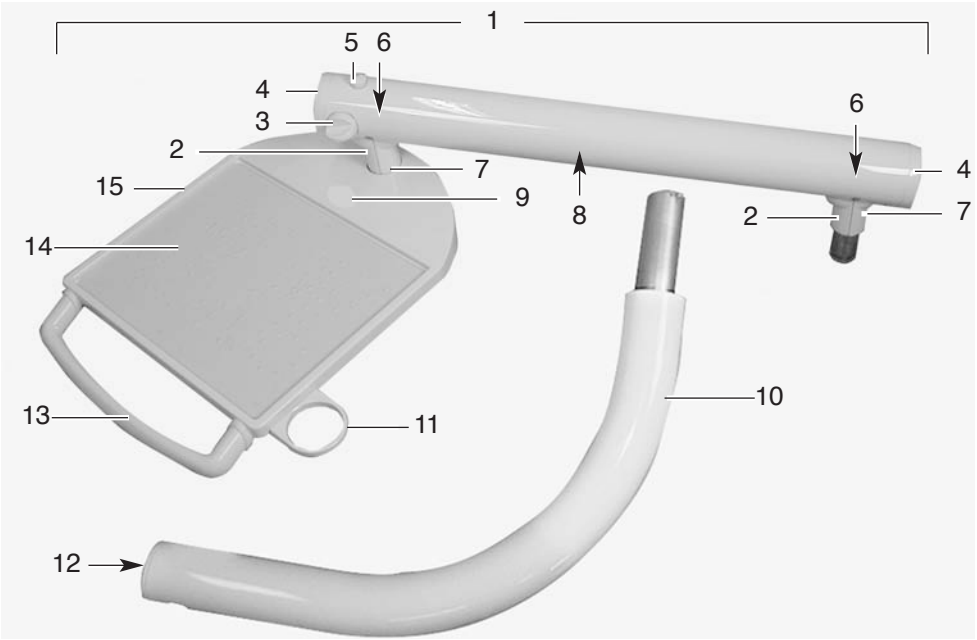




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Service-Tisch 1568	1.000.2156	Cervical table 1568	
	BS Erweiterung Servicetisch	1.002.2111		
2	Abdeckung, links	0.213.4742	Cover, left	
3	Drehknopf	0.724.6442	Rotary button	
	Klemmstück (zu Pos. 3)	0.724.7122	Clamp bolt (for item 3)	
4	Abdeckung	0.213.4722	Cover	
	Schnäpper (zu Pos. 4)	0.764.3933	Catch (for item 4)	
5	Deckel	0.724.8632	Cover	
	Heber (zu Pos. 5)	0.724.8612	Spiral insert (for item 5)	
	Druckfeder (zu Pos. 5)	0.201.7035	Pressure spring (for item 5)	
6	Bundbuchse	0.220.1322	Bush	
	Buchse (zu Pos. 6)	0.220.1323	Bush (for item 6)	
7	Abdeckung, rechts	0.213.4732	Cover, right	
8	Gasdruckfeder 1500N	0.220.1522	Pneumatic spring 1500N	Servicetisch ohne 1440
	Gasdruckfeder 1900N	0.220.1517	Pneumatic spring 1900N	Cervical table without 1440
	Gelenkauge (zu Pos. 8)	0.724.8502	Joint eye (for item 8)	Servicetisch mit 1440
9	Abdeckung, M	0.725.4481	Cover, M	Cervical table with 1440
10	Schwenkarm	1.000.3432	Swivel arm	
11	Becheraufnahme	0.725.0403	Receptacle	
12	Abdeckung	0.213.4712	Cover	
	Schnäpper (zu Pos. 12)	0.764.3933	Catch (for item 12)	
13	Griff	0.710.7012	Handle	
14	Antirutschmatte	0.710.7072	Non-slip mat	
	Einlage	1.002.2873	Insert	Edelstahl/inox
15	Tablett	0.725.0393	Tray	
16	Abdeckung	0.725.0463	Cover	
17	Anschlußstück	0.725.0443	Connector	
18	Leitung	0.740.3971	Wire	1440
19	Bremssegment	0.214.0332	Brake segment	
	Druckfeder (zu Pos. 19)	0.201.8173	Pressure spring (for item 19)	
20	Becherhalter, komplett	1.002.4499	Cup support	
21	Schraube	0.261.5103	Screw	
22	Platte	0.724.7602	Base	

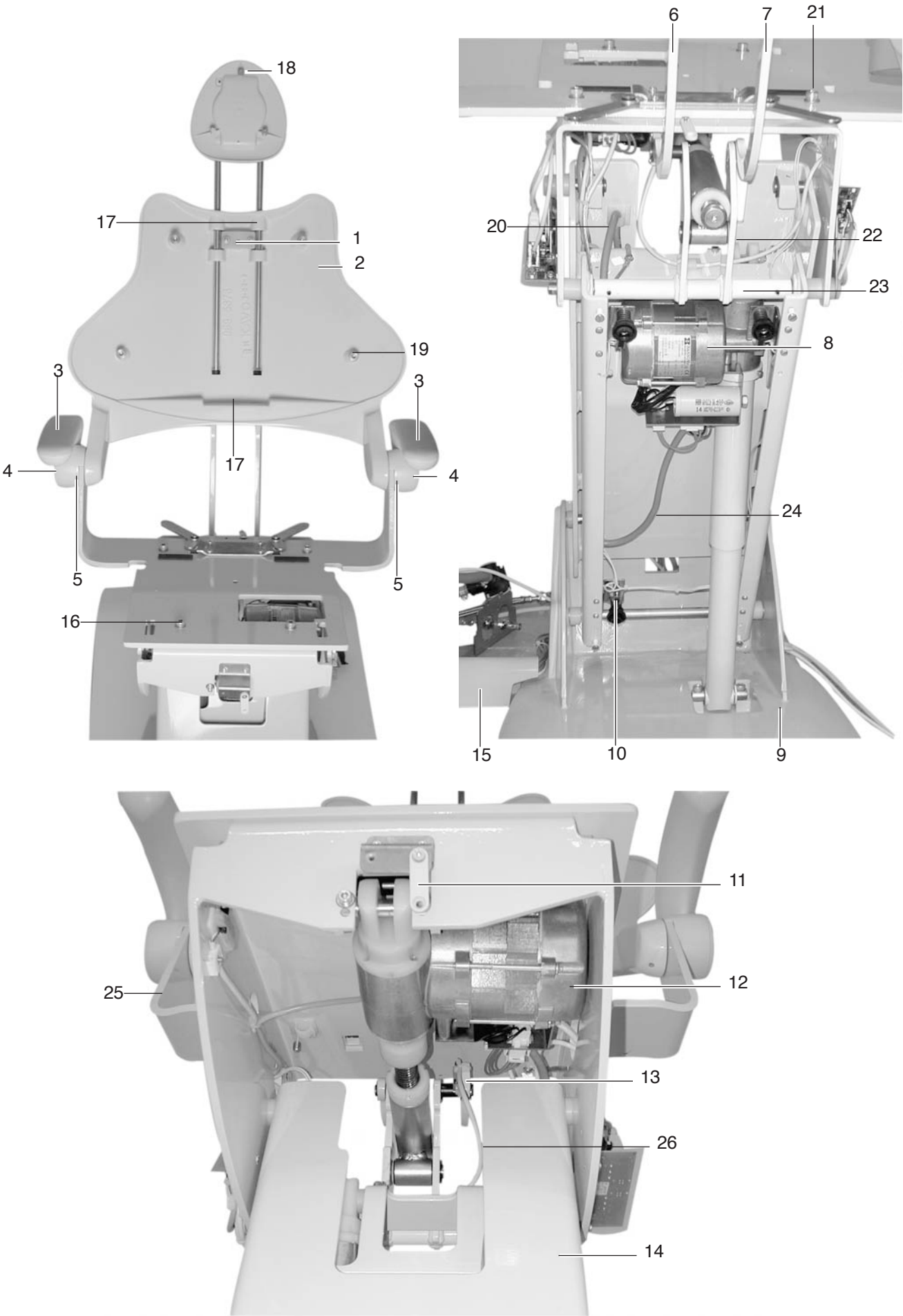



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Bremse	0.988.0746	Brake	
2	Rückenlehne	0.988.9423	Backrest	ohne Polster/without cushion
3	Armlehne kpl	0.988.9422	Arm cap ass.	
4	Abdeckung	1.003.7372	Cover	anstelle Armlehne/ instead of Armrest
	Schraube M6x55	1.004.4549		
	Buchse	1.004.4548		
5	Abstandsstück	0.988.9421	Spacer	
6	Hebel	0.988.9432	Lever	f. Mikroschalter/Microswitch
7	Hebel Rückenlehne	0.988.9715	Lever Backrest	
8	Spindelmotor	0.988.9420	Spindle motor	Basis/Base
	Rep AT	1.006.5112		
9	Stuhlbasis	0.988.9474	Chair base	
10	Mikroschalter	0.223.2169	Microswitch	zum Anlöten / to solder on Sicherheitsblech unten/ Safety plate below
11	Verbindungsstück	0.988.9471	Connecting piece	
12	Spindelmotor	1.002.6836	Spindle motor	Rückenlehne/Backrest
	Rep AT	1.006.5113		
13	Mikroschalter	0.223.2169	Microswitch	zum Anlöten / to solder on Rückenlehne/Backrest
14	Träger Parallelogramm	0.988.9466	Support	
15	Kanal rechtshänder	1.001.0946	Duct right-hander	
	Kanal linkshänder	1.001.2842	Duct left-hander	
	Abdeckung	0.988.9434	Cover	anstelle Kanal/ instead of Duct
16	Schraube	0.249.4212	Screw	
	U-Scheibe	0.261.4010	Disc (for item 16)	
17	Achse	0.988.9747	Axis	
	Scheibe	0.274.4456	Disc (for item 17)	
	Schraube	0.275.0561	Screw (for item 17)	
	O-Ring	0.272.3255	O-ring (for item 17)	
18	Spezialschraube	1.003.0650	Screw	
19	Spezialschraube	0.988.9725	Screw	
20	Leitung Motor Rückenlehne	1.004.2117	Line mot. backrest	
21	Schraube M8	0.275.022?	Screw	
22	Achse	1.003.43??	Axis	
	Buchse	0.988.70??	Bush	
23	Support	1.003.9922	Support	
24	Leitung Motor Basis	1.004.21??	Line motor basis	
25	Leitung Sicherh. Schaltung Sitzbank	1.004.2107	Line	
26	Leitung Sicherh. Schaltung Rücklehne	1.004.2099	Line	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

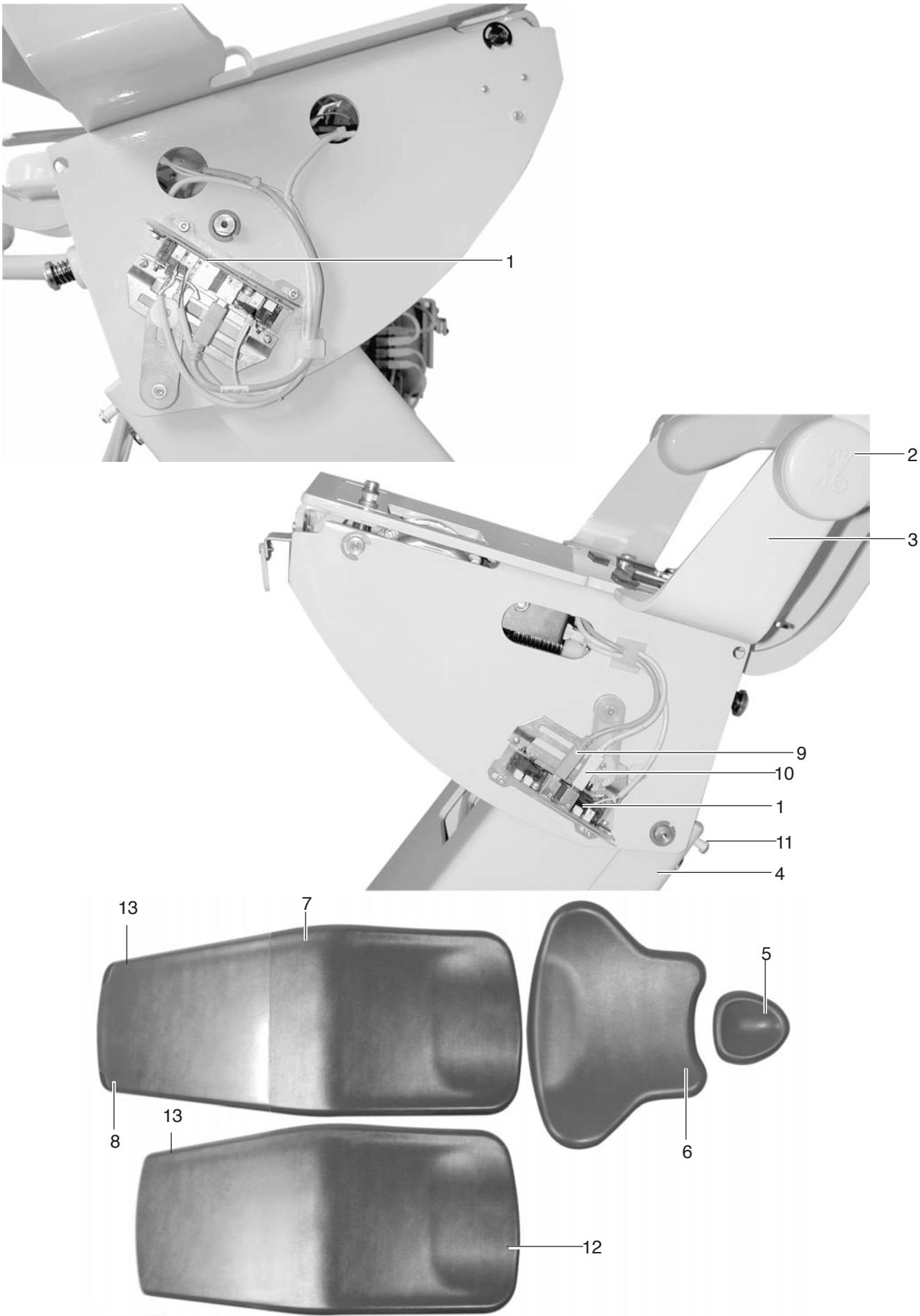



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Wegaufnehmer	0.790.8691	Position pick up	
2	Deckel	0.272.2897	Cover	
3	Träger	0.988.9457	Support	
4	Abdeckung, unten	0.988.9434	Cover	
5	Kopfpolster	1.001.4556	Headrest cushion standard	Farbe angeben/specify color
	Kopfpolster soft	1.006.4368	Headrest cushion soft	
6	Rückenpolster	1.001.4558	Backrest cushion	Farbe angeben/specify color
	Rückenpolster soft	1.006.5181	Backrest cushion soft	
7	Sitzpolster	1.001.4564	Seat cushion	Farbe angeben/specify color
	Sitzpolster soft	1.006.5180	Seat cushion soft	
8	Fußbankschutz	1.001.5845	Seat foot protection	
9	Leitung USB	0.223.4217	Cable USB	2500 mm
10	Leitung USB	1.001.5672	Cable USB	900 mm
11	Bundbuchse	0.274.4057	Flange sleeve	
12	Sitzpolster 1058 kurz	1.002.0888	Seat cushion 1058 short	Farbe angeben/specify color
13	Polsterrahmen	0.988.9469	Upholstery square	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

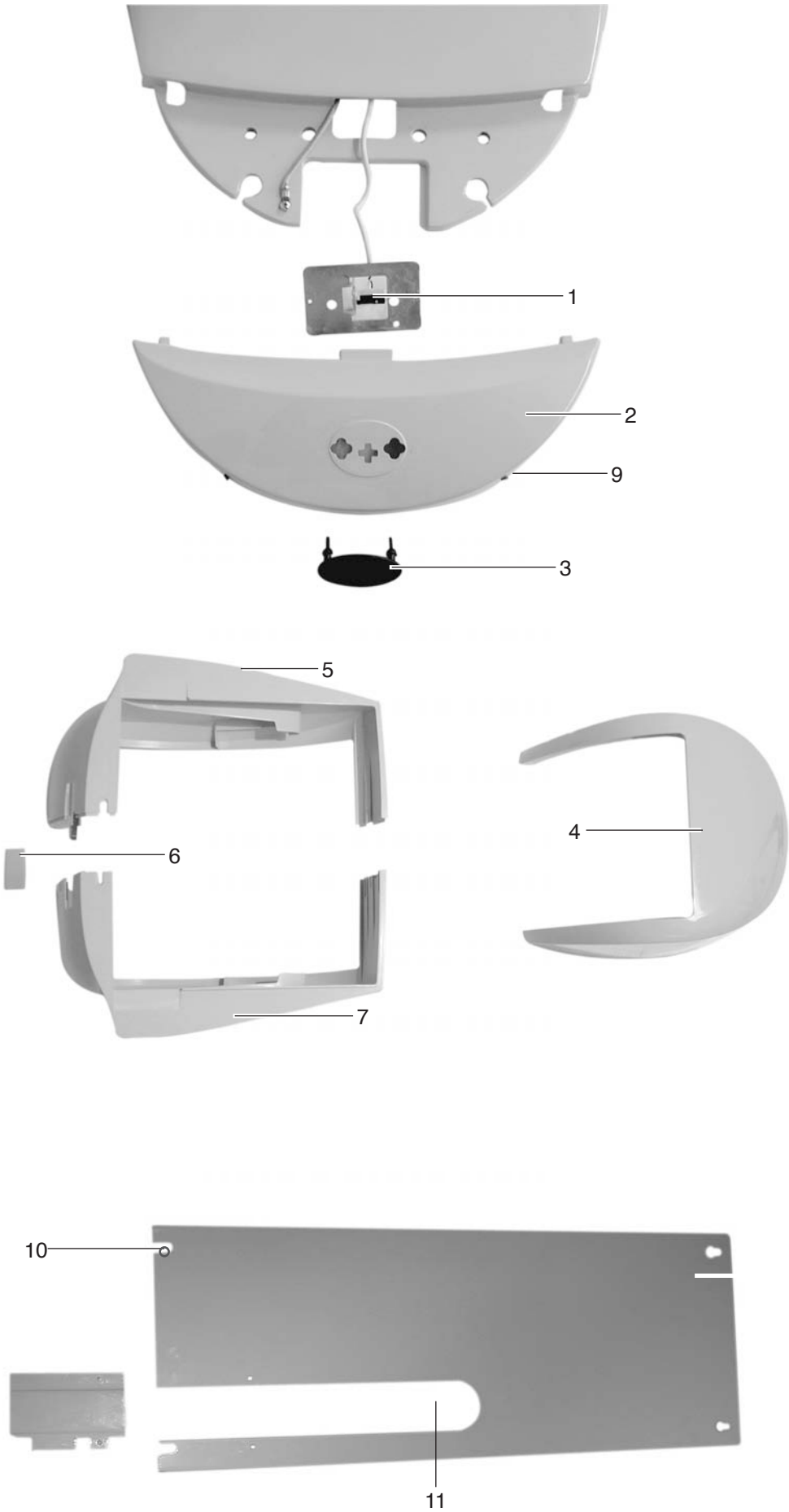



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Mikroschalter	0.223.2168	Microswitch	zum Anlöten / to solder on
	Schaltaufnahme (zu Pos. 1)	0.764.6403	Switch holder (for item 1)	
2	Stuhlfussanlasser	0.988.9416	Starter for chair	
3	Steuerungsknopf	0.989.1225	Control button	
4	Basis Abdeckung	0.988.9411	Cover base	
5	Stuhlabdeckung	0.988.9412	Cover chair	
6	Kappe	0.988.9472	Cap	
7	Stuhlabdeckung	0.988.9413	Cover chair	
8	Abdeckung	0.988.9434	Cover	unten/below
9	Einsatz	0.988.6062	Insert	
	SK Schraube M4x25 (zu Pos9)	0.270.0887	Screw (for item 9)	
10	Buchse	0.274.4057	Bush	
11	Spindelabdeckung	0.988.9764	Spindle cover	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

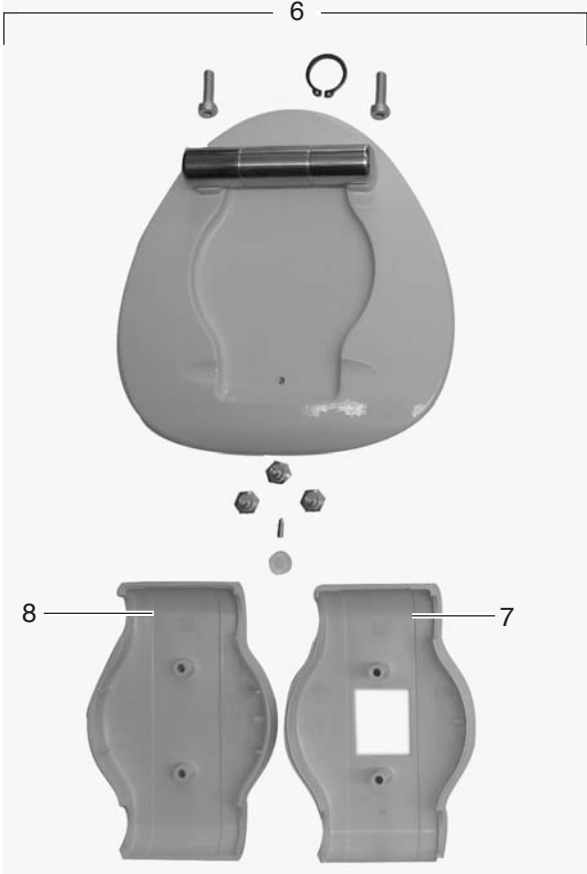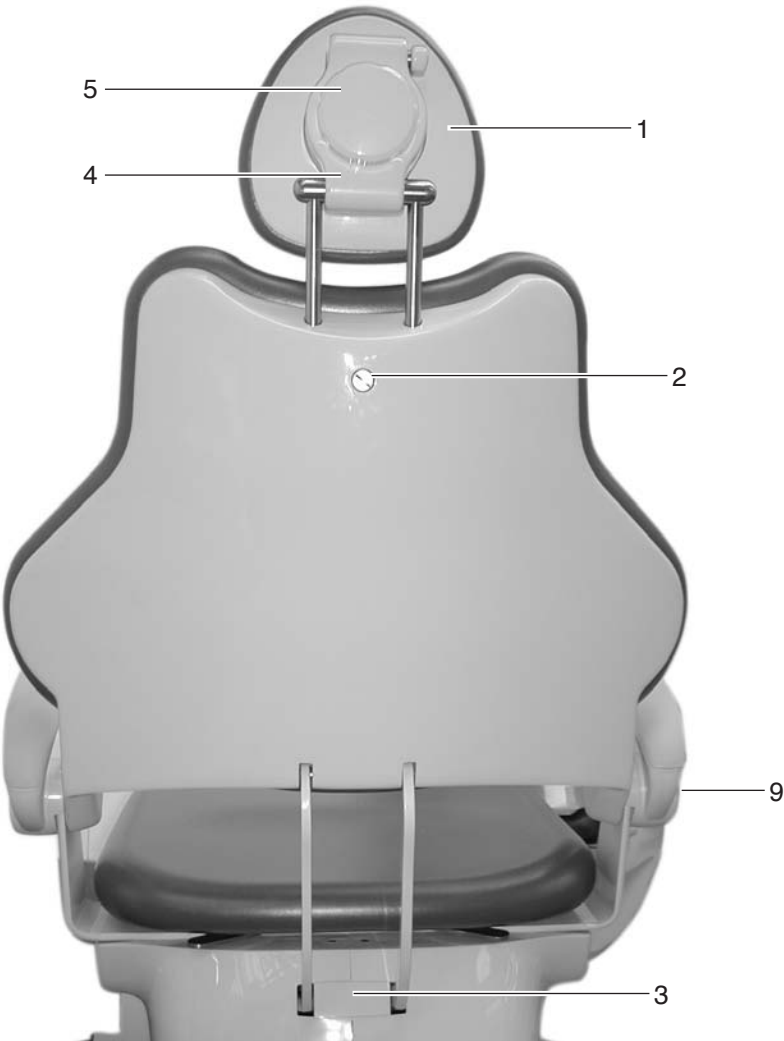




Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Kopfstütze komplett	0.988.9410	Headrest assembly	
2	Bremsknopf	0.988.9722	Brake knob	
3	Blende	0.988.9472	Cover	
4	Abdeckung hinten	0.988.9425	Cover back	mit Aussparung/with clearance
	Abdeckung vorne	0.988.9427	Cover front	
5	Drehknopf	0.988.9429	turning knob	
6	Bausatz Kopfstütze	1.002.7478	Headrest kit	
7	Abdeckung	0.988.9425	Cover	mit Aussparung / with clearance
8	Abdeckung	0.988.9427	Cover	
9	Abdeckung	0.272.2897	Cover	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.


KaVo 1058

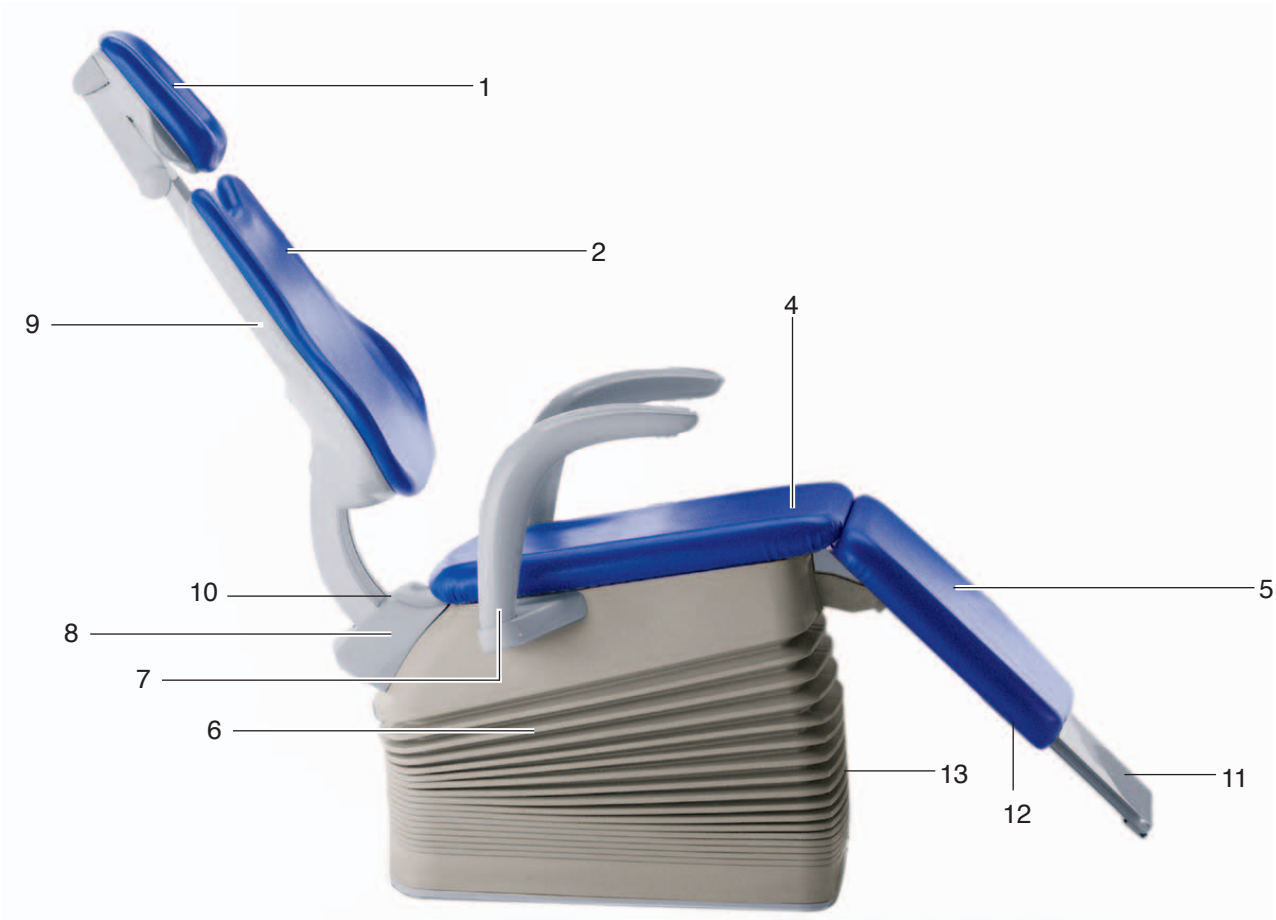



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Kopfstütze 2-Gelenk	0.790.4871	Headrest	
2-joints kit	Druckknopf/snap-fastener s. Seite/page 126			
	Kopfpolster Ergo soft	1.004.9162		
	oder BS Kopfstütze 2-Gelenk	1.003.5074	or Headrest 2-joints kit	Drehknopf/knob s.Seite/page 124
2	Rückenlehnenpolster Progress	0.790.8951	Backrest upholstery Progress	Farbe angeben/specify color
	Rücklehnenposter P soft	1.005.0873		
3	Rückenlehnenpolster Comfort	0.790.7001	Backrest upholstery Comfort	Farbe angeben/specify color
	Rückenlehnenpolster C soft	1.005.0874		
4	Sitzpolster	1.003.0543	Seat upholstery	Farbe angeben/specify color
	Sitzpolster soft	1.006.4370		
5	Beinpolster	1.003.1175	Leg upholstery	Farbe angeben/specify color
	Beinpolster soft	1.006.4369		
	Schraube für Beinpolsterbef.	0.261.5128		
6	Faltenbalg	1.003.1900	Rubber cover	
7	Armlehne re. li.	1.003.2416	Right-left-hand armrest	s. Seite/page 1222
8	Verkleidung	1.003.1901	Cover	
9	BS Rückenlehne Progress	1.000.3651	Kit Backrest Progress	s. Seite/page 124
	oder BS Rückenlehne Comfort	1.000.3326	or Kit Backrest Comfort	s. Seite/page 130
	oder BS Kopfstütze mot.	1.000.3650	or Motorized Headrest	mit Rückenlehne Progress/ with Backrest Progress
				s. Seite/page 128
	oder BS Kopfstütze mot.	1.000.3511	or motorized Headrest	mit Rückenlehne Comfort/ with Backrest Comfort
				s. Seite/page 130
10	Zwischenstück	1.003.4482	Spacer	
11	Magnetfolie	1.003.????	Magnetic foil	
12	Schrauben für Beinpolster	0.261.5128	Screw	
13	Kanalabdeckung	1.003.0635	Cover	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

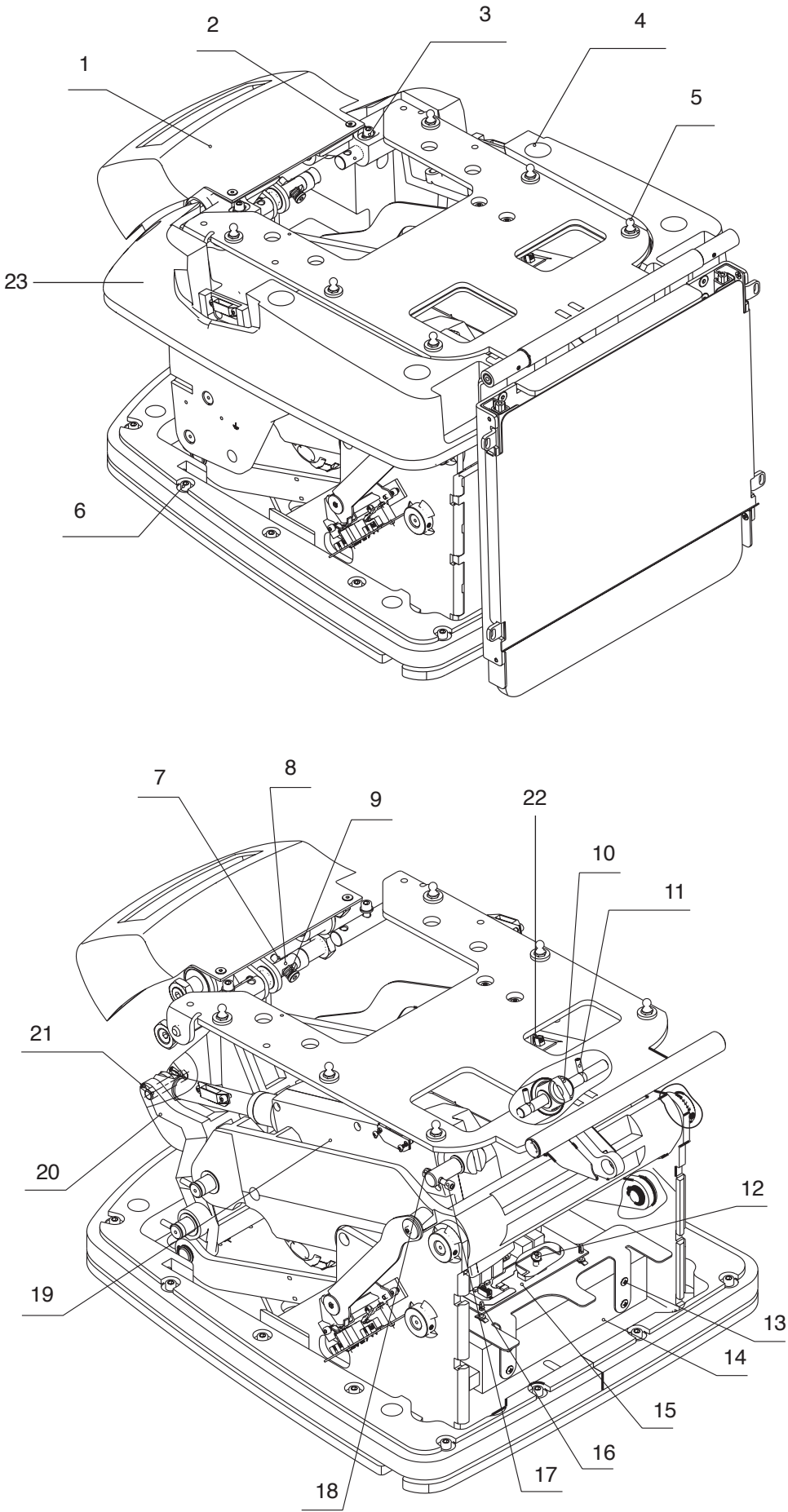



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Verkleidung	1.003.1901	Encasement	
2	Senkschraube M 5x10	0.260.9019	SCREW	
3	Zylinderschraube M 6x16	0.249.4197	Cylindrical screw M 6x16	
	Scheibe 6,4 (zu Pos. 3)	0.242.4018	WASHER	
4	Zylinderschraube M 6x50	0.249.4206	SCREW	
	Scheibe B 6,4 (zu Pos. 4)	0.261.4008	WASHER	
5	Kugel-Bolzen D8	1.003.0790	BOLT	
6	Zylinderschraube M 6x30	0.249.4202	Cylindrical screw M 6x30	
	Scheibe B 6,4 (zu Pos. 4)	0.261.4008	WASHER	
7	Schaftschraube M6	0.201.1243	SHAFT SCREW	
8	Lagerachse	0.790.6153	SHAFT	
9	Druckfeder	0.201.8232	SPRING	
10	Spindelantrieb Basis	1.003.0633	MOTOR	
11	Gewindestift M 5x10	0.249.6221	PIN	
12	Zylinderschraube M 5 x 8	0.249.4178	SCREW	
13	Linsenschraube M 4 x 6	0.261.5095	COUNTER SCREW	
14	Schaltnetzteil SP-320-27	1.003.3685	POWER SUPPLY	
15	Strg. DC- MOT- Endstufe	1.002.8885	Control DC-Engines	
16	Abstandshalter 9,5	1.002.3684	DISTANCE HOLDER	
17	Zylinderschraube M 6x35	0.249.4203	SCREW	
18	Sechskantmutter M 6	0.251.5807	6-KT MUTTER	
19	Spindelantrieb Rücken	1.003.0634	MOTOR	
20	Hebel	1.002.6516	lever	
21	Gewindestift M 5x10	0.249.6221	PIN	
22	Wegaufnehmer	0.790.8691	Position pick up	Rückenlehne/Backrest
23	Oberteil (alt)	1.003.1903	Upper cover	




1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

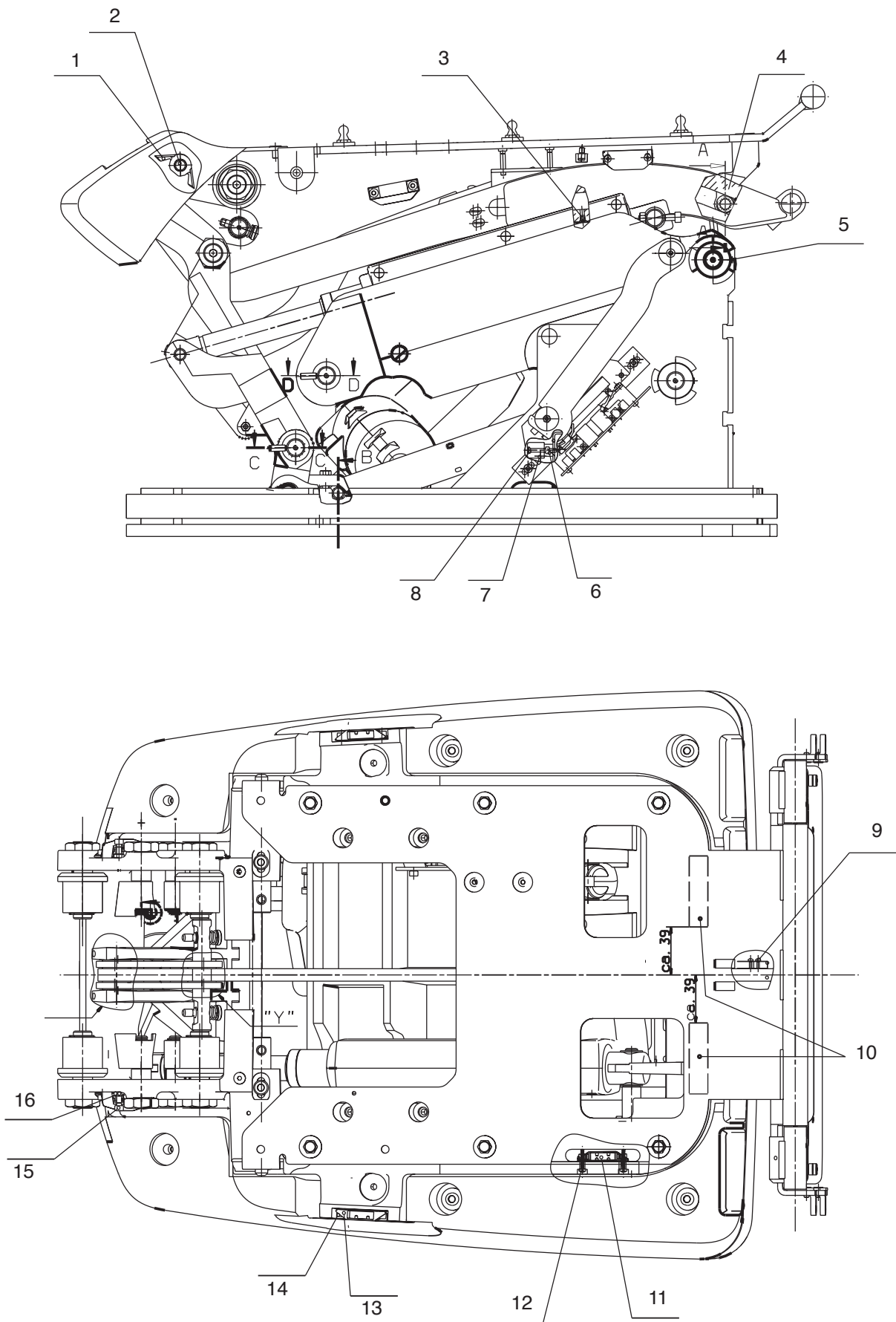



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Abstreifer	1.003.4319	FENDER	
2	Exzenter	0.790.6133	ECCENTRIC	
3	Senkschraube M 4 x 6	0.251.4544	COUNTER SINK SCREW	
4	Sicherungsscheibe 7	0.258.6011	SAFETY WASHER	
5	Gewindestift M 5x10	0.249.6221	PIN	
6	Zylinderschraube M 3 x 6	0.249.4152	ROUND SCREW	
7	Hutschelle	0.222.6052	Clamp	
8	Linsenschraube M 3x16	0.261.5037	SCREW, M3 x .5 x 16 ZP	
9	Linsenschraube M 2x10	0.261.4976	OVAL HEAD SCREW	
10	Platte	0.220.0452	Base	
11	Mikroschalter	0.223.2169	Micro switch	Sicherheitsschalter Armstütze/security switch armrest
	Schaltergehäuse zu Pos. 11	0.764.4633	SWITCH HOUSING for item 11	
12	Halbrundschraube 3x16 EJOT	0.260.9558	SCREW	
13	Mikroschalter	0.223.2405	Micro switch	Sicherheitschalter Sitzbank/security switch seat
	Schaltergehäuse zu Pos. 13	0.790.9932	SWITCH CASE for item 13	
14	Zylinderschraube M 4 x 6	0.249.4164	Cylindrical screw M 4x6	
15	Zylinderschraube M 4 x 20	0.249.4171	ROUND SCREW	
16	Sechskantmutter M 4	0.251.1012	HEXAGONAL NUT	
	Kanalabdeckung	1.003.0635	Cover	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

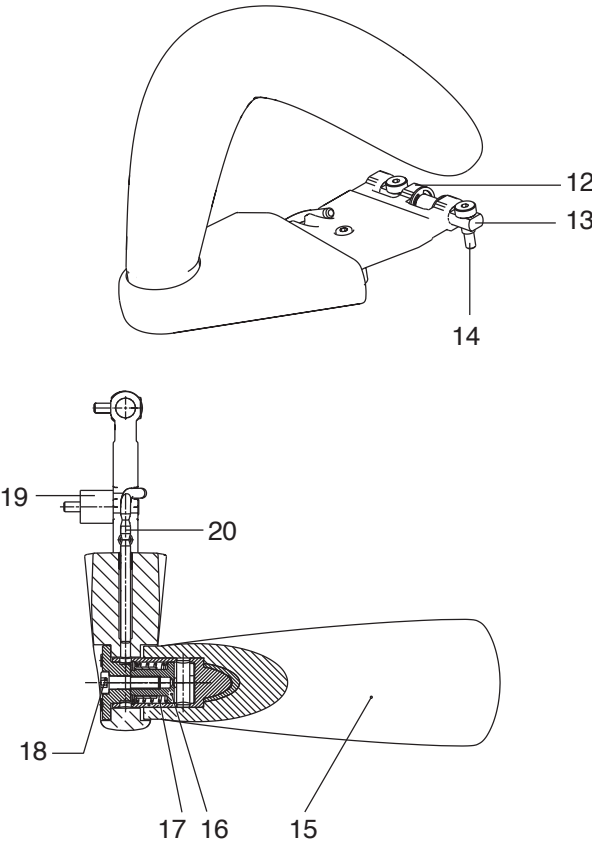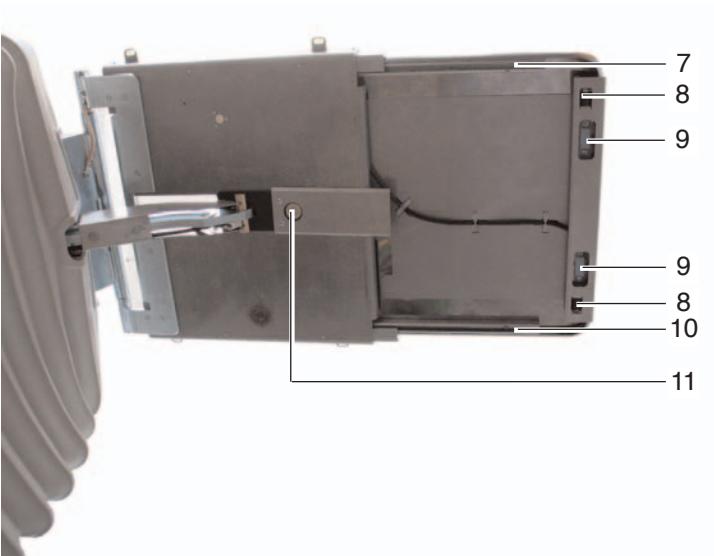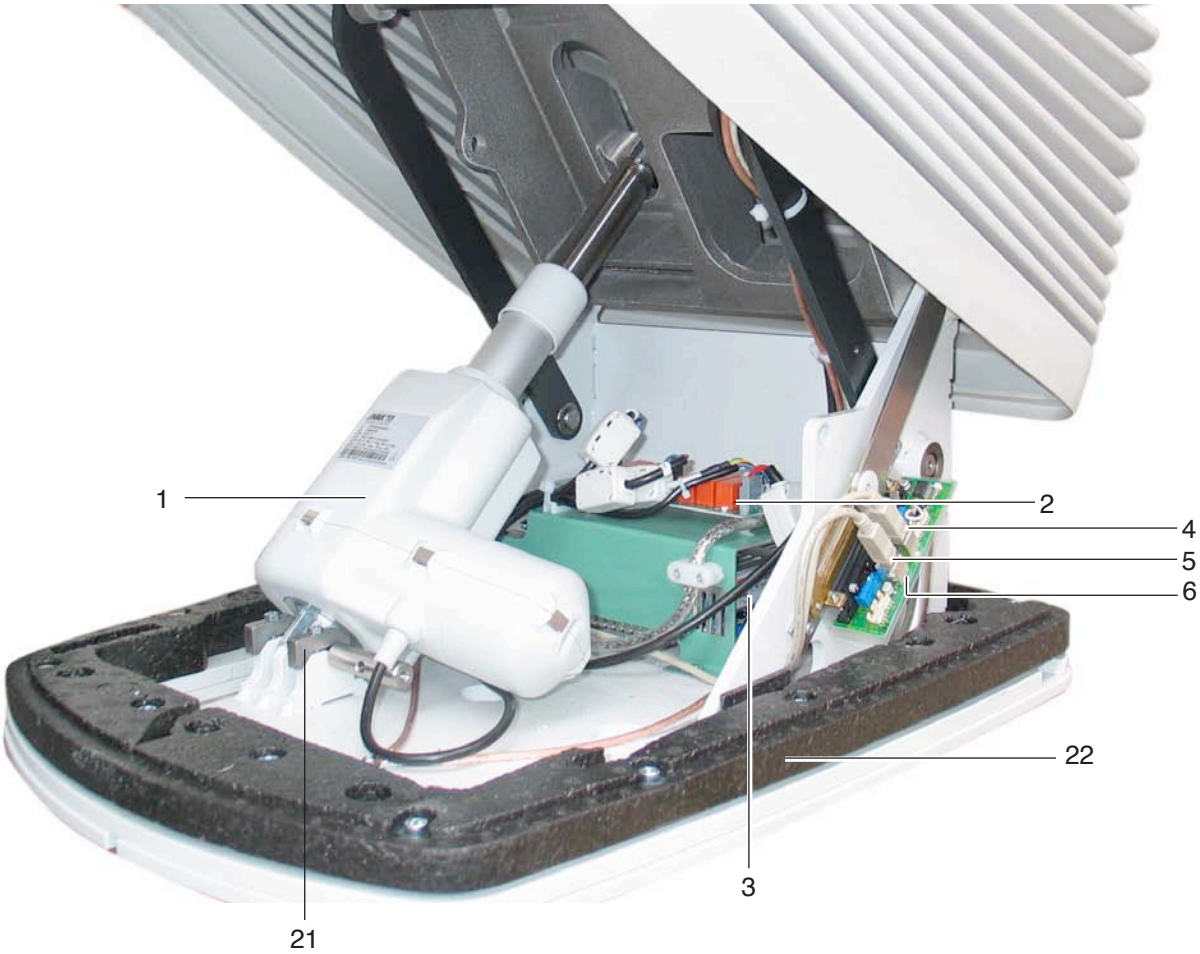



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	Spindelantrieb Basis	1.003.0633	Motor	
2	Steuerung DC-MOT Endstufe	1.002.8885	Control DC engines	
3	Schaltnetzteil SP 320-27	1.003.3685	Power supply	
4	Leitung USB	0.223.4214	Cable USB	
5	Leitung USB	0.223.4217	Cable USB	
6	Wegaufnehmer	0.790.8691	Position pick up	Hub
7	Quadroführung re	0.220.1821	Quadro guide right side	
8	Metallpuffer	0.220.0402	Metal sleeve	
9	Mikroschalter	0.220.2405	Micro switch	
	Schaltergehäuse zu Pos. 9	0.790.9932	Switch housing for item 9	
10	Quadroführung li.	0.220.1822	Quadro guide left side	
11	Senkschraube	0.260.9019	Screw	M 5 x 10
12	Sicherungsscheibe 10	0.258.6020	Safety disk 10	
13	Achse	0.790.2413	Axis	
14	Passschraube	0.220.7344	Screw	
15	Armlehne	1.003.2417	Armrest	
16	Lagerzapfen	0.790.2423	Bearing pin front	
17	Druckfeder	0.201.8286	Pressure spring	
18	Schraube	0.260.8463	Screw	M 8 x 30
19	Schwinggummi	0.220.0411	Antivibration pad	
20	Hebel	0.790.2403	Lever	
21	Achs-Sicherung	1.002.6318	Axis safety	
22	Halter Unterteil	1.003.1902	Cover holder	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

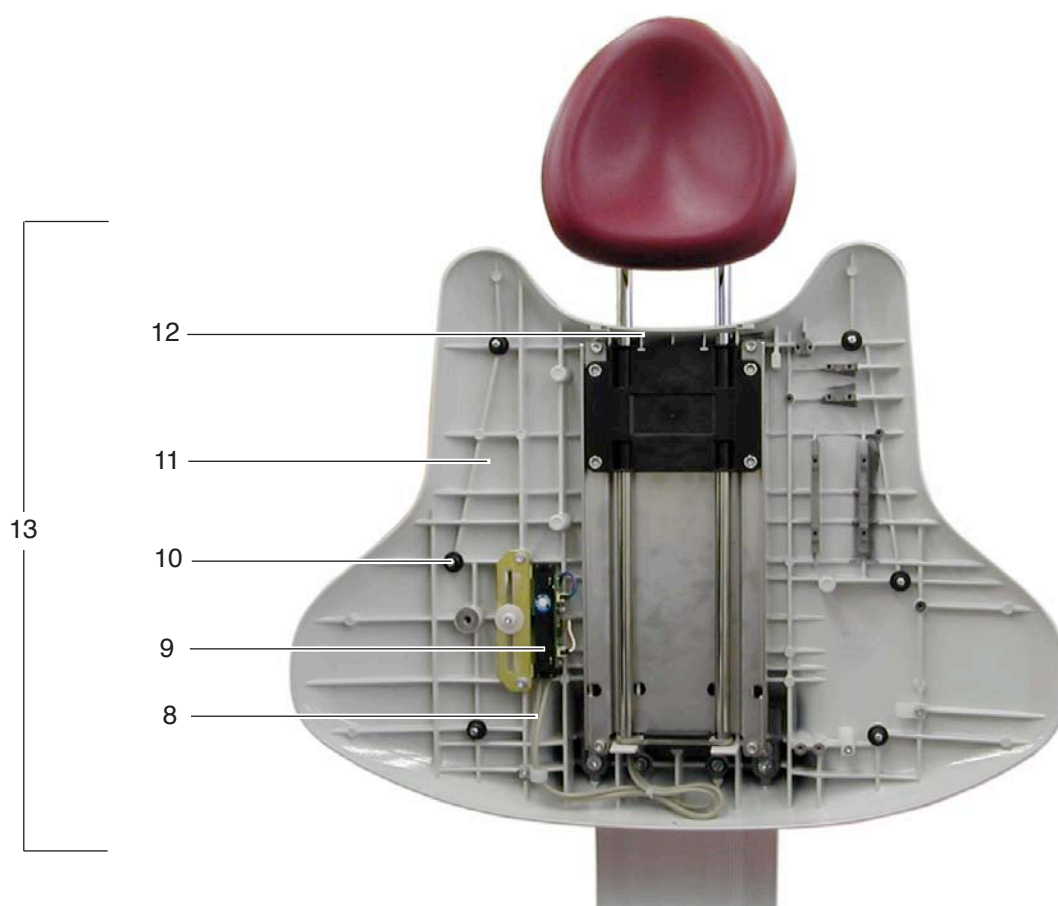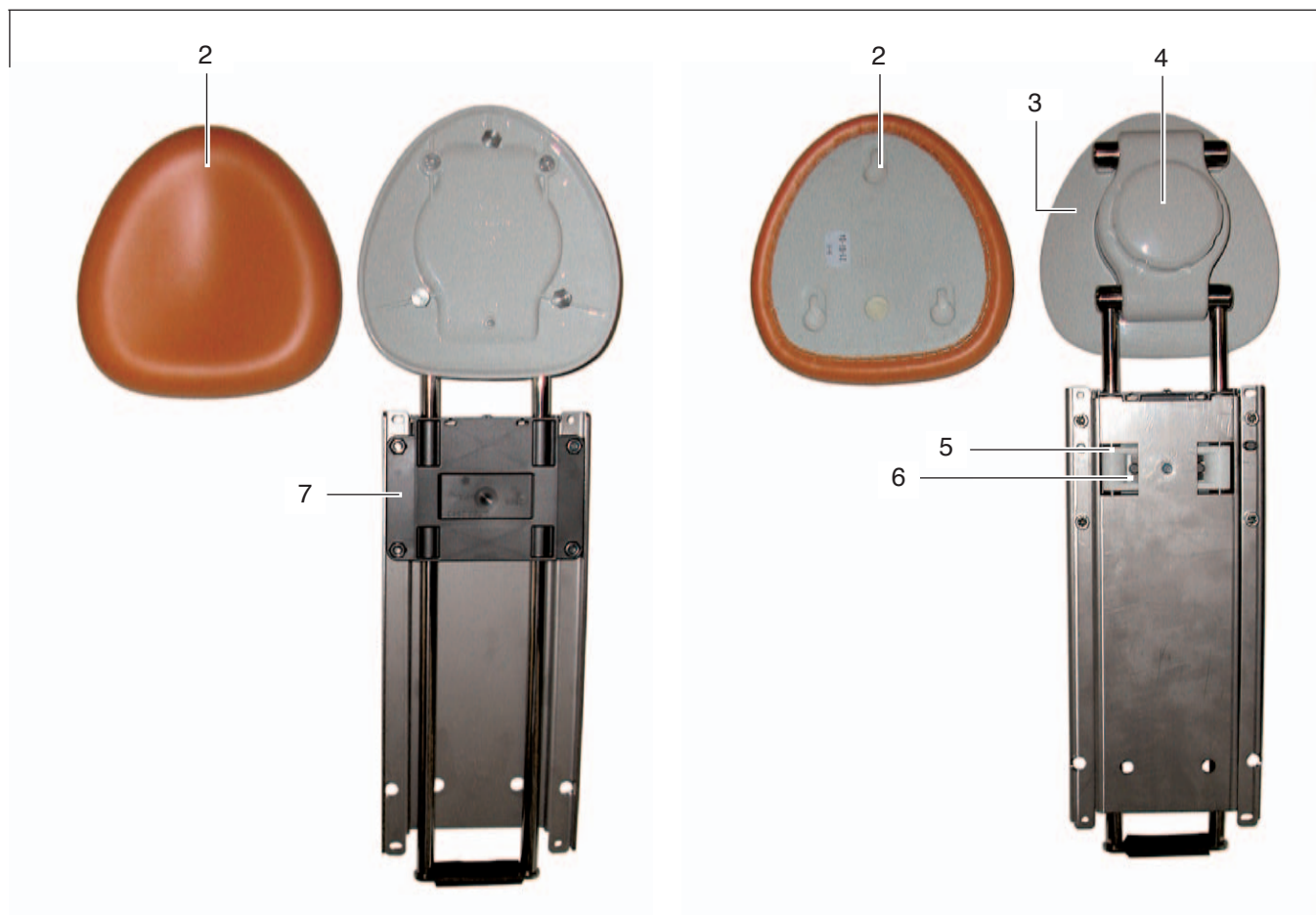



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Kopfstütze 2-Gelenk	1.003.5074	2-joints kit	mit Drehknopf/with knob Farbe angeben/specify color mit Aussparung/with ohne Aussparung/without
2	Kopfpolster	1.001.4556	Headrest upholstery	
3	Abdeckung hinten	0.988.9425	Cover	
	Abdeckung vorne	0.988.9427	Cover	
4	Drehknopf	0.988.9429	Knob	
5	Bremse	0.790.8562	Break	
6	Blattfeder	0.201.7553	Leaf spring	
7	Adapterführung	0.790.2583	Guide for adapter	
8	USB-Leitung	0.790.5711	Cable USB	1700 mm
9	Wegaufnehmer	0.226.7053	Position pick up	
10	Kugelbolzen	0.790.2623	Bolt	
	Linsenschraube zu Pos. 10	0.260.8501	Screw for item 10	M 3 x 14
11	Rückenschale Progress	0.790.2613	Backrest bowl Progress	
12	Blende Progress	1.000.3381	Cover Progress	
13	BS Rückenlehne Progress	1.000.3651	BS Backrest Progress	


1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

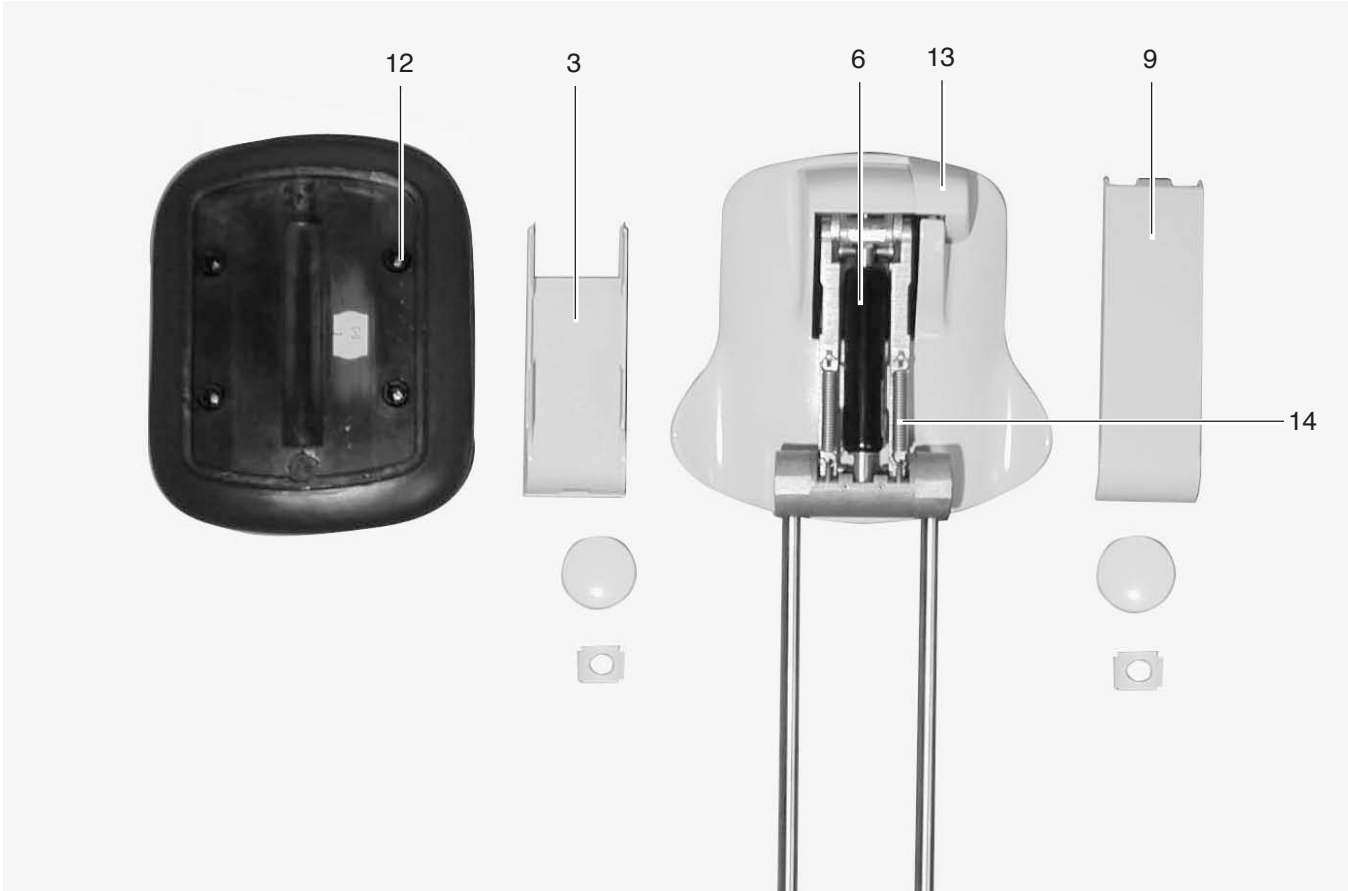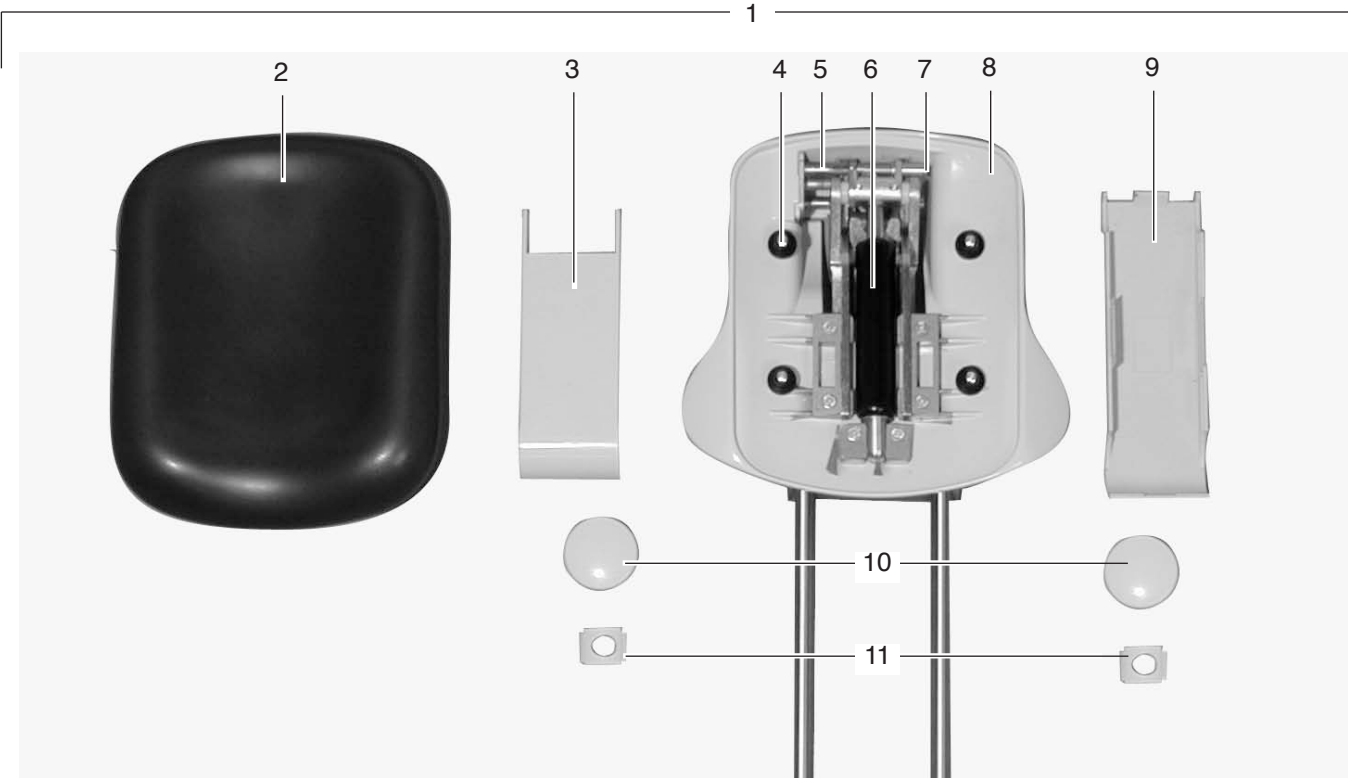



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Kopfstütze 2-Gelenk	0.790.4871	Headrest 2-joints kit	Farbe angeben/specify color
2	Kopfpolster ergo	0.790.4861	Headrest cushioning ergo	
3	Abdeckung	0.790.4823	Cover	
4	Kugelbolzen	0.790.2623	Ball bolt	
5	Schubachse	0.790.4713	Shaft	
6	Blockierzylinder	0.220.1523	Blocking cylinder	
7	Federgehäuse	0.790.4723	Spring housing	
	Druckfeder zu Pos. 7	0.201.8292	Pressure spring for item 7	
8	Polsterträger	0.790.4643	Cushion holder	
9	Abdeckung	0.790.4833	Cover	
10	Abdeckkappe	0.790.4843	Cap	
11	Abdecksegment	0.790.4853	Segment cap	
12	Schnäpper	0.710.5602	Catch	
13	Drucktaste	0.790.4773	Pushbutton	
14	Zugfeder	1.000.0971	Tension spring	



1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

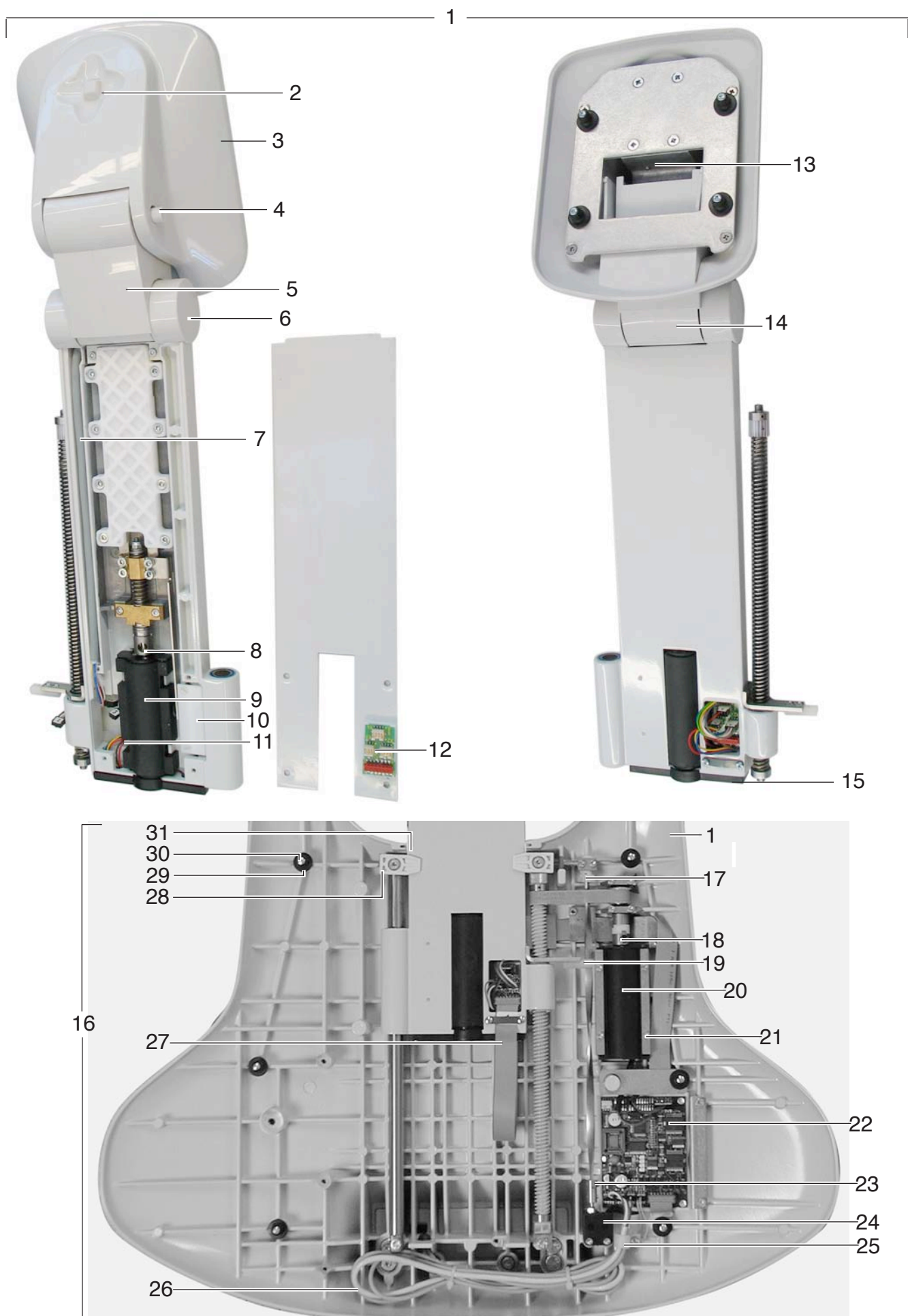



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	AT Mot. Kopfstütze (10013170)	1.001.6455	Mot. headrest for exchange	
2	Kappe	1.000.3584	CAP	f.Joystick
	Joystick-Platine	1.000.1950	Joystick board for mot. headrest	
	motorische Nackenstütze			
3	Polsterträger	1.000.3514	Upholstery support	
4	Druckknopf	1.000.5041	PUSH BUTTON	
5	Abdeckung	1.000.3525	COVER	
6	Abdeckung	1.000.3532	COVER	
7	Leitung Joystick/Schalter	1.000.6236	Line Joystick/switch	
8	Sicherung	1.000.3545	Fuse	
9	Motor Achse 5	1.000.7200	Motor axis 5	
10	Potihalter	1.000.3549	Support	
11	Silikonhülle	1.000.3547	Silicone sheath	zu Pos./for item 9
12	Adapterplatine	1.000.1949	Adapter PCB mot. headrest	
13	Lagerbock	1.000.3516	Support	
14	Abdeckung	1.000.3533	COVER	
15	Kabelkanal	1.000.3551	Cable channel	
16	BS Kopfstuetze mot./ Rueckenl. P 1065/66	1.000.3650	Motorized Headrest/ Backrest P 1065/66	
17	Flachkopfschraube M3x8	1.001.3113	SCREW M3x8	
18	Gewindestift M 4x 5	0.249.5005	THREADED PIN	
19	Gabel	1.000.3555	FORK	
	Senkschraube M 3x 8	0.251.4501	Counter sunk screw M 3x 8	
20	Motor Achse 4	1.000.7199	Motor axis 4	
	Silikonhuelle	1.000.3547	Silicon sheath	(zu Pos./for item 20)
21	Schraube	0.249.4152	Screw	
22	Steuerung motorische Nackenstütze	1.000.1948	Control of mot. headrest	bis 04/2003
	Prg. Speicher mot. Nackenstütze	1.000.8888	Memory headrest	
	Strg. mot. Kopfstütze mit Software	1.001.4864	Control of mot. headrest	ab/from 04/2003
	Prg. Speicher mot.Kopfstütze	1.001.7984	Memory mot. headrest	ab/from 04/2003
23	Linsenschraube M 3x 8	0.261.5034	OVAL HEAD SCREW	
	Federmutter	1.000.5792	SPRING NUT	
24	Drehpoti	0.221.3620	Potentiometer	
	Potihalter	1.000.3574	Support	(zu Pos./for item 24)
25	Kabelschelle	0.222.6215	Clamp	
	Zylinderschraube M 4x 6	0.249.4164	Cylindrical screw M 4x 6	
26	Leitung motorische Nackenstütze	1.000.6232	Line mot. headrest	Stecker/pin X1 + X2
	Leitung Versorgung		Supply line	
27	Bandleitung 14x690	1.000.5803	Ribbon cable 14x690	
28	Lasche	0.790.7083	Holder	
29	Kugelbolzen	0.790.2623	Ball bolt	
30	Linsenschraube	0.260.8501	Oval head screw	M 3 x 14
31	Abdeckleiste	0.790.2683	Cover	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.

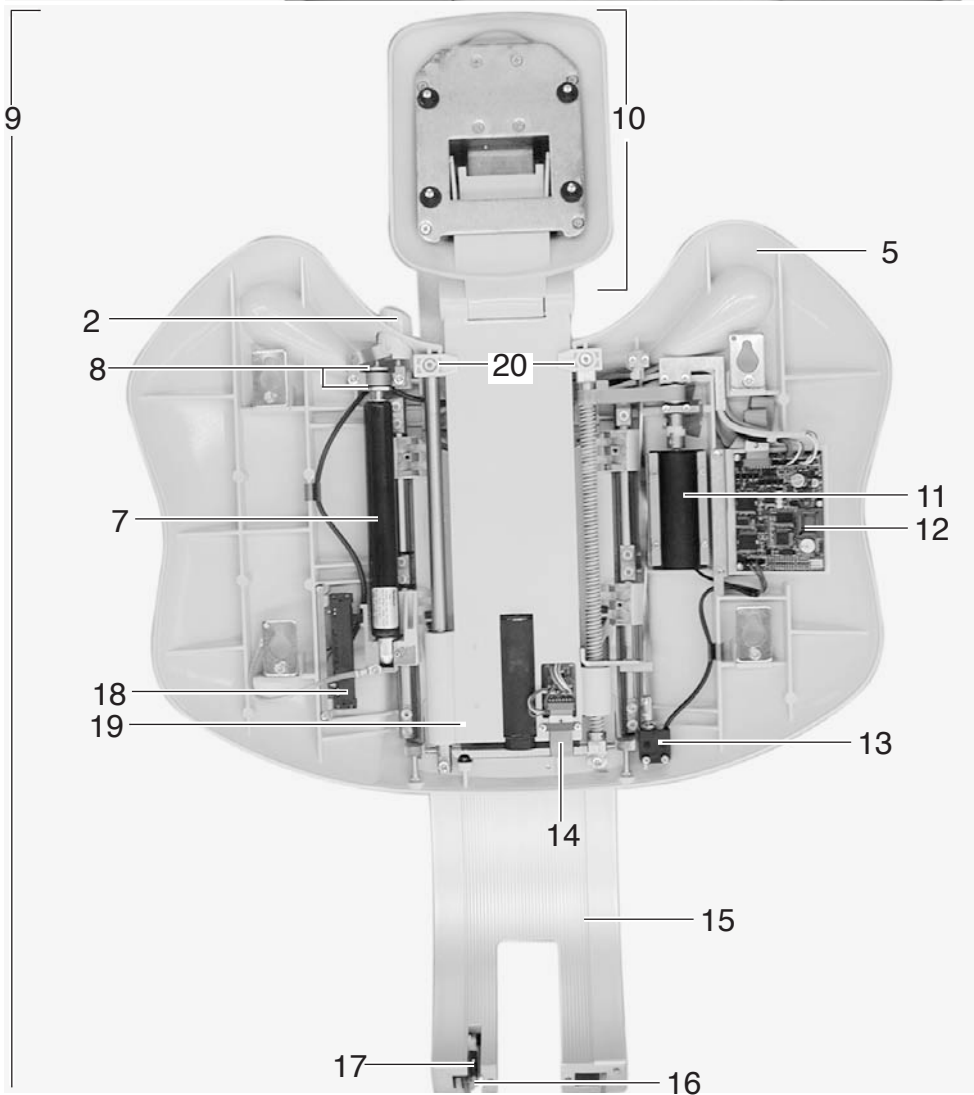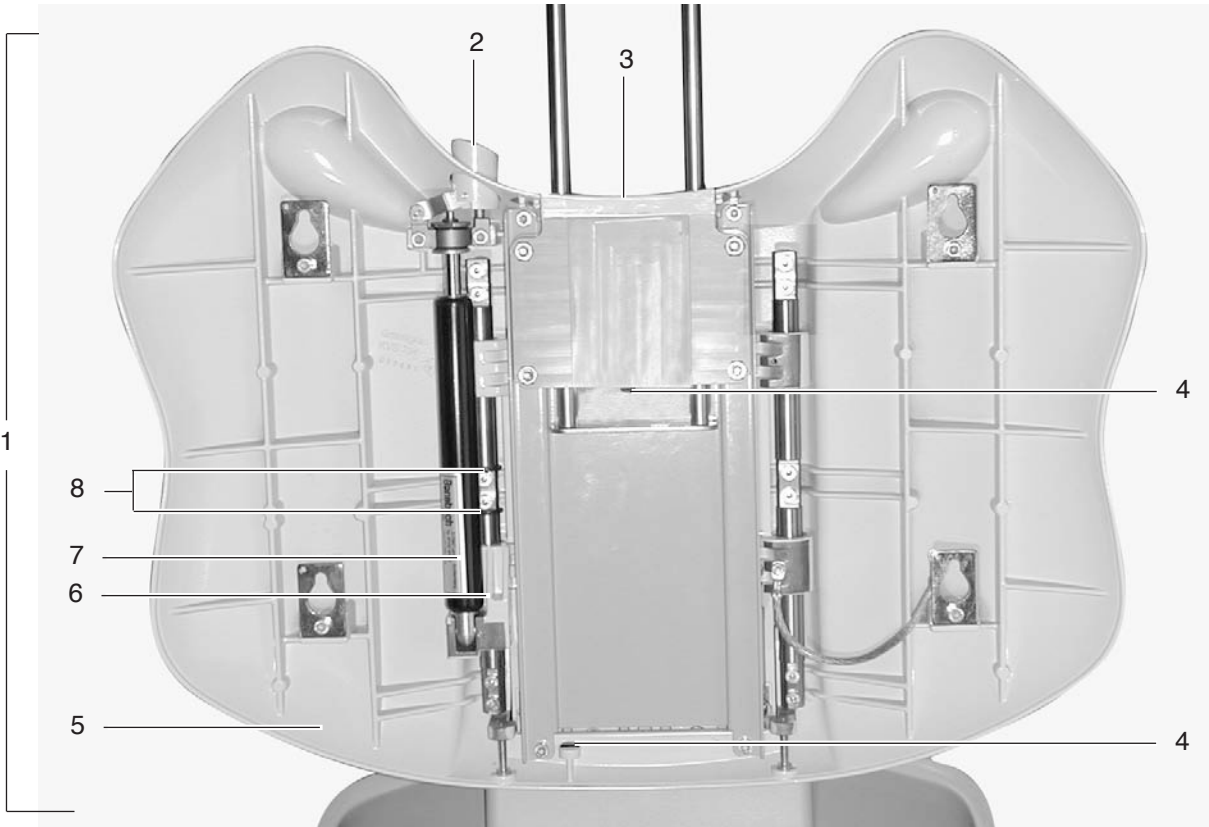



Pos. Item	Bezeichnung	Mat.-Nr. Mat.-No.	Designation	Bemerkungen Note
1	BS Rückenlehne Comfort	1.000.3326	Backrest Comfort kit	
2	Drucktaste	0.790.7773	Pushbutton	
3	Blende Comfort	0.790.2693	Cover Comfort	
4	Elastikpuffer	0.220.0440	Elastic buffer	
5	Rückenschale Comfort	1.000.3978	Backrest bowl Comfort	
6	Führungsträger	0.790.7633	Guide support bracket	
7	Gasdruckfeder	0.220.1521	Pneumatic spring	
8	O.Ring	0.200.6216	O-ring	13,10 x 2,62
	Abdeckung Rückseite	0.790.7093	Cover	für Bremsschraube/ for brake screw
9	BS Kopfstütze mot./ Rückenlehne C. 1065/66	1.000.3511	Motorized Headrest/ Backrest C. 1065/66	
10	A-Mot.Kopfstütze (1.001.3170)	1.001.6455	Mot.headrest for exchange	s. Seite/page 128
11	Motor Achse 4	1.000.7199	Motor axis 4	
	Silikonhülle	1.000.3547	Silicon sheath	zu Pos./for item 11
12	Steuerung motorische Nackstütze	1.000.1948	Control of mot. headrest	bis/until 04/2003
	Prg. Speicher mot. Nackenstütze	1.000.8888	Memory headrst	
	Strg. mot. Kopfstütze mit Software	1.001.4864	Control of mot. headrest	ab/from 04/2003
	Prg.Speicher mot.Kopfstütze	1.001.7984	Memory mot. headrest	
13	Drehpoti	0.221.3620	Potentiometer	
	Potihalter	1.000.3574	Support	(zu Pos./for item 13)
14	Bandleitung 14 x 690	1.000.5803	Ribbon cable 14 x 690	
15	Kurvensegment	0.790.7683	Segment	
16	Leitung mot. Nackenstütze	1.000.6232	Line mot. headrest	Stecker/pin X1 + X2
	Leitung Versorgung mot. Nackenstütze	1.000.6233	Supply cable mot. headrest	STECKER/PIN X31 + X2
17	Schaltergehäuse	0.764.4633	Switch housing	
	Mikroschalter	0.223.2169	Micro switch	(zu Pos./for item 17)
18	Wegaufnehmer Nackenstütze			
	Achse 3	1.000.6234	Position pick up axis 3	
19	Führungsträger	0.790.7633	Support	
20	Verbindungsstück	1.004.0918	Connecting piece	

1) =Verschleißteil, ständige Lagerhaltung empfehlenswert. / Wear part, we recommend to have it permanently in stock.



KaVo. Dental Excellence.