

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ A-DEC

После каждого пациента

- Очистка *(с помощью ультразвука)* и стерилизация наконечников пистолета вода-воздух
 - Очистка, смазывание и стерилизация наконечников
 - Промывка инструментальных шлангов
 - Очистка вакуумных линий *(после проведения хирургических процедур)*
 - Очистка или дезинфекция контактных поверхностей
 - Замена всех барьеров
-

Ежедневно или при необходимости

- Обработка системы циркуляции воды с помощью A-dec ICX®
 - Промывка плевательницы в течение одной минуты
 - Очистка чаши плевательницы и фильтра чаши
 - Очистка вакуумных линий
-

Еженедельно или при необходимости

- Очистка изножья кресла *(для кресла A-dec 311)* или покрытия изножья
 - Очистка клапанов вакуумного отсоса и слюноотсоса
 - Осмотр и техническое обслуживание коллектора твердых частиц *(дважды в неделю)*
 - Техническое обслуживание коллектора масла *(проводится один раз в месяц, если для обслуживания наконечников используется аппарат Assistina)*
 - Очистка дезинфицированных поверхностей слабым мыльным раствором для удаления остатков химических продуктов
-

Ежемесячно

- Отслеживание качества воды и обслуживание системы циркуляции воды *(при необходимости)*
 - Техническое обслуживание коллектора масла *(проводится еженедельно, если для обслуживания наконечников не используется аппарат Assistina)*
 - Смазывание уплотнительных колец вакуумного отсоса и слюноотсоса
 - Очистка защитного экрана стоматологического светильника слабым мыльным раствором *(чтобы не поцарапать экран, используйте марлю или кусок мягкой ткани размером 5 см на 5 см)*
-

Ежегодно

- Замена и смазывание уплотнительных колец пистолета, а также блоков клапанов и кнопок
- Замена и смазывание уплотнительных колец вакуумного отсоса и слюноотсоса
- Замена воздушных и водных фильтров в напольной распределительной коробке или в блоке коммуникаций